

1.

CROCODILE 1+2



Das Crocodile Größen 1-2 mit montiertem Sitz

2.



Schrauben, Muttern und Abstandhalter mit einem 13-mm-Schraubenschlüssel und einem 6-mm-Inbusschlüssel ausbauen und für Bild 5 aufheben

3.

13 mm 6 mm



Schrauben, Muttern und Abstandhalter mit einem 13-mm-Schraubenschlüssel und einem 6-mm-Inbusschlüssel ausbauen und für Bild 5 aufheben


4.



Den Sitz in den Rahmen einsetzen

5.

13 mm 6 mm

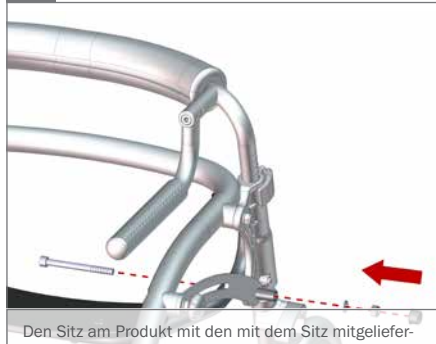

Den Sitz am Produkt mit den mit dem Sitz mitgelieferten Schrauben und den Unterlegscheiben und Muttern aus Bild 2 befestigen

1.

### CROCODILE 3



Das Crocodile Größe 3 mit montiertem Sitz

2.



Lieferumfang


3.



Den Sitz in den Rahmen einsetzen

4.

⬡ 6 mm

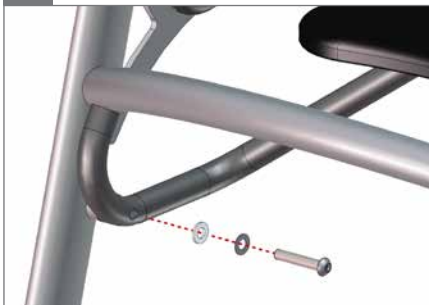

Den Sitz am Produkt mit den mit dem Sitz mitgelieferten Schrauben und den Unterlegscheiben und Muttern mit einem 6-mm-Innbusschlüssel befestigen

