

1.

CROCODILE 1+2




Crocodile mit Sitzhose für Größen 1-2

2.



Die Sitzhose mit dem Klettverschluss an den Bändern am Rahmen befestigen

3.

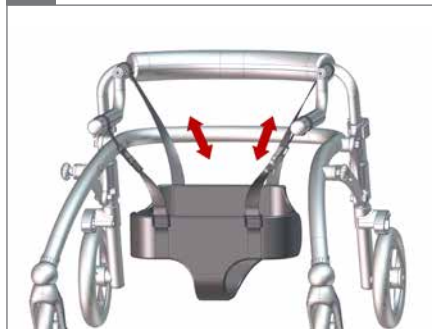


Die Höhe einstellen

4.



Den Schnappverschluss einrasten lassen/lösen, um ihn für den Benutzer vorzubereiten. Lösen, bevor ein Benutzer hineingesetzt wird.

5.

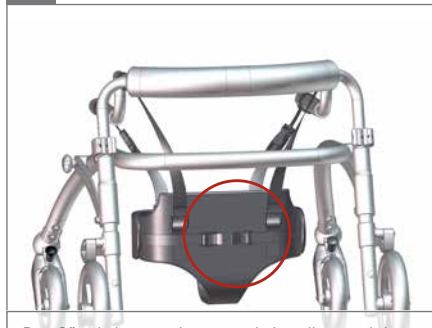

Den Gürtel einrasten lassen und einstellen, nachdem ein Benutzer in die Sitzhose gesetzt wurde.