


1.

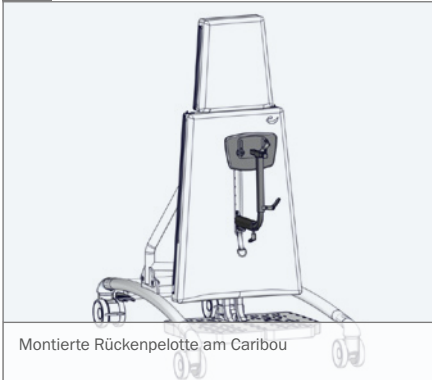

Montierte Rückenpelotte am Caribou

2.



Einzelteile Rückenpelotte

3.



Rückenpelotte in die Befestigungsöffnung am Grundpolster einsetzen.


4.

○ 5 mm, 2,5 Nm




Rückenpelotte mit Schraube und Unterlegscheibe mit 5 mm Inbusschlüssel montieren.

5.

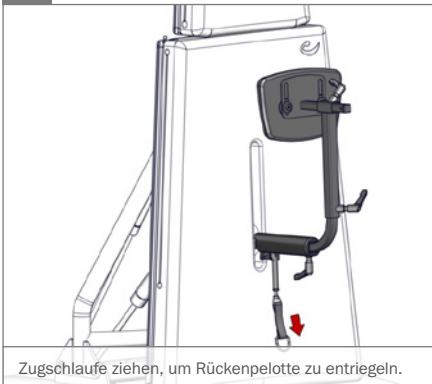

Zugschleife ziehen, um Rückenpelotte zu entriegeln.

6.

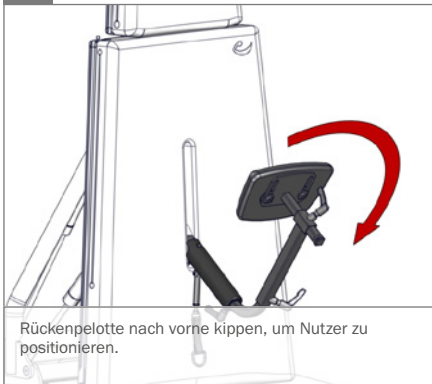

Rückenpelotte nach vorne kippen, um Nutzer zu positionieren.

