

1.




Caribou mit Kniepelotten

2.



Feste Kniepelotten/Abschwenkbare Kniepelotten

3.

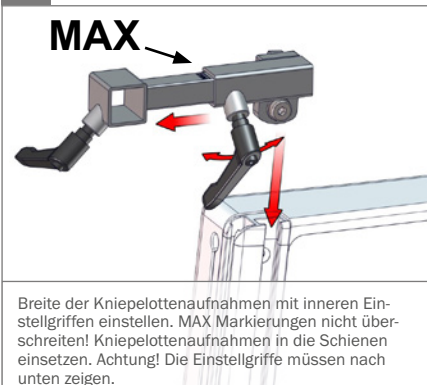

Breite der Kniepelottenaufnahmen mit inneren Einstellgriffen einstellen. MAX Markierungen nicht überschreiten! Kniepelottenaufnahmen in die Schienen einsetzen. Achtung! Die Einstellgriffe müssen nach unten zeigen.

4.

5 mm - 2,5 Nm



Aufnahme in der Schiene auf optimale Position einstellen. Befestigungsschraube der Aufnahme in der Schiene mit 5 mm Inbusschlüssel festziehen.

5.



Kniepelottenhalter in Aufnahme einsetzen. Einstellgriff für Kniepelottenhalter festziehen.

