

1.



Caribou mit Seitenpelotten

2.




Einzelteile Seitenpelotten

3.



Seitenpelottenhalterung in die Schienen oben am Grundpolster einsetzen. Achtung! Die Einstellgriffe müssen nach unten zeigen.

4.

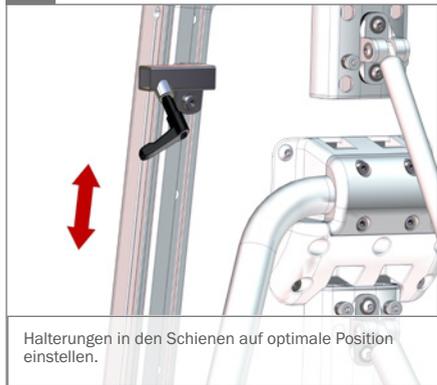

Halterungen in den Schienen auf optimale Position einstellen.


5.

⊕ 5 mm - 2,5 Nm



Befestigungsschraube in den Halterungen mit 5 mm Inbusschlüssel festziehen, um Halterungen in den Schienen zu befestigen.

6.

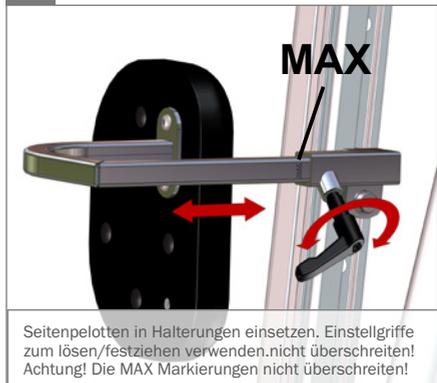

Seitenpelotten in Halterungen einsetzen. Einstellgriffe zum lösen/festziehen verwenden, nicht überschreiten! Achtung! Die MAX Markierungen nicht überschreiten!