




Monteringsanvisning - SV

Molift Raiser Pro Halksäker fotplatta

molift[®]
by Etac

BM43102 - 2025-07-21 - Rev. 1.0

01. Ta ut den halksäkra fotplattan och rengöringsduken ur påsen.
02. Rengör fotplattans yta noggrant med rengöringsduken.
03. Ta bort skyddsfilmerna från en av de halksäkra fotplattorna.
04. Applicera den halksäkra fotplattan med den självhäftande sidan nedåt medan du riktar in den mot en av de två markerade fotformerna på fotplattan. Tryck ner jämnt för att säkerställa fullständig vidhäftning.
05. Upprepa proceduren med den andra halksäkra fotplattan och rikta in den mot den andra markerade fotformen.

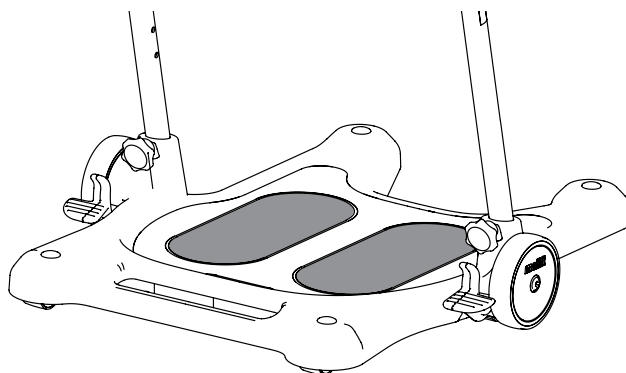

www.etac.com





Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222



Sodimed SA

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06



Etac A/S

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac