




MONTAGE-INSTRUCTIE ACHTERBANKBESCHERMER (NLPE011) EN BESCHERMKUSSENS (NLSW071/NLSW070)

Wanneer de achterbank van de auto hoge wangen heeft aan de zijkanten, dan kan het voorkomen dat bij het uitschuiven van de autostoel de slede de bekleding raakt. Hierdoor kan de achterbank beschadigd raken. Wij raden aan de achterbankbeschermer (A) te gebruiken.

De set beschermkussens (B) raden wij aan te gebruiken om de achterbank te beschermen alsmede te zorgen voor een stabiele basis voor de Stingray Swing-out. Bij het zitgedeelte 'zweeft' het frame deels boven de achterbank. Het ruggedeelte drukt daarentegen teveel in de bekleding. In deze gevallen is het aan te raden om beschermkussens te gebruiken.

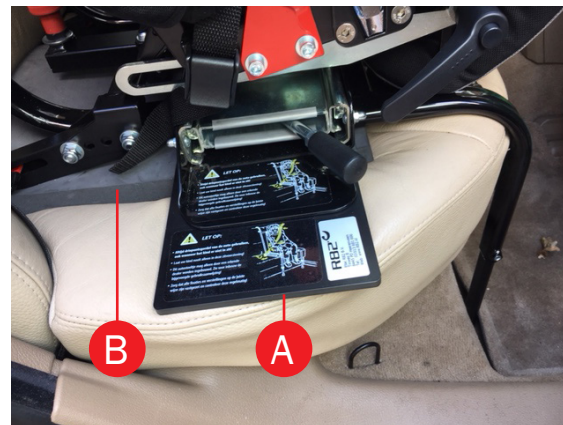

Plaats de grijze beschermkussens (B) op de achterbank. Een op het zitgedeelte en de andere plaatst u tegen de rugleuning onder het bovenste gedeelte van het frame (zie foto).

Plaats vervolgens de achterbankbeschermer (A) aan de buitenzijde van het beschermkussen. Het uiteinde van de plaat komt ter hoogte van de zijkant van de achterbank. Zo is de achterbank volledig beschermd tijdens het uitschuiven van het autostoeltje (zie foto's)

Monteer tot slot het autostoeltje op de achterbank en herpositioneer eventueel de beschermkussens. Zorg ervoor dat de achterbankbeschermer onder het uitschuifmechanisme van het autostoeltje zit.