

Montering av Bakspeglarna



Backspeglar:

Verktyg

KLAXON®

- Skruvmejsel
- Insexnyckel N. 2,5 – 3 – 5
- Tryckluftspistol
- En sax



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Sätt in Tryckluftspistolen i hålet på handtaget och blockera samtidigt hålet på det motsatta handtaget



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Medan du blåser luft i det första handtaget, flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Blockera hålet i styret till vänster från avlägsnande av handtaget.



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Fortsätt med det andra handtaget om du behöver montera två backspeglar.

Blås luft och flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det.



Backspeglar: Montering

KLAXON®

Nu ska styret se ut så här



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Använd saxen för att öppna ett hål på handtaget enligt cirkeln som är präglad på själva handtaget.

Fortsätt med det andra handtaget om du behöver montera två backspeglar.



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Blockera hålet på sidan av handtaget och sätt in tryckluftspistolen under den motsatta sidan. Blås luft medan du trycker handtaget mot mitten av styret.



Backspeglar: Montering

KLAXON®

Fortsätt med det andra handtaget om du behöver montera två backspeglar.


Blockera hålet på sidan av handtaget och sätt in tryckluftspistolen under den motsatta sidan. Blås luft medan du trycker handtaget mot mitten av styret.



Backspeglar: Montering

KLAXON®

Montera backspegeln genom att följa
instruktionerna på lådan.

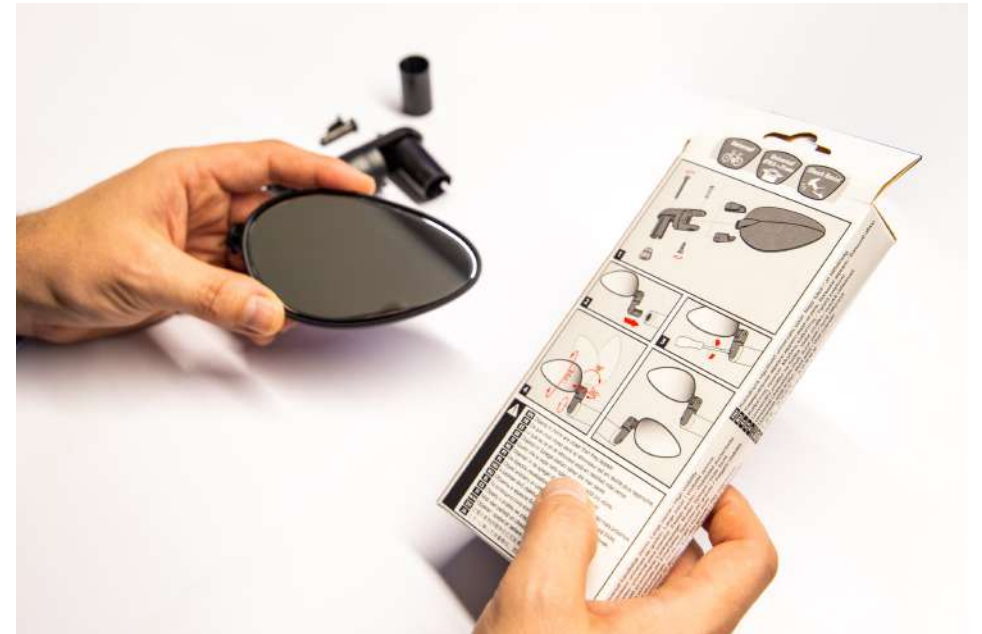

Backspegelar: Montering

KLAXON®

Sätt in backspegeln i hålet på styret.



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Dra åt skruven med skruvmejseln så att backspegelns inre rör expanderar och fäster vid styrets rör.



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Justera backspegelns vinkel efter slutanvändarens behov och dra sedan åt skruven med skruvmejseln för att fixera den.



Backspegelar: Montering

KLAXON®

Fortsätt med det andra handtaget om du behöver montera två backspegelar.
Sätt in backspegeln i hålet på styret.



Backspeglar: Montering

KLAXON®

Dra åt skruven med skruvmejseln så att backspegelns inre rör expanderar och fäster vid styrets rör.



Backspeglar:

Montering

KLAXON®

Justera backspegelns vinkel efter slutanvändarens behov och dra sedan åt skruven med skruvmejseln för att fixera den.



Backspeglar: Montering

KLAXON®

Resultatet ska se ut så här (om båda backspeglarna har monterats).





Konsten att röra sig