

Montering av Gashandtaget



Gashandtag: Verktyg

- Skruvmejsel
- Insexnyckel N. 2,5 – 3 – 5
- Tryckluftspistol



KLAXON®

Gashandtag: Montering

KLAXON®

Sätt in Tryckluftspistolen i hålet på handtaget och
blockera samtidigt hålet på det motsatta handtaget



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Medan du blåser luft i det första handtaget, flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Blockera hålet i styret till vänster från avlägsnande av handtaget.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Blås luft och flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Nu ska styret se ut så här



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Ta bort kardborrbandet som fäster kabeln vid styret.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel nr. 3 för att försiktigt skruva loss gasreglaget.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel nr. 5 för att försiktigt skruva loss bromsspaken.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Öppna styrenhetens väska och dra ur
gasreglagets kontakt.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Ta bort gasreglaget från styret.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Sätt i gashandtaget i styret tillsammans med distansen. Flytta vid behov den andra delen av styret för att skapa utrymme.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Sätt i det nya handtaget (medföljer satsen) på styret och sätt i Tryckluftspistolen i dess hål.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Blockera styrhålet på andra sidan.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Blås ut luft och flytta handtaget mot mitten av styret.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Sätt i Gashandtagets kontakt i styrenhetens väska.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Sätt i gashandtagets kontakt.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Justera lutningen på Gashandtagets accelerationsdel och använd sedan en Insexnyckel nr 3 för att fästa den genom att dra åt skruven.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Justera lutningen på bromsspaken och fixera det sedan med Insexnyckeln nr 5.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Fäst kablarna vid styret med kardborrebandet.



Gashandtag: Montering

KLAXON®


Nu ska styret se ut så här.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel nr 2,5 för att försiktigt skruva loss displayens tryckknapp.

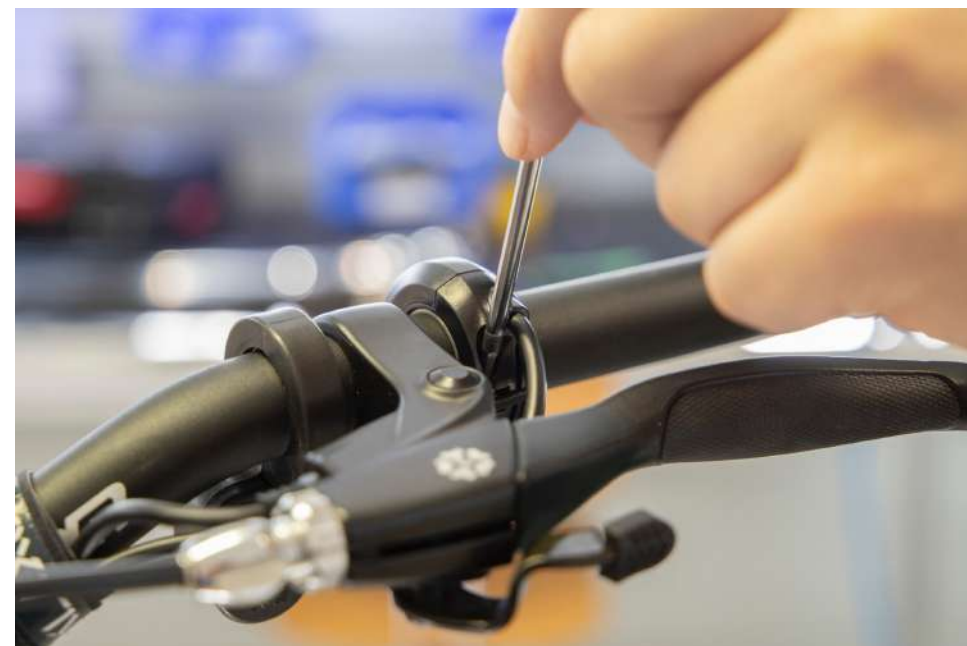

Gashandtag: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel nr. 2,5 för att försiktigt skruva loss Bromsspaken.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel nr 3 för att försiktigt skruva lossa den Röda Knappen.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Justera styrets delar vid behov.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Blockera gashandtagets hål på andra sidan.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Blås ut luft och flytta det nya handtaget (medföljer satsen) mot mitten av styret.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel nr 2,5 för att fästa displayens tryckknapp.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Justera bromsspakens lutning vid behov.
Använd en Insexnyckel nr 5 för att fästa den.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel nr 3 för att fästa den röda knappen.



Gashandtag: Montering

KLAXON®

Slå på Klick och kontrollera om gashandtaget fungerar korrekt.





Konsten att röra sig