

Montering av Korgsatsen



Korgsats: Verktyg

KLAXON®

- Insexnyckel N. 3/4/5/6
- En pincett
- Buntband
- En Spärrnyckel Nr. 3



Korgsats: Montering

KLAXON®

Ta bort batteriet från Klick.



Korgsats: Montering

KLAXON®


Använd Insexnyckeln Nr.3 för att avlägsna ECU.
För att göra detta skruva loss de 3 skruvarna på
den nedre delen.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckel nr 4 för att endast ta bort den övre skruven som håller fast reglaget.

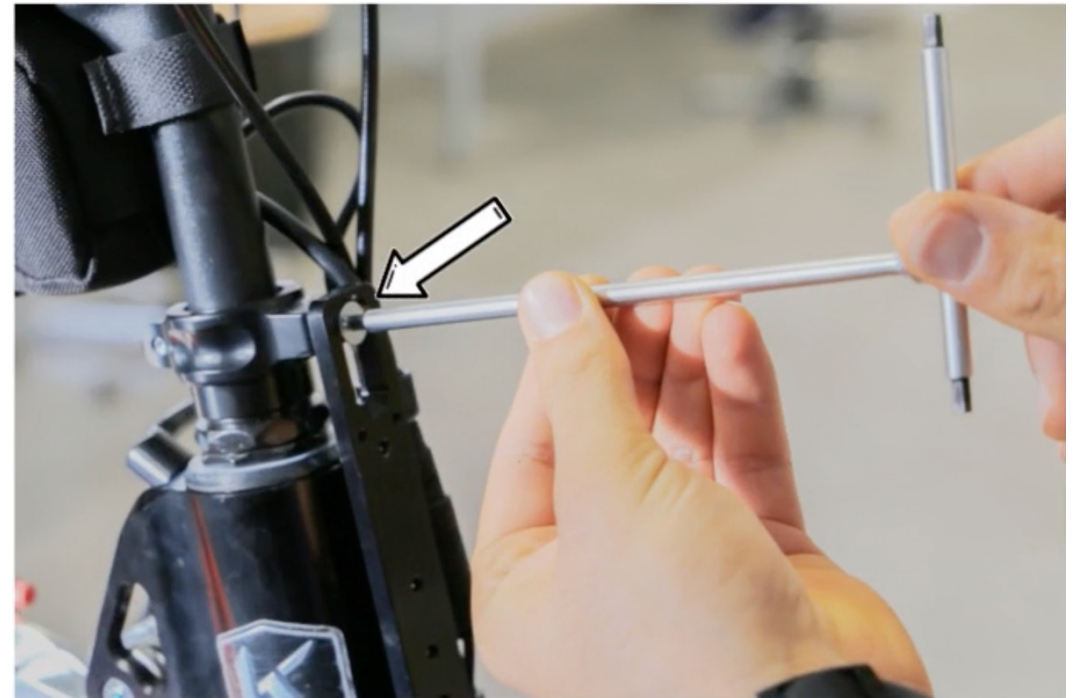

Korgsats: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckel nr 5 för att lossa bromsvajerns fästsruvar. Detta kommer också att lossa vajrarna.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckel nr. 6 för att skruva loss styret.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckel nr. 5 för att lossa skruven
på styrets distans.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Ta bort styret från Klick.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Ta bort distansen från Klick.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Sätt i korgens hållarram för att ersätta styrets
distans.



Korgsats: Montering

KLAXON[®]

Sätt tillbaka styret på plats



Korgsats: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckel nr.5 för att fästa ramsatsen.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckel nr. 3 för att fästa styrenheten med dess 3 skruvar.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Fäst bromsvajern med dess skruvar. Använd insexnyckel nr. 5.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Sätt fästsystemet på plats på korgens ram och sätt i skruvarna.



Korgsats: Montering

KLAXON®


Använd Spärnnyckel Nr.3 för att fästa systemet.



Korgsats: Montering

KLAXON®

Följ instruktionerna för att installera och fästa systemet på korgen.

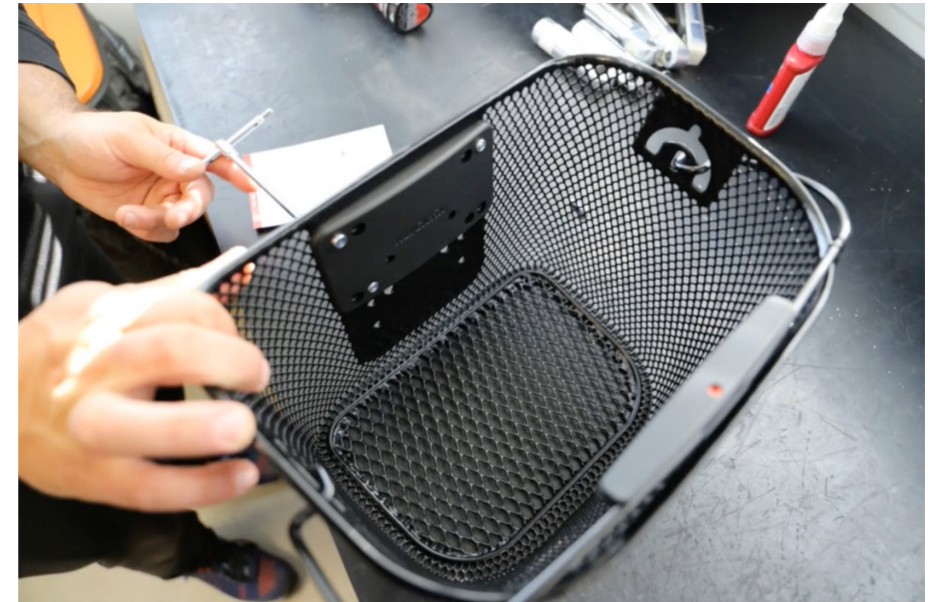

Korgsats: Montering

KLAXON®

Anslut Korgen till Ramen.





Konsten att röra sig