

Montering av Tetra-handtag



Tetra-handtag:

Verktyg

KLAXON®

- Insexnyckel N. 5
- Tryckluftspistol
- Momentnyckel



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Sätt in Tryckluftspistolen i hålet på handtaget och
blockera samtidigt hålet på det motsatta handtaget



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Medan du blåser luft i det första handtaget, flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Blockera hålet i styret till vänster från avlägsnande av handtaget.



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Blås luft och flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det.



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Använd en insexnyckel nr. 5 för att skruva loss fästskruven
på båda universalklämringarna.



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Placera universalklämringen enligt slutanvändarens behov.
Det är lämpligt att placera klämringen i bromsriktningen
så att Tetra-handtagets vikt tynger framåt (mot
bromsaktiveringen istället för acceleratoraktiveringen).
Flytta vid behov manöverelementen på styret.



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®


Fäst universalklämringen lätt så att den kan röra sig något för att göra de sista justeringarna (t.ex.: flytta åt sidan, ändra lutning etc.).



Tetra-handtag: Montering

Kontrollera lutning och avstånd med användaren genom att montera Tetra-handtaget som valts utifrån slutanvändarens behov.

KLAXON®

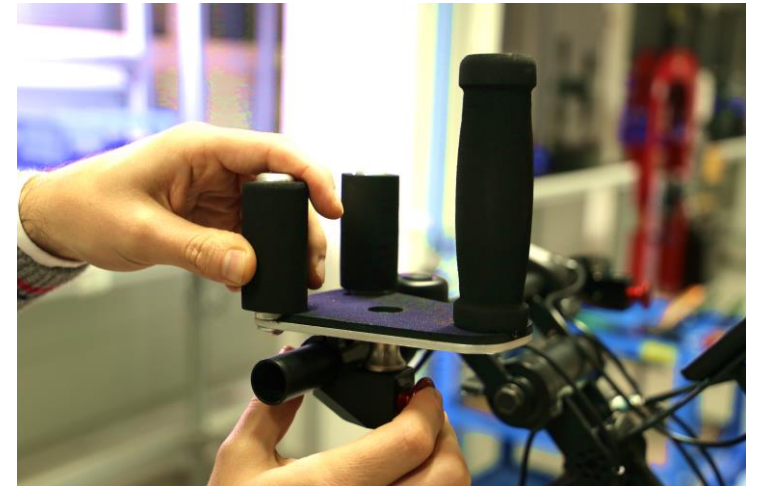

Tetra-handtag: Montering

Kontrollera att Tetra-handtaget kan röra sig obehindrat. Om det finns hinder i vägen, skapa mer utrymme så att rörelsen kan utföras fritt och fullständigt. I det här exemplet är det nödvändigt att flytta den röda knappen mer mot mitten.


KLAXON®



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Observera avståndet mellan den universella Klämringen och kanten på Tetra-styret. Detta underlättar monteringen av den andra klämringen

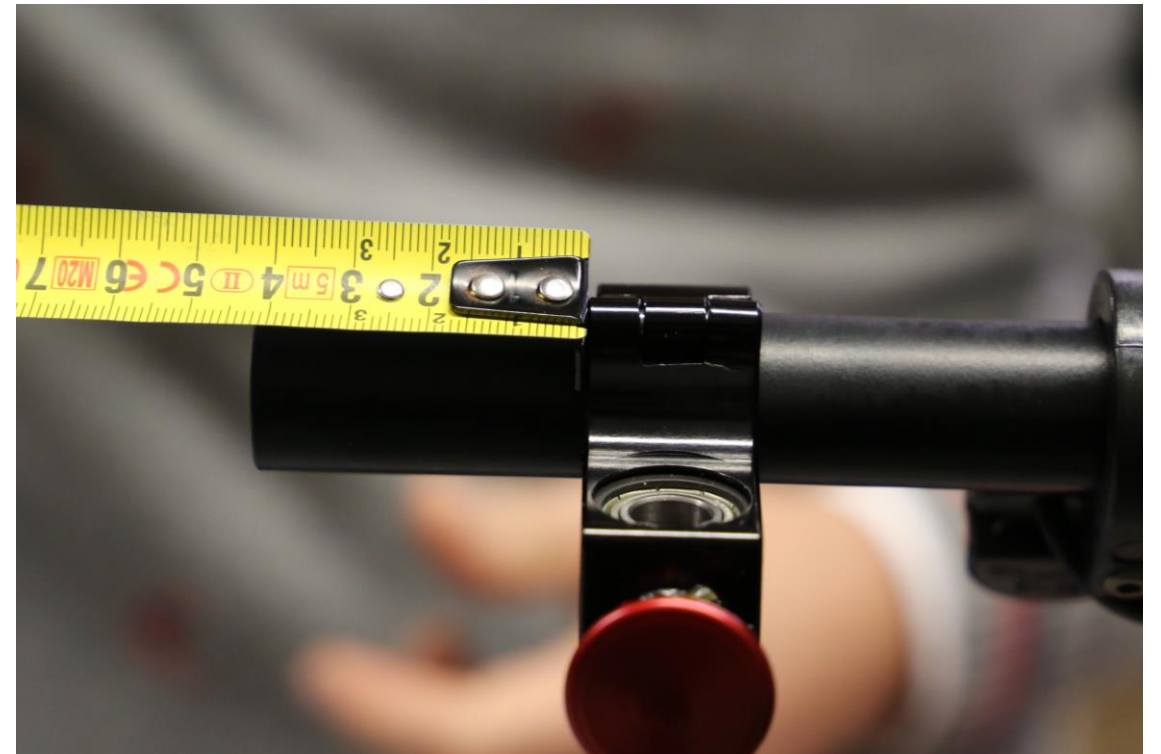

Tetra-handtag: Montering

Placera den universala klämringen på samma avstånd som den andra Universala Klämringen. Det är lämpligt att placera klämringen i bromsriktningen så att Tetra-handtagets vikt tynger framåt (mot bromsaktiveringen istället för acceleratoraktiveringen).

Flytta vid behov manöverelementen på styret.

KLAXON®



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Fäst universalklämringen lätt så att den kan röra sig något för att göra de sista justeringarna (t.ex.: flytta åt sidan, ändra lutning etc.).



Tetra-handtag: Montering

KLAXON®

Kontrollera med användaren lutning och avstånd genom att installera Tetra Handtager av dennes val.



Tetra-handtag: Montering

Kontrollera att Tetra-handtaget kan röra sig obehindrat. Om det finns hinder i vägen, skapa mer utrymme så att rörelsen kan utföras fritt och fullständigt. I det här exemplet är det nödvändigt att flytta den röda knappen mer mot mitten.

KLAXON®



Tetra-handtag: Montering

KLAXON[®]

När de är justerade, fixera Tetra-handtagen på plats med en momentnyckel inställd på 5 Nm.



Tetra-handtag:

Montering

Tetra-handtag kan monteras av samma eller olika typer i olika kombinationer beroende på slutanvändarens behov. Här är några exempel.

KLAXON®



Tetra-handtag:

Justering T-HANDTAG-01

För att justera handstödet, utöva lite kraft för att bredda/minska det tillgängliga utrymmet.

KLAXON®



Tetra-handtag:

Justering T-HANDTAG-02

KLAXON®

För att justera handstödet, utöva lite kraft för att bredda/minska det tillgängliga utrymmet.




Tetra-handtag:

Justering T-HANDTAG-03

KLAXON®

För att justera handstödet, skruva loss önskad skruv som sitter under handtaget. Flytta handstödet på plats och fixera det sedan igen genom att skruva fast skruven.

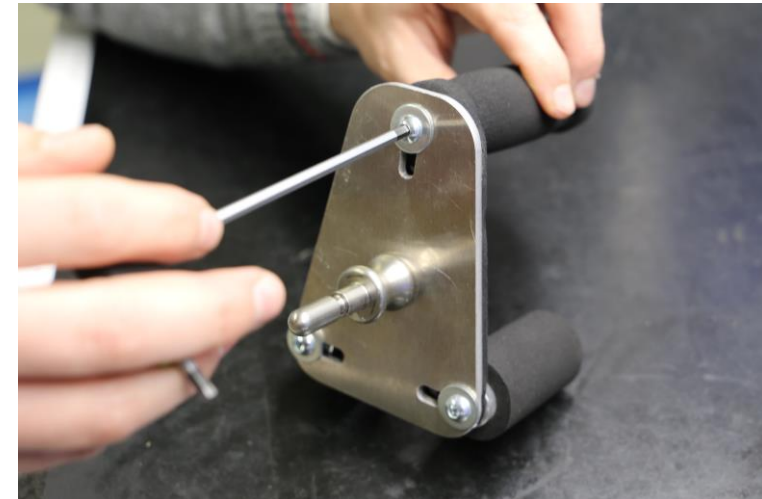



Konsten att röra sig