

Montering av Tetra Signalhorn



Tetra Signalhorn:

Verktyg

KLAXON®

- Insexnyckel N. 5
- Tryckluftspistol
- En sax



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Sätt in Tryckluftspistolen i hålet på handtaget och
blockera samtidigt hålet på det motsatta handtaget



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Medan du blåser luft i det första handtaget, flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Blockera hålet i styret till vänster från avlägsnande av handtaget.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Blås luft och flytta det andra handtaget åt sidan för att ta bort det.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®



Använd saxen för att öppna ett hål på handtaget enligt cirkeln som är präglad på själva handtaget.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®


Blockera hålet på sidan av handtaget och sätt in tryckluftspistolen under den motsatta sidan. Blås luft medan du trycker handtaget mot mitten av styret.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Blockera hålet på sidan av handtaget och sätt in tryckluftspistolen under den motsatta sidan. Blås luft medan du trycker handtaget mot mitten av styret.

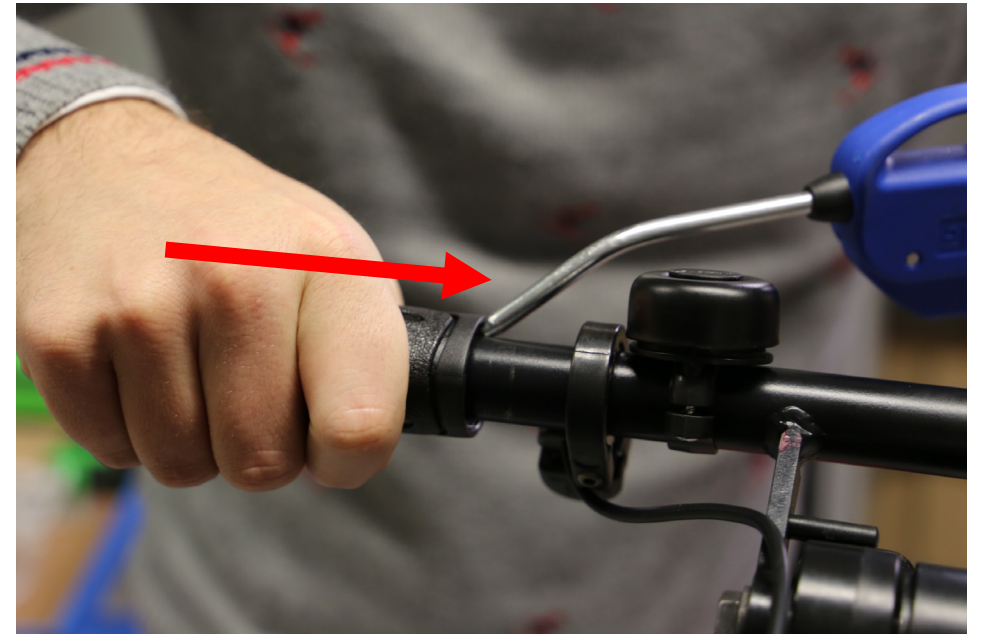

Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Använd en Insexnyckel N. 5 för att skruva loss Tetra Signalhornets skruvar och utöka deras fästringar.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Sätt i Tetra-signalhornet med signalhornets kant pekande mot användaren. Justera signalhornets lutning efter slutanvändarens behov. Använd insexnyckeln för att fästa Tetra-hornet.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckeln för att fästa Tetra-signalhornet.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Sätt i Tetra-signalhornet med signalhornets kant pekande mot användaren. Justera signalhornets lutning efter slutanvändarens behov. Använd insexnyckeln för att fästa Tetra-hornet.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Använd insexnyckeln för att fästa Tetra-signalhornet.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®



Använd plastkåporna för att blockera båda hålen i Tetra-styrstäng.



Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Justera kommandona på Tetra-styret efter slutanvändarens behov.

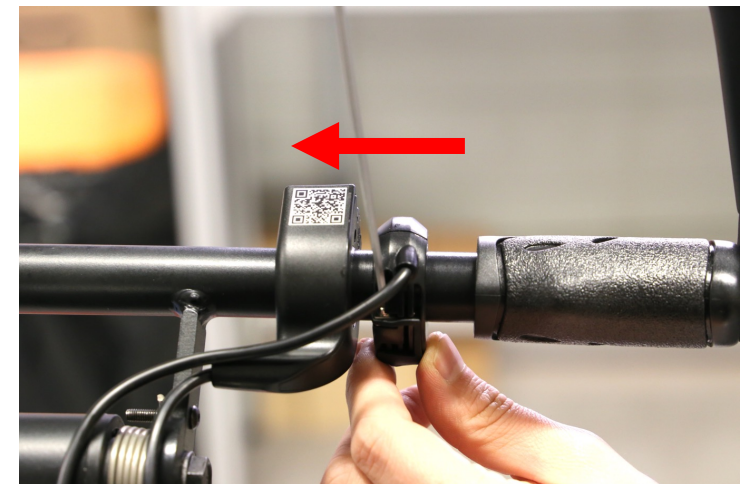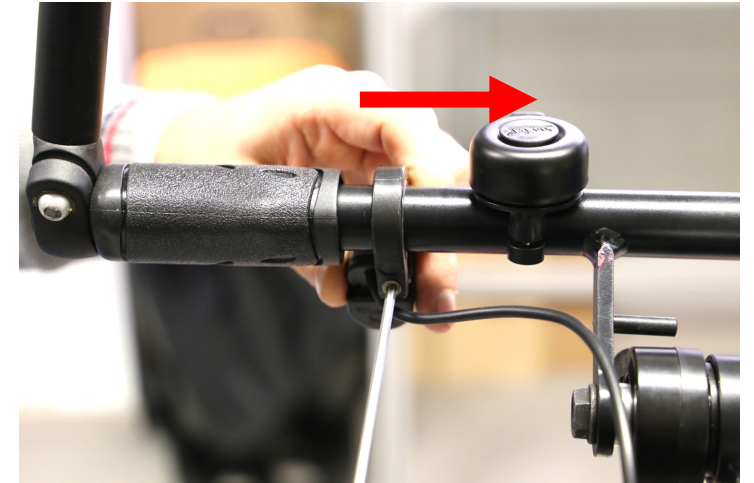

Tetra Signalhorn: Montering

KLAXON®

Tetra-signalhornen ska se ut så här när de är monterade.





Konsten att röra sig