

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



**etac**<sup>®</sup>

# Etac Clean

Mobila dusch- och toalettstolar

# Etac Clean – en prisbelönt klassiker

Clean mobil duschstol är en av Etacs absoluta storsäljare. Den introducerades 1999, satte standarden för framtidens duschstolar och behåller sin position än idag. Dess utmärkta hygien och användarvänliga egenskaper gör den populär på vårdinrättningar och i hemmiljöer över hela världen.

## Enkel att köra och manövrera

Ett av Cleans viktigaste kännetecken är att den är enastående lättmanövrerad. Tack vare den smala designen går den enkelt genom dörröppningar och passar där det är ont om plats. Det breda körhandtaget tillåter olika grepp, vilket gör stolen mycket enkel att använda för vårdpersonalen.

## Flexibilitet – utan komplexitet

Clean har många bra funktioner – utan onödig komplexitet. Armstöden kan flyttas eller tas bort med ett enkelt klick för att underlätta överflyttning, och bromsarna är lätta att komma åt, låsa och låsa upp. Det ergonomiska fotstödet är unikt och kan fällas ut eller förvaras under sitsen när det inte används.

## Många alternativ för olika användare

Clean-serien består av tre modeller och många varianter, alla med unika funktioner som gör att de passar för olika användares behov.





## Egenskaper



### Smal men rymlig

Stolen är nätt och smal men har ändå en stor och bekväm sittyta för användaren.



### Enkel åtkomlighet för personlig vård

Standardsitsen är öppen bakåt och har ett urtag fram för att underlätta åtkomligheten vid hygienbestyr. Det finns även en variant med sits som är öppen framåt.



### Passar över olika toalettmodeller

Stolen placeras nära väggen och passar perfekt även över väggmonterade toaletter tack vare den upprätta ramen.



### Ergonomiskt fotstöd

Det praktiska fotstödet har en mjuk, rundad form som ger komfort och stöd för fotvalven.



### Etac Clean dusch- och toalettstol

44 cm, 4 låsbara hjul, lagungrön	80229209
44 cm, 4 låsbara hjul, vit	80229269
49 cm, 4 låsbara hjul, lagungrön	80229210
49 cm, 4 låsbara hjul, vit	80229270
55 cm, 4 låsbara hjul, lagungrön	80229211
55 cm, 4 låsbara hjul, vit	80229271

### Art. nr.

### Material

Chassi: Pulverlackerade stålror  
Sitt- och ryggstöd: Polypropen  
Armstöd: Polypropen  
Fotplatta: Polypropen  
Hjulfästen: Polyamid  
Hjul, låsbara, kullagrade: Polyamid/TPE  
Bäckengejder: Polypropen



### Mått och vikt

Totalbredd: 50 cm  
Bredd mellan armstöden: 43,5 cm  
Sitthöjder: 44 / 49 / 55 cm  
Frihöjd utan bäckengejder: 38,5 / 43,5 / 49,5 cm  
Frihöjd med bäckengejder: 37 / 42 / 48 cm  
Sittbredd: 48 cm  
Sittdjup: 44 cm  
Hygienuttag: djup x bredd 36 cm x 21,5 cm  
Vikt: 44 cm: 13,5 kg  
Vikt: 49 cm: 14,0 kg  
Vikt: 55 cm: 14,5 kg  
Max brukarvikt: 130 kg

### Underhåll



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.



# Etac Clean Höjdreglerbar

Clean Höjdreglerbar kan ställas in på olika sitthöjder, vilket gör att den kan anpassas efter olika användares behov, till exempel för att underlätta överflyttning eller passa en viss typ av toalett. Denna modell kan även vara lämplig för vårdinrättningar där stolen behöver passa mer än en användare.

## Samma stol för alla höjder

Möjligheten att justera sitthöjden gör att stolen kan anpassas efter olika behov. Den kan ställas in på en maximal höjd av 60 cm, helt utan verktyg. Dessutom har den samma fördelar som övriga medlemmar i Clean-sortimentet.

## Större utbud av fotstöd

Till denna modell finns ytterligare fot- och vadstöd som tillval. Läs mer om tillbehören på sidan 9–11.



## Passar morgondagens vårdbehov

I takt med att befolkningen blir äldre, får människor allt oftare vård i sina hem. Den prognosen ställer höga krav på framtida badrumshjälpmedel. De måste tillgodose behoven både på vårdinrättningar och i hemmiljöer.

Cleans smala, hygieniska och lättmanövrerade design gör den mer än lämplig för morgondagens vårdbehov. Läs mer på [www.etac.se](http://www.etac.se).

### Etac Clean Höjdjusterbar

4 låsbara hjul, vit

### Art. nr

80229208

### Mått och vikt

Totalbredd: 54 cm  
 Bredd mellan armstöden: 43,5 cm  
 Sitthöjder: 47,5–60,0 cm  
 Sittbredd: 48 cm  
 Sittdjup: 44 cm  
 Frihöjd under sits: utan bäckengejder: 42 – 54,5 cm  
 Frihöjd under sits: med bäckengejder: 40,5 – 53 cm  
 Hygienuttag: djup x bredd 36 cm x 21,5 cm  
 Vikt: 14,2 kg  
 Max brukarvikt: 130 kg

### Material

Chassi: Pulverlackerade stålrör  
 Sitt- och ryggstöd: Polypropen  
 Armstöd: Polypropen  
 Fotplatta: Polypropen  
 Hjul, låsbara, kullagrade: Polyamid/TPE  
 Hjulfäste: Polyamid  
 Höjdreglerbart rör till hjul: Rostfritt stål

### Underhåll



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.





# Etac Clean 24"

För den mer självständiga användaren finns en modell av Clean som man kan köra själv. Den har samma fördelar som de andra familjemedlemmarna – men ger rörlighet åt användare som kan använda stolen på egen hand.

## Lättmanövrerad

Stolen är enkel att manövrera tack vare 24-tumshjulen som är placerade på ett sätt som underlättar dagliga aktiviteter och ger bra komfort.

## Förenklar överflyttning

Den stora sitsen och den stora fria sittytan framför hjulen underlättar förflyttning till och från stolen. Bromshandtagen är också placerade så att de inte kommer i vägen vid en överflyttning, samtidigt som de alltid är lätta att nå.



## Kontinuerligt uppdaterad

Som med de flesta av Etacs produkter har Clean kontinuerligt förbättrats genom åren, och genom hela processen har vi alltid sett till att den klassiska Clean förblir en *modern Clean*.

Eftersom personlig hygien först och främst är en fråga om individuella preferenser, vet vi hur viktigt det är att erbjuda alternativ. Därför har även nya modeller tillkommit i sortimentet.

### Etac Clean 24"

55 cm med 24" drivhjul, lagungrön  
55 cm med 24" drivhjul, vit

### Art. nr.

80229216  
80229276

### Mått och vikt

Totalbredd: 67 cm  
Bredd mellan armstöden: 43,5 cm  
Sitthöjder: 55 cm  
Sittbredd: 48 cm  
Sittdjup: 44 cm  
Frihöjd under sits: utan bäckengejder: 49,5 cm  
Frihöjd under sits: med bäckengejder 48 cm  
Hygienuttag: djup x bredd 36 cm x 21,5 cm  
Vikt: 20 kg  
Max brukarvikt: 130 kg

### Material

Drivhjulsadapter: aluminum  
Drivhjul: polyamid, kullagrade  
Chassi: Pulverlackerat stålror  
Sits/ryggstöd: Polypropylen  
Armstöd: Polypropylen  
Fotstöd: Polypropylen  
Hjulfäste: Polyamid  
Hjul: Polyamid/TPE

### Underhåll



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.







# Etac Clean med sits öppen fram

Nu introducerar vi ett nytt tillskott i familjen – Clean med sits som är öppen fram. Den nya modellen ger användaren ännu fler möjligheter att sköta hygienrutinen på sina villkor.

## Clean med sits öppen fram

För dig som föredrar att komma åt framifrån finns en variant med sits som är öppen fram. Det kan vara lämpligt för användare som kan nå mer självständigt på det sättet, beroende på deras rörelseomfång eller personliga preferenser. Åtkomlighet framifrån kan också passa vissa vårdgivares dagliga hygienrutiner bättre. Den här modellen kan vara särskilt användbar när du använder en handdusch i stället för torkklapp.

Finns som variant för Clean och Clean 24”.



## Fördelar med öppning fram

Sitsen kan vara särskilt användbar när du använder en handdusch istället för torkklapp.

Sitsen har en generös öppning fram för att underlätta åtkomlighet för hygienbestyr.

Stolen passar perfekt över väggmonterade toaletter och andra toalettmodeller.

### Etac Clean dusch- och toalettstol med sits öppen fram

49 cm, 4 låsbara hjul
55 cm, 4 låsbara hjul
55 cm med 24" drivhjul

### Beskrivning

Öppning fram, lagungrön
Öppning fram, lagungrön
Öppning fram, lagungrön

### Art.nr.

80229325
80229321
80229327

### Vikt

49 cm: 14,0 kg  
55 cm: 14,5 kg

### Max brukarvikt

130 kg

### Fakta



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.



# Tillbehör för ytterligare anpassning

Att kunna anpassa produkterna är avgörande för att främja förmåga och delaktighet i dagliga aktiviteter. Cleans tillbehörssortiment ger många möjligheter till individuell anpassning, oavsett om det handlar om extra komfort, stöd eller nya funktioner.



## Komfort

Att lägga till lite extra mjukhet kan öka användarens välbefinnande och hjälpa till att hålla värmen. Det finns många mjuka sitsar samt stoppningar för ryggstöd och armstöd.

## Stöd och positionering

Att stödja en bra sittställning är avgörande för att främja användarens förmågor och kan förbättra deras känsla av säkerhet. Olika remmar, en tvärså eller sidostöd är några av alternativen.

## Ytterligare funktioner

Vissa tillbehör kan användas för att lägga till funktioner. Det finns till exempel olika bäcken och bäckengejder, och en tvålköpp som kan klickas fast på stolen.

## Tillbehör



### Mjukt ryggstöd

80209225

Justerbart ryggstöd i mjukt mesh. Ger ökad komfort för användare som behöver ett mjukare stöd, eftersom det formar sig efter ryggradens krökning. Enkelt att justera med 3 spännen baktill.



### Sittdyna

80209528

En mjuk sittdyna när en hel sittyta är att föredra. 2 cm hög.



### Sidostöd

80209509

Vadderat sidostöd för förbättrad positionering och en ombonad sittkänsla. Reglerbar i bredden. Kompatibel med det vanliga ryggstödet.



### Sittdyna

80209247

En sittdyna när det behövs en hel sits.



### Mjuk ryggdyna

80209261

En ryggdyna för extra värme och mjukhet. Värmereflekerande material med halkfri yta. Används med det vanliga ryggstödet.



### Mjuk dyna

80209260

En tunn mjuk sits med värmereflekerande egenskaper och halkfri yta. Öppningsbredd: 17 cm.

## Tillbehör



### Mjuk komfortsits, 2 cm hög

80209517

Mjuk sits för extra komfort. Lätt konturformad öppning med urtag framtill för enkel åtkomlighet. Öppningsbredd 18 cm.



### Mjuk komfortsits, 4 cm hög

Öppningsbredd 15 cm: 80209301

Öppningsbredd 18 cm: 80209227

Mjuk sits för extra komfort. Lätt konturformad öppning med urtag framtill för enkel åtkomlighet.



### Mjuk komfortsits, öppen framåt

80209527

Komfortsits för extra mjukhet vid sittande. Kompatibel med Clean med sits öppen framåt. 2 cm hög.



### Komfortarmstöd

80209226

Ger mjukt stöd för underarmarna samtidigt som greppytan på armstödet hålls fri och ger ett stadigt grepp när användaren reser sig upp.



### Komfortöverdrag

80209228

Mjukt ryggstöd med integrerade armstödsdynor för mer komfort och stöd. Vattenavvisande och värmereflekterande yta.



### Komfortkit

80209237

Komfortkit som ökar välbefinnandet och omsluter användaren. Inklusive både komfortskal och mjuk komfortsits 4 cm.



### Höft-/brösthälte stoppad

80209524

Mjukt och snabbtorkande bälte för stabilt stöd och positionering. Längd mellan 65 och 130 cm, regleras med 3 spännen. Kan användas som höftbälte på alla Clean-modeller och som bröstbälte med det mjuka ryggstödet.



### Höftbälte

80209440

Ger stöd för bäckenet. Enkelt att justera till önskad längd med ett plastspänne. Fästs runt rören i ryggen med kardborreband.



### Brösthälte

80209442

Ger bälten stöd i framkant. Lätt att justera i längd och fästs runt ryggstödet band. Användning tillsammans med höftbälte rekommenderas. Kompatibel endast med mjukryggen.



### Säkerhetsrem

80209034

Fästs på baksidan av ryggstödet. Bör alltid användas tillsammans med höftbältet. Kompatibel med vanligt ryggstöd.



### Tvärså

80209246

Kan användas för att hålla i sig, luta sig mot och öka användarens trygghet. Enkel att fästa på armstöden.



### Tvålkopp

80209266

Tvålkopp med inbyggd hållare för duschhandtag. Kan även användas för att hålla bäckenets lock eller toalettpapper. Klickas enkelt fast på sidan av sitsen.



### Stänkskydd

80209430

Ger ett mjukt skydd framtill för att undvika stänk. Fästs framtill på sitsen och är lätt att ta bort. Kan även handhållas för bättre kontroll.



### Bäcken

Bäcken inkl. lock med handtag: 80209255

Endast bäcken: 80209254.

Endast lock: 80209256

Format för att undvika spill och förenkla tömning/hällning. Smart lock som låses automatiskt när man lyfter.

Bäckengejder beställs separat.

## Tillbehör



### Bäckengejder

80209257

Passar både bäcken, sängbäcken och vanliga sjukhusbäcken med en tunn kant. Klickas fast i hållare under sitsen, vilka ingår som standard.



### Fäste för låg montering av bäcken/hink

80209259

Monteras i bäcken-/hinkgejder. Sänker bäcken-/hinkgejder 6 cm.



### Hink med handtag och lock

80209265

Traditionell hink som används med hinkgejder. Inklusive lock. Hinkgejder beställs separat.



### Engångsbäcken

80209282

Starka och stabila engångsbäcken. 50 st.



### Hinkgejder

80209258

Passar hink med handtag och lock samt andra hinkar med tjocka/höga kanter. Klickas fast i hållare under sitsen, vilka ingår som standard.



### Bäckengejdersats

80209229

Bäckengejder som passar engångsbäcken.

## Andra tillbehör

### Endast Clean 44, 49 eller 55 cm



### Drivhjuladapter

Grå: 80209262

Vit: 80209305

Adapter för byte av standarddrivhjul mot 24"-hjul. Kompatibel med Clean 55 cm.

### Endast Clean Höjddreglerbar



### Uppfällbara fotstöd

80209250

Fotstöd som är fällbara, höjddreglerbara och avtagbara. Kompatibel med Clean Höjddreglerbar. Säljs parvis.



### Förhöjningssats med hjul

Vit: 80209511

Grön: 80209512

Klossar som höjer sitthöjden med 5 cm. Kompatibel med Clean 44 cm, 49 cm och 55 cm. Säljs i paket om 4.



### 75 mm hjul

Vit: Front – 80209515. Baksida – 80209516

Grön: Front – 80209513. Rygg – 80209514

När extra låg sitthöjd behövs. Minskar sitthöjden med 5 cm.

Monteras på Clean 44 cm som standard.

Kompatibel med Clean 49 cm. Säljs parvis.

## Mer information

För hela sortimentet och mer information om varje tillbehör, besök [www.etac.se](http://www.etac.se).





Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

**Etac Sverige AB**

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities