



**immedia**

# Immedia bäddsystem

För säkra och bekväma förflyttningar





# Nivå av funktionell rörlighet

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en universell klassificering publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO) och utgör ett gemensamt standardspråk och ramverk för beskrivning av hälsa och funktionshinder (WHO 2001).

LOCOmotion (Knibbe & Knibbe) från Nederländerna byggde vidare på ICF, och utvecklade MK5-konceptet och det tillhörande bedömningsverktyget TilThermometer för nästan 20 år sedan<sup>1</sup>.

I MK5 klassificeras patientens funktionella mobilitet i fem nivåer (A, B, C, D och E) baserat på patientens förmågor och möjlighet att samarbeta under förflyttningen.

Nedan finns en beskrivning av de fem nivåerna av funktionell rörlighet, hänvisningar kommer att göras till dessa nivåer för förslag av lämplig produkt.

<sup>1</sup> [www.tilthermometer.com](http://www.tilthermometer.com)



## Nivå A

Patienten kan självständigt utföra aktiviteten, med eller utan hjälpmedel, och utan risk för fysisk överbelastning för vårdpersonalen. Stimulering av självförtroendet är viktigt.



## Nivå B

Patienten är i behov av assistans, men detta leder inte till fysisk överbelastning för vårdpersonalen. Stimulering av självförtroendet är viktigt.



## Nivå C

Patienten är i behov av assistans. Detta leder till fysisk påfrestning för vårdpersonal när hjälpmedel inte används. Patienten kan dock i hög grad bidra till olika aktiviteter. Stimulering av aktivitet och självförtroende är av stor betydelse.



## Nivå D

Patienten är i behov av assistans. Detta leder till fysisk påfrestning för vårdpersonal när hjälpmedel inte används. Patienten är mycket passiv och har svårt att bidra till aktiviteten. Stimulering av aktivitet och självförtroende är fortfarande av stor vikt.



## Nivå E

Patienten är i behov av mycket assistans. Detta leder till fysisk påfrestning för vårdpersonal när hjälpmedel inte används. Patienten är helt passiv. Stimulering av aktivitet utgör inte en prioritet, utan vikt läggs vid komfort och säkerhet.

# Immedia SatinSheet

Immedia SatinSheet är ett komplett bäddsystem med satintyg som har mycket låg friktion och är utformat för att underlätta vändning och positionering i sängen av självständiga patienter (A) till patienter som är helt beroende av assistans (E).

## Underlättar vård av självständiga patienter till patienter som är helt beroende av assistans.

SatinSheet systemet består av ett glidlakan med satin, vilket underlättar ompositionering och minskar risken för friktion och skjuvning, så att risken för trycksår minimeras.

Det breda sortimentet av draglakan uppfyller behoven hos delvis självständiga patienter och hjälper till att minska belastningen på vårdpersonal så att arbetsrelaterade skador kan förhindras.

Eftersom lakanen får ligga kvar i sängen ökar de komforten för patienten och underlättar positionering eller vändning. Draglakan finns även i versioner med handtag på undersidan för vändning med lyft. Det gör omvårdnadsarbetet mindre tidskrävande och kan innebära att färre vårdpersonal krävs.



*Information om hur man väljer den lämpligaste SatinSheet-kombinationen finns på sidan 6*

# Immedia 4WayGlide

Immedia 4WayGlide är ett komplett bäddsystem i nylon med mycket låg friktion. Det är utformat för att underlätta vändning och positionering av delvis självständiga patienter (B) till patienter som är helt beroende av assistans (E).

## Underlättar vård av delvis självständiga patienter till patienter som är helt beroende av assistans.

4WayGlide-systemet består av ett nylonlakan och en glidmadrass med nylon på undersidan. De två delarna måste alltid användas i kombination. Det kviltade bomulls-/polyestermaterialet är vänt mot patienten och är skonsamt och behagligt mot kroppen.

Glidmadrassen är försedd med handtag på undersidan för bättre grepp och för att kunna användas tillsammans med lyft, samt för att göra vårdarbetet mindre tidskrävande vilket kan innebära att färre vårdpersonal krävs.

Det breda sortimentet av nylonlakan, med eller utan låsluckor, uppfyller vårdpersonalens behov vid ompositionering av delvis självständiga patienter till patienter som är helt beroende av assistans och bidrar till att minska belastningen så att arbetsrelaterade skador kan undvikas.



*Information om hur man väljer den lämpligaste 4WayGlide-kombinationen finns på sidan 6*

# Guide för val av Immedia bäddsystem

## Funktionsnivå



Nivå A



Nivå B

Välj längd på  
SatinSheet glidlakan




Glidlakan  
SatinSheet 2D Mini




Glidlakan  
SatinSheet 2D Midi

Välj typ av  
SatinSheet draglakan

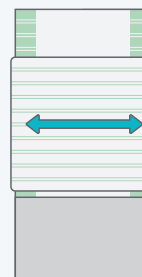

Draglakan SatinSheet 2D  
Mini eller Midi

Välj längd på  
4WayGlide-systemet

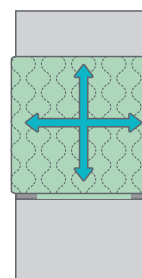

4WayGlide  
Mini




**Nivå C**




**Nivå D**




**Nivå E**

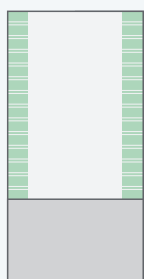


Glidlakan  
SatinSheet 2D Midi

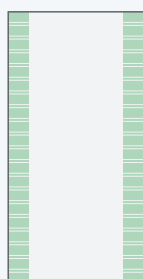


Glidlakan  
SatinSheet 2D Maxi

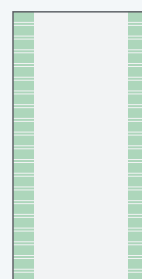


Glidlakan  
SatinSheet 2D Maxi

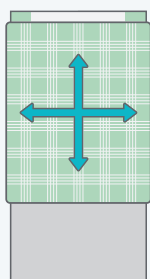


Draglakan  
SatinSheet 4D Midi

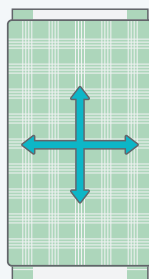


Draglakan  
SatinSheet 4D  
Midi eller Maxi

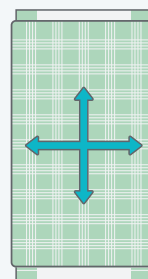


Draglakan  
SatinSheet 4D Maxi

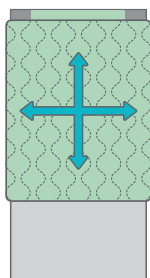

4WayGlide  
Midi

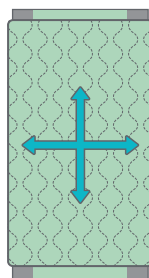

4WayGlide  
Madrass LPL

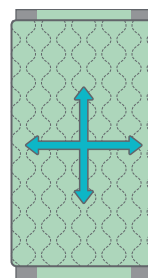

4WayGlide  
Madrass LPL



Etac är en världsledande utvecklare och leverantör  
av ergonomiska hjälpmedel.  
Målet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar  
livskvaliteten för patienten, de anhöriga och vårdpersonalen.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad  
produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

**Etac Sverige AB**

☎ 0371-58 73 00  
✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)  
🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**®  
Creating Possibilities