



immedia

Manuella förflyttningshjälpmedel

Produktguide



Etac - Creating Possibilities

Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och manuella förflyttningshjälpmedel. Genom våra specialiserade produktvarumärken, erbjuder vi funktionella högkvalitativa produkter inom ett stort område för alla stadier av livet. Oavsett om lösningen är för ett barn eller en äldre person, är vårt mål att främja individens förmågor och förbättra vårdgivarens arbetsförhållanden - genom kvalitet, funktionalitet och design.

immedia

Immedia by Etac - erbjuder användarvänliga manuella förflyttnings- och positioneringshjälpmedel som möjliggör säkra och bekväma förflyttningar för både vårdgivare och patient.



Positionering liggande

Immedia SatinSheet System	4
Immedia 4WayGlide System	6
Immedia TwinSheet4Glide.....	8
Immedia MultiGlide glidmatta.....	9
Immedia MultiGlide Single Patient Use	9
Immedia In2Sheet	10
Immedia GlideCushion och TurningMattress	10



Positionering sittande

Immedia vridplattor	11
Immedia OneWayGlide gliddyna	11



Överflyttning sittande

Immedia vridplattor för golv	12
Immedia glidbrädor, glidskivor och glidmatta	13



Överflyttning liggande

Immedia 2Move förflyttningsskiva	14
Immedia TransferMattress	15
Immedia E-board Oval L	15



Stöd och support

Hjälpmedel för stöd och support	16
---------------------------------------	----



Speciallösningar


Hjälpmedel för speciallösningar	17
---------------------------------------	----



Sitt- till stående


Sitt- till stående uppresningsstöd	18
--	----

Positionering liggande

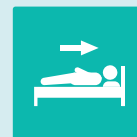


Immedia SatinSheet System

Ett komplett system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng

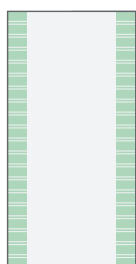


2Direction glidlakan

Börja med att placera ett 2Direction glidlakan direkt på madrassen. Glidlakanet har en glidyta (satin) med låg friktion i mitten, vilket underlättar självständig förflyttning i sidled och vändning. Sidorna är av polyester/bomull som ger högre friktion, vilket minimerar risken för ugridning.

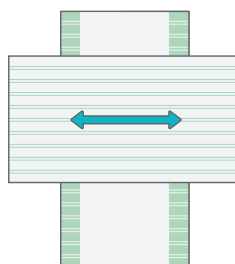

2Direction draglakan

2Direction draglakan används till patienter som är i behov av assistans vid sidledes förflyttningar och vändning i säng. Draglakanen är utformade för att användas ovanpå 2Direction glidlakan.

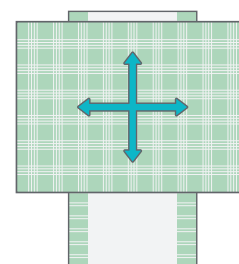

4Direction draglakan

4Direction draglakan används till patienter som är i stort behov av assistans och behöver hjälp med förflyttning i alla riktningar. Dessa draglakan är utformade för att användas ovanpå 2Direction glidlakan.

Varianter av 2Direction Glidlakan

Ett glidlakan kan placeras ovanpå en förebyggande eller behandlande madrass utan någon påverkan av madrassens tryckavlastande förmåga.



2Direction Baslakan

Ett baslakan som bäddas in under madrassen. Patienten ligger direkt på glidytan vilket minskar friktionen, och gör det enklare för patienten att röra och vända på sig.



2Direction Corner

Glidlakan med resårband i hörnen som fästs runt madrassens hörn. Lakanet är enkelt att bädda i och rekommenderas när en tryckavlastande madrass används.

- Traditionell modell av lakan
- Underlättar vändning
- Finns i tre längder, fyra bredder och för dubbelsäng
- Enkelt att bädda i
- Passar även på en tjockare madrass
- Rekommenderas när en förebyggande och behandlande madrass används



2Direction Fit

Dra-på-lakan med dragsko. Lakanet är försett med ett glidområde som täcker hela sängens bredd vid fotändan. Det gör det enklare att förflytta benen i och ur sängen.

- **Dra-på-lakan**
- **Dragsko för att spänna åt lakanet**
- **Underlättar för benen att glida i och ur sängen**



2Direction Elastic Fit

Dra-på-lakan med resårband. Denna modell har öppning i alla fyra hörnen så att slangen till växeltrycksmadrassen kan träs igenom utan besvär. Lakanet är försett med ett glidområde som täcker hela sängens bredd vid fotändan. Det gör det enklare att förflytta benen i och ur sängen.

- **Dra-på-lakan**
- **Öppna hörn för slang till växeltrycksmadrass**
- **Underlättar för benen att glida i och ur sängen**

Varianter av Draglakan

Immedia draglakan är utformade för att användas ovanpå ett 2Direction glidlakan. 2Direction draglakan används av vårdgivare för att assistera vid positionering i sidled. Draglakan 4Direction används för hjälp vid positionering i alla riktningar.



Draglakan – 2Direction

Används för förflyttning i sidled eller vändning i säng. Förhindrar att patienten glider uppåt eller nedåt i sängen. Placeras ovanpå ett 2Direction glidlakan.

- **Ränderna indikerar glidriktningen**
- **Underlättar positionering i sidled**
- **Tunt och luftigt draglakan**
- **Finns i två längder**
- **För patienter med behov av ett absorberande material**
- **Ränderna indikerar glidriktningen**
- **Underlättar positionering i sidled**



Draglakan – 2Direction med inkontinensskydd

För delvis vårdbehövande patienter med behov av ett absorberande material. Används för förflyttning i sidled eller vändning i säng. Placeras ovanpå ett 2Direction glidlakan.



Draglakan – 4Direction

Ett 4Direction draglakan med en undersida av satin som placeras ovanpå 2Direction glidlakan och möjliggör förflyttning och positionering i alla riktningar.

- **Mönsterränderna indikerar glidriktningen**
- **Mycket låg friktion för enkel ompositionering**
- **Finns i två längder**



Draglakan – 4Direction med handtag

Lämpligt att använda tillsammans med lyft för vändning i säng. Ett 4Direction draglakan med en undersida av satin som placeras ovanpå 2Direction glidlakan och möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled.


- **Kan användas tillsammans med lyft**
- **Finns i två längder**



Draglakan – 4Direction med vätskespärr

Ett 4Direction draglakan med en ovansida med vätskespärr och en undersida av satin. Placeras ovanpå 2Direction glidlakan och möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled. Finns i två storlekar.

- **Med vätskespärr**
- **Mycket låg friktion för enkel ompositionering**
- **Med bäddflikar**

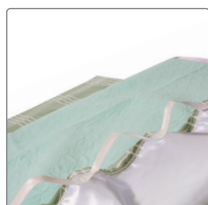

Draglakan – 4Direction med vätskespärr och handtag

Lämpligt att använda tillsammans med lyft för vändning i säng. Ett 4Direction draglakan med ovansida med vätskespärr och en undersida av satin. Placeras ovanpå 2Direction glidlakan och möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled.

- **Med vätskespärr**
- **Kan användas tillsammans med lyft**
- **Finns i två storlekar**




SatinSheet Örngott

Örngottets mönster visar glidriktningen. Vid placering med ränderna i sidled underlättar kudden vid sidförflyttning. Placerat med ränderna i längsriktningen erhålls glidförmåga i alla riktningar vilket underlättar vid förflyttning högre upp i säng.

- **Underlättar vid förflyttning i sidled**
- **Underlättar vid förflyttning högre upp i säng**

Immedia 4WayGlide System

Förflyttningssystem för vändning och förflyttning av patienter med begränsad rörlighet, smärta, trycksår eller hög vikt.

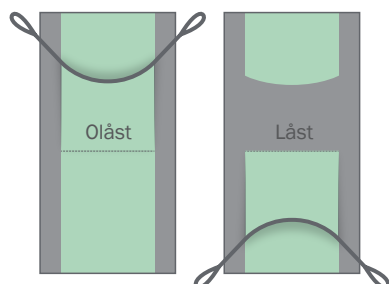


4WayGlide nylonakan

Börja med att placera ett nylonakanet direkt på sängens madrass. Nylonakanet är försett med ett grönt glidområde med låg friktion. Vissa modeller har också ett grått område med hög friktion och fungerar som broms. Nylonakanet har resårband i hörnen som fästs runt sängens madrass.

4WayGlide nylonakan är utformat för att användas under 4WayGlide glidmadrass och fungerar inte ensamt.

Finns i flera varianter.

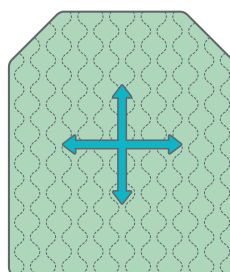


4WayGlide glidmadrass

Placera en till 4WayGlide glidmadrass ovanpå nylonakanet för förflyttning i alla riktningar. Glidmadrassen har handtag på undersidan vilket ger bra grepp vid förflyttning. Vändning kan utföras manuellt eller med hjälp av lyft. Madrassen är även försedd med hörnremmar som fästs runt madrassen för att förhindra att patienten glider.

4WayGlide glidmadrass är utformat för att användas ovanpå 4WayGlide nylonakan och fungerar inte ensamt.

Glidmadrassen finns i tre storlekar – mini, midi eller maxi

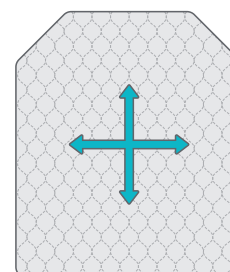

TwinSheet4Glide glidmadrass – med vätskespärr


När vätskespärr krävs placeras en TwinSheet4Glide glidmadrass ovanpå nylonakanet. Glidmadrassen har handtag på undersidan vilket ger bra grepp vid förflyttning.

Twinsheet4Glide glidmadrass är utformat för att användas ovanpå 4WayGlide nylonakan och fungerar inte ensamt.

Finns i två varianter.

4WayGlide nylonlakan


Används alltid tillsammans med en glidmadrass. Ligger kvar i sängen och underlättar vändning eller förflyttning av patienten. Kan placeras ovanpå en förebyggande och behandlande madrass utan någon påverkan av madrassens tryckavlastande förmåga.

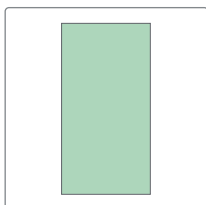

Nylonlakan

Enkelt nylonlakan utan låsfunktion och utan antihalkkanter på långsidorna. Kan användas när det inte finns något behov av att förhindra att patienten glider ur sängen eller när maximal glidyta önskas.


- **Utan låsfunktion**
- **Underlättar vid förflyttning mellan två liggplatser**

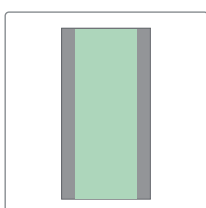

Nylonlakan med antihalkkanter på långsidorna

Nylonlakan utan låsfunktion men med antihalkkanter på långsidorna. Kan användas när det finns behov av att förhindra att patienten glider ur sängen.


- **Utan låsfunktion med antihalkkanter på långsidorna**
- **Minimerar risken att glida ur sängen**
- **Finns i tre storlekar för mini, midi eller maxi**

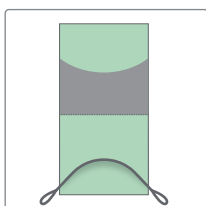

Nylonlakan med en låslucka

Nylonlakan med en låslucka under sittdelen och utan antihalkkanter på långsidorna. Kan användas när det finns behov av att förhindra att patienten glider nedåt i sängen vid sittande.


- **En låslucka**
- **Minimerar risken att glida nedåt i sängen**
- **Underlättar vid förflyttning mellan två liggplatser**

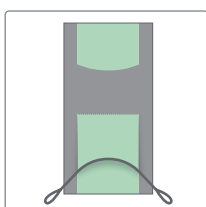

Nylonlakan med en låslucka och antihalkkanter på långsidorna

Nylonlakan med en låslucka under sittdelen och antihalkkanter på långsidorna. Kan användas när det finns behov av att förhindra att patienten glider nedåt eller ur säng.


- **En låslucka**
- **Minimerar risken att glida nedåt eller ur säng**
- **Finns i två bredder**

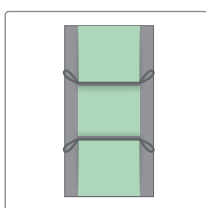

Nylonlakan med två låsluckor och antihalkkanter på långsidorna

Kan användas när det finns behov av att förhindra att patienten glider ur sängen. Det finns inget lås på den del som är placerad under stussen för att förhindra skjuv eller friktion när patienten sitter i sängen.

- **Två låsluckor**
- **Antihalkkanter på långsidorna**
- **Minimerar risken att glida nedåt eller ur säng**

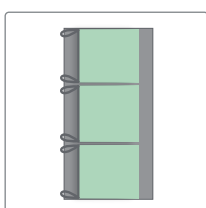

Nylonlakan med tre låsluckor och antihalkkanter på långsidorna

Detta är det mest komplexa nylonlakanet. Systemet kan låsas på flera olika sätt. Kan användas när det finns behov av att förhindra att patienten glider nedåt eller ur sängen. Rekommenderas ej för ensam vårdare.

- **Tre låsluckor – valfritt att använda ett, två eller tre lås**
- **Antihalkkanter på långsidorna**
- **Minimerar risken att glida nedåt eller ur säng**
- **Finns i två bredder**

Varianter av 4WayGlide glidmadrass


Förflyttningssystem för vändning och förflyttning av patienter med begränsad rörlighet, smärta, trycksår eller hög vikt.



4WayGlide glidmadrass – polyester/bomull

Standardversionen av 4WayGlide glidmadrass har en ovansida av polyester/bomull och en undersida av nylon. Handtagen på undersidan av glidmadrassen ger ett mycket bra grepp. Kan även fästas på lyftbygeln för användning med lyft.

- **Med handtag för bättre grepp**
- **Kan användas med lyft**
- **Finns i 2 bredder och 3 längder**

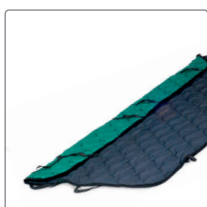

4WayGlide glidmadrass i polyuretan

4WayGlide glidmadrass har en ovansida av polyuretan och en undersida av nylon. Ytan rengörs enkelt genom avtorkning. Handtagen på undersidan av glidmadrassen ger ett mycket bra grepp. Kan även fästas på lyftbygeln för användning med lyft. Finns också i bredare modell, ett alternativ för större och tyngre patienter.

- **Enkel att torka av**
- **Med handtag för bättre grepp**
- **Kan användas med lyft**
- **Finns i 2 bredder**

Immedia TwinSheet4Glide

Immedia TwinSheet4Glide är en glidmadrass med vätskepärr för patienter med stort omvårdnadsbehov.



Immedia TwinSheet4Glide lång

Med en ovansida av mikrofiber och ett absorberande mellanlager, lämplig för patienter med inkontinensproblem. Handtagen på undersidan ger bra grepp och gör det möjligt att använda madrassen tillsammans med lyft. Skall alltid kombineras med ett nylonlakan.

- **Med vätskepärr**
- **Full längd**
- **Kan användas med lyft**



Immedia TwinSheet4Glide tvådelad

Patienten kan vändas på sidan för sårvård eller personlig hygien. Nederdelen kan enkelt tas bort och bytas ut om den blir smutsig. Kan användas tillsammans med lyft. Skall alltid kombineras med ett nylonlakan.

- **Med vätskespärr**
- **Tvådelad**
- **Lämplig vid sårvård eller personlig hygien**

Immedia MultiGlide glidmatta

Immedia MultiGlide är lämplig när det finns behov av att minska friktionen under tryckpunkterna. Till exempel vid vändning och ompositionering i säng och vid överflyttning mellan säng och rullstol.



Immedia MultiGlide SG

En glidmatta med låg friktion på båda sidor. Lämplig för alla typer av förflyttningar då man vill minska friktionen under tryckpunkterna. Friktionen är låg på både in- och utsidan vilket minskar friktionen maximalt. Denna modell rekommenderas i de flesta fall.

- **Låg-låg friktion**
- **Tubformad**
- **För många olika situationer**



Immedia MultiGlide SG rulle

Ett glidtyg på rulle med låg friktion på båda sidor. Tyget kan klippas till i önskad längd.

- **Låg-låg friktion**
- **10 meter lång och 150 cm bred**
- **Kan klippas till i önskad storlek**



Immedia MultiGlide

En tunn, tubformad glidmatta med låg friktion på insidan och hög friktion på utsidan. Den höga friktionen på utsidan säkerställer att glidtyget ligger kvar under patienten vid förflyttning och fungerar även som en vattentät barriär. Rekommenderas vid förflyttningar i våta miljöer.

- **Hög-låg friktion**
- **Tubformad**
- **Vattentät**



Immedia MultiGlide med handtag

Tubformad glidmatta med hög friktion på utsidan och låg friktion på insidan. Handtagen är i första hand utvecklade för förflyttning uppåt och nedåt i säng.

- **Hög-låg friktion**
- **Handtag för att underlätta förflyttning uppåt/nedåt i säng**
- **Vattentät**

Immedia MultiGlide Single Patient Use

Ett glidtyg för enpatientsbruk med låg friktion på båda sidor som minskar risken för korskontaminering och infektion. Kan användas för förflyttning i säng, mellan säng och rullstol, på operationsbordet eller vid röntgen.



Immedia MultiGlide SPU

Det tunna glidtyget ger minskad friktion under tryckpunkter vilket minskar risken för skjuv. Dessutom minskar belastningen på vårdpersonal. Ska kasseras om den är nedsmutsad eller om den inte längre används av samma patient.

- **Låg-låg friktion**
- **Enpatientsprodukt – används endast till en patient**
- **Reducerar risken för infektion**
- **Finns i flera olika storlekar**

Immedia In2Sheet

Ett draglakan med en ovansida med vätskespärr och en undersida som har låg friktion. Minskar friktionen i sidled och lakanet är därför lämpligt vid vändning av en inkontinent patient med nedsatt rörlighet.



Immedia In2Sheet

Detta draglakan placeras direkt ovanpå ett vanligt bomullslakan. Draglakanet har en undersida av satin och låg friktion vänd nedåt. Detta minskar friktionen i sidled och lakanet är därför lämpligt vid vändning av en patient med nedsatt rörlighet och som har behov av vätskespärr.

- **För patienter med nedsatt rörlighet och behov av vätskespärr**
- **Vändning i säng**
- **Handtag på sidorna**

Immedia glidmatta och vändmadrass

För vändning och ompositionering



Immedia GlideCushion

Används för vändning i säng, förflyttning uppåt eller nedåt i säng och överflyttningar från säng till rullstol. Kan användas som stöd vid förflyttningar som utförs självständigt eller med assistans. Kan kombineras med ett vattentätt nylonöverdrag.

- **Minimerar friktion under tryckpunkter**
- **För vändning och förflyttning högre upp i säng**
- **Kan användas av självständiga patienter**



Immedia TurningMattress

Produkten placeras ovanpå den vanliga madrassen och patienten kan ligga kvar på produkten. Den låga friktionen på insidan gör det enklare för en patient med nedsatt rörlighet att självständigt vända sig i sängen.

- **Underlättar vändning i säng**
- **Kan ligga kvar i sängen under patienten**
- **Kan användas av självständiga patienter**

Positionering sittande



Immedia vridplattor

Immedias vridplattor är särskilt lämpliga som stöd vid överflyttning i och ur en bil eller säng. Kan även användas på stol för att komma bättre intill vid bord.



Immedia EasyTurn

En mjuk vridplatta som gör det enklare för patienten att ta sig in i och ut ur en bil eller i och ur en säng. Vridplattan är enkel att placera och använda.

- **Gör det enklare att ta sig in i och ut ur en bil eller säng**
- **Underlättar rotation**
- **Enkel att placera och använda**



Immedia AutoTurn

En vridplatta som underlättar för en patient att ta sig in i och ut ur en bil. Den låga friktionen underlättar för patienten att vrida sig och ändra sittläge i bilstolen och belastningen på fötter, knän, höfter och rygg minskar. Immedia AutoTurn fästs runt stolsryggen med hjälp av ett bälte.

- **Gör det enklare att ta sig in i och ut ur en bil eller säng**
- **Underlättar vridning och ändring av sittläge**
- **Minimerar belastningen på fötter, knän, höfter och rygg**

Immedia OneWayGlide gliddyna

Gliddyna för enklare positionering i sittande. Immedia OneWayGlide glider lätt i en riktning och bromsar i den andra.



Immedia OneWayGlide Velour

En tubformad gliddyna med ovansida av velour. Skön att sitta på, placeras på en textilyta.

- **Tubformad**
- **Yta av velour**
- **Glider i en riktning**



Immedia OneWayGlide Long Velour

En lång och öppen gliddyna med handtag och en ovansida av velour. Längden på dynan gör att patienten kan flytta sig längre bak i stolen flera gånger utan att behöva placera om gliddynan. Handtagen ger ett bra grepp för vårdaren vid assistans.

- **Öppen lång gliddyna**
- **Glider i en riktning**
- **Handtag för bra grepp vid assistans**



Immedia OneWayGlide Long med knytband Velour

En lång och öppen gliddyna med handtag och en ovansida av velour. Längden på dynan gör att patienten kan flytta sig längre bak i stolen flera gånger utan att behöva placera om gliddynan. Knytbanden används för att fästa gliddynan vid rullstolens underrede.

- Glider i en riktning
- Handtag för bra grepp vid assistans
- Knytband för att fästa gliddynan vid rullstolens underrede



Immedia OneWayGlide Velour Pad

En enkel gliddyna med ovansida av velour som är lämplig att placera direkt på en textilyta.

- Ett lager
- Velour yta
- Glider i en riktning



Immedia OneWayGlide antihalk

En tubformad gliddyna med antihalkmaterial på utsidan som greppar mot alla material. Kan vid behov kombineras med polyuretanöverdrag.

- Hög friktion
- Kan användas på alla underlag
- Glider i en riktning

Överflyttning sittande



Immedia vridplattor för placering på golv

Vridplattor för placering på golvet underlättar sittande överflyttning. Vridplattan är lämplig när patienten inte kan flytta med fötterna i samband med sittande överflyttning.



Immedia PediTurn Soft

En mjuk vridplatta som är lämplig när patienten inte bär skor. Tack vare antihalkytan på båda sidorna ligger den stadigt på plats.

- För patienter utan skor
- Överflyttning mellan sittplatser
- Minimerar belastning i knän och anklar



Immedia PediTurn Hard

En hård vridplatta som är lämplig när patienten bär skor.

- För patienter med skor
- Överflyttning mellan sittplatser
- Minimerar belastning i knän och anklar

Immedia glidbrädor, glidskivor och glidmatta

En glidbräda överbryggar kortare avstånd vid sittande överflyttning. Den låga friktionen på brädans ovansida gör det möjligt för patienten att förflytta sig själv eller med assistans.



Immedia E-Board med vikbar kant

Glidbrädan har en kant på ena sidan som kan vikas uppåt och nedåt, vilket gör brädan mer robust och stabil. När kanten viks upp skyddar den mot rullstolens hjul.

- **Robust, lång och stabil**
- **Med en vikbar kant för att skydda mot rullstolshjulet**
- **Finns i två längder, 60 och 75 cm**



Immedia E-Board Compact

En mindre och lättare glidbräda som enkelt kan tas med, passar mer aktiva och självständiga patienter.

- **För den mer oberoende patienten**
- **Låg vikt och lätt att bära**
- **Finns i två längder, 45 och 60 cm**



Immedia Butterfly

En bred och stabil glidbräda. Den har urtag för rullstolshjulet och en halkfri yta på undersidan vilket underlättar positioneringen och gör att den ligger stadigt på plats.

- **Bred och stabil**
- **Kan användas med glidvinge för ytterligare glidfunktion**
- **Lämplig för tyngre patienter, max brukarvikt 250 kg**



Immedia 3B-Board

En lång och stabil glidbräda med svängd form. Brädan kan placeras med den svängda delen vänd antingen framåt eller bakåt beroende på vilka hinder som finns runt omkring, exempelvis rullstolens hjul.

- **Möjliggör överflyttningar över längre avstånd**
- **Svängd form för bättre placering av patienten**
- **Lämplig vid överflyttning i och ur bil**



Immedia Dolphin

En stabil glidbräda som är specialutformad för överflyttning till en toalettstol. Glidbrädan har urtag för toalettstolen och rullstolshjulet samt antihalkmaterial på undersidan vilket underlättar positioneringen och gör att den ligger stadigt på plats.

- **Överflyttning till toalett eller hygienstol**
- **Robust och stabil**
- **Urtag för rullstolshjulet**



Immedia E-Board Oval L

En tunn glidskiva som används vid överflyttning mellan två sängar, vid applicering av lyftsele och ompositionering. Glidskivan är flexibel med en slät yta och låg friktion på båda sidor som underlättar vid placering och borttagning.

- **Flexibel och smidig - endast 3 mm**
- **För horisontella överflyttningar och ompositionering**
- **För applicering av lyftsele**



Immedia E-Board Oval S

En tunn och liten glidskiva, används för att flytta en patient längre bak i rullstol eller för applicering av benstöd på lyftsele. Glidskivan har en låg friktion på båda sidor som underlättar vid placering och borttagning.

- **Lätt att applicera**
- **För ompositionering**
- **För applicering av benstöd på lyftsele**



Immedia Swan

En öppen glidmatta med handtag. Den är lämplig vid överflyttningar mellan säng och rullstol eller i och ur bil. Kan användas med eller utan glidbräda.

- **Kan användas med eller utan glidbräda**
- **Lämplig vid överflyttningar mellan säng och rullstol**
- **Lämplig vid överflyttningar i och ur bil**

Överflyttning liggande



Immedia 2Move förflyttningsskiva

En förflyttningsskiva är avsedd att överbrygga kortare avstånd vid förflyttningar i rygggläge, t.ex. mellan säng och brits, röntgenbord, säng etc.



Immedia 2Move

Förflyttningsskivan överbryggar avståndet och utjämnar vid behov höjdskillnader vid liggande överflyttning mellan två liggplatser.

- **Låg vikt - lätt att transportera och förvara**
- **Finns i flera storlekar, både som vikbar och ej vikbar**



Tillbehör: Immedia 2Move nylonöverdrag

Överdrag med låg friktion som placeras runt förflyttningsskivan. Minimerar friktion och underlättar överflyttningen.

- **Finns i flera olika storlekar**
- **Vattentät**
- **Minimerar friktion**



Tillbehör: Immedia 2Move engångsöverdrag

Plastöverdrag med låg friktion som placeras runt förflyttningsskivan. Minimerar friktion och underlättar överflyttningen. Perforerad på rulle.

- **Engångsöverdrag**
- **Minimerar friktionen**
- **Skyddar förflyttningsskivan från smuts**



Tillbehör: Immedia 2Move Display

Smidig väggdisplay för förflyttningsskivan gör den alltid tillgänglig. Försedd med hållare för engångsöverdraget.

- **Gör förflyttningsskivan lätt tillgänglig**
- **Hållare för engångsöverdraget**

Immedia TransferMattress

Polstrad glidmadrass för liggande överflyttning



Immedia TransferMattress

Underlättar vid liggande överflyttning mellan två liggplatser, till exempel mellan sängar, mellan säng och duschvagn, säng och röntgenbord etc. Kan även användas vid vändning i säng, exempelvis från ryggläge till magläge.

- **Ger en mjuk och bekväm liggande överflyttning**
- **Kan användas vid vändning i säng**
- **Mjukt polstrad i bomull/polyester**



Tillbehör: Immedia TransferMattress nylonöverdrag

Immedia TransferMattress kan kompletteras med ett överdrag i vattentät nylon.

- **Vattentät**
- **Minimerar friktionen**
- **Skyddar Immedia TransferMattress från smuts**
- **Finns även engångsöverdrag av plast**

Immedia glidskiva

En glidskiva överbryggar kortare avstånd vid liggande överflyttning.




Immedia E-Board Oval L

En tunn glidskiva som används vid överflyttning mellan två sängar. Glidskivan är flexibel med en slät yta och låg friktion på båda sidor som underlättar vid placering och borttagning.

- **Flexibel och smidig - endast 3 mm**
- **För horisontella överflyttningar**

För stöd och support

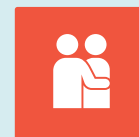

Hjälpmedel för stöd och support

Lösningar för stöd och support samt hjälp vid aktivering och förflyttning.



Immedia SupportBelt

Vårdbältet är ett användbart hjälpmedel när patienten behöver stöd vid uppresning eller nedsättning, stöd vid gåträning eller assistans vid överflyttning mellan två sittplatser. De diagonala handtagen ger vårdaren ett ergonomiskt grepp.

- **Stöd vid uppresning/nedsättning**
- **Stöd vid gåträning**
- **Många handtag möjliggör ett bra grepp**



Immedia Sling

Fungerar som vårdarens förlängda arm, vilket gör det möjligt för vårdaren att erbjuda stöd och hjälp och samtidigt upprätthålla en ergonomisk arbetsställning och ett bra grepp utan att inkräkta på patientens personliga utrymme.

- **Stöd vid förflyttning högre upp i säng**
- **Stöd vid uppresning/nedsättning**
- **Assistans vid positionering i stol**



Immedia SmartMove

Kan användas som stöd vid förflyttning från sittande till stående, högre upp i säng eller längre bak i stol. Insidan har ett antihalk material för att förhindra att den glider ur position.

- **Stöd vid förflyttning högre upp i säng**
- **Stöd vid uppresning/nedsättning**
- **Assistans vid positionering i stol**



Immedia BedString

Sängbandet är huvudsakligen avsett för att hjälpa en aktiv patient att ta sig upp till sittande ställning i sängen. I sittande läge kan patienten ta tag i handtaget och luta sig framåt vid applicering av lyftsele, placering av kuddar eller vid påklädning.

- **Stöd upp till sittande i säng**
- **Många handtag ger möjlighet att hitta ett bra grepp**
- **Fästs lämpligast vid fotändan av sängen**

Speciallösningar



Hjälpmedel för speciallösningar

Hjälpmedel som är användbara vid olika förflyttningssituationer



Immedia MultiGlide Glove

Kan användas i många olika situationer såsom små lägesförändringar, förflyttningar samt utslätning av skrynkliga lakan eller klädesplagg. Kan även användas för att motverka skjuv vid förflyttningar.

- **Små lägesförändringar**
- **"Handcheck" på antidecubitusdynor och antidecubitusmadrasser**
- **Motverkar skjuv**



Immedia OneManSling

Genom att fästa den ena änden av slingan i sängens huvudgavel kan en ensam vårdare flytta patienten högre upp i sängen med minimal kraftansträngning. Multiglide glidmatta eller Immedia SatinSheet 4Direction placeras under patientens tryckpunkter, för att minimera friktionen.

- **Stöd vid förflyttning högre upp i säng**
- **Hjälpmedel för ensam vårdare**
- **Minimal kraftansträngning**



Immedia SlingOn

För enkel applicering av lyftsele i sängen utan att behöva flytta patienten. Perfekt för patienter med smärta, tyngre patienter eller patienter som inte bör eller kan ligga på sidan.

- **Applicering av lyftsele när patienten inte bör eller kan ligga på sidan**
- **Minska friktionen under tryckpunkter**
- **Vändning och positionering**



Immedia MiniBoard

Förflyttningsbår lämplig vid lyft från golv när personlyft inte kan användas. Den styva bottenplattan i kombination med den glatta ytan förenklar placeringen under patienten.

- **Lyft från golv**
- **Finns med huvudstöd för säker och bekväm överflyttning**
- **Finns i flera storlekar**



Immedia Wedge

En kilformad positioneringskudde som ger stöd så att patienten kan ligga kvar på sidan vid vila eller för att underlätta omvårdnad. Överdraget har en antihalkyta som håller positioneringskudden på plats oavsett underlag.

- **Fungerar som stöd vid sidoläge**
- **Olika vinklar på sidorna för att passa olika situationer**
- **Finns i två längder**



Immedia Rescue

Ett evakueringslakan som finns på plats under madrassen. Vid brand kan den användas för att snabbt evakuera en sängliggande patient inklusive hela madrassen. Materialet är brandsäkert.

- **För evakuering i nödsituationer**
- **Finns på plats under madrassen**



Immedia NonSlip Metervara

Ett antihalkmaterial med hög friktion som klipps till i önskad storlek. Rullens bredd är 150 cm och den finns i två längder, 5 eller 30 meter.

- **För att öka friktionen**
- **Klipp till önskad storlek**
- **Placeras under mattallriken för att hålla den på plats**

Sitt- till stående



Uppresningsstöd

Ergonomiska plattformar för aktiva förflyttningar från sittande till stående. Funktionell och säker design som minskar risken för skador för både patient och vårdgivare. Lämplig i hemsjukvård och i vård- och sjukhusmiljö.



Molift Raiser Pro

En överflyttningsplattform som tillåter patienten att använda sin egen muskelkraft med naturligt rörelsemönster. Perfekt i trånga utrymmen och för korta överflyttningar som från säng till rullstol, duschstol eller toalett.

- **Stöd vid överflyttning från säng till rullstol, duschstol och toalett**
- **Minskar skaderisk för patient och vårdgivare**
- **Lätt att manövrera**



Etac Turner Pro

En vridplatta med funktionell design för säker överflyttning med stödhandtag. Möjliggör en bra arbetsställning för vårdaren och minimerar risken för skador i samband med överflyttningen. Främjar patientens naturliga rörelsemönster.

- **Säker överflyttning med stöd i stående**
- **Få och enkla inställningar**
- **Perfekt för trånga utrymmen**



Molift Transfer Pro

Effektiviserar sittande förflyttningar och prioriterar tidig mobilisering och komfort. Den främjar en bra hållning, minskar skaderisken och uppmuntrar till naturlig rörlighet. Perfekt för förflyttning mellan säng, rullstol eller toalett.

- **Möjliggör tidig rehabilitering**
- **Stöttar patientens förmåga**
- **Möjliggör förflyttning med ensam vårdare**





Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

 **etac**®
Creating Possibilities