

Periodisk besiktning av Lyftselar

Enligt EN ISO 10535:2007 ska periodisk besiktning av selar göras minst var 6:e månad. Besiktningen innebär att man kontrollerar selen så att man kan säkerställa att den är säker att använda.

Besiktningen ska utföras av en kvalificerad person som känner till produktens användning, funktion och skötsel. Skadad sele skall omedelbart tas ur bruk!

Selmodell:.....

Artikelnummer:.....

Serienummer:.....

Besiktningen utförd av:.....

Datum:.....

Godkänd

Tas ur bruk

Kommentarer.....

.....

.....

.....

Checklista

- Är selens märkning läslig och komplett?
- Är lyftband och sömmar intakta?
 - Kontrollera så att inga sömmar är slitna eller trasiga.
 - Kontrollera att inga revor, hål eller snitt finns på lyftbanden.
- Är tyget intakt?
 - Kontrollera så att inget onormalt slitage finns.
 - Kontrollera att inga revor, hål, snitt eller fransning finns på tyget.
 - Kontrollera så att inga onormala förändringar finns på tyget som t ex färg, hårdhet, mögel eller vassa kanter.
- Om selen är utrustad med spänne kontrollera så att detta är oskadat
- Kontrollera så att eventuella tillbehör såsom lyftband, bälte osv. är oskadade.