


# Molift Partner 255

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac


## Checklista för periodiska kontroller (SV)

I enlighet med ISO:10535

PI03004 Rev. A 2022-05-23

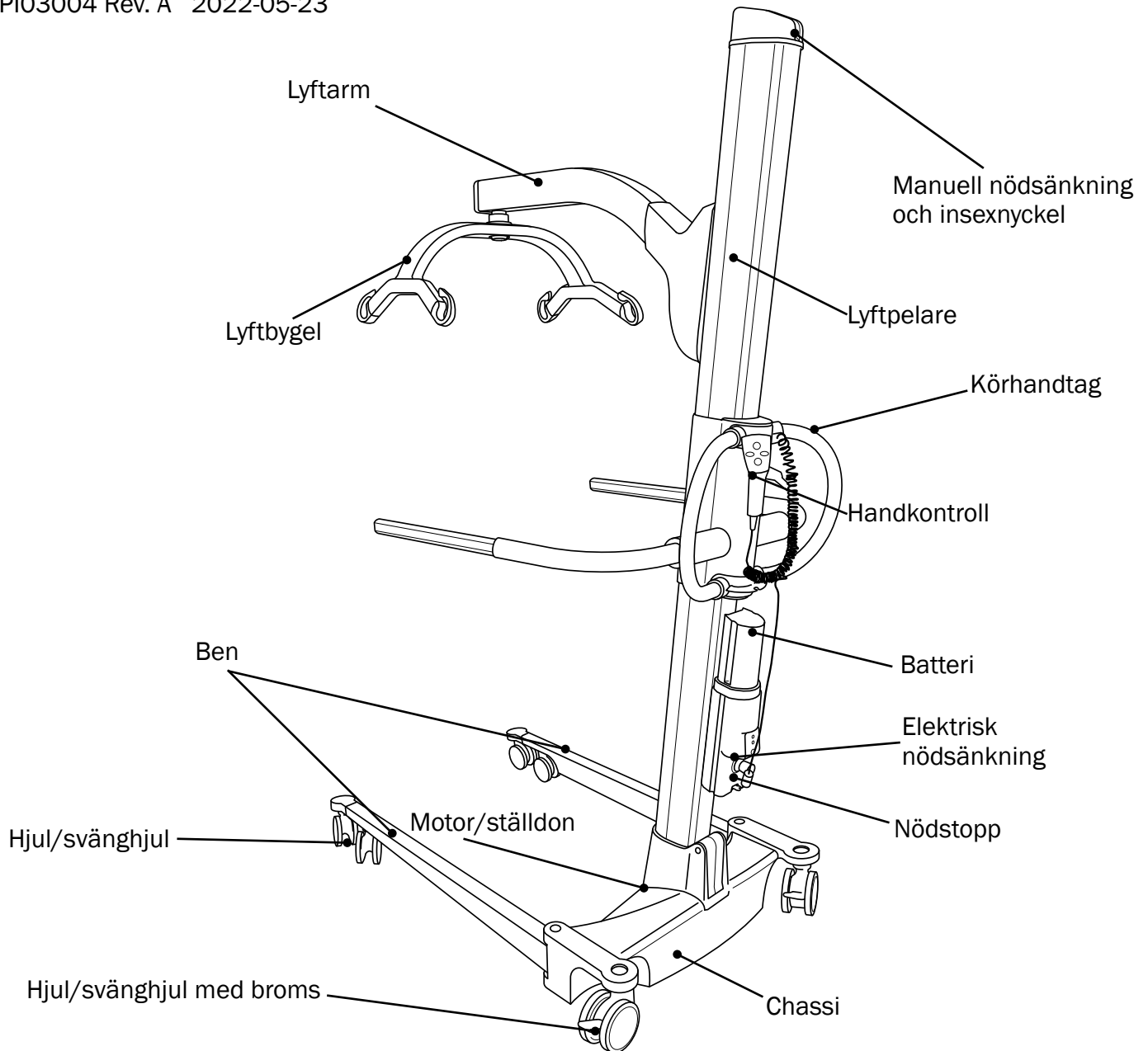

### Produktetikett

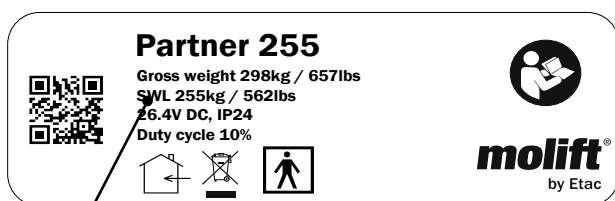

Värde för säker arbetsbelastning

### ID-etikett



Serienummer Artikelnummer Tillverkningsdatum

Det går att ladda ner det här dokumentet från [www.etac.com](http://www.etac.com).

Scanna QR-koden på produktetiketten för att komma till produktens hemsida. Användarmanualen finns under "Dokument".

Artikelnummer (se ID-etikett):

.....

Serienummer (se ID-etikett):

.....

Tillverkningsår:

.....

Ägare:

.....

Selen ska inspekteras separat och ingår inte i den här kontrollen.

### Serviceljusindikator

Kontrollera serviceljusindikatorns ljus:

Status	Serviceljus	Läge
(Lyser inte)		Strömsparläge (Stand by)
Grön		Redo att användas
Gul		Boka service
Röd		Låt utföra service
Röd (plus ljudsignal)		Låt utföra service omedelbart

### Användningssituation

Hemma  
Sjukhus  
Vårdhem  
Annan



**Den periodiska kontrollen ska utföras av en person som är lämpad och kvalificerad samt har kunskap om hur lyften är utformad, används och sköts.**



**Med lyftens mjukvara Molift Service tool är det möjligt att ange datum när den periodiska kontrollen utförs, namnet på kontrollören samt ytterligare information. Molift rekommenderar att man skriver in alla observationer/kommentarer rörande lyften i Molift Service tool för att få en komplett historiklogg för lyften.**

### Visuell undersökning



**Visuell undersökning av den bärande strukturen för att säkerställa att det inte finns några skador, sprickor, deformationer eller andra fel. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.**

OK    Inte OK

Lyftpelare
Lyftarm
Produktetikett
Plastskydd
Handkontroll
Hjul/svänghjul
Bromsar på hjul/svänghjul
Kablar
Batteri
Elektronik
Lyftbygel
Benspridningsmekanism
Ingen korrosion
Svetsning
Användningsinstruktioner/ användarmanual finns på plats/är tillgänglig

**Funktionskontroll**

**Testa FUNKTIONEN och kontrollera beträffande slitage och skador. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.**

OK    *Inte OK*

Hjul/svänghjul

Hjul-/svänghjulsbromsar

Med ben i inre läge (parallella):  
Kontrollera att det inte går  
att minska avståndet mellan  
benen när de trycks ihop för  
hand.

Lyftpelaren är komplett fixerad  
när låshandtaget är aktiverat.

Nödstoppsknappen fungerar  
korrekt och bryter strömmen  
när den trycks ner.  
Återställ brytaren.

Verktyg för manuell  
nödsänkning

Elektrisk nödsänkning

Manuell nödsänkning

Handkontroll (knappar,  
dragavlastning på  
handkontrollens kabel, krok  
samt batteriindikator)

Lyftbygelkoppling (vridleden rör  
sig fritt och utan ljud)

Om alla punkter har  
markerats med "OK" hittills  
ska lyften testas med säker  
arbetsbelastning.

Genomför en lyftcykel med  
vikt som motsvarar säker  
arbetsbelastning  
(se produktetiketten för värde i  
kg/lbs).

Motor och axel får inte slira  
när de belastas (vilket skulle  
få lyftarmen att sjunka) och  
rörelsen ska vara mjuk och  
jämn.

Benspridningsmekanism, yttre  
och inre position med säker  
arbetsbelastning

OK    *Inte OK*

Kontrollera visuellt igen  
beträffande skador, spel och  
deformationer så som beskrivs  
ovan. Alla skadade delar måste  
repareras eller bytas ut och  
testet ska göras om tills lyften  
arbetar korrekt.

Laddaren fungerar.

Batteri.

Med fulladdat batteri insatt,  
efter inledande cykel,  
batteriljuset är släckt,  
serviceljusindikatorn är grön

Tillbehör:

.....  
.....

**Kontroll utförd av**

För- och efternamn:

.....

Datum/plats:

.....

Underskrift:

.....

Godkänd utan fel.

Nästa kontroll (ÅÅÅÅ/MM):        /

Lyften har klassats som "fungerar inte" och  
skickats för reparation.


Lyften kan inte repareras och har tagits ur  
drift.

Om den periodiska kontrollen visar på defekter,  
slitage eller andra skador som kan äventyra  
patientsäkerheten får lyften inte användas förrän  
bristen har åtgärdats.

Ägaren har informerats.

## Anteckningar

---

 **Till följd av juridiska krav måste det här dokumentet eller en kopia av det arkiveras tillsammans med ägarens serviceloggbok.**

Om enheten godkändes utan fel ska kontrolletiketten med markering av år och månad för **nästa** kontroll sättas fast. När du beställer etikett, använd artikelnummer 1100306

