


# Molift Quick Raiser 1, 2 und 2+

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

## Prüfliste für die periodische Inspektion (DE)

Gemäß ISO:10535

PI04102 Rev. A 2022-06-13

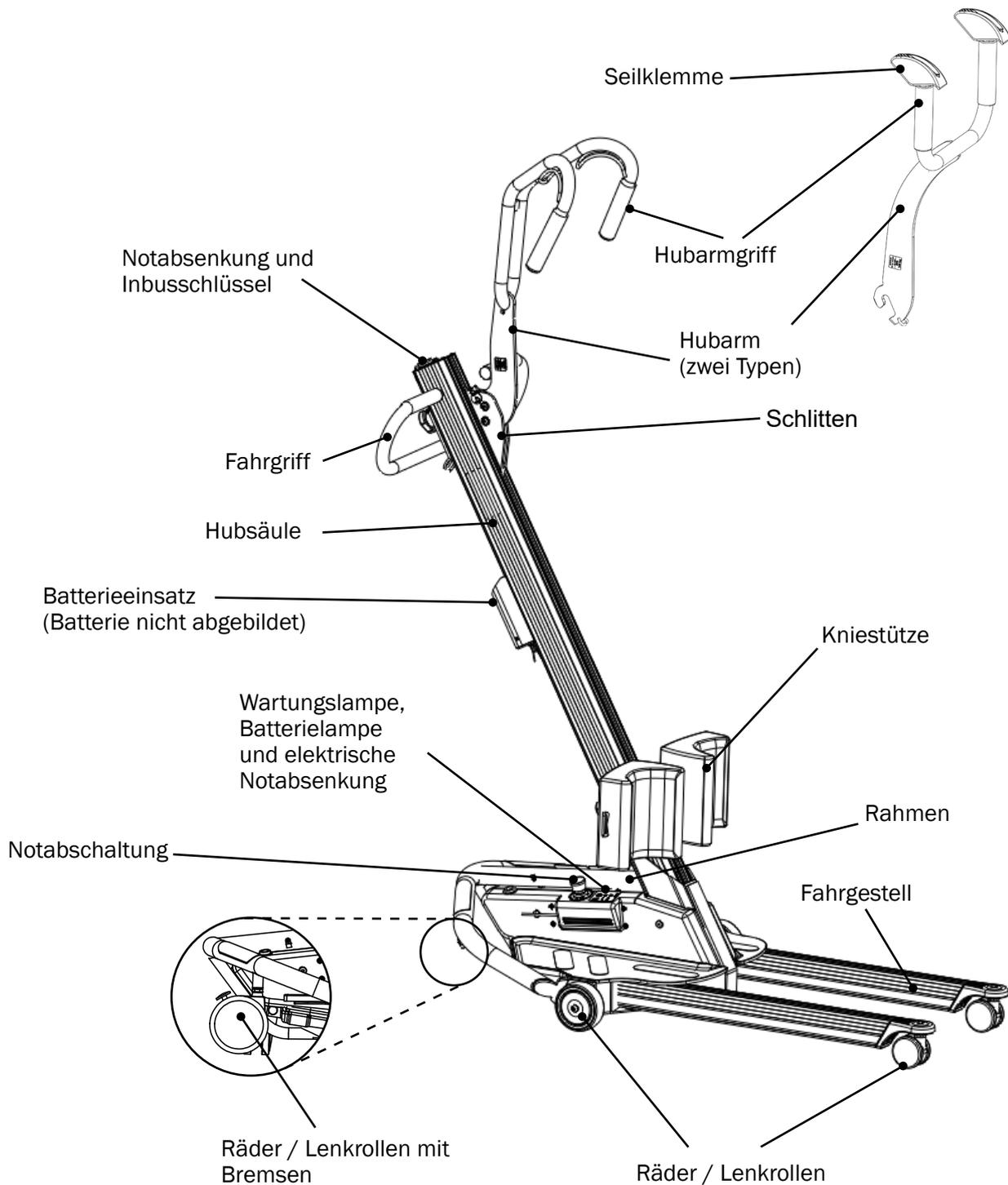

**Produktschilder**

Eine Kopie dieses Dokuments ist unter [www.etac.com](http://www.etac.com) abrufbar.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Produktschild, um zur Produkt-Webseite zu gelangen. Das Benutzerhandbuch finden Sie im Abschnitt „Dokumente“.

Artikelnummer (siehe ID-Schild):

.....

Seriennummer (siehe ID-Schild):

.....

Produktionsjahr:

.....

Eigentümer:

.....

Die Hebegurte müssen gesondert geprüft werden und sind nicht Bestandteil dieser Inspektion.

Geben Sie das Modell an:

- Quick Raiser 1
- Quick Raiser 2
- Quick Raiser 2+

**Wartungslampe**

Beachten Sie die Farbe der Wartungslampe:

Zustand	Wartungslampe	Betriebszustand
	Kein Licht	Stromsparen
	Grün	Einsatzbereit
	Gelb	Wartung beauftragen
	Rot	Wartung durchführen
	Rot (und Warnton, falls freigeschaltet)	Wartung sofort durchführen

**Nutzungsumgebung**

- Wohnung
- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Sonstiges



**Die periodische Inspektion muss von einer Person durchgeführt werden, die über die erforderliche Qualifikation verfügt und mit der Konstruktion, der Verwendung und der Pflege des Lifters vertraut ist.**



**Quick Raiser 1**  
 Gross weight 190kg / 419lbs  
 SWL 160kg / 353lbs  
 14.4V DC, IP24  
 Duty cycle 10%






Nenntragfähigkeit



**Quick Raiser 2**  
 Gross weight 198kg / 436lbs  
 SWL 160kg / 353lbs  
 14.4V DC, IP24  
 Duty cycle 10%






Nenntragfähigkeit

**molift**<sup>®</sup>  
 QUICK RAISER 2+

SWL 200kg / 440lbs  
 14.4 V DC, IP24  
 Duty cycle 10%



Etac AS, Etac Supply Gjøvik  
 Hadelandsveien 2  
 N-2816 Gjøvik NORWAY  
[www.etac.com](http://www.etac.com)





CE

Nenntragfähigkeit

**ID-Schild**



(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

REF	ABCDEFGHIJ		Etac A/S Parallevej 3 DK-8751 Gedved <a href="http://www.etac.com">www.etac.com</a>	MD 
SN	XXXXXX			

YYYY-MM-DD

Seriennummer

Artikelnummer

Produktionsdatum



**Im Molift Service Tool der Lifter-Software können das Datum der regelmäßigen Inspektion, der Name des Technikers und nähere Informationen eingegeben werden. Molift empfiehlt, alle Beobachtungen und Bemerkungen zum Lifter in das Molift Service Tool einzugeben, um ein vollständiges Geräteprotokoll zu gewährleisten.**

*bestanden abgelehnt*

Gebrauchsanleitung / Benutzerhandbuch ist vorhanden / verfügbar

### Sichtprüfung



**Sichtprüfung der Tragekonstruktion, um Schäden, Risse, Brüche und Verformungen auszuschließen. Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um den Lifter zur weiteren Verwendung zuzulassen.**

### Funktionsprüfung



**Prüfen Sie die FUNKTION und kontrollieren Sie auf Verschleiß und Beschädigung. Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um den Lifter zur weiteren Verwendung zuzulassen.**

*bestanden abgelehnt*

*bestanden abgelehnt*

Hubsäule
Hubarm
Hubarmverbindung
Seilklemmen
Hubarmgriffe
Hubarmschlitten
Fahrgestell
Produktschild
Gummiprofil
Handsteuerung
Bedienfeld
Räder / Lenkrollen
Bremsen an Rädern / Lenkrollen
Kabel
Batterie
Ladegerät
Sonstige Elektronik
Kniestütze
Spreizmechanismus des Fahrgestells
Keine Korrosion
Schweißstellen

Räder / Lenkrollen

Bremsen an Rädern / Lenkrollen

Mit nach innen gedrehtem (parallelem) Fahrgestell: Prüfen Sie, dass sich das Fahrgestell von Hand nicht weiter zusammenschieben lässt.

Die Notabschaltungstaste ist voll funktionsfähig und unterbricht bei Betätigung die Stromzufuhr. Rücksetzschalter

Elektrische Notabsenkung

Werkzeug für die manuelle Notabsenkung

Manuelle Notabsenkung

Handsteuerung (alle Tasten, Zugentlastung am Handsteuerungskabel, Haken und Batterieanzeige)

Wenn alle obigen Punkte „bestanden“ sind, prüfen Sie die Nenntragfähigkeit des Lifters.

Führen Sie einen Hubvorgang mit einem Gewicht in Höhe der 75% Nenntragfähigkeit durch (siehe Wert in kg/lbs auf dem Produktschild). Motor und Spindel dürfen unter Last nicht durchdrehen (wodurch sich der Hubarm senkt), und die Bewegung muss sanft und ruckfrei sein.

bestanden abgelehnt

	Spreizmechanismus des Fahrgestells, Drehung nach innen und außen bei Belastung in Höhe der Nennt Tragfähigkeit
	Führen Sie eine erneute Sichtkontrolle durch; Schäden, Spiel und Verformungen wie oben beschrieben. Etwaige beschädigte Teile müssen repariert oder ersetzt werden. Wiederholen Sie dann die Prüfung, bis der Lifter ordnungsgemäß funktioniert.
	Ladegerät ist betriebsbereit.

Batterie  
Bei vollständig geladener Batterie leuchtet die Batterielampe nach dem ersten Vorgang nicht, und die Wartungslampe (Schraubenschlüssel) leuchtet grün.

Zubehör:

.....

.....

.....

**Durchgeführt von**

Vollständiger Name:  
.....

Datum, Ort:  
.....

Unterschrift:  
.....

Ohne Beanstandungen abgenommen

Nächste Inspektion (JJJJ / MM):        /

Lifter wird als „defekt“ gekennzeichnet und zur Reparatur geschickt

Lifter ist irreparabel und muss stillgelegt werden.

Werden bei der periodischen Inspektion Mängel, Verschleißerscheinungen oder sonstige Schäden festgestellt, welche die Sicherheit des Pflegebedürftigen gefährden, darf der Lifter bis zur Behebung des Mangels nicht benutzt werden.

Benachrichtigen Sie den Eigentümer.



**Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss diese Unterlage oder eine Kopie davon im Wartungsbuch des Besitzers abgelegt werden.**

Bringen Sie bei Abnahme ohne Beanstandungen eine Prüfplakette an und kennzeichnen Sie diese mit Monat und Jahr der **nächsten** Inspektion. Verwenden Sie zur Bestellung der Plakette die Artikelnummer 1100306.

**CONTROL**

12 Month



**molift**

Kennzeichnen Sie die Plakette mit Monat und Jahr der nächsten Inspektion.



**Next periodic inspection**

Inspection performed by:

**Anmerkungen und Beobachtungen**

.....