


Molift Quick Raiser 1, 2, og 2+

molift[®]
by Etac


Sjekkliste for periodisk kontroll (NO)

I samsvar med ISO:10535


PI04103 Rev. A 2022-06-13

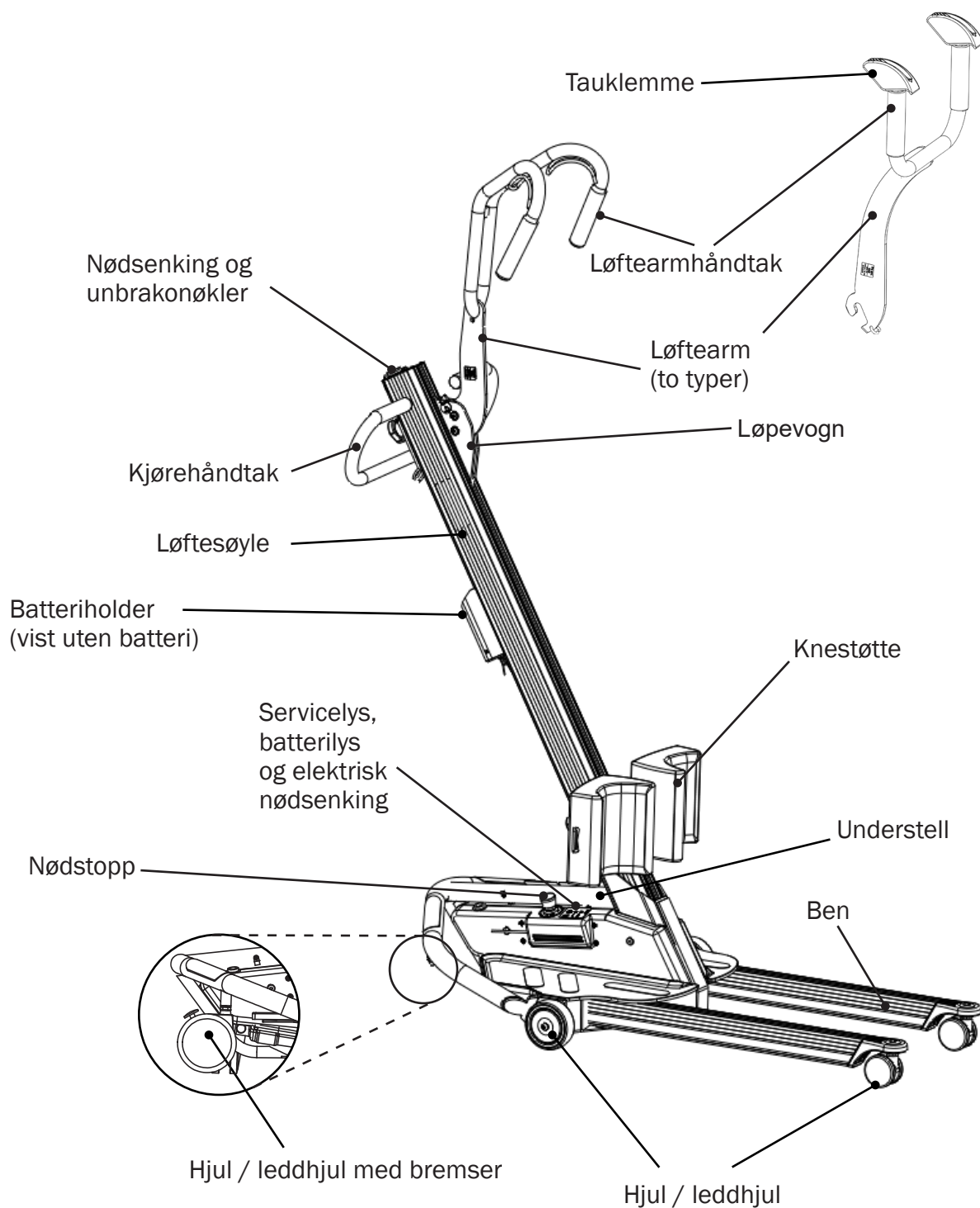

Produktetiketter

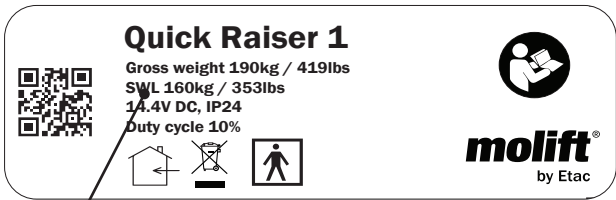

Brukervekt (SWL)-verdi

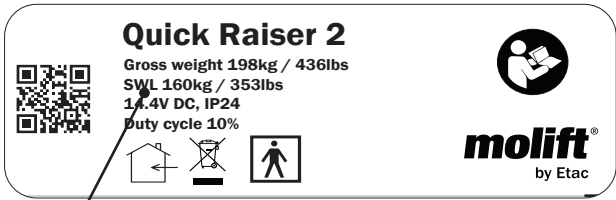

Brukervekt (SWL)-verdi



Brukervekt (SWL)-verdi

ID-etikett



Serienr. Artikkelnr. Produksjonsdato

Du kan laste ned en kopi av dette dokumentet på www.etac.com.

Skann QR-koden på produktetiketten for å komme til hjemmesiden til produktet. Du finner brukerhåndboken i dokument-delen.

Artikkelnr. (se ID-etikett):

.....

Serienr. (se ID-etikett):

.....

Produksjonsår:

.....

Eier:

.....

Seilet må inspiseres separat og er ikke en del av denne inspeksjonen.

Spesifikk modell:

- Quick Raiser 1
- Quick Raiser 2
- Quick Raiser 2+

Serviceindikatorlys

Legg merke til fargen til serviceindikatorlyset:

Status	Service lys	Modus
	Ikke på	Strømsparing
	Grønn	Klar til bruk
	Gul	Bestill service
	Rød	Gjennomfør service
	Rød (og lyd når den aktiveres)	Gjennomfør service umiddelbart

Brukssituasjon

- Hjemme
- Sykehus
- Pleiehjem
- Annet





Programvaren Molift Service Tool byr på muligheten til å legge inn dato for PI og navnet til den som gjennomfører informasjon samt ytterligere informasjon i løfteren. Molift anbefaler å legge inn observasjoner / kommentarer angående løfteren i Molift Service Tool for å få en komplett servicehistorikk for løfteren

Visuell undersøkelse



Visuell undersøkelse av lastbærende struktur for å forsikre at den ikke er skadet, har sprekker, brudd eller deformeringer. Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk

OK Ikke OK

Løftesøyle
Løftearm
Løftearmtilkobling
Tauklemmer
Løftearmhåndtak
Løftearmtilkobling (løpevogn)
Ben
Produktetikett
Gummiprofil
Håndbetjening
Kontrollpanel
Hjul / leddhjul
Bremser på hjul / leddhjul
Kabler
Batteri
Lader
Annen elektronikk
Knestøtte
Benspredemekanisme
Ingen korrosjon
Sveisesømmer

OK Ikke OK

Bruksanvisning / brukerhåndbok til stede / tilgjengelig

Funksjonskontroll



Test FUNKSJONEN og inspiser om det er slitasje eller skade. Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk

OK Ikke OK

Hjul / leddhjul
Hjul- / leddhjulbremser
Med ben i indre posisjon (parallel): Kontroller av avstanden mellom bena ikke reduseres når de dyttes sammen for hånd
Nødstoppbryteren fungerer fullstendig og bryter strømforsyningen når den aktiveres. Nullstillingsknapp
Elektrisk nødsenkning
Verktøy til manuell nødsenkning
Manuell nødsenkning
Håndbetjening (alle knapper, kabelslakker håndbetjeningskabel, krok og batteriindikator)
Hvis alle punkt hittil er «OK» må løfteren testes med brukervekt (SWL).
Gjennomfør en løftesyklus med vekt tilsvarende 75% brukervekt (SWL) (se produktetikett for verdi i kg/lbs). Motor og spindel skal ikke slippe under last (senke løftearmen) og bevegelsen skal være jevn
Benspredemekanisme, ytre og indre posisjon med brukervekt (SWL)
Gjennomfør ny visuell kontroll; skader, slark og deformering som beskrevet over. Alle skadde deler må repareres eller byttes ut, og testen gjennomføres på nytt til løfteren fungerer korrekt

OK Ikke OK

Laderen fungerer

Batteri.
Med fulladet batteri satt inn:
etter innledende syklus er bat-
terilyset av og skiftenøkkelen/
serviceindikatorlyset lyser grønt

Tilbehør:

.....

.....

.....

Gjennomført av

Fult navn:

.....

Dato/sted:

.....

Underskrift:

.....

Godkjent uten feil

Neste inspeksjon
(ÅÅÅÅ / MM):/.....

Løfteren er merket «Ute av drift» og sendt til reparasjon

Løfteren kvalifiserer ikke til reparasjon og er tatt ut av bruk

Dersom den periodevise inspeksjonen avslører defekt, slitasje eller annen skade som utgjør en trussel for pasientsikkerheten skal løfteren ikke brukes til defekten er utbedret

Eier er varslet




På grunn av rettslige krav må dette dokumentet, eller en kopi av det, arkiveres sammen med eierens serviceløggbok

Hvis godkjent uten feil; sett på inspeksjonsetikett og marker måned og år for **neste** inspeksjon. Bruk produktnr. 1100306 ved bestilling av etikett


CONTROL

12 Month



molift

Merk etiketten med måned og år for neste inspeksjon



Next periodic inspection

Inspection performed by:

Kommentarer og observasjoner

.....