


Molift Quick Raiser 1, 2 og 2+

molift[®]
by Etac

Tjekliste til periodisk eftersyn (DA)



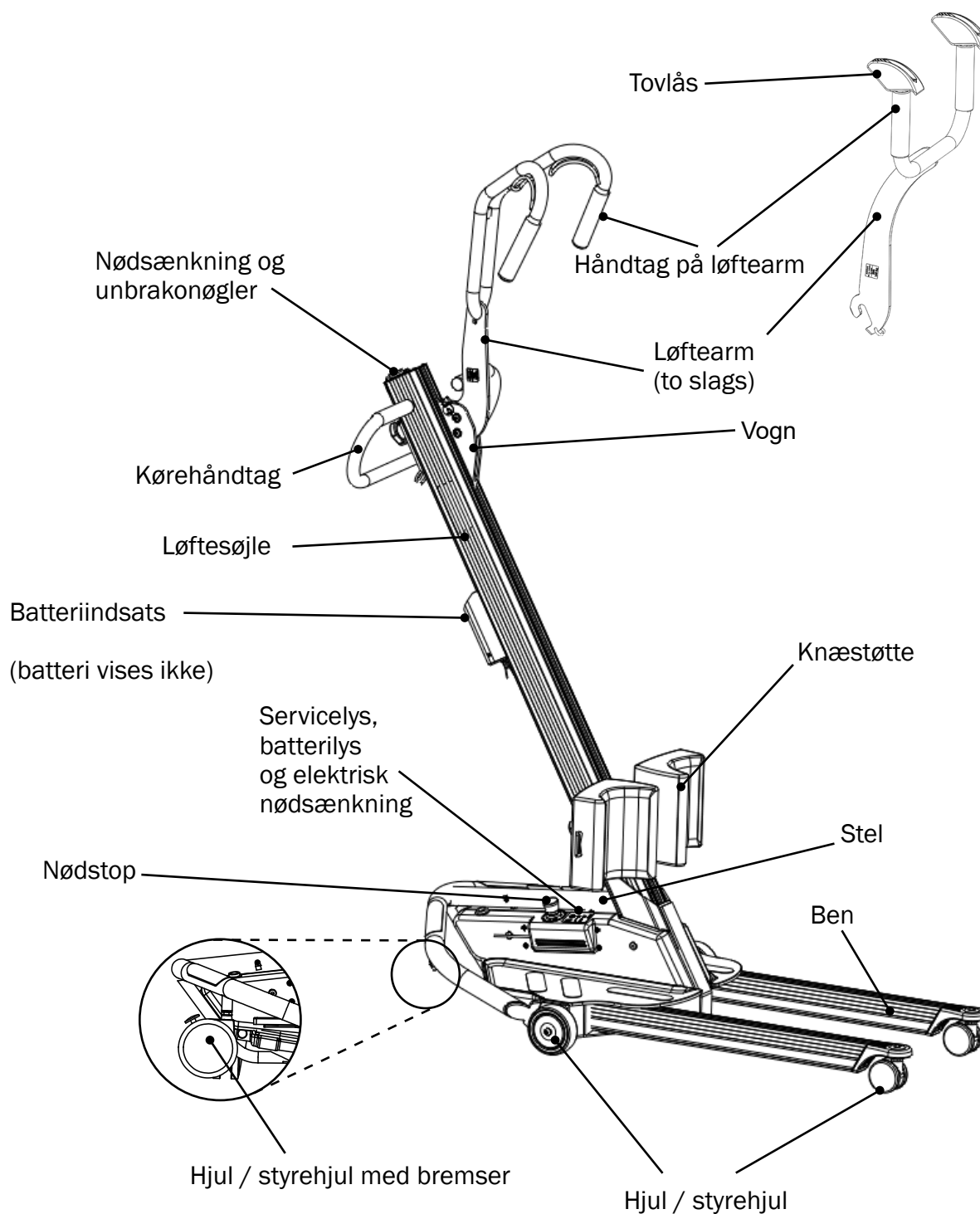


I overensstemmelse med ISO:10535

PI041110 Rev. A 2022-06-13








Produktmærkater

Quick Raiser 1
 Gross weight 190kg / 419lbs
 SWL 160kg / 353lbs
 14.4V DC, IP24
 Duty cycle 10%

SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

Quick Raiser 2
 Gross weight 198kg / 436lbs
 SWL 160kg / 353lbs
 14.4V DC, IP24
 Duty cycle 10%

SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

molift[®]
 QUICK RAISER 2+
 SWL 200kg / 440lbs
 14.4 V DC, IP24
 Duty cycle 10%



Etac AS, Etac Supply Gjøvik
 Hadelandsveien 2
 N-2816 Gjøvik NORWAY
 www.etac.com






SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

Id-mærkat



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXXXX(21)XXXXXX

REF ABCDEFGHIJ

SN XXXXXX

YYYY-MM-DD

Etac A/S
 Parallevej 3
 DK-8751 Gedved
 www.etac.com




Serie-nummer Artikel-nummer Produktionsdato

En kopi af dette dokument kan downloades på www.etac.com.

Scan QR-koden på produktmærkaten for at få adgang til produktets hjemmeside. Brugervejledningen kan findes i dokumentafsnittet.

Artikelnummer (se id-mærkat):

.....

Serienummer (se id-mærkat):

.....

Produktionsår:

.....

Ejer:

.....

Sejlet skal inspiceres særskilt og er ikke med i dette eftersyn.

Angiv model:

- Quick Raiser 1
- Quick Raiser 2
- Quick Raiser 2+


Serviceindikatorens lys

Vær opmærksom på farven på serviceindikatorens lys:

Status	Service lys	Tilstand
	Intet lys	Strømbesparende
	Grønt	Klar til brug
	Gult	Bestil service
	Rød	Udfør service
	Rød (og lyd ved aktivering)	Udfør service øjeblikkeligt

Anvendelsessituation

- Hjemmet
- Hospital
- Plejehjem
- Andet



Det periodiske eftersyn skal udføres af en person, der er egnede og tilstrækkeligt kvalificeret og godt bekendt med konstruktion, brug og pleje af personløfteren



Personløfterens software Molift Service-værktøj giver mulighed for at indtaste dato for PI og navnet på inspektøren sammen med yderligere oplysninger. Molift anbefaler at tilføje alle observationer / bemærkninger vedrørende personløfteren i Molift Service-værktøjet for at have en komplet historiklog over personløfteren

Visuel undersøgelse



Visuel undersøgelse af den lastbærende struktur for at sikre, at der ikke er skader, revner, flosser eller deformationer. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug

OK Ikke OK

Løftesøjle
Løftearm
Løftearms forbindelse
Tovlåse
Håndtag på løftearme
Løftearms forbindelse (vogn)
Ben
Produktmærkat
Gummiprofil
Betjeningshåndsæt
Betjeningspanel
Hjul / styrehjul
Bremser på hjul / styrehjul
Ledninger
Batteri
Oplader
Øvrig elektronik
Knæstøtte
Benspredningsmekanisme
Ingen korrosion
Svejsninger
Brugsanvisning / brugervejledning er til stede / tilgængelig

Funktionel undersøgelse



Test FUNCTION, og inspicer for slitage og skader. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug

OK Ikke OK

Hjul / styrehjul
Hjul / styrehjulets bremses
Med benene i indre position (parallelt): Kontroller, at afstanden mellem benene ikke kan mindskes, når de skubbes sammen med hånden
Nødstopknappen er fuldt funktionsdygtig og afbryder strømmen, når den aktiveres. Nulstil afbryder
Elektrisk nødsænkning
Værktøj til manuel nødsænkning
Manuel nødsænkning
Betjeningshåndsæt (alle knapper, aflastning på betjeningshåndsættets ledning, krog og batteriindikator)
Hvis alle punkter indtil videre er "OK", skal personløfteren testes med SWL.
Udfør én løftecyklus med vægt, der svarer til 75% SWL (se produktmærkat for værdi kg/lbs). Motor og aksel må ikke glide under belastning (forårsager at løftearmen sænker sig), og bevægelsen skal være glat og jævn
Benspredningsmekanisme, ydre og indre position med SWL
Udfør ny visuel kontrol; skader, revner og deformationer som beskrevet ovenfor. Eventuelle beskadigede dele skal repareres eller udskiftes, og testen gentages, indtil personløfteren fungerer korrekt
Opladeren er funktionsdygtig

OK Ikke OK

Batteri.
Når der er isat et fuldt opladet batteri, er batterilyset slukket efter første cyklus, og nøgle/ servicelys er grønt

Tilbehør:

.....
.....
.....

Udført af

Fulde navn:

.....

Dato/sted:

.....

Underskrift:

.....

Godkendt uden fejl

Næste eftersyn (ÅÅÅÅ/MM): /

Personløfteren er markeret "Ude af drift" og sendt til reparation

Personløfteren er ikke berettiget til reparation og er taget ud af drift


Hvis det periodiske eftersyn afslører en defekt, slitage eller anden skade, der bringer patientens sikkerhed i fare, må personløfteren ikke anvendes, før manglen er afhjulpet

Ejeren er underrettet





Grundet lovkrav skal dette dokument eller en kopi arkiveres sammen med ejerens servicelogs bog

Hvis den godkendes uden fejl, påføres inspektionsmærkat, og måned og år til næste eftersyn noteres herpå. Ved bestilling af mærkat anvendes varenummer 1100306

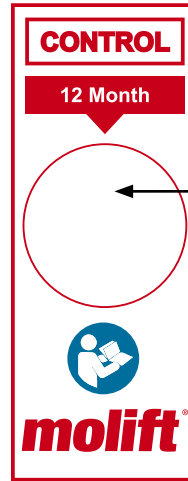

Notér måned og år til næste eftersyn på mærkaten

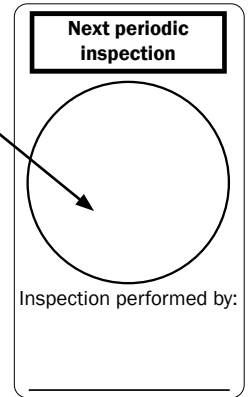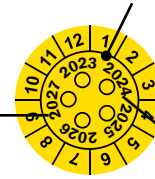

Noter og observationer

.....