


Molift Mover 180, 205 und 300

molift®
by Etac


Prüfliste für die periodische Inspektion (DE)

Gemäß ISO:10535

PI06102 Rev. A 2022-06-15

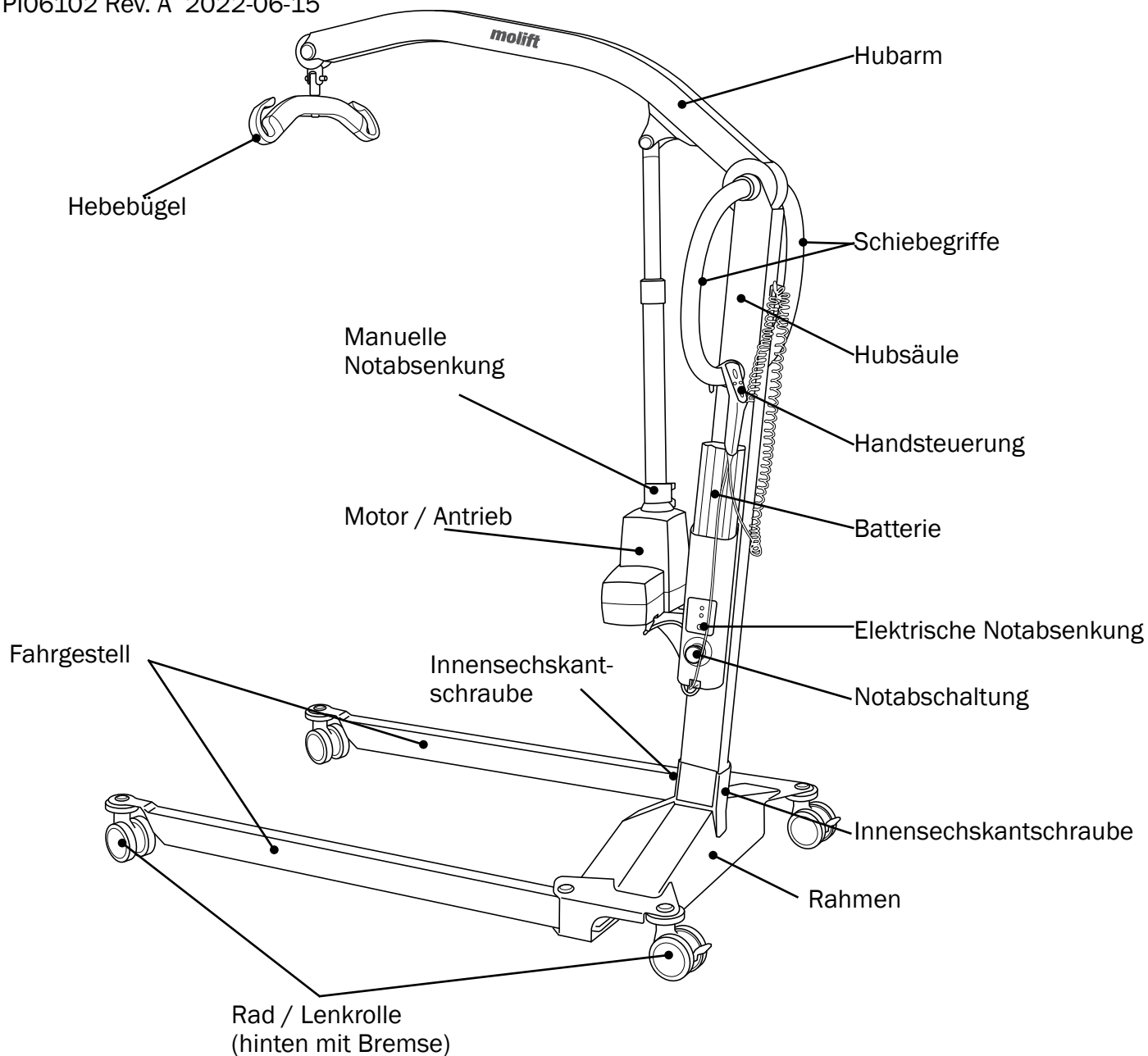

Produktschild, Mover 180

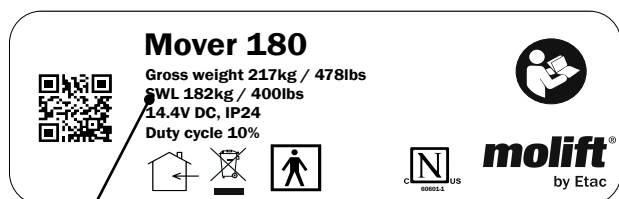


Nenntragfähigkeit


ID-Schild, Mover 180



Seriennummer Artikelnummer Produktionsdatum

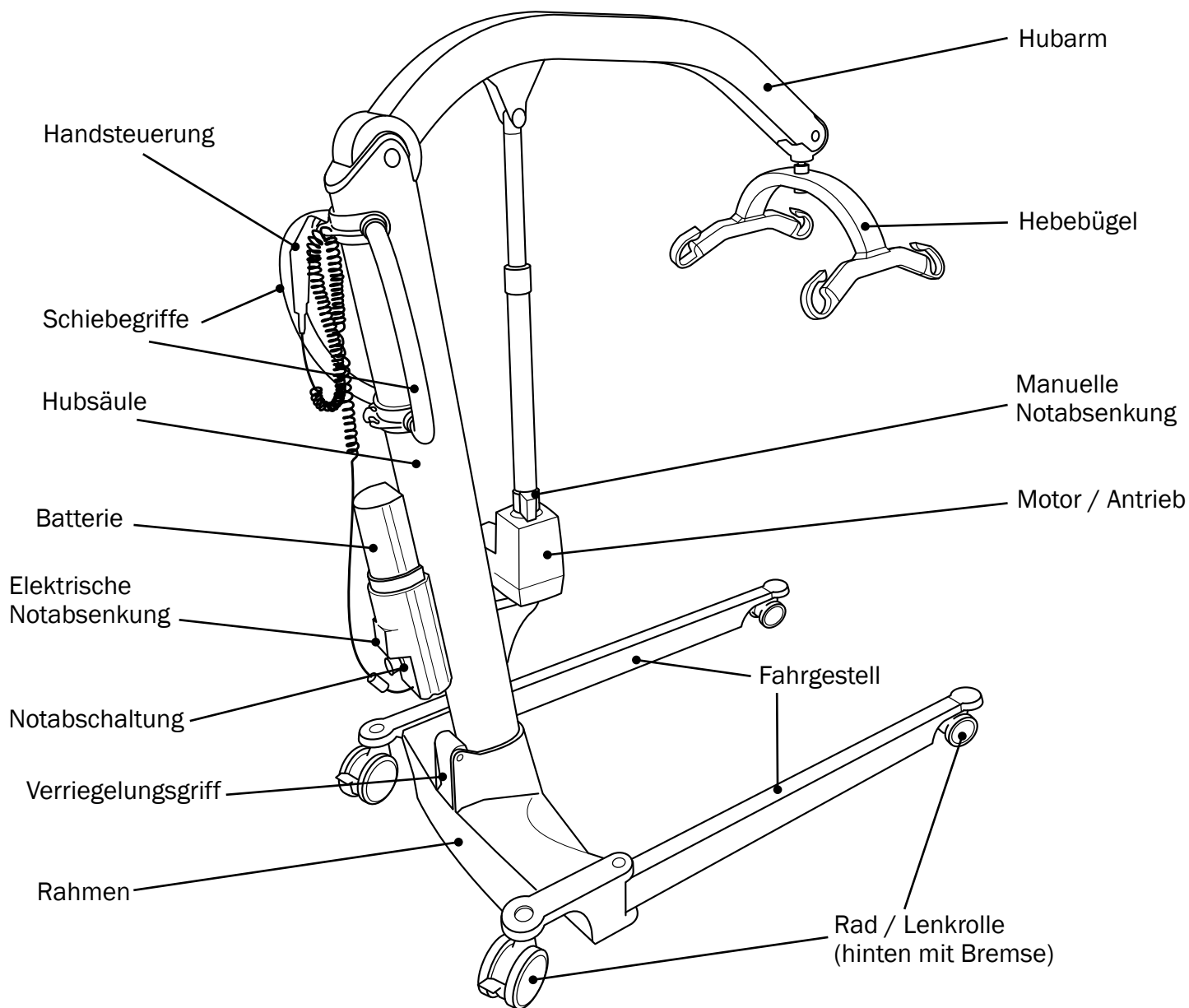

Produktschild, Mover 205

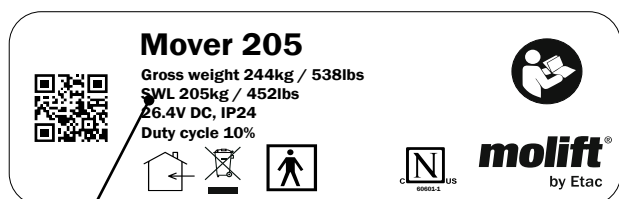


Nenntragfähigkeit


ID-Schild, Mover 205



Seriennummer Artikelnummer Produktionsdatum

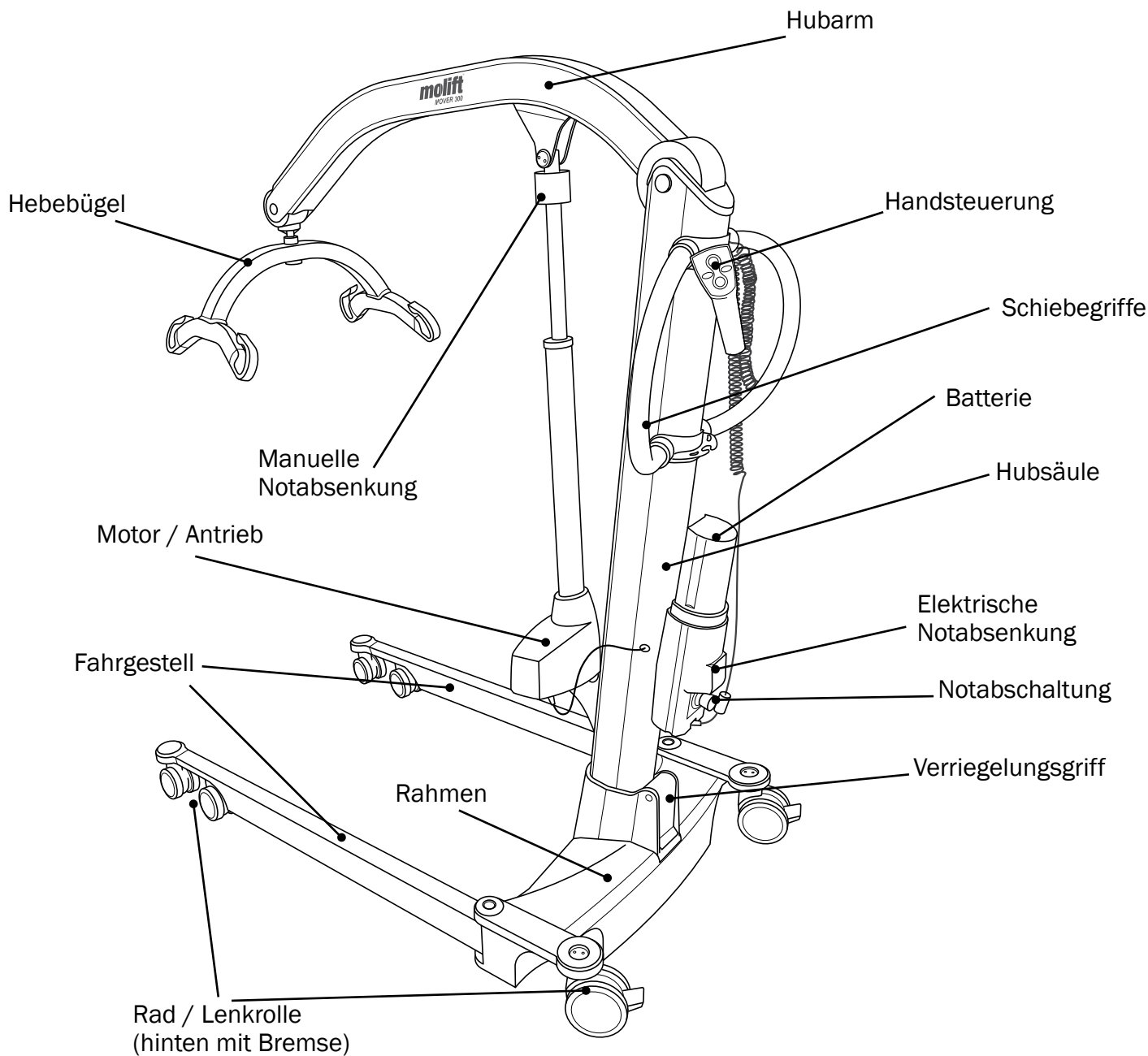


Produktschild, Mover 300

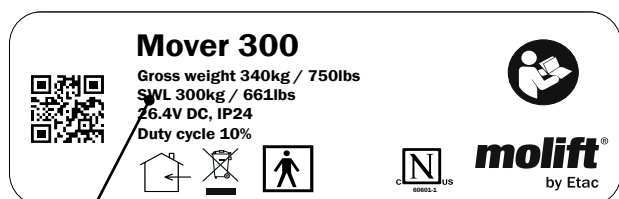

Nenntragfähigkeit

ID-Schild, Mover 300

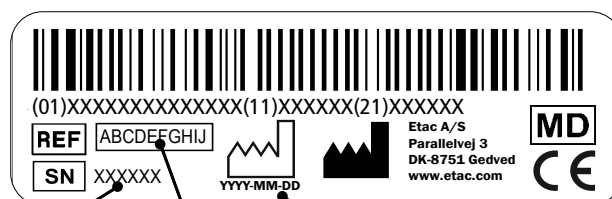

Seriennummer Artikelnummer Produktionsdatum

Eine Kopie dieses Dokuments ist unter www.etac.com abrufbar.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Produktschild, um zur Produkt-Webseite zu gelangen. Das Benutzerhandbuch finden Sie im Abschnitt „Dokumente“.

Artikelnummer (siehe ID-Schild):

.....

Seriennummer (siehe ID-Schild):

.....

Produktionsjahr:

.....

Eigentümer:

.....

Die Hebegurte müssen gesondert geprüft werden und sind nicht Bestandteil dieser Inspektion.

Geben Sie das Modell an:

Mover 180
Mover 205
Mover 300

Nutzungsumgebung

Wohnung
Krankenhaus
Pflegeheim
Sonstiges



Die periodische Inspektion muss von einer Person durchgeführt werden, die über die erforderliche Qualifikation verfügt und mit der Konstruktion, der Verwendung und der Pflege des Lifters vertraut ist.



Im Molift Service Tool der Lifter-Software können das Datum der regelmäßigen Inspektion, der Name des Technikers und nähere Informationen eingegeben werden. Molift empfiehlt, alle Beobachtungen und Bemerkungen zum Lifter in das Molift Service Tool einzugeben, um ein vollständiges Geräteprotokoll zu gewährleisten.

Wartungslampe

Beachten Sie die Farbe der Wartungslampe:

Zustand	Wartungs- lampe	Betriebszustand
	(Kein Licht)	Stromsparmodus (Standby)
	Grün	Einsatzbereit
	Gelb	Wartung beauftragen
	Rot	Wartung durchführen
	Rot (und Warnton, falls freigeschaltet)	Wartung sofort durchführen

Sichtprüfung



Sichtprüfung der Tragekonstruktion, um Schäden, Risse, Brüche und Verformungen auszuschließen. Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um den Lifter zur weiteren Verwendung zuzulassen.

bestanden abgelehnt

	Hubsäule
	Hubarm
	Fahrgestell
	Produktschild
	Kunststoffabdeckungen
	Handsteuerung
	Antrieb
	Räder / Lenkrollen
	Bremsen an Rädern / Lenkrollen
	Ladegerät
	Kabel
	Batterie
	Sonstige Elektronik
	Hebebügel, mit Polsterung
	Spreizmechanismus des Fahrgestells
	Keine Korrosion
	Schweißstellen
	Gebrauchsanleitung / Benutzerhandbuch ist vorhanden / verfügbar

Funktionsprüfung

Prüfen Sie die FUNKTION und kontrollieren Sie auf Verschleiß und Beschädigung. Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um den Lifter zur weiteren Verwendung zuzulassen.

<i>bestanden</i>	<i>abgelehnt</i>
Räder / Lenkrollen	
Bremsen an hinteren Rädern / Lenkrollen	
Mit nach innen gedrehtem (parallelem) Fahrgestell: Prüfen Sie, dass sich das Fahrgestell von Hand nicht weiter zusammenschieben lässt.	
Nur für Mover 180: Die Hubsäule ist vollständig mit Sechskant-Sicherungsschrauben fixiert.	
Nur für Mover 205 und 300: Die Hubsäule ist vollständig fixiert, wenn der Verriegelungsgriff eingerastet ist.	
Die Notabschaltungstaste ist voll funktionsfähig und unterbricht bei Betätigung die Stromzufuhr. Rücksetzschalter.	
Elektrische Notabsenkung	
Manuelle Notabsenkung	
Handsteuerung (Tasten, Zugentlastung am Handsteuerungskabel, Haken und Batterieanzeige)	
Aufhängung des Hebebügels (Drehgelenk bewegt sich frei und geräuschlos)	
Hebebügel-Schnellauslösung	
Wenn alle obigen Punkte „bestanden“ sind, prüfen Sie die Nenntragfähigkeit des Lifters.	

bestanden *abgelehnt*

Führen Sie einen Hubvorgang mit einem Gewicht in Höhe der Nenntragfähigkeit durch (siehe Wert in kg/lbs auf dem Produktschild). Der Antrieb darf unter Last nicht durchdrehen (wodurch sich der Hubarm senkt).

Spreizmechanismus des Fahrgestells, Drehung nach innen und außen bei Belastung in Höhe der Nenntragfähigkeit

Führen Sie eine erneute Sichtkontrolle durch; Schäden, Spiel und Verformungen wie oben beschrieben. Etwaige beschädigte Teile müssen repariert oder ersetzt werden. Wiederholen Sie dann die Prüfung, bis der Lifter ordnungsgemäß funktioniert.

Ladegerät ist betriebsbereit.

Bei vollständig geladener Batterie leuchtet die Batterielampe nach dem ersten Vorgang nicht, und die Wartungslampe (Schraubenschlüssel) leuchtet grün.

Zubehör:

.....

.....

.....

Durchgeführt von

Vollständiger Name:

Datum, Ort:

Unterschrift:

Ohne Beanstandungen abgenommen

Anmerkungen und Beobachtungen

Nächste Inspektion
(JJJ / MM): /

Lifter wird als „defekt“ gekennzeichnet und zur Reparatur geschickt

Lifter ist irreparabel und muss stillgelegt werden.

Werden bei der periodischen Inspektion Mängel, Verschleißerscheinungen oder sonstige Schäden festgestellt, welche die Sicherheit des Pflegebedürftigen gefährden, darf der Lifter bis zur Behebung des Mangels nicht benutzt werden.



Benachrichtigen Sie den Eigentümer.



Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss diese Unterlage oder eine Kopie davon im Wartungsbuch des Besitzers abgelegt werden.

Bringen Sie bei Abnahme ohne Beanstandungen eine Prüfplakette an und kennzeichnen Sie diese mit Monat und Jahr der **nächsten** Inspektion. Verwenden Sie zur Bestellung der Plakette die Artikelnummer 1100306.

Kennzeichnen Sie die Plakette mit Monat und Jahr der nächsten Inspektion.

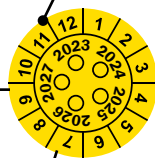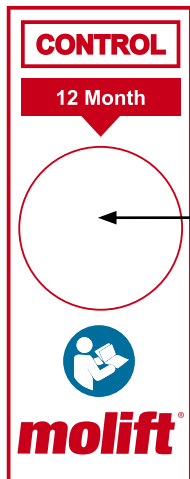

Next periodic inspection

Inspection performed by: