




Lista de verificación de la inspección periódica (ES)

Molift Mover 180, 205 y 300


molift[®]
by Etac

PI08210 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

De acuerdo con la norma ISO 10535

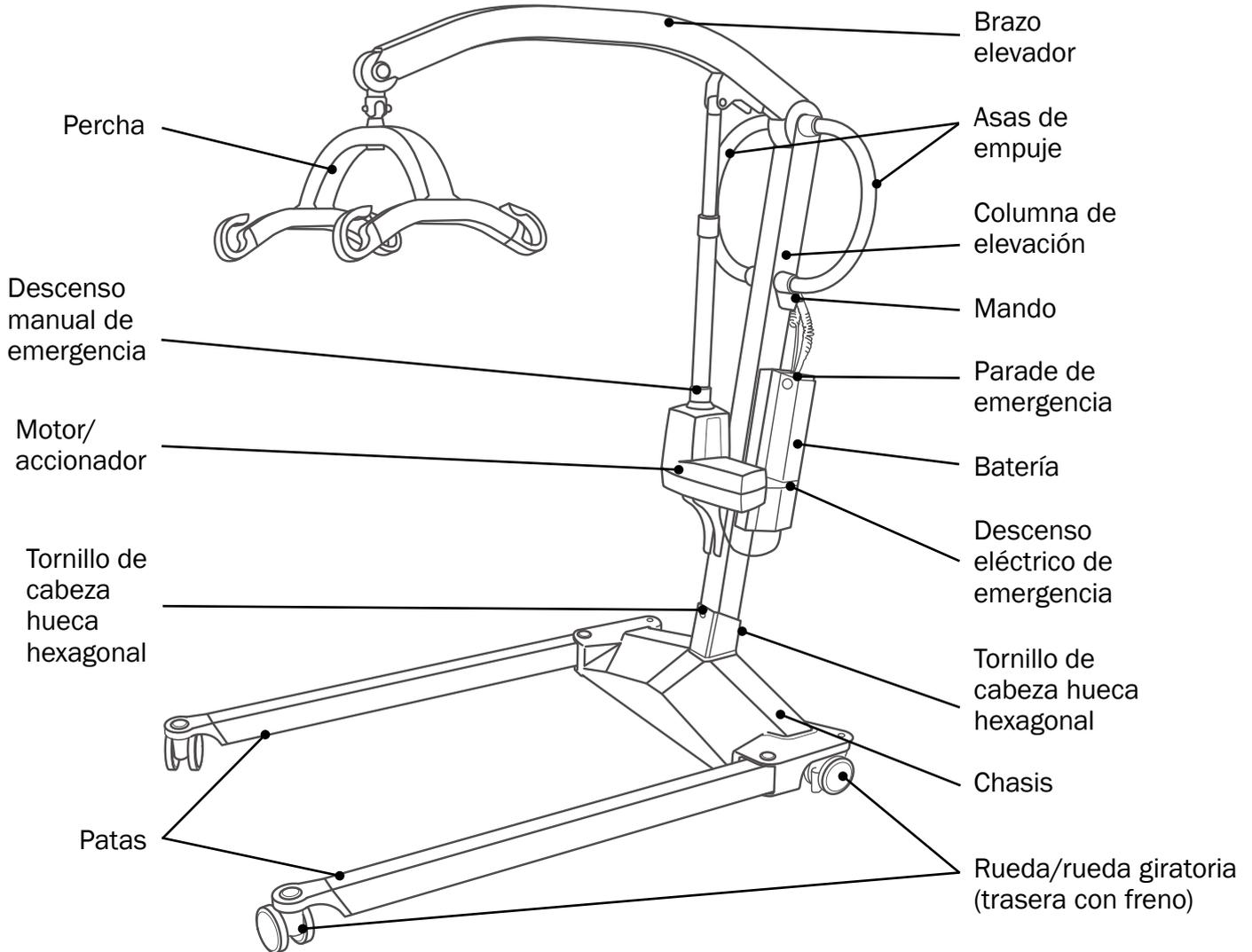

Etiqueta del producto, Mover 180

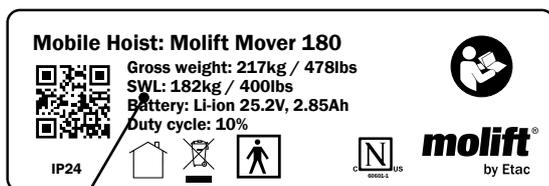

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)


Etiqueta de identificación, Mover 180




N.º de serie

N.º de artículo

Fecha de producción

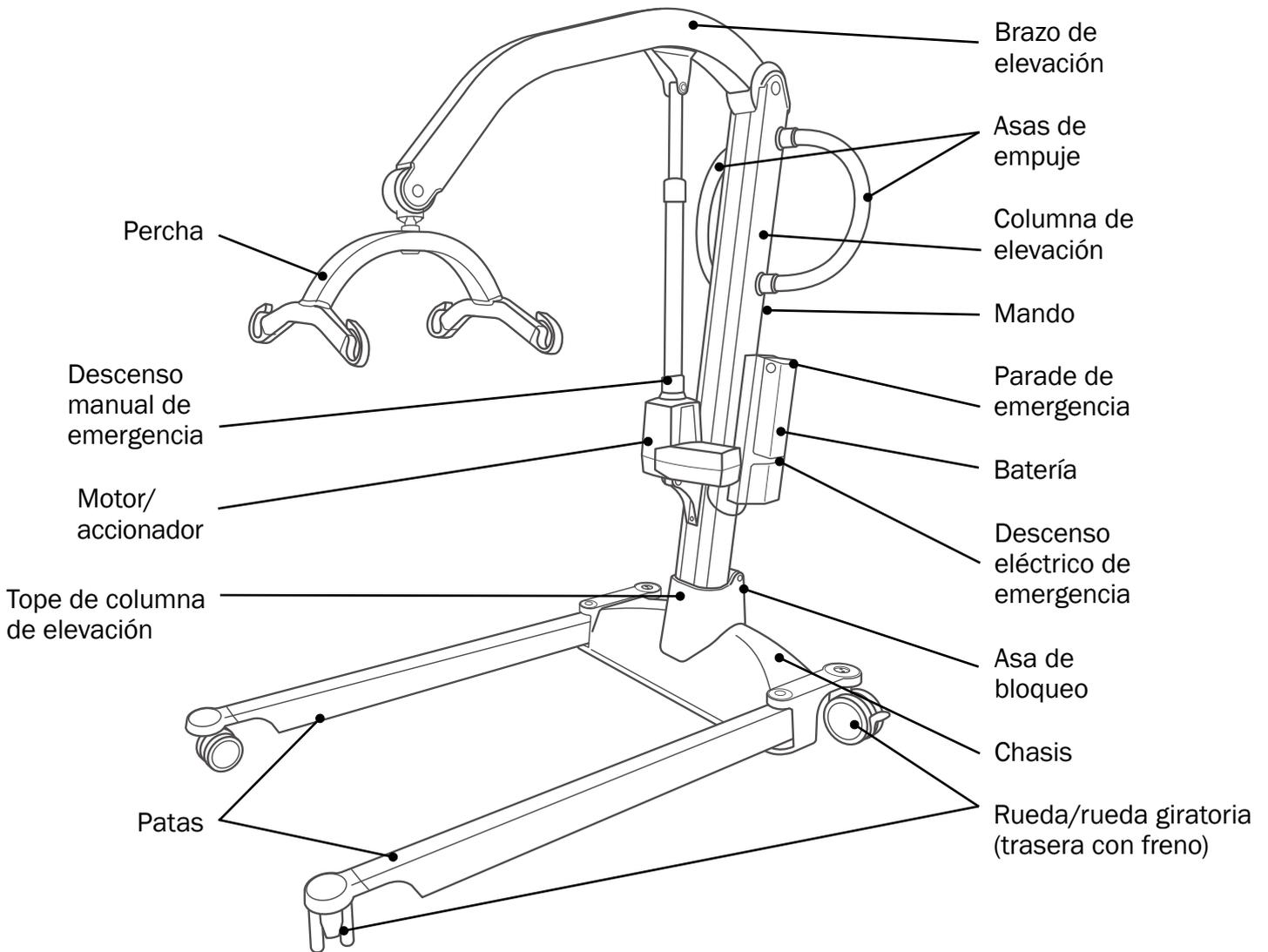


Etiqueta del producto, Mover 205

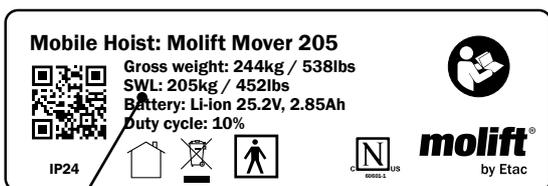

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)


Etiqueta de identificación, Mover 205

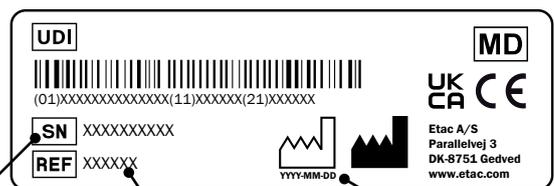


N.º de serie

N.º de artículo

Fecha de producción

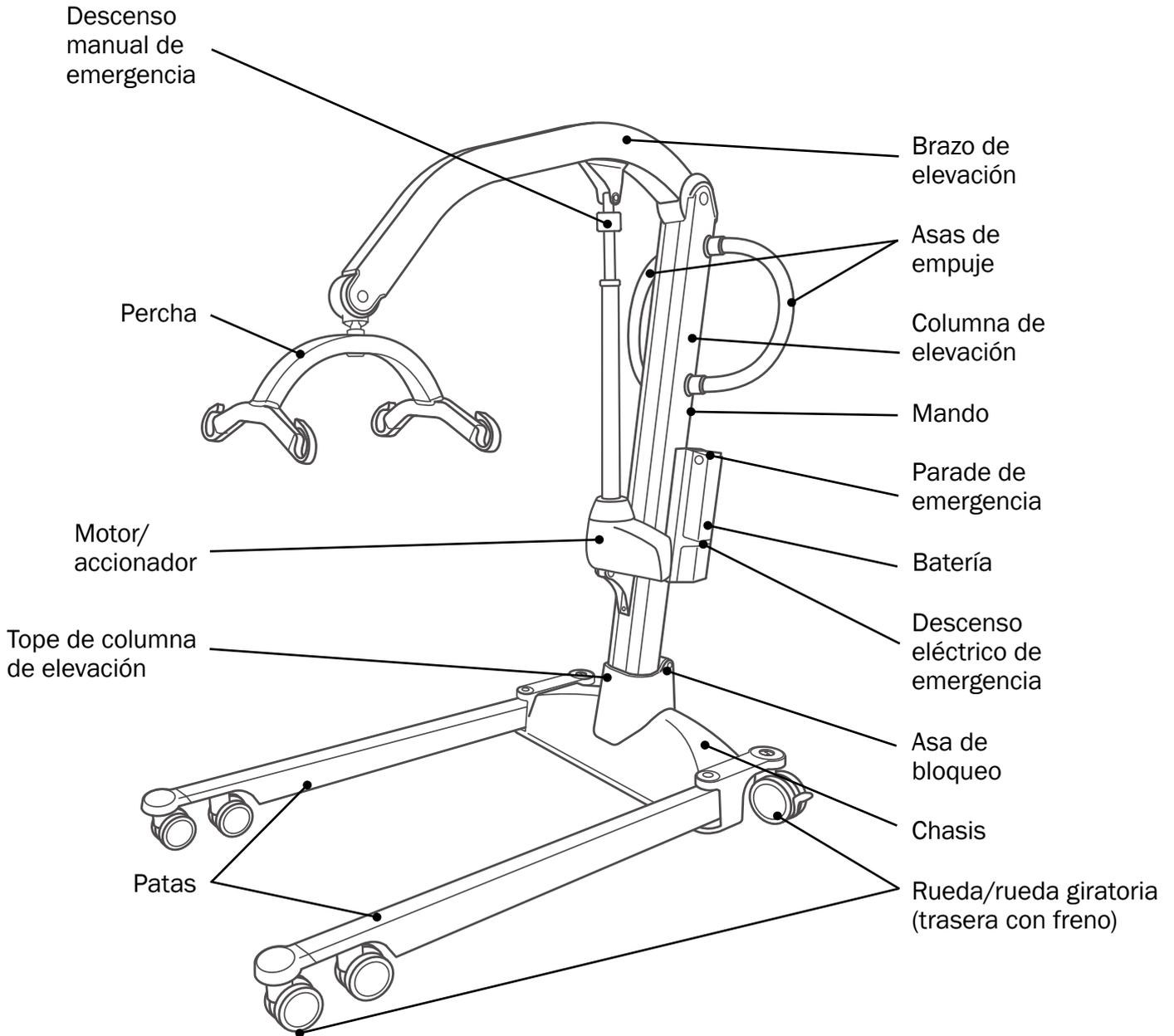

Etiqueta del producto, Mover 300

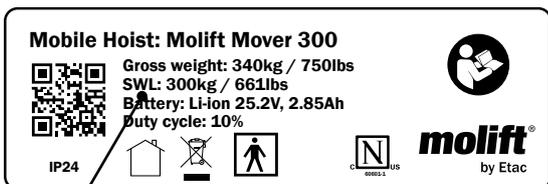

Valor de CTS (Carga de Trabajo Segura)

Etiqueta de identificación, Mover 300



N.º de serie

N.º de artículo

Fecha de producción

Puede descargarse una copia de este documento en www.etac.com.

Escanee el código QR de la etiqueta del producto para acceder a la página de inicio. El manual de usuario se encuentra en la sección de documentos.

N.º de artículo (véase la etiqueta de identificación):

.....

N.º de serie (véase la etiqueta de identificación):

.....

Año de producción:

.....

Propietario:

.....

El arnés debe inspeccionarse por separado y no está incluido en esta inspección.

Especifique el modelo:

Specify model:

- Mover 180
- Mover 205
- Mover 300

Lugar de utilización

- Hogar
- Hospital
- Residencia de ancianos
- Otro



La inspección periódica debe realizarla una persona debidamente cualificada y que conozca bien el diseño, el uso y el cuidado de la grúa



La herramienta Molift Service del software de la grúa ofrece la opción de introducir la fecha de PI y el nombre del inspector junto con información adicional. Molift recomienda añadir todas las observaciones/comentarios relativos a la grúa en la herramienta Molift Service para el registro completo del historial de la grúa

Indicador de luz de servicio

Observe el color del indicador luminoso de servicio:

Estado	Luz de servicio	Modo
	(sin luz)	No se requiere servicio/inspección periódica
	Amarillo	Pedir servicio
	Amarillo (parpadea y suena cuando se acciona)	Realizar mantenimiento
	Amarillo (se enciende y apaga lentamente)	Realizar inspecciones periódicas

Examen visual



Examen visual de la estructura para asegurarse de que no hay daños, grietas, deshilachados o deformaciones. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

Bien No está bien

	Columna de elevación
	Brazo elevador
	Patas
	Etiqueta del producto
	Cubiertas de plástico
	Mando
	Accionador
	Ruedas/ruedas giratorias
	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias
	Cargador
	Cables
	Batería
	Otros componentes electrónicos
	Percha
	Mecanismo de ajuste de piernas
	Sin corrosión
	Soldaduras
	Las instrucciones de uso/ el manual del usuario están presentes/disponibles

Examen funcional



Compruebe si funciona e inspeccione para detectar si presenta desgaste o daños.

Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>	<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>
	Ruedas/ruedas giratorias		Si todos los puntos se han marcado como “Bien”, la grúa se probará con una CTS (Carga de Trabajo Segura)
	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias traseras		Realice un ciclo de elevación con un peso igual a la CTS (Carga de Trabajo Segura) (consulte la etiqueta del producto para conocer el valor en kg/lbs).
	Con las patas en la posición interior (en paralelo): Compruebe que la distancia entre las patas no pueda disminuir al empujarlas con la mano		El actuador no debe deslizarse cuando hay carga (provocando el descenso del brazo de elevación)
	Solo para Mover 180: La columna de elevación está completamente fijada con tornillos de bloqueo hexagonales bien apretados		Mecanismo de ajuste de piernas, hacia fuera y hacia dentro con CTS (Carga de Trabajo Segura)
	Solo para Mover 205 y 300: La columna de elevación está completamente fija cuando se engancha el asa de bloqueo		Realice un nuevo control visual; Daños, juego y deformaciones como se describió anteriormente. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o sustituida y la prueba se repite una vez más hasta que la grúa funcione correctamente
	El botón de parada de emergencia es totalmente operativo e interrumpe el suministro de energía cuando se activa. Botón de reinicio		El cargador está operativo
	Descenso eléctrico de emergencia		Reinicie la inspección periódica pulsando los botones de subida y bajada del mando de control durante 12 segundos (después de reiniciar, la luz de servicio se apaga)
	Descenso manual de emergencia		
	Mando (botones, alivio de tensión en el cable del mando, gancho e indicador de batería)		
	Enganche de la percha (la articulación giratoria se mueve libremente y sin hacer ruido)		
	Desenganche rápido de la percha		

Accesorios:

.....

.....

.....

Realizado por

Nombre completo:

Fecha/lugar:

Firma:

Aprobado sin fallos

Próxima inspección
(MM/AAAA):/.....

La grúa se marca con “Fuera de servicio”
y se envía a reparar

La grúa no se puede reparar y se retira del
servicio

Si al realizar la inspección periódica se encuentra algún defecto, desgaste u otro daño que pueda poner en peligro la seguridad del paciente, la grúa no podrá utilizarse hasta que se haya subsanado la anomalía.

Se ha notificado al propietario


Notas y observaciones




Por requisitos legales, este documento o una copia del mismo debe archivar con el libro de registro de servicio del propietario

Si se aprueba sin defectos, coloque la etiqueta de inspección periódica y marque el mes y el año para la **próxima** inspección periódica. Al pedir la etiqueta, utilice el n.º de referencia 1100306

Next periodic inspection

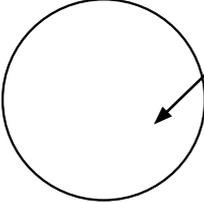

Inspection performed by:

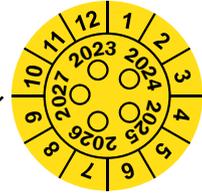

Marque la etiqueta con el mes y el año de la próxima inspección periódica

UK REP

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP



Sodimed SA

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06



Etac A/S

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac