




Kontrolni seznami za periodični pregled (SI)

Molift Mover 180, 205 in 300


molift[®]
by Etac

PI08212 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

Skladno z ISO 10535

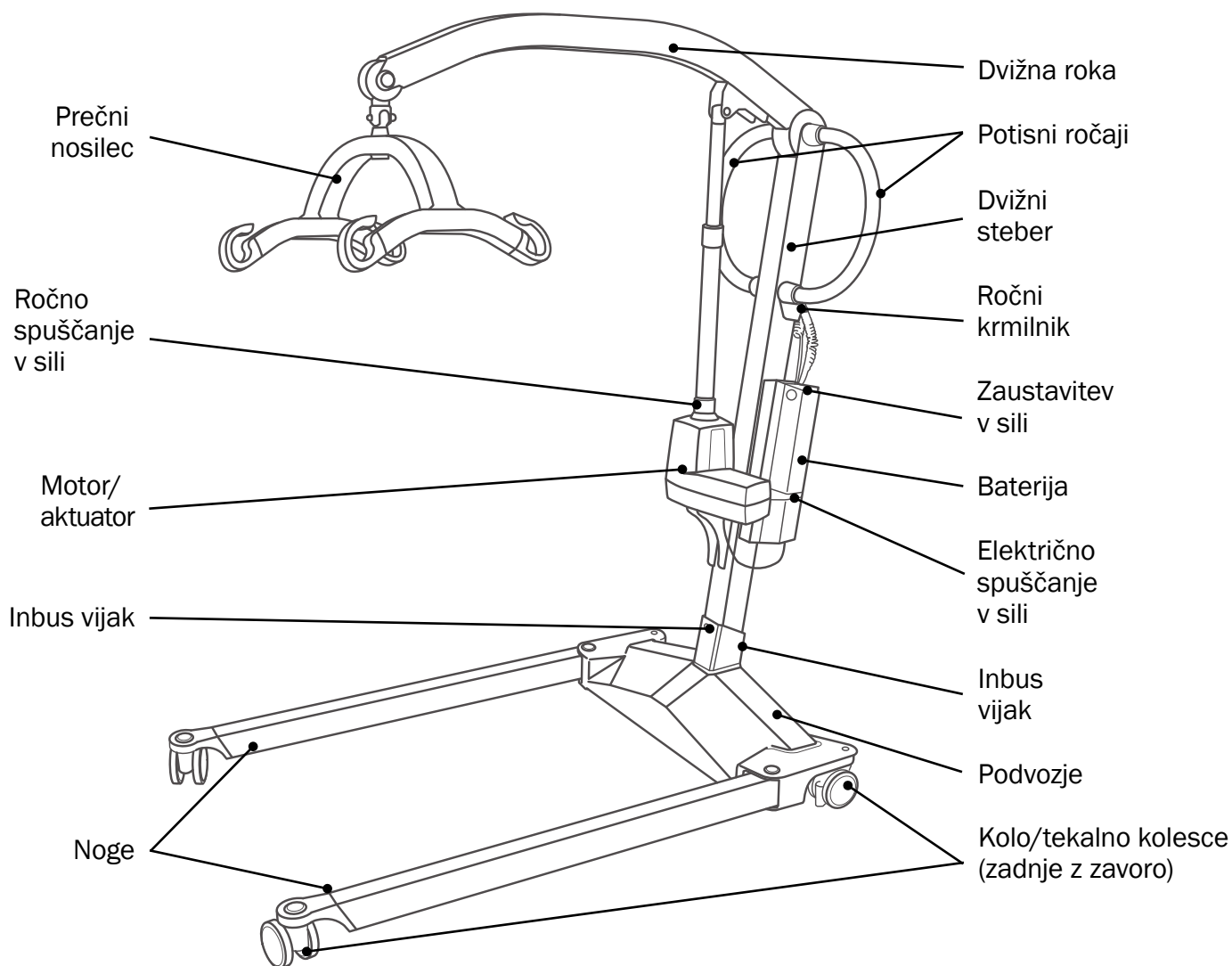

Etiketa izdelka, Mover 180

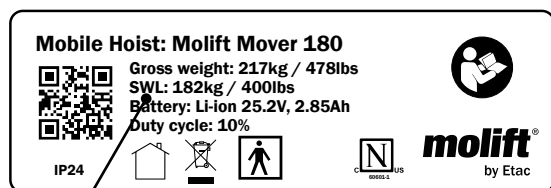

Masa SWL

Identifikacijska nalepka, Mover 180



Serijska št.


Št. izdelka

Datum proizvodnje




www.etac.com



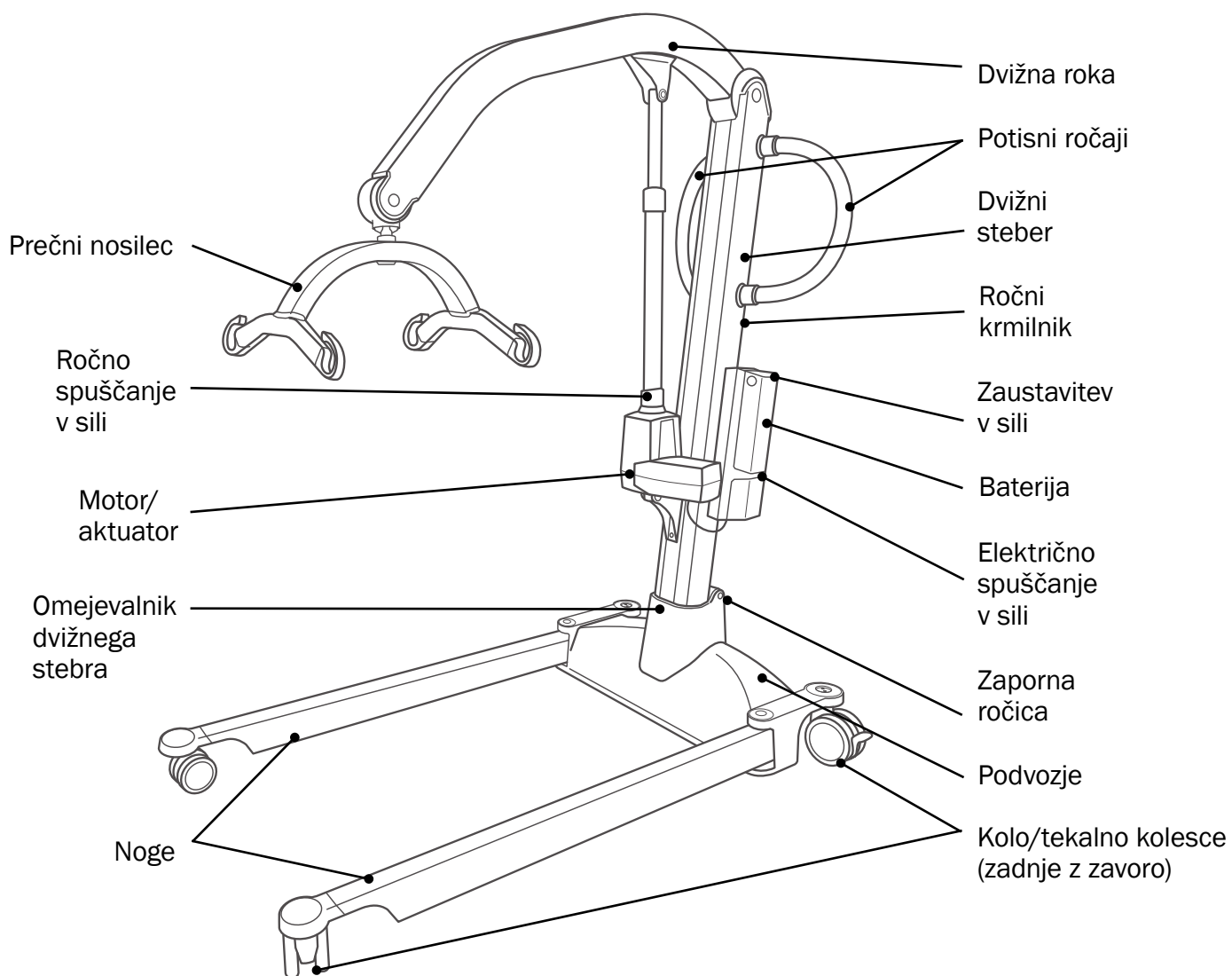

Etiketa izdelka, Mover 205

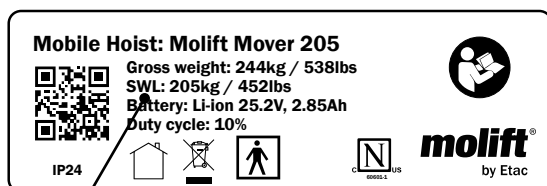

Masa SWL


Identifikacijska nalepka, Mover 205




Serijska št.

Št. izdelka

Datum proizvodnje

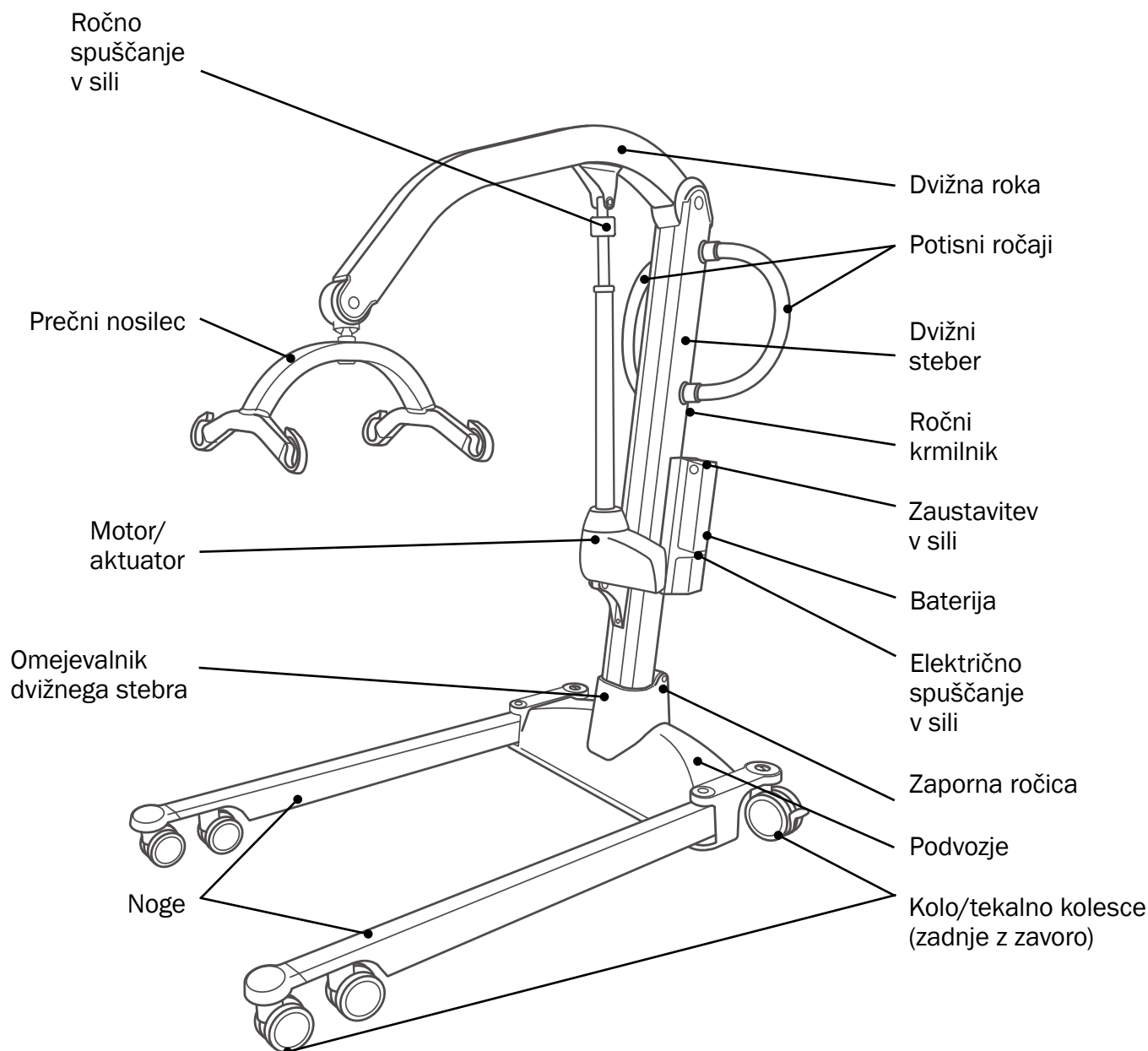

Etiketa izdelka, Mover 300

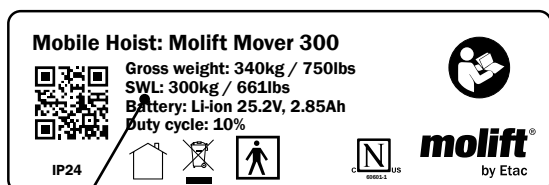

Masa SWL

Identifikacijska nalepka, Mover 300



Serijska št.

Št. izdelka

Datum proizvodnje

Kopija tega dokumenta je na voljo za prenos na www.etac.com.

Za dostop do domače strani izdelka odčitajte QR-kodo na etiketi izdelka. Navodila za uporabo najdete v razdelku z dokumentacijo.

Št. izdelka (glejte identifikacijsko etiketo):

.....

Serijska št. (glejte identifikacijsko etiketo):

.....

Leto proizvodnje:

.....

Lastnik:

.....

Zanke je treba pregledati ločeno in niso vključene v tem pregledu.

Izberite model:

Mover 180
Mover 205
Mover 300

Mesto uporabe

Domača uporaba
Bolnišnica
Dom za starejše
Drugo



Periodični pregled mora opraviti ustrezno usposobljena oseba, ki je dobro seznanjena z zasnovo, uporabo in vzdrževanjem dvigala



Programska oprema dvigala Molift Service tool omogoča vnos datuma periodičnega pregleda ter imena in priimka preglednika skupaj z dodatnimi informacijami. Molift priporoča, da za celotno zgodovino dvigala vse ugotovitve/pripombe v zvezi z dvigalom vnesete v Molift Service tool

Servisni indikator

Označite stanje servisnega indikatorja:

Stanje	Servisna lučka	Stanje
	(Ne sveti nobena lučka)	Servis/periodični pregled ni potreben
	Rumena	Naročite servis
	Rumena lučka (med delovanjem utripa in se oglasi zvok)	Opravite servis
	Rumena lučka (se počasi prižiga in ugaša)	Redni periodični pregled

Vizualni pregled



Preglejte stanje nosilnih ležajev glede morebitnih poškodb, razpok, obrabe ali deformacije. Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke.

Ustrezno Neustrezno

	Dvižni steber
	Dvižna roka
	Noge
	Etiketa izdelka
	Plastični pokrovi
	Ročni krmilnik
	Aktuator
	Kolo/tekalo kolesce
	Zavore na kolo/tekalo kolesce
	Polnilnik
	Kabli
	Baterija
	Druga elektronika
	Prečni nosilec
	Mehanizem za nastavitev noge
	Nobene korozije
	Zvari
	Navodila za uporabo/ uporabniški priročnik so prisotna/na voljo

Funkcionalni preizkus



Preizkusite delovanje in pregledjte opremo glede morebitne obrabe ali poškodb.
Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke.

Ustrezno Neustrezno

Ustrezno Neustrezno

Kolo/tekhalno kolesce
Zavore zadnjih Kolo/tekhalno kolesce
Z nogami v notranjem položaju (vzporedno): Preverite, da se razdalja med nogama ne more zmanjšati, če ju stisnete skupaj.
Samo pri Mover 180: nosilni steber je popolnoma varno trdno pritrjen z inbus vijaki
Samo pri Mover 205 in 300: nosilni steber je popolnoma trdno pritrjen, ko je zaporna ročica sprožena
Gumb za zaustavitev v sili je popolnoma funkcionalen in prekine napajanje, ko je sprožen. Ponastavite stikalo.
Električno spuščanje v sili
Ročno spuščanje v sili
Ročni upravljalnik (gumbi, razbremenitev napetosti na kablu ročnega upravljalnika, kavelj in indikator napolnjenosti baterije)
Priključek konzole za dvigovanje (vrtljivi spoj se premika prosto in brez zvokov)
Hitra sprostitelj konzole za dvigovanje
Če so vse točke ocenjene z »Ustrezno«, je treba dvigalo preizkusiti z maso SWL
Izvedite en cikel dvigovanja z maso, enako vrednosti SWL (za vrednost v kg glejte etiketo izdelka). V obremenjenem stanju aktuator ne sme drseti (posledica je spuščanje nosilne konzole)

Mehanizem za nastavitev nog z maso SWL, navzven in navznoter
Izvedite nov vizualni kontrolni pregled; za poškodbe, razrahljanost spojev in deformacije, kot je opisano zgoraj. Vse poškodovane dele je treba popraviti ali zamenjati in znova ponoviti preizkus, dokler dvigalo ne deluje pravilno
Polnilnik deluje pravilno
Periodični pregled ponastavite tako, da za 12 sekund pritisnete gumba gor in dol na ročnem krmilniku (servisna lučka po ponastavitvi ugasne)

Dodatna oprema:

.....

.....

.....

Pregled opravil

Ime in priimek:

Datum/kraj:

Podpis:

Odobreno brez napak

Naslednji pregled
(LLLL/MM): /

Dvigalo je označeno z »V okvari« in poslano
na popravilo

Dvigala ni mogoče popraviti in je
odstranjeno iz uporabe

Če so na periodičnem pregledu ugotovljene okvare,
obraba ali druge poškodbe, ki ogrožajo bolnikovo
varnost, dvigala do odprave pomanjkljivosti ni
dovoljeno uporabljati

Lastnik je opozorjen




Zaradi zakonskih zahtev je treba ta dokument ali kopijo vložiti v lastnikov servisni dnevnik.


Opombe in ugotovitve

Če je pregled brez napak, nalepite nalepko priredničnega pregleda in označite mesec in leto za **naslednji** pregled. Pri naročilu nalepke uporabite artikel št. 1100306

Next periodic inspection

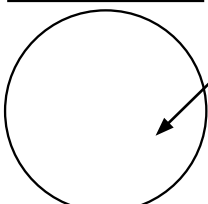

Inspection performed by: _____

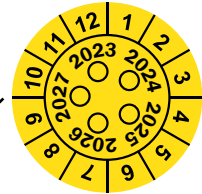

Nalepko periodičnega pregleda označite z mesecem in letom pregleda

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac