


# Molift Smart 150

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac


## Sjekkliste for periodisk kontroll (NO)

I samsvar med ISO:10535

PI09203 Rev. A 2022-06-16

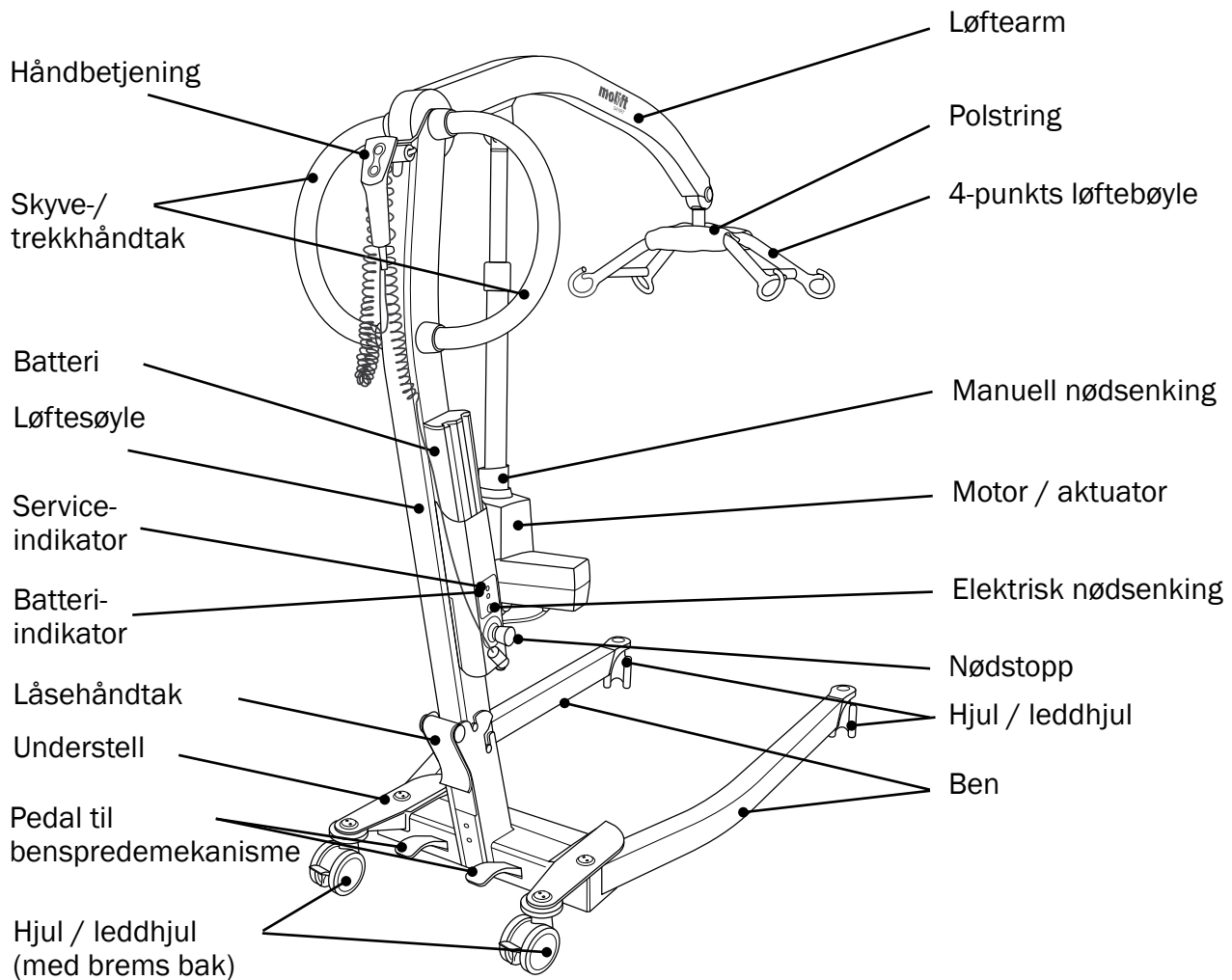

### Produktetikett

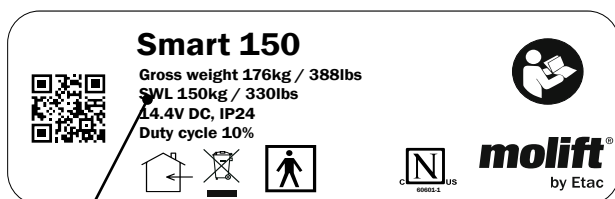

Brukervekt (SWL)-verdi

### ID-etikett



Serienr.

Artikkelnr.

Produksjonsdato

Du kan laste ned en kopi av dette dokumentet på [www.etac.com](http://www.etac.com).

Skann QR-koden på produktetiketten for å komme til hjemmesiden til produktet. Du finner brukerhåndboken i dokument-delen.

Artikkelnr. (se ID-etikett):

.....

Serienr. (se ID-etikett):

.....

Produksjonsår:

.....

Eier:

.....

Seilet må inspiseres separat og er ikke en del av denne inspeksjonen.

## Serviceindikatorlys

Legg merke til fargen til serviceindikatorlyset:

Status	Servicelys	Modus
(ikke på)		Strømsparing (Stand by)
Grønn		Klar til bruk
Gul		Bestill service
Rød		Gjennomfør service
Rød (og lyd når den aktiveres)		Gjennomfør service umiddelbart

## Brukssituasjon

Hjemme  
Sykehus  
Pleiehjem  
Annet



**Den periodevise inspeksjonen skal gjennomføres av en person som er egnet og godt kvalifisert, og godt kjent med designet, bruken og vedlikeholdet av løfteren**



**Programvaren Molift Service Tool byr på muligheten til å legge inn dato for PI og navnet til den som gjennomfører informasjon samt ytterligere informasjon i løfteren. Molift anbefaler å legge inn observasjoner / kommentarer angående løfteren i Molift Service Tool for å få en komplett servicehistorikk for løfteren**

## Visuell undersøkelse



**Visuell undersøkelse av lastbærende struktur for å forsikre at den ikke er skadet, har sprekker, brudd eller deformeringer. Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk**

OK   Ikke OK

	Løftesøyle
	Løftearm
	Ben
	Produktetikett
	Plastdeksel
	Håndbetjening
	Aktuator
	Hjul / leddhjul
	Bremser på hjul / leddhjul
	Lader
	Kabler
	Batteri
	Annen elektronikk
	4-punkts løftebøyle, inkl. polstring
	Benspredemekanisme
	Ingen korrosjon
	Sveisesømmer
	Bruksanvisning / brukerhåndbok til stede / tilgjengelig

## Funksjonskontroll



**Test FUNKSJONEN og inspiser om det er slitasje eller skade.**  
**Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk**

OK Ikke OK

Hjul / leddhjul
Bakhjul- / leddhjulbrems
Med ben i indre posisjon (parallel): Kontroller av avstanden mellom bena ikke reduseres når de dyttes sammen for hånd
Løftesøylen er fiksert fullstendig når låsehåndtaket er satt på
Håndbetjening (knapper, kabelslakker håndbetjeningskabel, krok og batteriindikator)
Elektrisk nødsenking
Manuell nødsenking
Nødstoppbryteren fungerer fullstendig og bryter strømforsyningen når den aktiveres. Nullstillingsknapp
Løftebøylekobling (svingkoblingen beveger seg fritt og uten lyder)
Hvis alle punkt hittil er «OK» må løfteren testes med brukervekt (SWL).
Gjennomfør en løftesyklus med vekt tilsvarende brukervekt (SWL) (se produktetikett for verdi i kg/lbs). Aktuatoren skal ikke slippe under last (senke løftearmen)
Benspredemekanisme, ytre og indre posisjon med brukervekt (SWL)
Laderen fungerer
Batteri. Med fulladet batteri satt inn: etter innledende syklus er batterilyset av og skiftenøkkelen/serviceindikatorlyset lyser grønt

Tilbehør:

.....

.....

.....

## Gjennomført av

Fult navn:

.....

Dato/sted:

.....

Underskrift:

.....

Godkjent uten feil

Neste inspeksjon  
(ÅÅÅÅ / MM): ...../.....

Løfteren er merket «Ute av drift» og sendt til reparasjon

Løfteren kvalifiserer ikke til reparasjon og er tatt ut av bruk

Dersom den periodevise inspeksjonen avslører defekt, slitasje eller annen skade som utgjør en trussel for pasientsikkerheten skal løfteren ikke brukes til defekten er utbedret


Eier er varslet

## Kommentarer og observasjoner

---

 **På grunn av rettslige krav må dette dokumentet, eller en kopi av det, arkiveres sammen med eierens serviceloggbok**

Hvis godkjent uten feil; sett på inspeksjonsetikett og marker måned og år for **neste** inspeksjon. Bruk produktnr. 1100306 ved bestilling av etikett

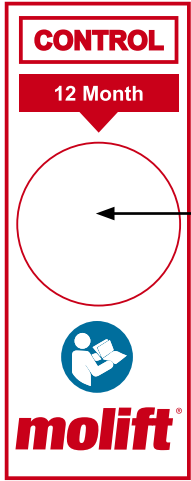

Merk etiketten med måned og år for neste inspeksjon

