


# Molift Smart 150

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac


## Määräaikaistarkastuksen muistilista (FI)

Standardin ISO:10535 mukaisesti

PI09205 Ver. A 2022-06-16

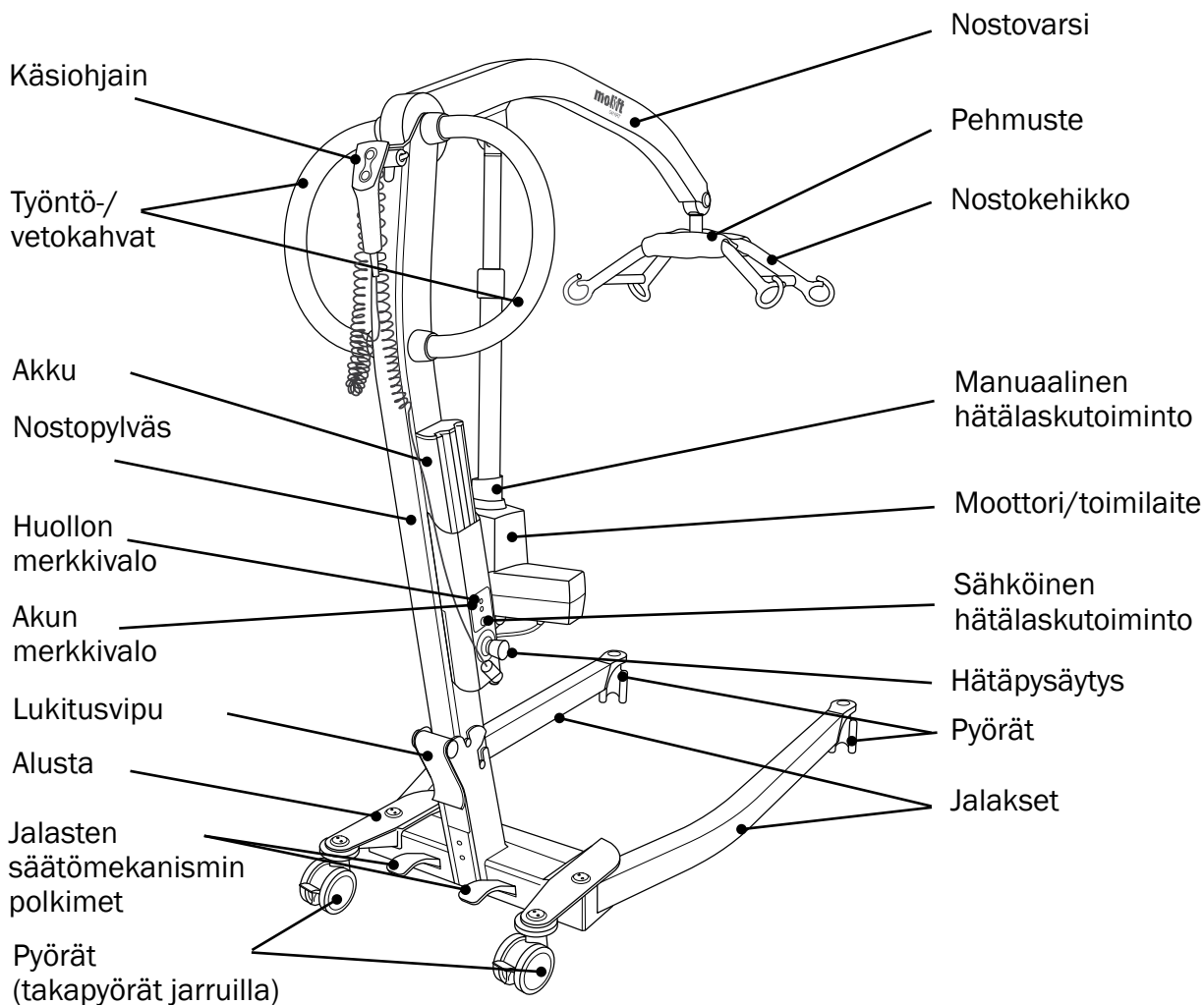

### Tuotetarra

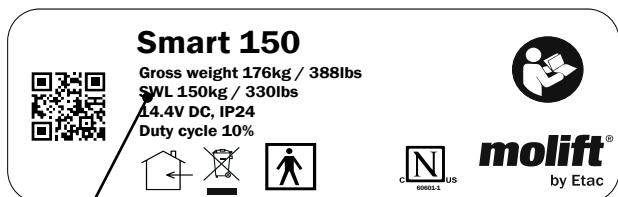

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

### Tyyppikilpi



Sarjanumero Tuotenumero Valmistuspäivä

Tämän dokumentin kopion voi ladata osoitteesta  
www.etac.com.

Siirry tuotesivulle skannaamalla tuotetarrassa  
oleva QR-koodi. Käyttöopas löytyy dokumenttien  
osiosta.

Tuotenumero (katso tyyppikilpi):

.....

Sarjanumero (katso tyyppikilpi):

.....

Valmistuspäivä:

.....

Omistaja:

.....

Nostoliina ei sisälly tähän tarkastukseen, vaan se  
on tarkastettava erikseen.

### Huollon merkkivalo

Huomioi huollon merkkivalon väri:

Tila	Huollon merkkivalo	Toiminto
	(Ei valoa)	Virransäästö (valmiustila)
	Vihreä	Käyttövalmis
	Keltainen	Varaa huolto
	Punainen	Huolla laite
	Punainen (ja äänimerkki, jos käytössä)	Huolla laite heti

### Käyttökohteet

Koti  
Sairaala  
Hoitolaitos  
Muu



**Määräaikaistarkastuksen saa suorittaa tehtävään soveltuva ja pätevä henkilö, joka on perehtynyt huolella laitteen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon.**



**Määräaikaistarkastuksen päivämäärän ja tarkastajan sekä mahdolliset lisätiedot voi syöttää nostolaitteen Molift Service Tool -sovellukseen. Molift suosittelee lisäämään kaikki nostolaitteeseen liittyvät havainnot/huomiot Molift Service Tool -sovellukseen, jotta laitteen historiatiedot pysyvät ajan tasalla.**

### Silmämääräinen tarkastus



**Tarkasta kuormittuvat rakenteet silmämääräisesti, ettei niissä ole vaurioita, halkeamia, kulumia ja vääntymiä. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuntoon.**

OK    Ei OK

	Nostopylväs
	Nostovarsi
	Jalakset
	Tuotetarra
	Muovisuojat
	Käsiohjain
	Toimilaite
	Pyörät
	Pyörien jarrut
	Latauslaite
	Johdot
	Akku
	Muu elektroniikka
	Nostokehikko ja pehmuste
	Jalasten säätömekanismi
	Korroosiovauriot
	Hitsaussaumamat
	Käyttöopas on tallessa/ saatavilla

**Toiminnan tarkastus**

**Testaa TOIMINTA ja tarkasta kulumien ja vaurioiden varalta. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuntoon.**

OK Ei OK

Pyörät

Takapyörien jarrut

Jalaket sisäasennossa (samasuuntaisesti): Tarkasta, ettei jalasten välinen ero pienene, kun niitä työnnetään yhteen käsin.

Nostopylväs on täysin lukittu paikalleen, kun lukituskahva on kytkettynä.

Käsiohjain (painikkeet, käsiohjaimen johdon vedonpoistin, koukku ja akun merkkivalo)

Sähköinen hätälaskutoiminto

Manuaalinen hätälaskutoiminto

Hätäpysäytyspainike on täysin toimintakunnossa ja sammuttaa virransyötön painiketta käytettäessä. Nollaa painikkeen asetukset.

Ripustimen liitäntä (nivel liikkuu vapaasti ja äänettömästi)

Jos kaikki tähän saakka tarkastetut kohdat ovat OK, testaa nostolaite suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL).

Tee yksi nostokierros painolla, joka vastaa suurinta turvallista kuormaa (SWL), katso tuotetarrasta arvo kiloina (kg) / paunoina (lbs). Toimilaite ei saa liukua kuormitettuna (aiheuttaen nostovarren laskeutumisen).

Jalasten säätömekanismi, ulko- ja sisäasento suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)

Latauslaite on toimintakunnossa

Akku:

Kun täyteen ladattu akku on asetettu paikalleen, akun merkkivalo sammuu ja työkalun kuvake / huollon merkkivalo palaa vihreänä ensimmäisen kierroksen jälkeen.

Lisävarusteet:

.....

.....

.....

**Tarkastajan tiedot**

Nimi:

.....

Päiväys/paikka:

.....

Allekirjoitus:

.....

Hyväksytty ilman vikoja

Seuraava tarkastus  
(VVV / KK):        /

Nostolaite on merkitty "Epäkunnossa"-merkinnällä ja lähetetty korjattavaksi

Nostolaitetta ei voi korjata, joten se poistetaan käytöstä

Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee vikoja, kulumia tai muita vaurioita, jotka vaarantavat potilaan turvallisuuden, nostolaitetta ei saa käyttää ennen kuin puute on korjattu.

Asiasta on ilmoitettu omistajalle

## Muistiinpanot ja havainnot



**Lakisääteisten vaatimusten takia tämä dokumentti tai sen kopio on arkistoitava osaksi omistajan huoltokirjaa.**

Mikäli laite hyväksytään ilman vikoja, kiinnitä laitteeseen tarkastustarra, johon merkitään **seuraavan** tarkastuksen ajankohta (kuukausi ja vuosi). Kun tilaat tarran, käytä tuotenumeroa 1100306.

