


Molift Smart 150

molift[®]
by Etac


Tjekliste til periodisk eftersyn (DA)

I overensstemmelse med ISO:10535

PI09210 Rev. A 2022-06-16

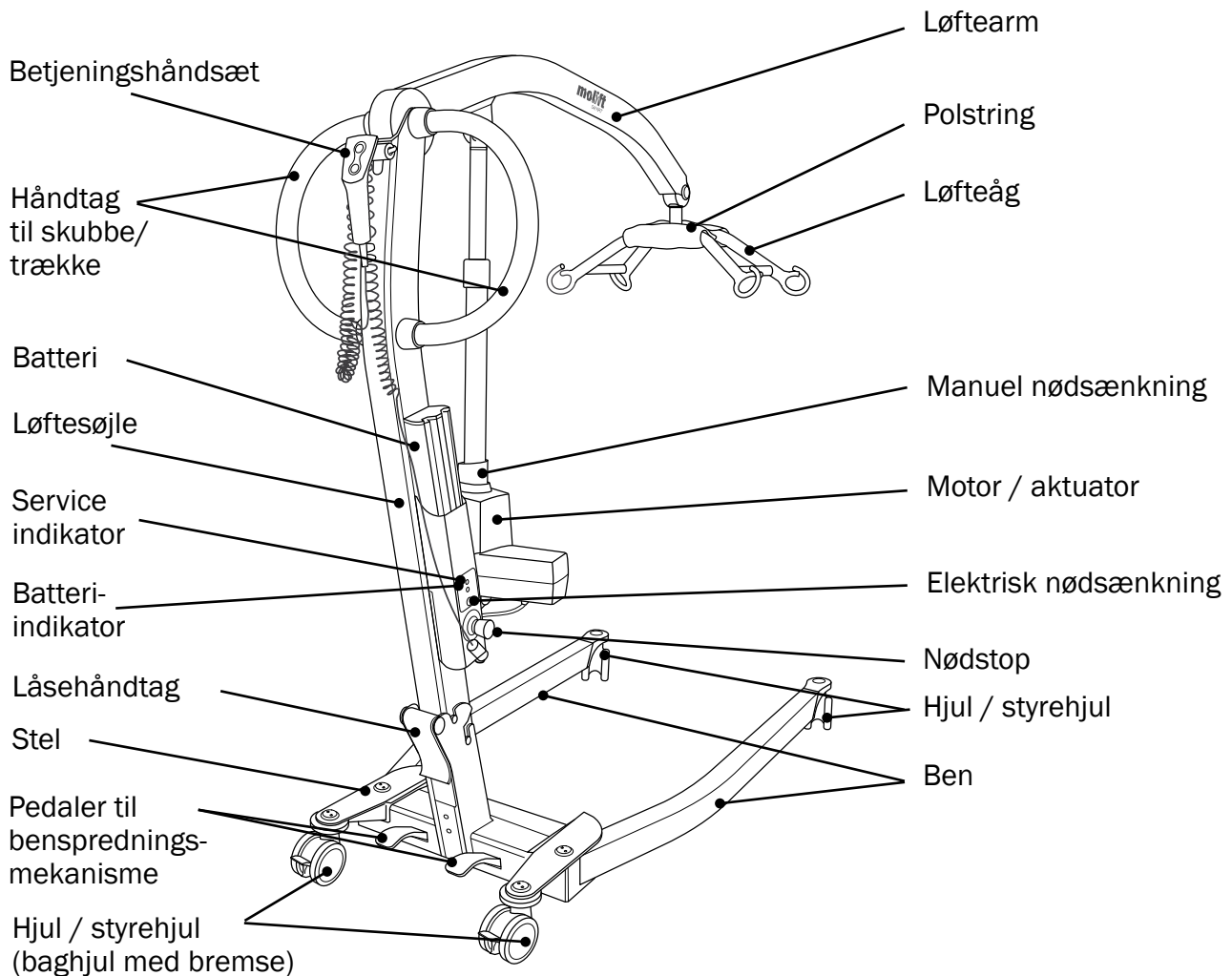

Produktmærkat

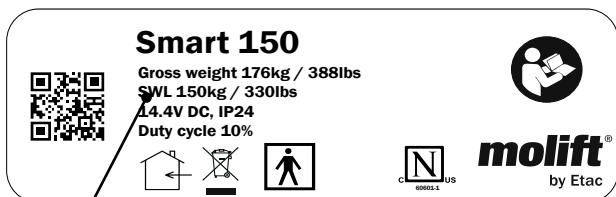

SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

Id-mærkat



Serienummer Artikelnummer Produktionsdato

En kopi af dette dokument kan downloades på www.etac.com.

Scan QR-koden på produktmærkaten for at få adgang til produktets hjemmeside. Brugervejledningen kan findes i dokumentafsnittet.

Artikelnummer (se id-mærkat):

.....

Serienummer (se id-mærkat):

.....

Produktionsår:

.....

Ejer:

.....

Sejlet skal inspiceres særskilt og er ikke med i dette eftersyn.

Serviceindikatorens lys

Vær opmærksom på farven på serviceindikatorens lys:

Status	Servicelys	Tilstand
	(Intet lys)	Strømbesparende (standby)
	Grønt	Klar til brug
	Gult	Bestil service
	Rød	Udfør service
	Rød (og lyd ved aktivering)	Udfør service øjeblikkeligt

Anvendelsessituation

Hjemmet
Hospital
Plejehjem
Andet



Det periodiske eftersyn skal udføres af en person, der er egnet og tilstrækkeligt kvalificeret og godt bekendt med konstruktion, brug og pleje af personløfteren



Personløfterens software Molift Service-værktøj giver mulighed for at indtaste dato for PI og navnet på inspektøren sammen med yderligere oplysninger. Molift anbefaler at tilføje alle observationer / bemærkninger vedrørende personløfteren i Molift Service-værktøjet for at have en komplet historiklog over personløfteren

Visuel undersøgelse



Visuel undersøgelse af den lastbærende struktur for at sikre, at der ikke er skader, revner, flosser eller deformationer. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug

OK Ikke OK

	Løftesøjle
	Løftearm
	Ben
	Produktmærkat
	Plastdæksler
	Betjeningshandsæt
	Aktuator
	Hjul / styrehjul
	Bremser på hjul / styrehjul
	Oplader
	Ledninger
	Batteri
	Øvrig elektronik
	Løfteåg, inkl. polstring
	Benspredningsmekanisme
	Ingen korrosion
	Svejsninger
	Brugsanvisning / brugervejledning er til stede / tilgængelig

Funktionel undersøgelse

**Test FUNCTION, og inspicer for
slitage og skader.
Alle kontrolpunkter skal tjekkes for
at godkende personløfter til videre
brug**

OK Ikke OK

Hjul / styrehjul

Baghjul / styrehjulets bremser

Med benene i indre position
(parallelt): Kontroller, at
afstanden mellem benene ikke
kan mindskes, når de skubbes
sammen med hånden

Løftesøjlen sidder helt fast, når
låsehåndtaget er i indgreb

Betjeningshåndsæt (knapper,
aflastning på betjenings-
håndsættets ledning, krog og
batteriindikator)

Elektrisk nødsænkning

Manuel nødsænkning

Nødstopknappen er fuldt
funktionsdygtig og afbryder
strømmen, når den aktiveres.
Nulstil afbryder

Løfteågets kobling (drejeled
bevæger sig frit og uden støj)

Hvis alle punkter indtil videre er
"OK", skal personløfteren testes
med SWL.

Udfør én løftecyklus med vægt,
der svarer til SWL (se produkt-
mærkaten for værdi kg/lbs).
Aktuatoren må ikke glide
under belastning (forårsager at
løftearmen sænker sig)

Benspredningsmekanisme,
ydre og indre position med SWL

Opladeren er funktionsdygtig

Batteri.

Når der er isat et fuldt opladet
batteri, er batterilyset slukket
efter første cyklus, og nøgle/
servicelys er grønt

Tilbehør:

.....
.....
.....

Udført af

Fulde navn:

.....

Dato/sted:

.....

Underskrift:

.....

Godkendt uden fejl

Næste eftersyn (ÅÅÅÅ/MM): /

Personløfteren er markeret "Ude af drift" og
sendt til reparation

Personløfteren er ikke berettiget til
reparation og er taget ud af drift


Hvis det periodiske eftersyn afslører en defekt,
slitage eller anden skade, der bringer patientens
sikkerhed i fare, må personløfteren ikke anvendes,
før manglen er afhjulpet

Ejeren er underrettet

Noter og observationer

 **Grundet lovkrav skal dette dokument eller en kopi arkiveres sammen med ejerens serviceløgbog**

Hvis den godkendes uden fejl, påføres inspektionsmærkat, og måned og år til **næste** eftersyn noteres herpå. Ved bestilling af mærkat anvendes varenummer 1100306

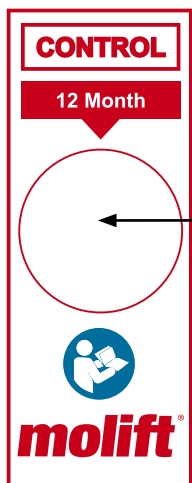

Notér måned og år til næste eftersyn på mærkaten

