


Molift Smart 150

molift[®]
by Etac


Kontrolní seznam pravidelných prohlídek (CZ)

V souladu s ISO:10535

PI09211 Rev A 2022-06-16

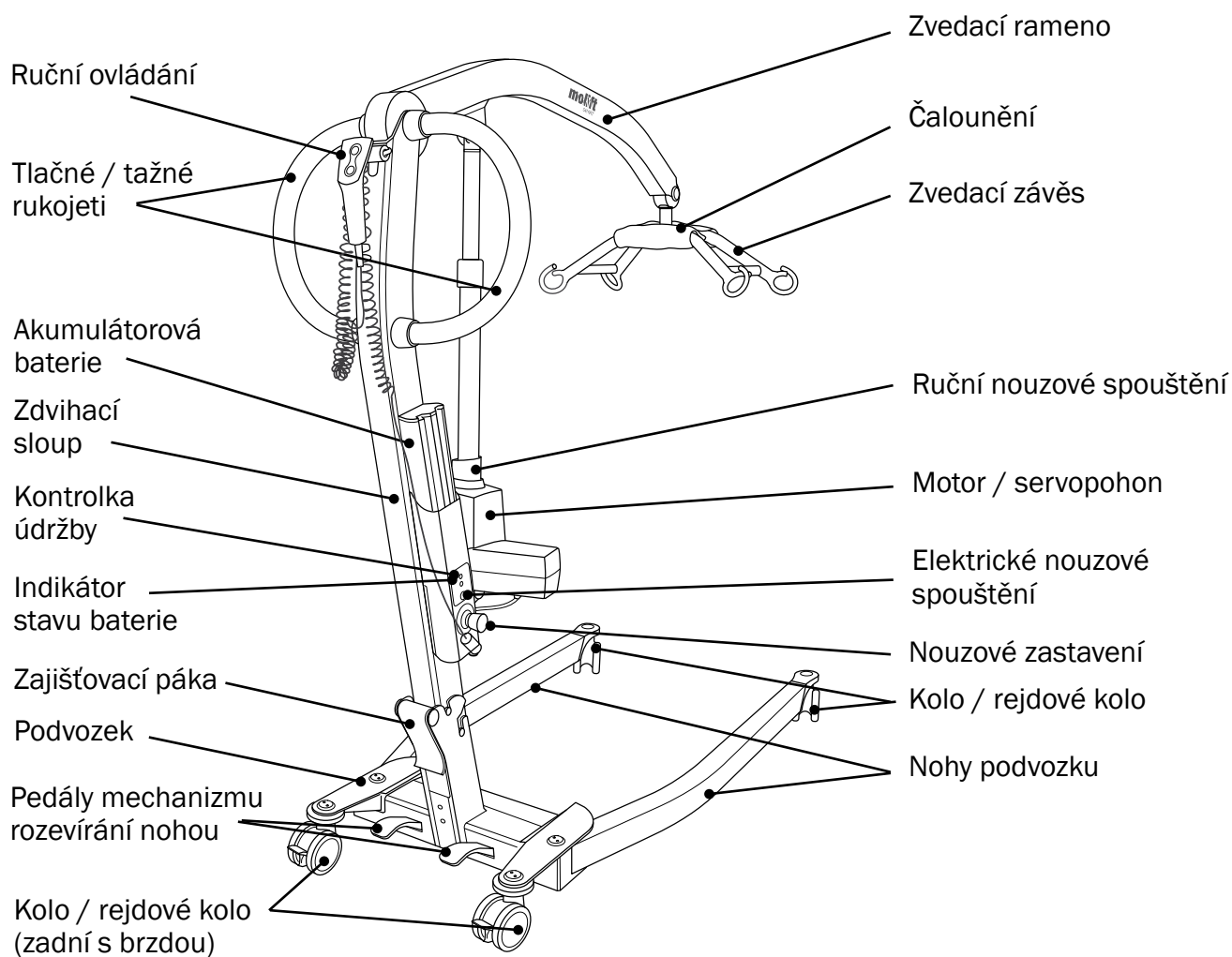

Výrobní štítek

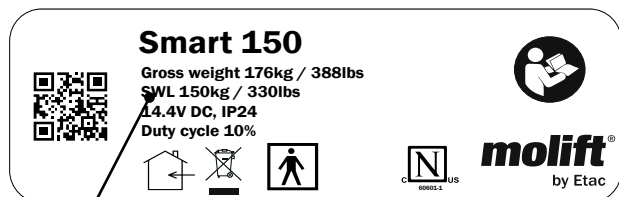

Hodnota SWL

ID štítek



Výrobní číslo

Katalog. č.

Datum výroby

Kopie tohoto dokumentu je ke stažení na adrese www.etac.com.

Oskenujte QR kód na štítku produktu pro přístup na domovskou stránku produktu. Návod k použití naleznete v sekci dokumentů.

Katalog. č. (viz ID štítek):

.....

Výrobní číslo (viz ID štítek):

.....

Rok výroby:

.....

Vlastník:

.....

Závěsný kurt je nutno kontrolovat samostatně, není zahrnutý do této prohlídky.


Servisní kontrolka

Povšimněte si barvy servisní kontrolky:


Status	Kontrolka údržby	Režim
(nesvítí)		Snížená spotřeba (pohotovostní režim)
Zelená		Připraveno k použití
Žlutá		Objednat údržbu
Červená		Provést údržbu
Červená (a zvukový signál při aktivaci)		Okamžitě provést údržbu

Případy použití

- Domov
- Nemocnice
- Pečovatelství dům
- Ostatní




Pravidelnou prohlídku má provádět osoba, která je vhodná, řádně kvalifikovaná a dostatečně obeznámená s konstrukcí, používáním a péčí o zvedák.



Softwarový servisní nástroj zvedáku Molift umožňuje zadat datum pravidelné prohlídky a jméno kontrolora spolu s dalšími informacemi. Společnost Molift doporučuje zadat všechna pozorování / poznámky týkající se zvedáku do servisního nástroje Molift pro vytvoření kompletní historie zvedáku.

Vizuální prohlídka



Vizuální prohlídka nosné konstrukce, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození, prasklinám, roztřepení nebo deformacím. Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

V POŘÁDKU	Není V POŘÁDKU
	Zdvihací sloup
	Zvedací rameno
	Nohy podvozku
	Výrobní štítek
	Plastové kryty
	Ruční ovládání
	Servopohon
	Kola / rejdová kola
	Brzdy na kolech / rejdových kolech
	Nabíječka
	Kabely
	Akumulátorová baterie
	Ostatní elektronické jednotky
	Závěs včetně čalouněných vycpávek
	Mechanismus rozevírání nohou
	Bez koroze
	Svary
	Návod k použití je přítomný / dostupný

Funkční kontrola

**Prověřte FUNKCI, zkontrolujte opotřebení a poškození.
Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body**

V POŘÁDKU	Není V POŘÁDKU
	Kola / rejdová kola
	Brzdy zadních kol / rejdových kol
	S nohama podvozku ve vnitřní poloze (rovnoběžnými): Zkontrolujte, zda se vzdálenost mezi nohama nelze zmenšit tlakem rukou.
	Zvedací sloup je zcela zafixován přestavením zajišťovací páky
	Ruční ovládání (tlačítka, odlehčení tahu na kabelu ručního ovládání, hák a kontrolka baterie)
	Elektrické nouzové spouštění
	Ruční nouzové spouštění
	Tlačítko nouzového zastavení je plně funkční a při stlačení přerušuje napájení. Resetujte spínač
	Spojka zvedacího závěsu (otočný spoj se pohybuje volně a nehlukně)
	Pokud byly všechny body dosud v pořádku, otestujte zvedák na bezpečnostní limit (SWL).
	Proveďte jeden zvedací cyklus s hmotností rovnou SWL (hodnota v kg/lbs je uvedena na výrobním štítku). Servopohon nesmí při zatížení prokluzovat (a způsobit spuštění zvedacího ramene)
	Mechanismus rozevírání nohou, vnější a vnitřní poloha s bezpečnostním limitem (SWL)
	Nabíječka je funkční

V *Není V*
POŘÁDKU POŘÁDKU

Akumulátorová baterie. S vloženou plně nabitou baterií kontrolka baterie po úvodním cyklu zhasne a kontrolka údržby / s klíčem svítí zeleně

Příslušenství:

.....
.....
.....

Provedl

Jméno a příjmení:

.....

Datum/místo:

.....

Podpis:

.....

Schváleno bez závad

Příští prohlídka
(RRRR / MM): /


Zvedák je označen „Mimo provoz“
a odeslán k opravě

Zvedák není způsobilý k opravě a je vyřazen
z provozu


Pokud pravidelná prohlídka odhalí závadu, opotřebení nebo jiné poškození, které ohrožuje bezpečnost pacienta, nesmí být zvedák používán, dokud nebude závada odstraněna.

Vlastník je informován

Poznámky a zjištění

 **Vzhledem k zákonným požadavkům musí být tento dokument nebo jeho kopie uložena se servisní knížkou majitele**

Pokud je zařízení schváleno bez závad, nalepte kontrolní štítek a označte měsíc a rok **příští** prohlídky. Při objednávání štítku použijte kat. číslo 1100306

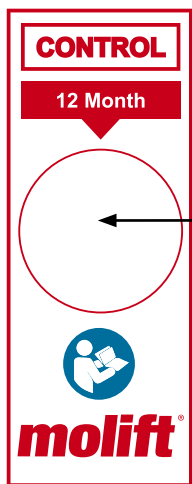

Na štítku vyznačte měsíc a rok příští prohlídky

