


molift[®]
by Etac

De acuerdo con la norma ISO 10535

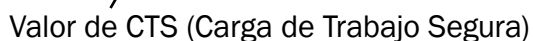

Puede descargarse una copia de este documento en www.etac.com.

Escanee el código QR de la etiqueta del producto para acceder a la página de inicio. El manual de usuario se encuentra en la sección de documentos.

N.º de artículo (véase la etiqueta de identificación):

.....

N.º de serie (véase la etiqueta de identificación):

.....

Año de producción:

.....

Propietario:

.....

El arnés debe inspeccionarse por separado y no está incluido en esta inspección.

Indicador de luz de servicio

Observe el color del indicador luminoso de servicio:

Estado	Luz de servicio	Modo
	(sin luz)	No se requiere servicio/inspección periódica
	Amarillo	Pedir servicio
	Amarillo (parpadea y suena cuando se acciona)	Realizar mantenimiento
	Amarillo (se enciende y apaga lentamente)	Realizar inspecciones periódicas

Lugar de utilización

Hogar
Hospital
Residencia de ancianos
Otro



La inspección periódica debe realizarla una persona debidamente cualificada y que conozca bien el diseño, el uso y el cuidado de la grúa



La herramienta Molift Service del software de la grúa ofrece la opción de introducir la fecha de PI y el nombre del inspector junto con información adicional. Molift recomienda añadir todas las observaciones/comentarios relativos a la grúa en la herramienta Molift Service para el registro completo del historial de la grúa

Examen visual



Examen visual de la estructura para asegurarse de que no hay daños, grietas, deshilachados o deformaciones. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

Bien No está
bien

	Columna de elevación
	Brazo elevador
	Patas
	Etiqueta del producto
	Cubiertas de plástico
	Mando
	Accionador
	Ruedas/ruedas giratorias
	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias
	Cargador
	Cables
	Batería
	Otros componentes electrónicos
	Percha, incl. acolchado
	Mecanismo de ajuste de piernas
	Sin corrosión
	Soldaduras
	Las instrucciones de uso/ el manual del usuario están presentes/disponibles

Examen funcional



Compruebe si funciona e inspeccione para detectar si presenta desgaste o daños.

Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>
	Ruedas/ruedas giratorias
	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias traseras
	Con las patas en la posición interior (en paralelo): Compruebe que la distancia entre las patas no pueda disminuir al empujarlas con la mano
	La columna de elevación está completamente fijada
	El botón de parada de emergencia es totalmente operativo e interrumpe el suministro de energía cuando se activa. Botón de reinicio.
	Descenso eléctrico de emergencia
	Descenso manual de emergencia
	Mando (botones, alivio de tensión en el cable del mando, gancho e indicador de batería)
	Enganche de la percha (la articulación giratoria se mueve libremente y sin hacer ruido)
	Si todos los puntos se han marcado como “Bien”, la grúa se probará con una CTS (Carga de Trabajo Segura).
	Realice un ciclo de elevación con un peso igual a la CTS (Carga de Trabajo Segura) (consulte la etiqueta del producto para conocer el valor en kg/lbs). El actuador no debe deslizarse cuando hay carga (provocando el descenso del brazo de elevación).

<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>
	Mecanismo de ajuste de piernas, hacia fuera y hacia dentro con CTS (Carga de Trabajo Segura)
	Realice un nuevo control visual; Daños, juego y deformaciones como se describió anteriormente. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o sustituida y la prueba se repite una vez más hasta que la grúa funcione correctamente.
	El cargador está operativo
	Reinicie la inspección periódica pulsando los botones de subida y bajada del mando de control durante 12 segundos (después de reiniciar, la luz de servicio se apaga)

Accesorios:

.....

.....

.....

Realizado por

Nombre completo:

Fecha/lugar:

Firma:

Aprobado sin fallos

Próxima inspección
(MM/AAAA):/.....

La grúa se marca con “Fuera de servicio”
y se envía a reparar

La grúa no se puede reparar y se retira del
servicio

Si al realizar la inspección periódica se encuentra
algún defecto, desgaste u otro daño que pueda
poner en peligro la seguridad del paciente, la grúa
no podrá utilizarse hasta que se haya subsanado
la anomalía.

Se ha notificado al propietario




Por requisitos legales, este documento o una copia del mismo debe archivar-se con el libro de registro de servicio del propietario


Notas y observaciones

Si se aprueba sin defectos, coloque la etiqueta de inspección periódica y marque el mes y el año para la **próxima** inspección periódica. Al pedir la etiqueta, utilice el n.º de referencia 1100306

Next periodic inspection

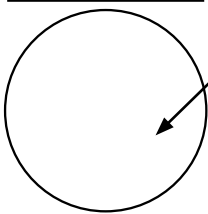

Inspection performed by: _____

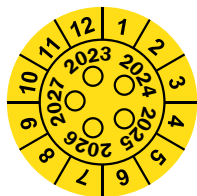

Marque la etiqueta con el mes y el año de la próxima inspección periódica

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac