


molift[®]
by Etac

Skladno z ISO 1053

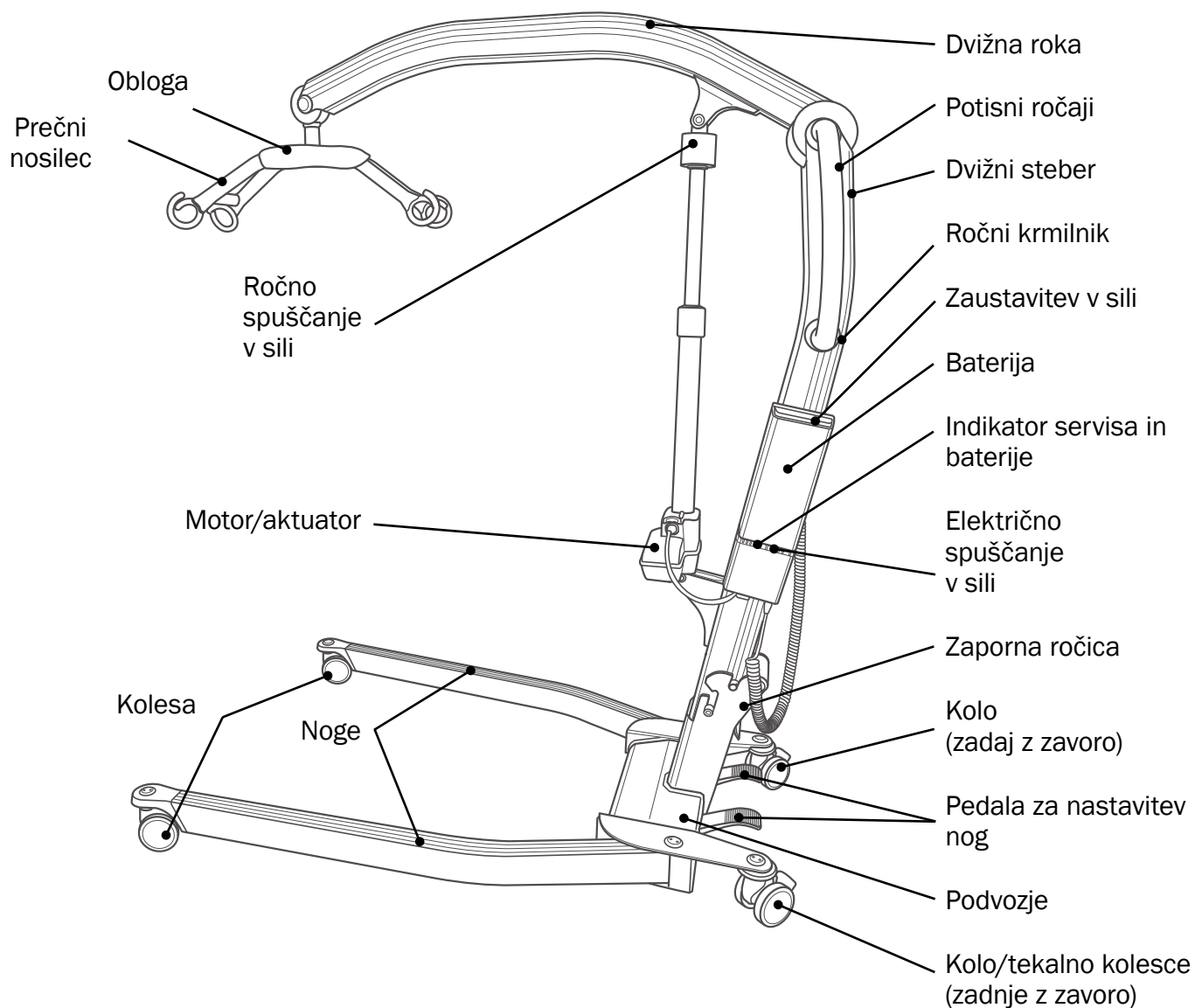

Identifikacijska nalepka



Št. izdelka

Datum proizvodnje



www.etac.com



Kopija tega dokumenta je na voljo za prenos na www.etac.com.

Za dostop do domače strani izdelka odčitajte QR-kodo na etiketi izdelka. Navodila za uporabo najdete v razdelku z dokumentacijo.

Št. izdelka (glejte identifikacijsko etiketo):

.....

Serijska št. (glejte identifikacijsko etiketo):

.....

Leto proizvodnje:

.....

Lastnik:

.....

Zanke je treba pregledati ločeno in niso vključene v tem pregledu.

Servisni indikator

Označite stanje servisnega indikatorja:

Stanje	Servisna lučka	Stanje
	(Ne sveti nobena lučka)	Servis/periodični pregled ni potreben
	Rumena	Naročite servis
	Rumena lučka (med delovanjem utripa in se oglasi zvok)	Opravite servis
	Rumena lučka (se počasi prižiga in ugaša)	Redni periodični pregled

Mesto uporabe

Domača uporaba
Bolnišnica
Dom za starejše
Drugo



Periodični pregled mora opraviti ustrezno usposobljena oseba, ki je dobro seznanjena z zasnovo, uporabo in vzdrževanjem dvigala



Programska oprema dvigala Molift Service tool omogoča vnos datuma periodičnega pregleda ter imena in priimka preglednika skupaj z dodatnimi informacijami. Molift priporoča, da za celotno zgodovino dvigala vse ugotovitve/pripombe v zvezi z dvigalom vnesete v Molift Service tool

Vizualni pregled



Preglejte stanje nosilnih ležajev glede morebitnih poškodb, razpok, obrabe ali deformacije. Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke

Ustrezno *Neustrezno*

Dvižni steber
Dvižna roka
Noge
Etiketa izdelka
Plastični pokrovi
Ročni krmilnik
Aktuator
Kolo/tekhalno kolesce
Zavore na kolo/tekhalno kolesce
Polnilnik
Kabli
Baterija
Druga elektronika
Prečni nosilec, vklj. z oblogami
Mehanizem za nastavitev noge
Nobene korozije
Zvari
Navodila za uporabo/ uporabniški priročnik so prisotna/na voljo

Funkcionalni preizkus



Preizkusite delovanje in preglejte opremo glede morebitne obrabe ali poškodb.
Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke

Ustrezno *Neustrezno*

Ustrezno *Neustrezno*

Kolo/tekalno kolesce
Zavore zadnjih Kolo/tekalno kolesce
Z nogami v notranjem položaju (vzporedno): Preverite, da se razdalja med nogama ne more zmanjšati, če ju stisnete skupaj
Nosilni steber je popolnoma trdno pritrjen, ko je zaporna ročica sprožena
Gumb za zaustavitev v sili je popolnoma funkcionalen in prekine napajanje, ko je sprožen. Ponastavite stikalo
Električno spuščanje v sili
Ročno spuščanje v sili
Ročni upravljalnik (gumbi, razbremenitev napetosti na kablju ročnega upravljalnika, kavelj in indikator napolnjenosti baterije)
Priključek konzole za dvigovanje (vrtljivi spoj se premika prosto in brez zvokov)
Če so vse točke ocenjene z »Ustrezno«, je treba dvigalo preizkusiti z maso SWL
Izvedite en cikel dvigovanja z maso, enako vrednosti SWL (za vrednost v kg glejte etiketo izdelka). V obremenjenem stanju aktuator ne sme drseti (posledica je spuščanje nosilne konzule)
Mehanizem za nastavitev nog z maso SWL, navzven in navznoter

Izvedite nov vizualni kontrolni pregled; za poškodbe, razrahljanost spojev in deformacije, kot je opisano zgoraj. Vse poškodovane dele je treba popraviti ali zamenjati in znova ponoviti preizkus, dokler dvigalo ne deluje pravilno
Polnilnik deluje pravilno
Periodični pregled ponastavite tako, da za 12 sekund pritisnete gumba gor in dol na ročnem krmilniku (servisna lučka po ponastavitvi ugasne)

Dodatna oprema:

.....

.....

.....

Pregled opravl

Ime in priimek:

.....

Datum/kraj:

.....

Podpis:

.....

Odobreno brez napak

Naslednji pregled
(LLLL/MM): /

Dvigalo je označeno z »V okvari« in poslano
na popravilo

Dvigala ni mogoče popraviti in je
odstranjeno iz uporabe

Če so na periodičnem pregledu ugotovljene okvare,
obraba ali druge poškodbe, ki ogrožajo bolnikovo
varnost, dvigala do odprave pomanjkljivosti ni
dovoljeno uporabljati

Lastnik je opozorjen



Zaradi zakonskih zahtev je treba ta dokument ali kopijo vložiti v lastnikov servisni dnevnik

Opombe in ugotovitve

Če je pregled brez napak, nalepite nalepko prirednega pregleda in označite mesec in leto za **naslednji** pregled. Pri naročilu nalepke uporabite artikel št. 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

Nalepko periodičnega pregleda označite z mesecem in letom pregleda

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac