


# Molift Quick Raiser 205

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac


## Checklista för periodiska kontroller (SV)

I enlighet med ISO:10535

PI13004 Rev. A 2022-06-16

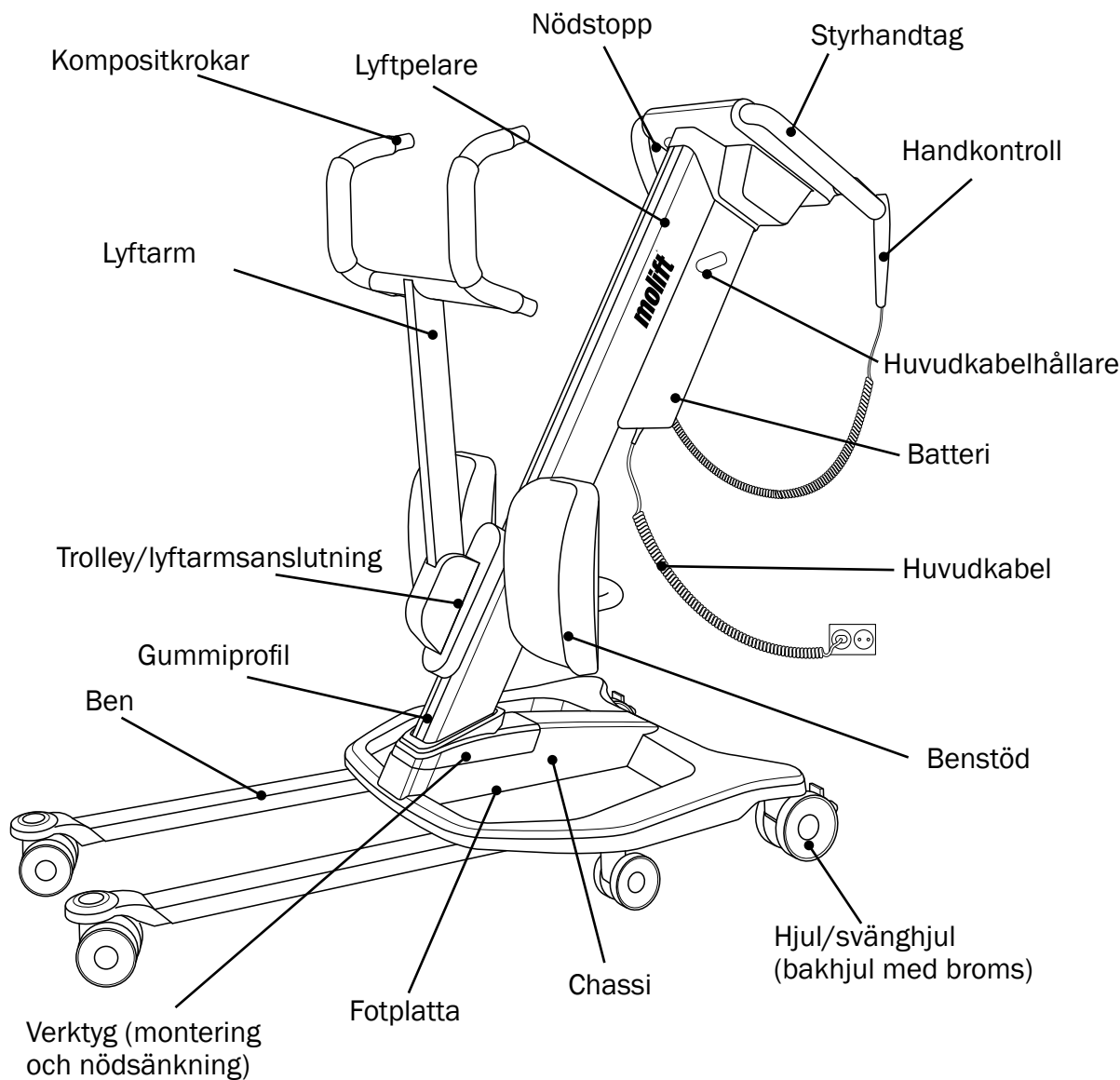

### Produktetikett

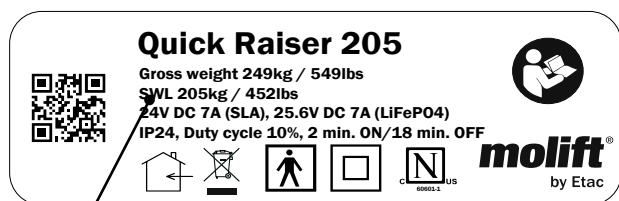

Värde för säker arbetsbelastning

### ID-etikett



Serienummer

Artikelnummer

Tillverkningsdatum

Det går att ladda ner det här dokumentet från [www.etac.com](http://www.etac.com).

Scanna QR-koden på produktetiketten för att komma till produktens hemsida. Användarmanualen finns under "Dokument".

Artikelnummer (se ID-etikett):

.....

Serienummer (se ID-etikett):

.....

Tillverkningsår:

.....

Ägare:

.....

Selen ska inspekteras separat och ingår inte i den här kontrollen.

### Användningssituation

Hemma  
Sjukhus  
Vårdhem  
Annan



**Den periodiska kontrollen ska utföras av en person som är lämpad och kvalificerad samt har kunskap om hur lyften är utformad, används och sköts.**



**Med lyftens mjukvara Molift Service tool är det möjligt att ange datum när den periodiska kontrollen utförs, namnet på kontrollören samt ytterligare information. Molift rekommenderar att man skriver in alla observationer/kommentarer rörande lyften i Molift Service tool för att få en komplett historiklogg för lyften.**

### ServiceIjusindikator (från 2018-01-01)

Kontrollera serviceIjusindikatorns Ijus:

Status	ServiceIjus	Läge
	Lyser inte	Service inte nödvändig
	Blinkar grönt	Boka service
	Gul	Periodisk kontroll krävs
	Röd	Låt utföra service
	Röd (plus ljudsignal)	Låt utföra service omedelbart

### ServiceIjusindikator (t.o.m. 2017-12-31)

Status	ServiceIjus	Läge
	Lyser inte	Service inte nödvändig
	Gul	Boka service
	Blinkar gult	Periodisk kontroll krävs
	Röd	Låt utföra service
	Röd (plus ljudsignal)	Låt utföra service omedelbart

### Visuell undersökning



**Visuell undersökning av den bärande strukturen för att säkerställa att det inte finns några skador, sprickor, deformationer eller andra fel. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.**

OK    Inte OK

Lyftpelare

Lyftarm

Kompositkrokar

Lyftarmsanslutning  
(ta bort täcklocket för kontrollen)

Ben

Produktetikett

Plastskydd

Gummiprofil

Handkontroll

Kontrollpanel

Hjul/svänghjul

OK	Inte OK
	Bromsar på hjul/svänghjul
	Kablar
	Batteri
	Elektronik
	Benstöd
	Ingen korrosion
	Benspridningsmekanism
	Svetsning
	Användningsinstruktioner/ användarmanual finns på plats/är tillgänglig

### Funktionskontroll



**Testa FUNKTIONEN och kontrollera  
beträffande slitage och skador.  
Alla kontrollpunkter ska kontrolleras  
för att lyften ska godkännas för  
vidare användning.**

OK	Inte OK
	Hjul/svänghjul
	Hjul-/svänghjulsbromsar
	Med ben i inre läge (parallella): Kontrollera att det inte går att minska avståndet mellan benen när de trycks ihop för hand.
	Lyftpelaren är komplett fixerad
	Nödstoppsknappen fungerar korrekt och bryter strömmen när den trycks ner. Återställ brytaren.
	Elektrisk nödsänkning
	Verktyg för manuell nödsänkning
	Elektrisk nödsänkning
	Handkontroll (alla knappar, dragavlastning på handkontrollens kabel, krok samt batteriindikator)

OK	Inte OK
	Kontrollpanel (alla knappar, förutom elektrisk nödsänkning)
	Om alla punkter har markerats med "OK" hittills ska lyften testas med säker arbetsbelastning.
	Genomför en lyftcykel med vikt som motsvarar säker 75% arbetsbelastning (se produktetiketten för värde i kg/ lbs). Motor och axel får inte slira när de belastas (vilket skulle får lyftarmen att sjunka) och rörelsen ska vara mjuk och jämn.
	Benspridningsmekanism, yttre och inre position med säker arbetsbelastning
	Kontrollera visuellt igen beträffande skador, spel och deformationer så som beskrivs ovan. Alla skadade delar måste repareras eller bytas ut och testet ska göras om tills lyften arbetar korrekt.
	Batteri. Med fulladdat batteri insatt, efter inledande cykel, batteriljuset är grönt och skiftnyckel-/ serviceljusindikatorn är AV.

Tillbehör:

.....

.....

.....

## Kontroll utförd av

För- och efternamn:

Datum/plats:

Underskrift:

Godkänd utan fel.

Nästa kontroll (ÅÅÅÅ/MM): /

Utför "Återställa lyft"

Lyften har klassats som "fungerar inte" och skickats för reparation.

Lyften kan inte repareras och har tagits ur drift.


Om den periodiska kontrollen visar på defekter, slitage eller andra skador som kan äventyra patientsäkerheten får lyften inte användas förrän bristen har åtgärdats.

Ägaren har informerats.



**Till följd av juridiska krav måste det här dokumentet eller en kopia av det arkiveras tillsammans med ägarens servicelögbok.**

Om enheten godkändes utan fel ska kontrolletiketten med markering av år och månad för **nästa** kontroll sättas fast. När du beställer etikett, använd artikelnummer 1100306

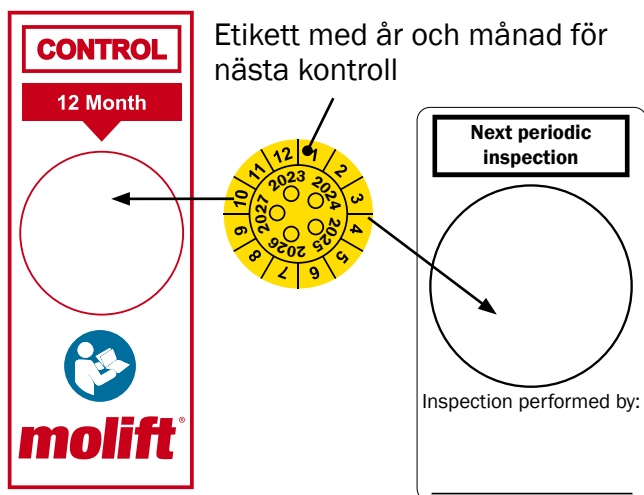


## Återställa lyft

1


Kontrollera att lyften är PÅ och att nödstoppet är inaktiverat.

2

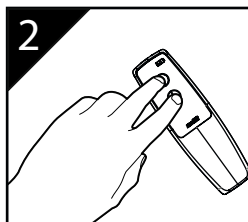


Tryck ner båda knapparna och håll tryckta i ca 4 sek.:  
Första pipet – när du börjar trycka.  
Andra pipet – släpp knapparna.

3

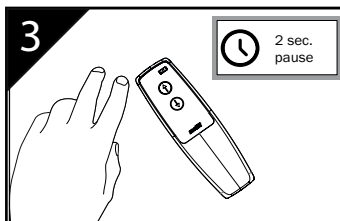

Vänta i ca 2 sek.

4

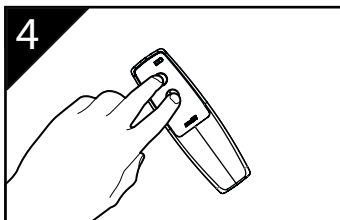

Tryck ner båda knapparna och håll tryckta i ca 4 sek.:  
Första pipet(-n) – släpp knapparna.  
Kontrollindikatorns ljus har SLÄCKTS – återställning genomförd.

## Anteckningar

.....