

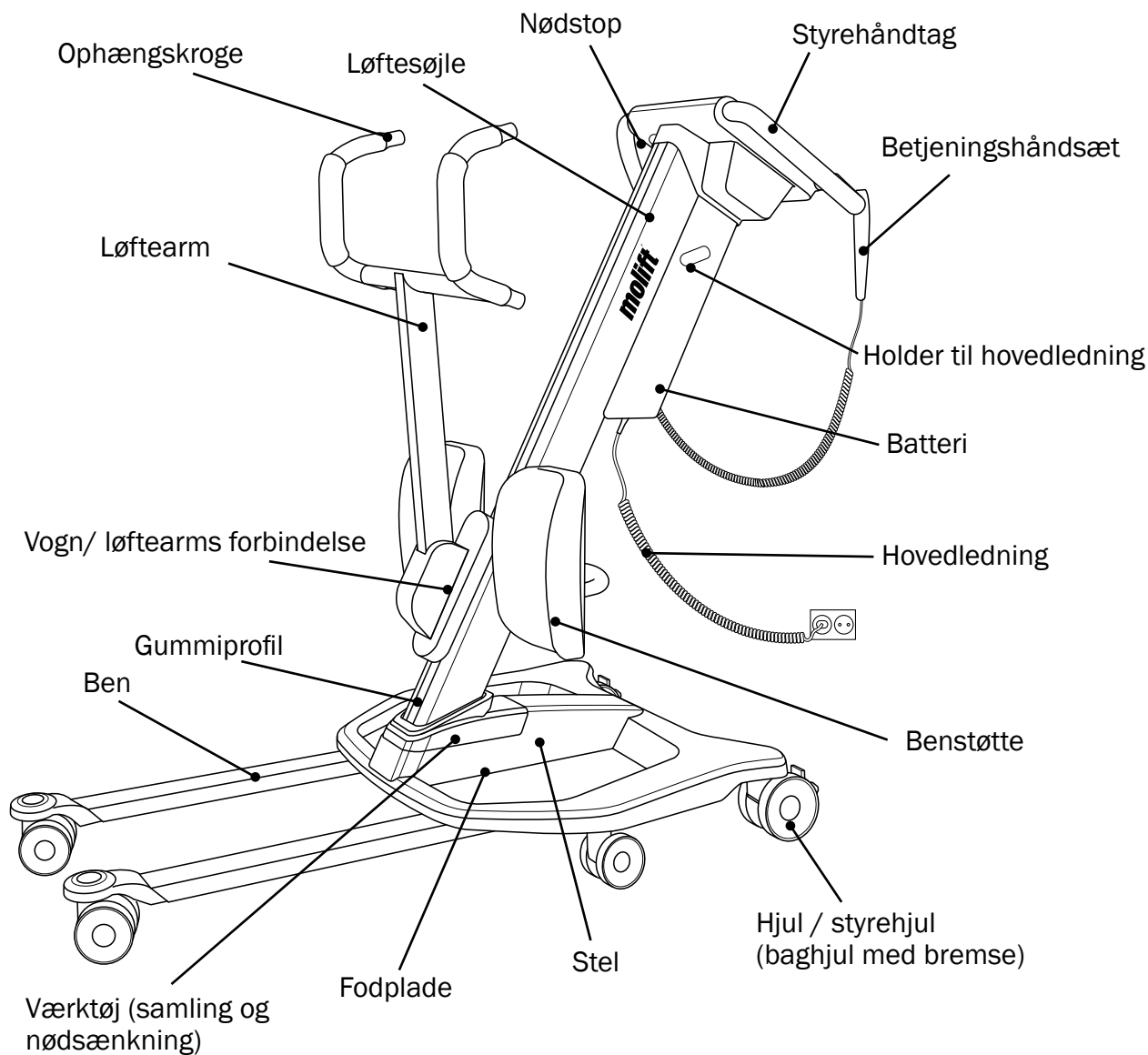
# Molift Quick Raiser 205

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

## Tjekliste til periodisk eftersyn (DA)





I overensstemmelse med ISO:10535

PI13010 Rev. A 2022-06-16



### Produktmærkat

**Quick Raiser 205**  
Gross weight 249kg / 549lbs  
SWL 205kg / 452lbs  
24V DC 7A (SLA), 25.6V DC 7A (LiFePO4)  
IP24, Duty cycle 10%, 2 min. ON/18 min. OFF



SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

### Id-mærkat



(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

REF	ABCDEFGHIJ			Etac A/S Parallevej 3 DK-8751 Gedved www.etac.com	
SN	XXXXXX				

YYYY-MM-DD



Serienummer Artikelnummer Produktionsdato

En kopi af dette dokument kan downloades på [www.etac.com](http://www.etac.com).

Scan QR-koden på produktmærkaten for at få adgang til produktets hjemmeside. Brugervejledningen kan findes i dokumentafsnittet.

Artikelnummer (se id-mærkat):

.....

Serienummer (se id-mærkat):

.....

Produktionsår:

.....

Ejer:

.....

Sejlet skal inspiceres særskilt og er ikke med i dette eftersyn.

### Anvendelsessituation

Hjemmet  
Hospital  
Plejehjem  
Andet



**Det periodiske eftersyn skal udføres af en person, der er egnet og tilstrækkeligt kvalificeret og godt bekendt med konstruktion, brug og pleje af personløfteren**



**Personløfterens software Molift Service-værktøj giver mulighed for at indtaste dato for PI og navnet på inspektøren sammen med yderligere oplysninger. Molift anbefaler at tilføje alle observationer / bemærkninger vedrørende personløfteren i Molift Service-værktøjet for at have en komplet historiklog over personløfteren**

### Serviceindikatorens lys (fra 01.01.2018)

Vær opmærksom på farven på serviceindikatorens lys:

Status	Servicelys	Tilstand
	Intet lys	Ikke behov for service
	Blinker grønt	Bestil service
	Gult	Periodisk eftersyn påkrævet
	Rød	Udfør service
	Rød (og lyd ved aktivering)	Udfør service øjeblikkeligt

### Serviceindikatorens lys (indtil 31.12.2017)

Status	Servicelys	Tilstand
	Intet lys	Ikke behov for service
	Gult	Bestil service
	Blinker gult	Periodisk eftersyn påkrævet
	Rød	Udfør service
	Rød (og lyd ved aktivering)	Udfør service øjeblikkeligt

### Visuel undersøgelse



**Visuel undersøgelse af den lastbærende struktur for at sikre, at der ikke er skader, revner, flosser eller deformationer. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug**

OK Ikke OK

Løftesøjle

Løftearm

Ophængskroge

Løftearms forbindelse (fjern dækslet for kontrol)

Ben

Produktmærkat


Plastdæksler

Gummiprofil

Betjeningshandsæt

OK	Ikke OK
	Betjeningspanel
	Hjul / styrehjul
	Bremser på hjul / styrehjul
	Ledninger
	Batteri
	Øvrig elektronik
	Benstøtte
	Ingen korrosion
	Benspredningsmekanisme
	Svejsninger
	Brugsanvisning / brugervejledning er til stede / tilgængelig

### Funktionel undersøgelse



**Test FUNCTION, og inspicer for slitage og skader. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug**

OK	Ikke OK
	Hjul / styrehjul
	Hjul / styrehjulets bremsere
	Med benene i indre position (parallelt): Kontroller, at afstanden mellem benene ikke kan mindskes, når de skubbes sammen med hånden
	Løftesøjle er helt fastgjort
	Nødstopknappen er fuldt funktionsdygtig og afbryder strømmen, når den aktiveres. Nulstil afbryder
	Elektrisk nødsænknings
	Værktøj til manuel nødsænknings
	Elektrisk nødsænknings
	Betjeningshåndsat (alle knapper, aflastning på betjeningshåndsettets ledning, krog og batteriindikator)

OK	Ikke OK
	Betjeningspanel (alle knapper, undtagen elektrisk nødsænknings)
	Hvis alle punkter indtil videre er "OK", skal personløfteren testes med SWL
	Udfør én løftecyklus med vægt, der svarer til 75% SWL (se produktmærkaten for værdi kg/lbs). Motor og aksel må ikke glide under belastning (forårsager at løftearmen sænker sig), og bevægelsen skal være glat og jævn
	Benspredningsmekanisme, ydre og indre position med SWL
	Udfør ny visuel kontrol; skader, revner og deformationer som beskrevet ovenfor. Eventuelle beskadigede dele skal repareres eller udskiftes, og testen gentages, indtil personløfteren fungerer korrekt
	Batteri. Når der er isat et fuldt opladet batteri, er batterilyset helt grønt efter første cyklus, og nøgle/ servicelys er slukket

Tilbehør:

.....

.....

.....

**Udført af**

Fulde navn:

Dato/sted:

Underskrift:

Godkendt uden fejl

Næste eftersyn (ÅÅÅÅ/MM): /

Udfør "Nulstilling af personløfter"

Personløfteren er markeret "Ude af drift" og sendt til reparation

Personløfteren er ikke berettiget til reparation og er taget ud af drift

Hvis det periodiske eftersyn afslører en defekt, slitage eller anden skade, der bringer patientens sikkerhed i fare, må personløfteren ikke anvendes, før manglen er afhjulpet

Ejeren er underrettet



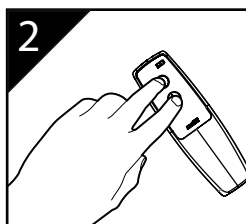
**Grundet lovkrav skal dette dokument eller en kopi arkiveres sammen med ejerens serviceløgbog**

Hvis den godkendes uden fejl, påføres inspektionsmærkat, og måned og år til **næste** eftersyn noteres herpå. Ved bestilling af mærkat anvendes varenummer 1100306

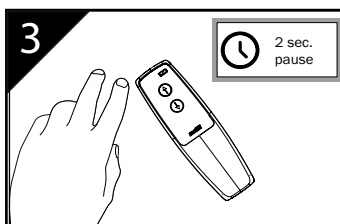
Notér måned og år til næste eftersyn på mærkaten

**Nulstilling af personløfter****1**

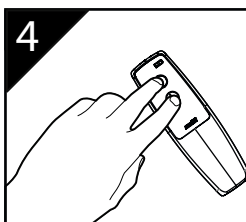
Sørg for, at personløfteren er tændt, og at nødstop er deaktiveret.

**2**

Tryk og hold begge knapper nede i ca. 4 sek.:  
Første bip – når du begynder at trykke.  
Næste bip – stop med at trykke.

**3**

Hold pause i ca. 2 sek.

**4**

Tryk og hold begge knapper nede i ca. 4 sek.:  
Første bip – stop med at trykke.  
Eftersynsindikatorens lys er slukket – nulstilling fuldført.

**Noter og observationer**

.....