

Molift Nomad


molift[®]
by Etac

Sjekkliste for periodisk kontroll (NO)


I samsvar med ISO:10535

PI15003 Rev. A 2022-06-17

Deler

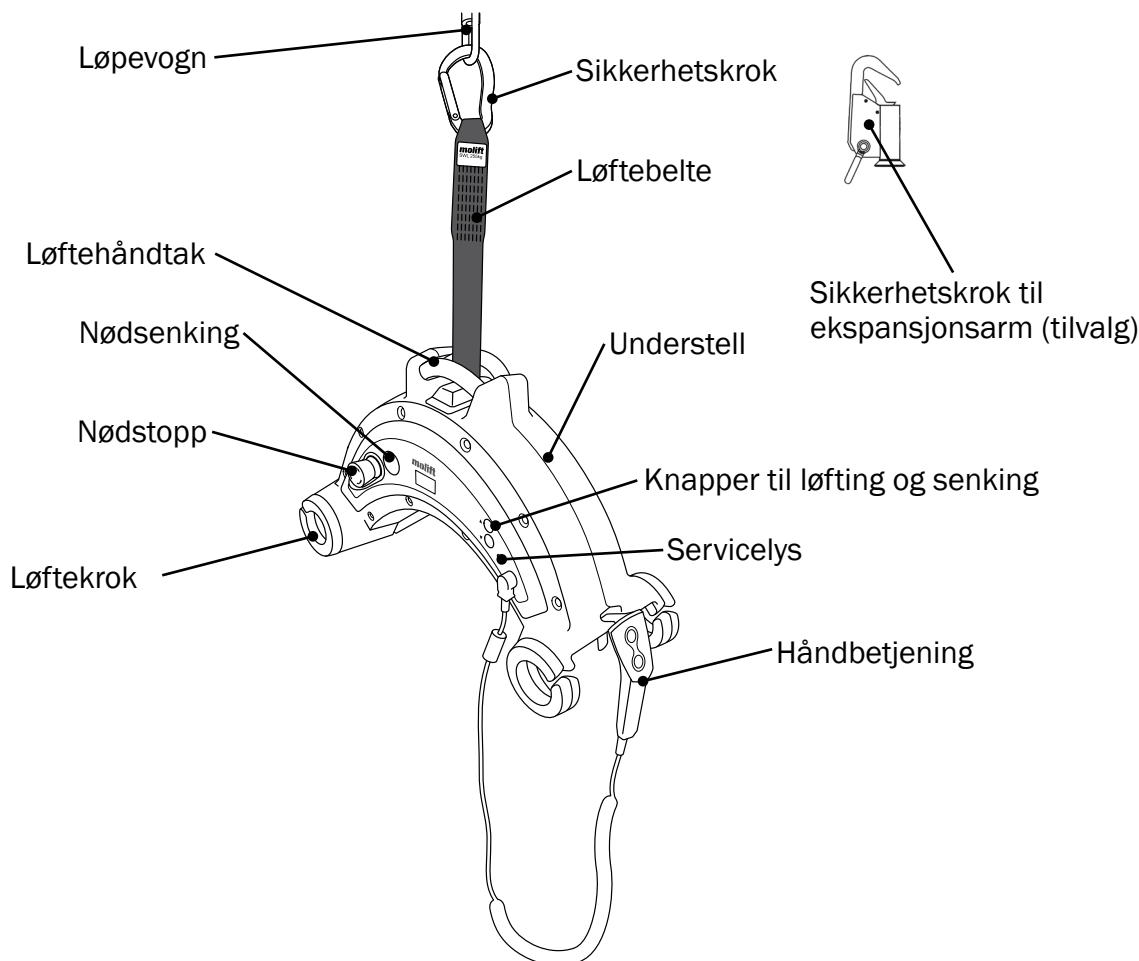

Produktetikett

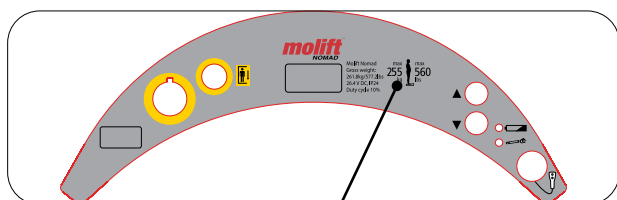


Brukervekt (SWL)-verdi

ID-etikett



Serienr. Artikkelnr. Produksjonsdato

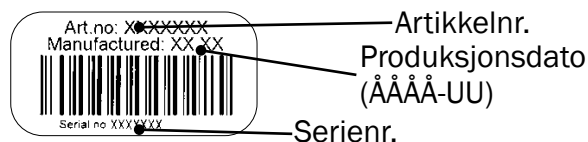

Du kan laste ned en kopi av dette dokumentet på www.etac.com.

Skann QR-koden på produktetiketten for å komme til hjemmesiden til produktet. Du finner brukerinstruksjonene i dokument-delen.

Artikkelnr. (se ID-etikett):

.....

Serienr. (se ID-etikett):

.....

Produksjonsår:

.....

Eier:

.....

Seilet må inspiseres separat og er ikke en del av denne inspeksjonen.

Programvaren Molift Service Tool byr på muligheten til å legge inn dato for PI og navnet til den som gjennomfører informasjon samt ytterligere informasjon i løfteren. Molift anbefaler å legge inn observasjoner / kommentarer angående løfteren i Molift Service Tool for å få en komplett servicehistorikk for løfteren



Dette inspeksjonsdokumentet dekker kun løfteren. Skinnesystemet må inspiseres i henhold til PI19203



Visuell undersøkelse

Visuell undersøkelse av lastbærende struktur for å forsikre at den ikke er skadet, har sprekker, brudd eller deformeringer. Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk



Serviceindikatorlys

Legg merke til fargen til serviceindikatorlyset:

Status	Service lys	Modus
	(ikke på)	Strømsparing (Stand by)
	Grønn	Klar til bruk
	Gul	Bestill service
	Rød	Gjennomfør service
	Rød (og lyd når den aktiveres)	Gjennomfør service umiddelbart

Brukssituasjon

Hjemme
Sykehus
Pleiehjem
Annet



Den periodevise inspeksjonen skal gjennomføres av en person som er egnet og godt kvalifisert, og godt kjent med designet, bruken og vedlikeholdet av løfteren

OK Ikke OK

Løftebelte med krok. Må byttes hvert femte år.
Se etiketten på beltet.

Sikkerhetskrok

Sikkerhetskrok til ekspansjonsarm (hvis relevant)

Etiketter, begge sider

Plastdeksel

Håndbetjening og kabel

Løftekrok

Lader

Bruksanvisning /
brugerhåndbok til stede /
tilgjengelig

Funksjonskontroll



Test FUNKSJONEN og inspiser om det er slitasje eller skade. Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk

OK	Ikke OK
Nødstoppbryteren fungerer fullstendig og bryter strømforsyningen når den aktiveres. Nullstillingsknapp. Serviceindikatorlyset må skifte til grønn	
Håndbetjening (knapper, kabelkontakter og batteriindikator)	
Full funksjonalitet til håndbetjeningen	
Opp/ned knapper på løfter	
Endestopp	
Løftebelte med sikkerhetskrok. Må byttes hvert femte år. Se etiketten på beltet.	
Kontrollert om beltet er skadet eller slitt	
Kontrollert om sikkerhetskroken er skadet eller slitt	
Hvis relevant: Kontrollert om sikkerhetskroken til ekspansjonen er skadet, fjærene fungerer, deler er løse og om den er slitt	
Svingkoblingen på løpevognen må bevege seg fritt når den dreies 360°	
Kontrollert at løfteren fungerer som den skal og kjører hele veien opp og ned uten last uten å lage uvanlige lyder	
Hvis alle punkt hittil er «OK» må løfteren testes med brukervekt (SWL). MERK! Forsikre deg om at brukervekt (SWL) for hele løftesystemet overskrider eller er lik løfterens brukervekt (SWL) før lasttest	

OK Ikke OK

Gjennomfør en løftesyklus med en vekt som tilsvarer brukervekten (SWL) med et område på min. 500 mm på toppen av løfteområdet. Bremsen må ikke slippe under last. Bevegelsen må være jevn og uten uvanlige lyder	
Beveg løfteren gjennom hele skinnesystemet med en last tilsvarende brukervekt (SWL). Kontroller at avvik og fjæring er akseptable	
Gjennomfør ny visuell kontroll; skader og deformering som beskrevet over. Alle skadde deler må repareres eller byttes ut, og testen gjennomføres på nytt til løfteren fungerer korrekt	
Laderen fungerer	
Batteri. Batterilyset er AV og serviceindikatorlyset er grønt	

Tilbehør:

.....

.....

.....

Gjennomført av**Kommentarer og observasjoner**

Fult navn:

Dato/sted:

Underskrift:

Godkjent uten feil

Neste inspeksjon
(ÅÅÅÅ / MM):/.....

Løfteren er merket «Ute av drift» og sendt til reparasjon
Løfteren kvalifiserer ikke til reparasjon og er tatt ut av bruk


Dersom den periodevise inspeksjonen avslører defekt, slitasje eller annen skade som utgjør en trussel for pasientsikkerheten skal løfteren ikke brukes til defekten er utbedret.

Eier er varslet



På grunn av rettslige krav må dette dokumentet, eller en kopi av det, arkiveres sammen med eierens serviceloggbok

Hvis godkjent uten feil; sett på inspeksjonsetikett og marker måned og år for **neste** inspeksjon. Bruk produktnr. 1100306 ved bestilling av etikett

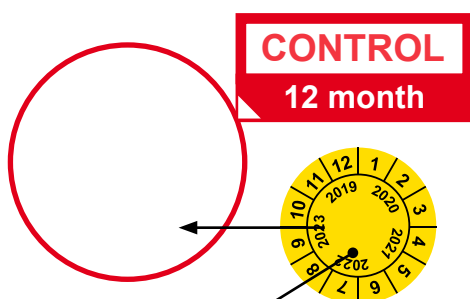

Merk etiketten med måned og år for neste inspeksjon