

Molift Nomad


molift[®]
by Etac

Määräaikaistarkastuksen muistilista (FI)


Standardin ISO:10535 mukaisesti

PI15005 Ver. A 2022-06-17

Osat

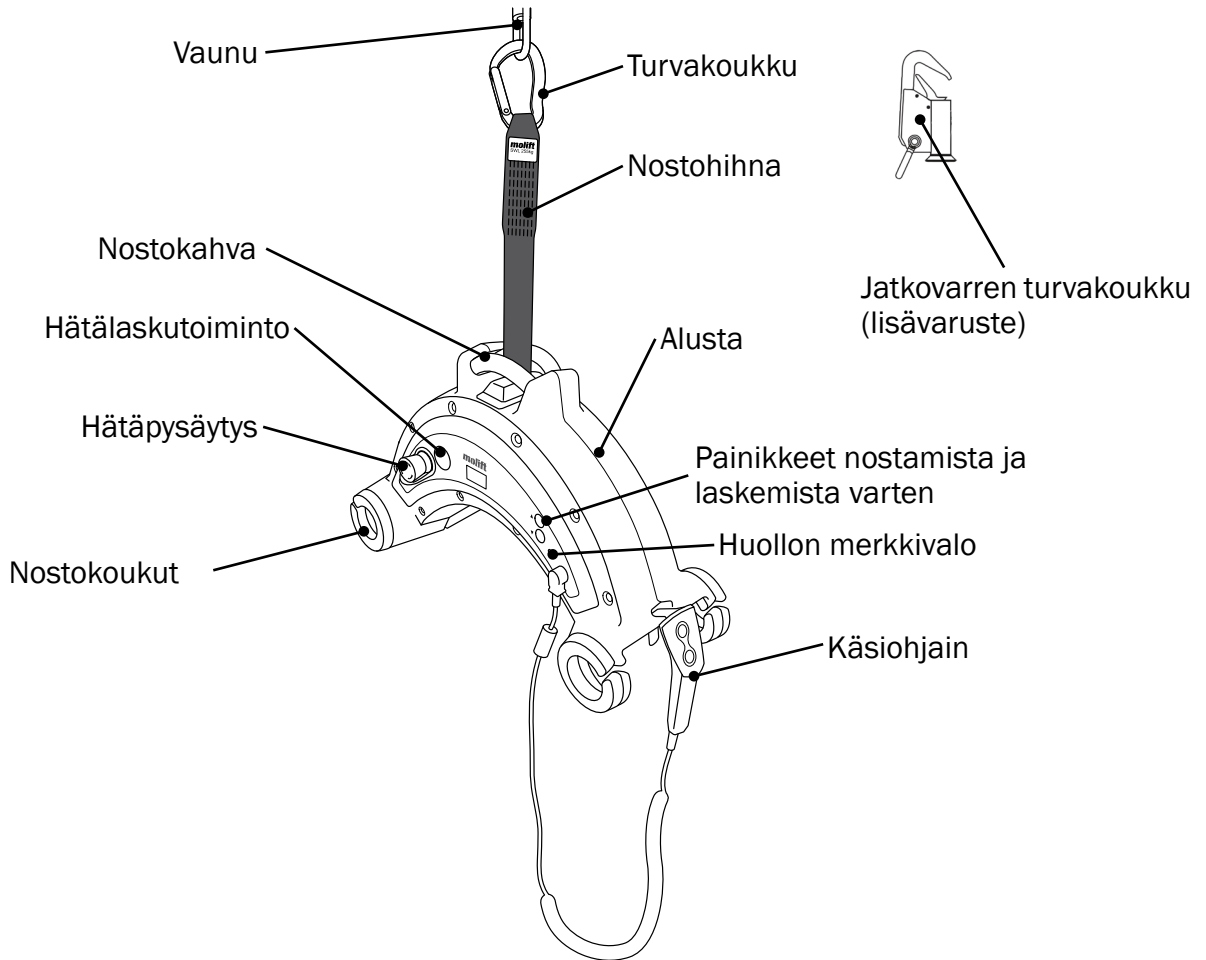

Tuotetarra

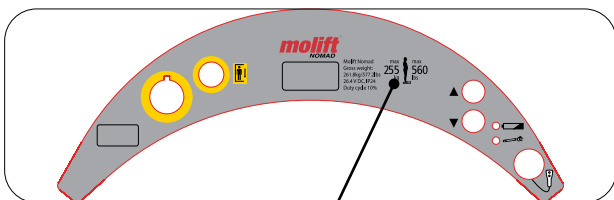


Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyypikilpi



Sarjanumero Tuotenumero Valmistuspäivä

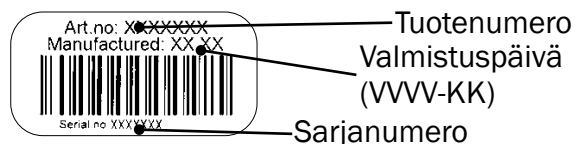

Tämän dokumentin kopion voi ladata osoitteesta
www.etac.com.

Siirry tuotesivulle skannaamalla tuotetarrassa
oleva QR-koodi. Käyttöopas löytyy dokumenttien
osiosta.

Tuotenumero (katso tyyppikilpi):

.....

Sarjanumero (katso tyyppikilpi):

.....

Valmistuspäivä:

.....

Omistaja:

.....

Nostoliina ei sisälly tähän tarkastukseen, vaan se
on tarkastettava erikseen.

**Määräaikaistarkastuksen
päivämäärän ja tarkastajan sekä
mahdolliset lisätiedot voi syöttää
nostolaitteen Molift Service Tool
-sovellukseen.**



**Molift suosittelee lisäämään
kaikki nostolaitteeseen liittyvät
havainnot/huomiot Molift Service
Tool -sovellukseen, jotta laitteen
historiatiedot pysyvät ajan tasalla.**

**Tämä tarkastusasiakirja koskee vain
nostinta.**



**Kiskojärjestelmä on tarkastettava
standardin PI19205 mukaisesti.**

Silmämääräinen tarkastus

**Tarkasta kuormittuvat rakenteet
silmämääräisesti, ettei niissä ole
vaurioita, halkeamia, kulumia
ja vääntymiä. Kaikki kohdat on
tarkastettava, jotta nostolaite
voidaan hyväksyä käyttökuntoon.**



OK Ei OK

Nostohihna ja koukku. Vaihdeettava
5 vuoden välein.
Katso hihnassa oleva merkki.

Turvakoukku

Jatkovarren turvakoukku
(jos käytössä)

Tarrat, molemmilla puolilla

Muovisuojat

Käsiohjain ja johto

Nostokoukut

Latauslaite

Käyttöopas on tallessa/saatavilla

Huollon merkkivalo

Huomioi huollon merkkivalon väri:

<i>Tila</i>	<i>Huollon merkkivalo</i>	<i>Toiminto</i>
(Ei valoa)		Virransäästö (valmiustila)
Vihreä		Käyttövalmis
Keltainen		Varaa huolto
Punainen		Huolla laite
Punainen (ja äänimerkki, jos käytössä)		Huolla laite heti

Käyttökohteet

Koti
Sairaala
Hoitolaitos
Muu



**Määräaikaistarkastuksen saa
suorittaa tehtävään soveltuva ja
pätevä henkilö, joka on perehtynyt
huolella laitteen rakenteeseen,
käyttöön ja huoltoon.**

Toiminnan tarkastus



Testaa TOIMINTA ja tarkasta kulumien ja vaurioiden varalta. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuntoon.

OK Ei OK

Hätäpysäytyspainike on täysin toimintakunnossa ja sammuttaa virransyötön painiketta käytettäessä.
Nollaa painikkeen asetukset.
Huollon merkkivalon täytyy palaa vihreänä.

Käsiohjain (painikkeet, johdon liitännät ja akun merkkivalo)

Käsiohjaimen toiminta

Nostolaitteen ylös/alas-painikkeet

Päätöspysäytin

Nostohihna ja turvakoukku.
Vaihdettava 5 vuoden välein. Katso hihnassa oleva merkki.

Tarkasta hihna vaurioiden, repeämien ja kulumien varalta

Tarkasta turvakoukku vaurioiden, repeämien ja kulumien varalta

Jos käytössä:
Tarkasta jatkovarren turvakoukku vaurioiden, repeämien, kulumien ja irrallisten osien varalta. Tarkasta myös jousen toiminta.

Vaunun nivel liikkuu vapaasti käännettäessä 360 astetta.

Tarkasta, että nostolaite toimii asianmukaisesti ja että sen voi nostaa ylös ja laskea alas kokonaan ilman kuormaa niin, että laitteesta ei kuulu epätavallista ääntä.

Jos kaikki tähän saakka tarkastetut kohdat ovat OK, testaa nostolaite suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL).

HUOMAUTUS: Varmista, että koko nostojärjestelmän suurin turvallinen kuorma (SWL) on suurempi tai yhtä suuri kuin nostolaitteen suurin turvallinen kuorma (SWL) ennen kuormituksen testausta.

OK Ei OK

Tee yksi nostokierros painolla, joka vastaa suurinta turvallista kuormaa (SWL), kun nostoalueen yläosaan jää vähintään 500 mm tilaa. Jarru ei saa liukua kuormitettuna. Liikkeen on oltava tasainen ja vakaa, eikä siitä saa kuulua epätavallista ääntä.

Liikuta nostolaitetta suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL) koko kiskojärjestelmän pituudelta. Tarkasta, että taipuma ja jousitus ovat asianmukaiset.

Tee silmämääräinen tarkastus uudelleen edellä kuvattujen ohjeiden mukaan vaurioiden ja vääntymien varalta. Kaikki vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava ja nostolaite on testattava uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että se toimii asianmukaisesti.

Latauslaite on toimintakunnossa

Akku:
Akun merkkivalo ei pala ja huollon merkkivalo palaa vihreänä.

Lisävarusteet:

.....

.....

.....

Tarkastajan tiedot**Muistiinpanot ja havainnot**

Nimi:

Päiväys/paikka:

Allekirjoitus:

Hyväksytty ilman vikoja

Seuraava tarkastus
(VVV / KK): /

Nostolaite on merkitty ”Epäkunnossa”-merkinnällä ja lähetetty korjattavaksi. Nostolaitetta ei voi korjata, joten se poistetaan käytöstä.


Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee vikoja, kulumia tai muita vaurioita, jotka vaarantavat potilaan turvallisuuden, nostolaitetta ei saa käyttää ennen kuin puute on korjattu.

Asiasta on ilmoitettu omistajalle



Lakisääteisten vaatimusten takia tämä dokumentti tai sen kopio on arkistoitava osaksi omistajan huoltokirjaa.

Mikäli laite hyväksytään ilman vikoja, kiinnitä laitteeseen tarkastustarra, johon merkitään seuraavan tarkastuksen ajankohta (kuukausi ja vuosi). Kun tilaat tarran, käytä tuotenumeroa 1100306.

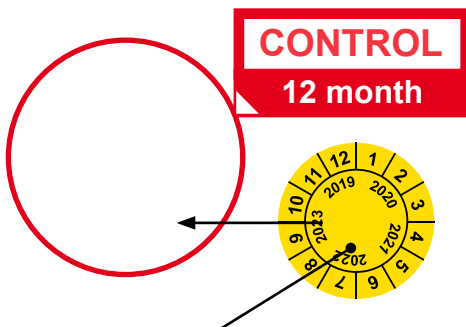

Merkitse tarraan seuraavan tarkastuksen ajankohta (kuukausi ja vuosi)