

Molift Nomad


molift[®]
by Etac

Controlelijst voor periodieke inspectie (NL)


Volgens ISO:10535

PI15009 Rev. A 2022-06-17

Onderdelen

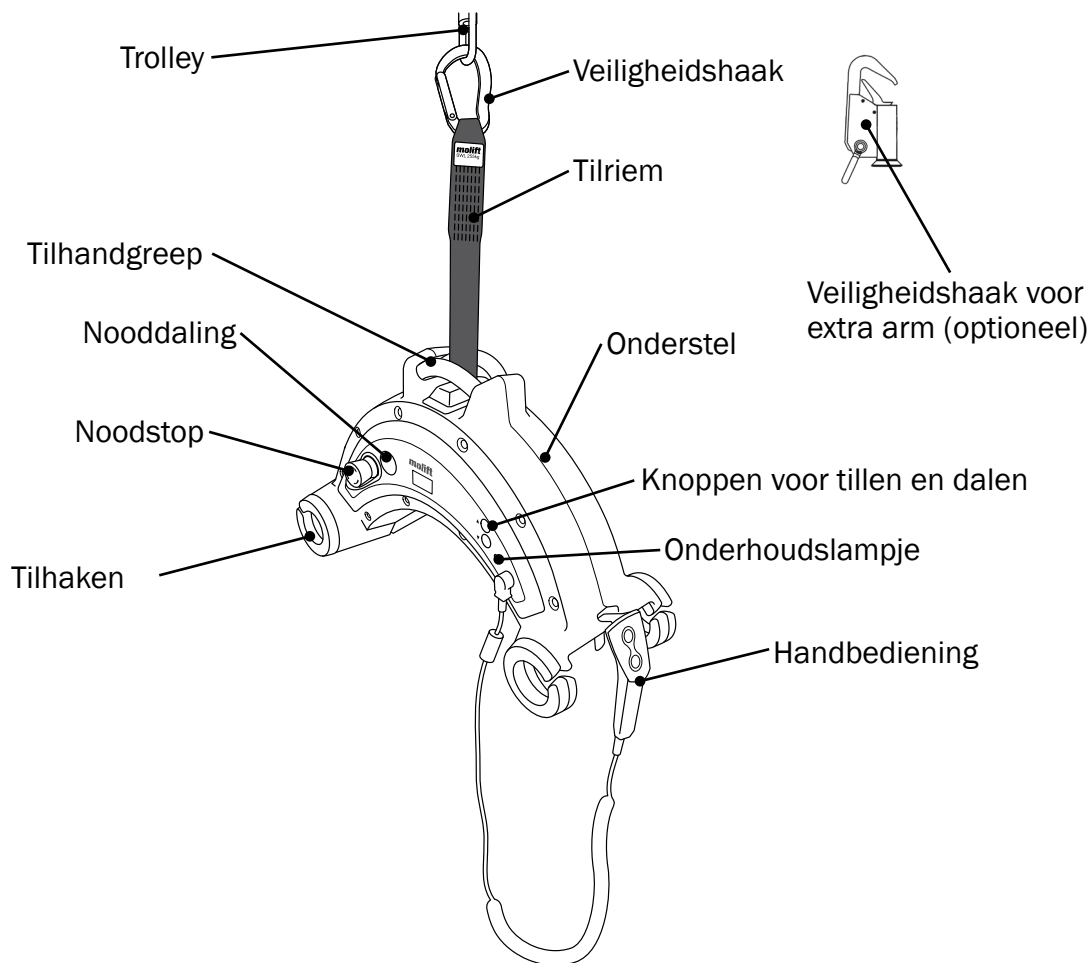

Productlabel

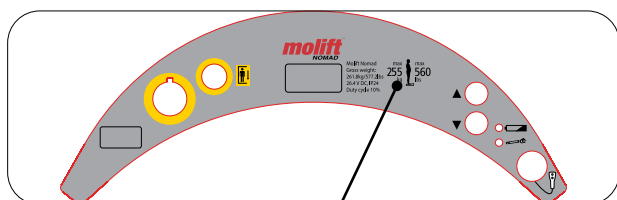


Maximaal gebruikersgewicht (SWL)

ID-label



Serienr. Artikelnr. Productiedatum

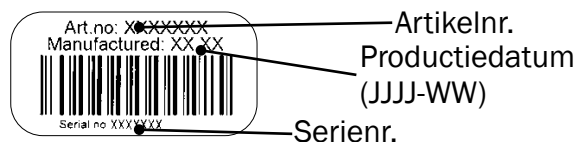

Een exemplaar van dit document kan worden gedownload van www.etac.com.

Scan de QR-code op het productlabel om naar de productpagina te gaan. De instructie voor gebruik staat in de sectie met documenten.

Artikelnr. (zie ID-label):

.....

Serienr. (zie ID-label):

.....

Productiejaar:

.....

Eigenaar:

.....

Tilbanden moeten afzonderlijk worden geïnspecteerd; dit maakt geen deel uit van deze inspectie.

Onderhoudslampje

Controleer de kleur van het onderhoudslampje:

Status	Onderhoudslampje	Modus
	(Lampje brandt niet)	Energiebesparende stand (stand-by)
	Groen	Klaar voor gebruik
	Geel	Onderhoud plannen
	Rood	Onderhoud uitvoeren
	Rood (+ geluidssignaal indien geactiveerd)	Onmiddellijk onderhoud uitvoeren

Gebruikssituatie

Thuis
Ziekenhuis
Zorginstelling
Overig



De periodieke inspectie moet worden uitgevoerd door iemand die geschikt en voldoende gekwalificeerd is en goed bekend is met het ontwerp, gebruik en onderhoud van de tillift.



In de Molift Service Tool, de software van de tillift, kan de datum van de periodieke inspectie worden ingevoerd, evenals de naam van degene die de inspectie heeft uitgevoerd en eventuele andere informatie.

Molift raadt aan om alle observaties en opmerkingen over de tillift in de Molift Service Tool te registreren voor een compleet historisch logboek van de tillift.



Dit inspectiedocument heeft alleen betrekking op de takel. Railsysteem moet worden geïnspecteerd volgens PI19209

Visuele inspectie



Visuele inspectie van de lastdragende structuur om te controleren op beschadigingen, scheuren, slijtage of vervorming. Alle controlepunten moeten worden nagelopen om de tillift goed te keuren voor verder gebruik.

OK Niet OK

	Tilriem met haak. Moet om de 5 jaar worden vervangen. Zie het label op de riem.
	Veiligheidshaak
	Veiligheidshaak voor extra arm (indien van toepassing)
	Labels, beide zijden
	Kunststof kappen
	Handbediening en kabel
	Tilhaken
	Oplader
	Gebruikershandleiding is aanwezig/beschikbaar

Functionele inspectie



Test FUNCTIE en controleer op slijtage en beschadigingen. Alle controlepunten moeten worden nagelopen om de tillift goed te keuren voor verder gebruik.

OK Niet OK

OK Niet OK	Noodstopknop is volledig operationeel en bij indrukken ervan wordt de stroomtoevoer uitgeschakeld. Reset de knop. Onderhoudslampje moet groen worden
	Handbediening (knoppen, contacten en acculampje)
	Functionaliteit voor handbediening
	Omhoog/omlaag knoppen op tillift
	Eindstop
	Tilriem met veiligheidshaak. Moet om de 5 jaar worden vervangen. Zie het label op de riem.
	Riem gecontroleerd op beschadigingen en slijtage
	Veiligheidshaak gecontroleerd op beschadigingen en slijtage.
	Indien van toepassing: Veiligheidshaak voor extra arm gecontroleerd op beschadigingen, veerfunctie, loszittende onderdelen en slijtage.
	Draaikoppeling op trolley beweegt vrij bij draaiing van 360°.
	Gecontroleerd dat de tillift naar behoren functioneert en onbelast volledig naar boven en beneden kan worden bewogen zonder abnormaal geluid.
	Als alle punten tot nu toe "OK" zijn, moet tillift worden getest met SWL. LET OP! Controleer of de SWL voor het volledige tilsysteem hoger is dan of gelijk is aan de SWL van de tillift voordat met belasting wordt getest.

	Voer één tilcyclus uit met gewicht gelijk aan SWL met min. bereik van 500 mm bovenaan tilbereik. Rem mag niet slippen bij belasting. Beweging moet soepel en gelijkmatig zijn, en zonder ongebruikelijk geluid.
	Verplaats tillift met belasting met SWL langs gehele railsysteem. Controleer of doorbuiging en vering acceptabel zijn.
	Voer opnieuw een visuele inspectie uit om te controleren op beschadigingen en vervormingen zoals hierboven beschreven. Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen en daarna moet opnieuw een test worden uitgevoerd totdat de tillift naar behoren functioneert.
	Oplader is operationeel.
	Accu. Acculampje is UIT en onderhoudslampje is groen.

Accessoires:

.....

.....

.....

Uitgevoerd door**Notities en observaties**

Volledige naam:

Datum/plaats:

Handtekening:

Goedgekeurd zonder gebreken

Volgende inspectie
(JJJ/MM): /

Tillift is gemarkeerd met "Buiten werking"
en is opgestuurd voor reparatie
Tillift komt niet in aanmerking voor
reparatie en is buiten gebruik gesteld


Als bij de periodieke inspectie defecten, slijtage
of andere beschadigingen worden geconstateerd
waarmee de veiligheid van de patiënt in gevaar
komt, mag de tillift pas weer worden gebruikt als
de onvolkomenheid is verholpen..

De eigenaar is geïnformeerd



Het is wettelijk vereist om dit document of een kopie ervan op te nemen in het servicelogboek van de gebruiker.

Worden er geen gebreken aangetroffen, bevestig dan de inspectiesticker en noteer hierop de maand en het jaar van de **volgende** inspectie. Het artikelnummer voor het bestellen van stickers is 1100306

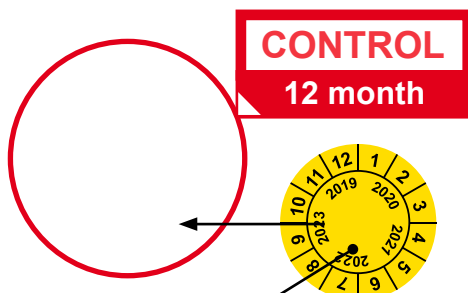

Noteer de maand en het jaar van de volgende inspectie op de sticker