

Molift Air

200/350/500


molift[®]
by Etac

Checklista för periodiska kontroller (SV)


I enlighet med ISO:10535

PI15704 Rev. A 2022-06-22


Delar, Molift Air 200/350

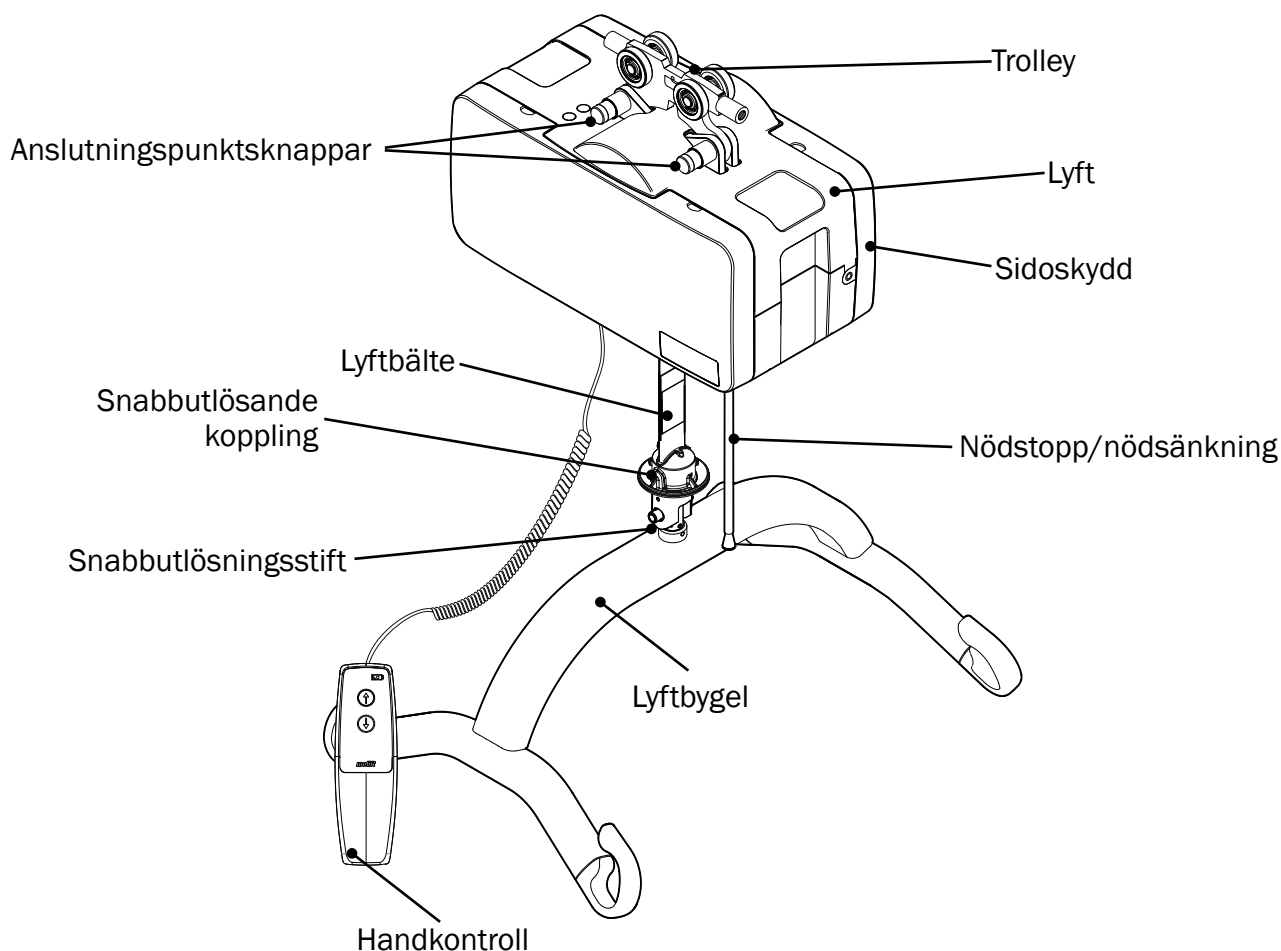


Produktetikett 200/350

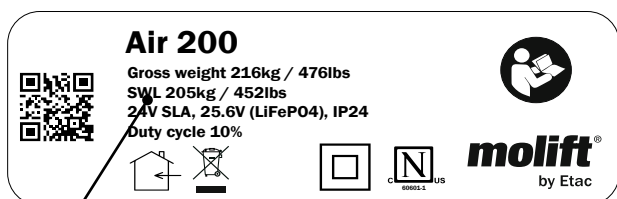

Värde för säker arbetsbelastning

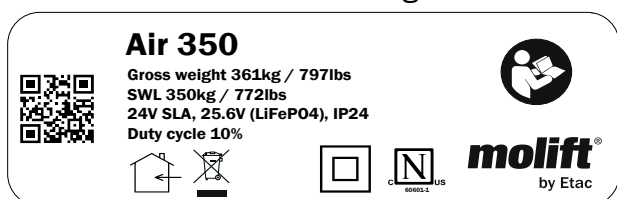


ID-etikett

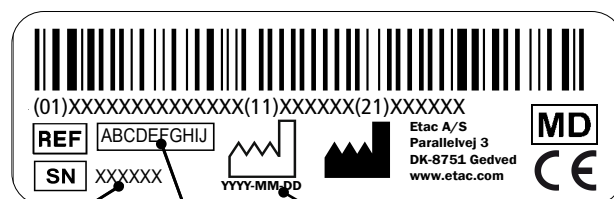


Serienummer Artikelnummer Tillverkningsdatum

Delar, Molift Air 500

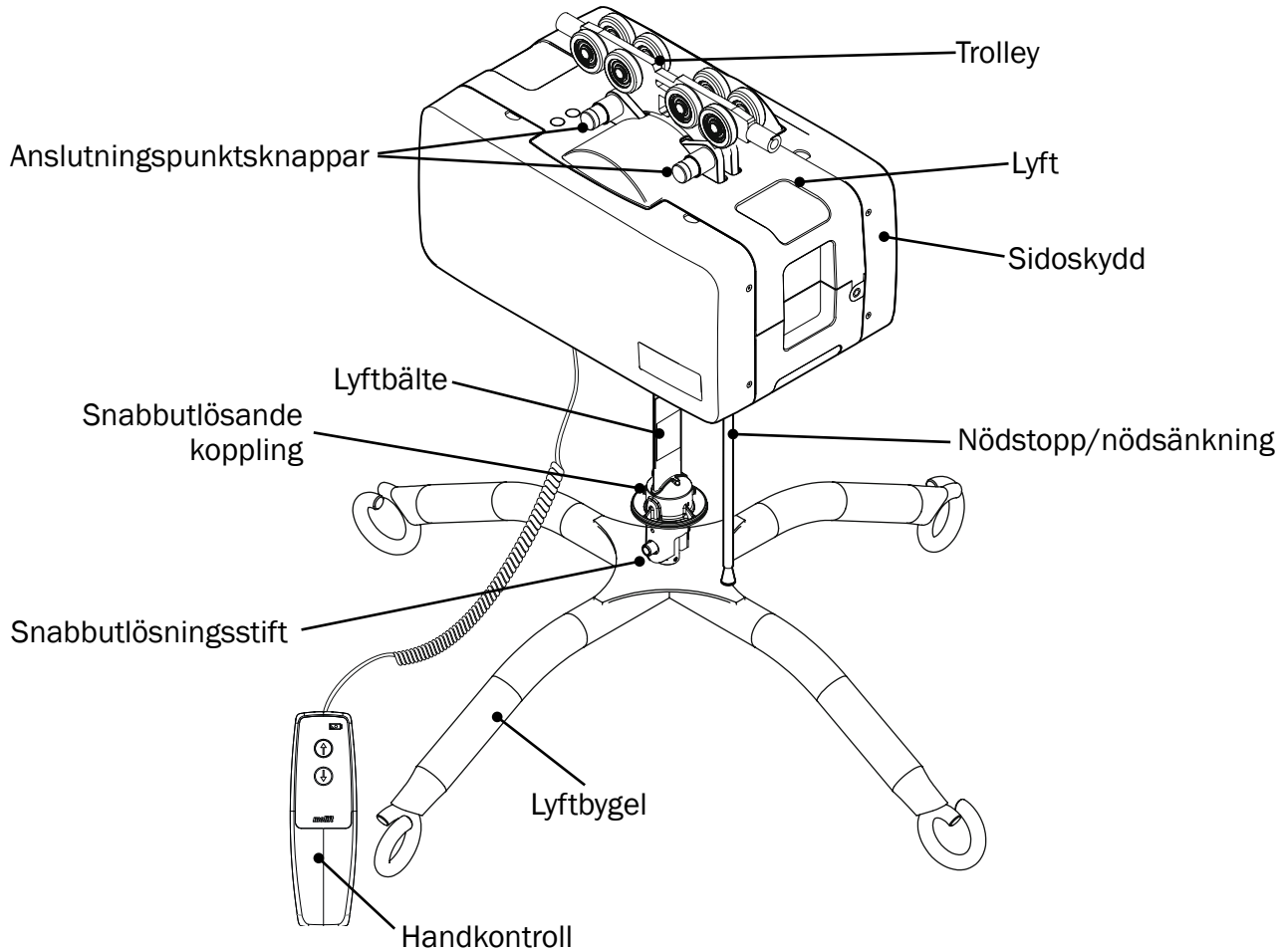

Produktetikett 500

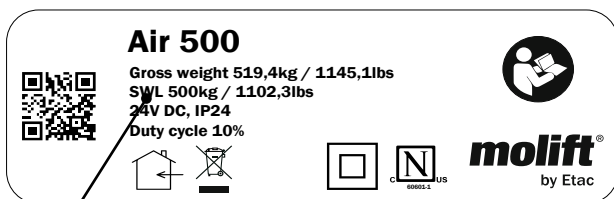

Värde för säker arbetsbelastning

ID-etikett



Serienummer Artikelnummer Tillverkningsdatum

Det går att ladda ner det här dokumentet från www.etac.com.

Scanna QR-koden på produktetiketten för att komma till produktens hemsida. Användarmanualen finns under "Dokument".

Artikelnummer (se ID-etikett):

.....

Serienummer (se ID-etikett):

.....

Tillverkningsår:

.....

Ägare:

.....

Specificera modell:

Molift Air 200
Molift Air 350
Molift Air 500

Selen ska inspekteras separat och ingår inte i den här kontrollen.

Serviceljusindikator

Kontrollera serviceljusindikatorns ljus:

Status	Serviceljus	Läge
	(Lyser inte)	Redo att användas
	Gul	Utför periodisk kontroll
	Blinkar grön	Boka service
	Röd	Låt utföra service
	Röd (plus ljudsignal)	Låt utföra service omedelbart

Användningssituation

Hemma
Sjukhus
Vårdhem
Annan



Den periodiska kontrollen ska utföras av en person som är lämpad och kvalificerad samt har kunskap om hur lyften är utformad, används och sköts.



Med lyftens mjukvara Molift Service tool är det möjligt att ange datum när den periodiska kontrollen utförs, namnet på kontrollören samt ytterligare information. Molift rekommenderar att man skriver in alla observationer/kommentarer rörande lyften i Molift Service tool för att få en komplett historiklogg för lyften.



Detta inspektionsdokument omfattar endast lyften. Skensystemet måste inspekteras i enlighet med PI19204

Visuell undersökning



Visuell undersökning av den bärande strukturen för att säkerställa att det inte finns några skador, sprickor, deformationer eller andra fel. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.

OK Inte OK

Lyftbälte
Produktetikett
Plastskydd
Handkontroll
Kablar
Elektronik
Lyftbygel
Lyftbygelkrokar
Snabbutlösande koppling
Användningsinstruktioner/ användarmanual finns på plats/är tillgänglig

Funktionskontroll



Testa FUNKTIONEN och kontrollera beträffande slitage och skador. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.

OK Inte OK

Nödstoppsknappen fungerar korrekt och bryter strömmen när den trycks ner.
Återställ brytaren.

Kontrollera verktyg för nödsänkning (finns bakom skyddet)

Elektrisk nödsänkning

Handkontroll (knappar, trådduttag och batteriindikator)

Handkontrollens funktionalitet

Snabbutlösande koppling (vridleden rör sig fritt och utan ljud när den vrids 360°)

Snabbutlösningstift

Anslutningspunktsknappar

Vinkelsensor. Dra lyftbältet åt sidan i alla fyra riktningar.

Kontrollera att lyften fungerar korrekt och hela vägen upp och ner utan belastning och utan ovanliga ljud.

Ändstopp

Om alla punkter har markerats med "OK" hittills ska lyften testas med säker arbetsbelastning.
OBS! Säkerställ att säker arbetsbelastning för hela lyftsystemet överstiger eller är lika med den säkra arbetsbelastningen innan all form av lasttestning.

Genomför en lyftcykel med vikt motsvarande säker arbetsbelastning på minst 500 mm i den övre delen av lyftområdet.
Bromsen får inte slira när de belastas. Rörelsen måste var mjuk och jämn och det får inte förekomma några ovanliga ljud.

OK Inte OK

För lyften belastad med säker arbetsbelastning längs hela skensystemet.
Kontrollera att nedböjning och upphängning är acceptabel.

Kontrollera visuellt igen beträffande skador och deformationer så som beskrivs ovan. Alla skadade delar måste repareras eller bytas ut och testet ska göras om tills lyften arbetar korrekt.

Laddaren fungerar.

Batteri.
Batteriljust är grönt och serviceljusindikatorn är SLÄCKT.

Tillbehör (t.ex. våg, framdrivning, IRC):

.....

.....

Kontroll utförd av

För- och efternamn:

.....

Datum/plats:

.....

Underskrift:

.....

Godkänd utan fel.

Nästa kontroll (ÅÅÅÅ/MM): /

Utför "Återställa lyft"

Lyften har klassats som "fungerar inte" och skickats för reparation.

Lyften kan inte repareras och har tagits ur drift.


Om den periodiska kontrollen visar på defekter, slitage eller andra skador som kan äventyra patientsäkerheten får lyften inte användas förrän bristen har åtgärdats.

Ägaren har informerats.





Till följd av juridiska krav måste det här dokumentet eller en kopia av det arkiveras tillsammans med ägarens serviceloggbok.


Om enheten godkändes utan fel ska kontrolletiketten med markering av år och månad för **nästa** kontroll sättas fast på det inre skyddet. När du beställer etikett, använd artikelnummer 1100306

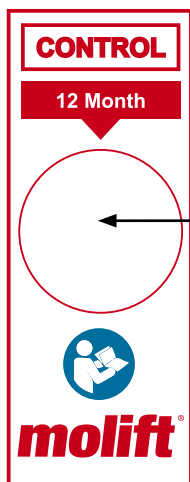


Etikett med år och månad för nästa kontroll

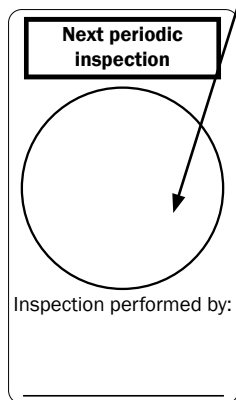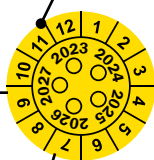


Återställa lyft

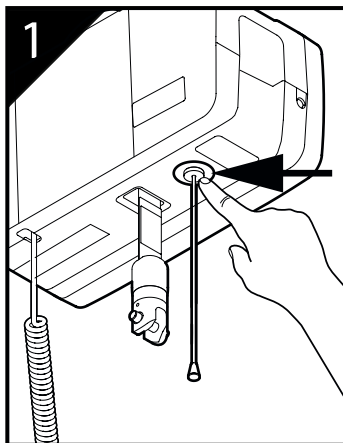


Kontrollera att lyften är PÅ och att nödstoppet är inaktiverat.

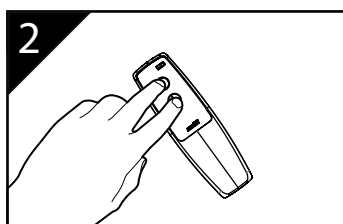

Tryck ner båda knapparna och håll tryckta i ca 4 sek.:
Första pipet – när du börjar trycka.
Andra pipet – släpp knapparna.

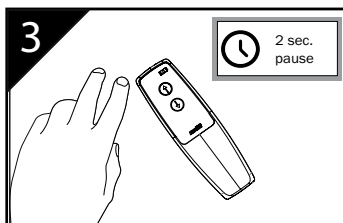

Vänta i ca 2 sek.

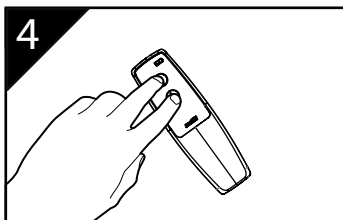

Tryck ner båda knapparna och håll tryckta i ca 4 sek.:
Första pipet(-n) – släpp knapparna.
Kontrollindikatorns ljus har SLÄCKTS – återställning genomförd.