

Imbracature Molift

Ispezione periodica

Ai sensi della norma ISO:10535

molift[®]
by Etac

PI40006 Rev A 2025-09-08

Ambito

Eseguire un'ispezione periodica almeno ogni 6 mesi. Può essere necessaria un'ispezione più frequente se l'imbracatura viene utilizzata o lavata più spesso del normale. L'ispezione deve essere eseguita da personale in possesso di adeguata formazione. Utilizzare questa lista di controllo per individuare segni di danni, usura o potenziali guasti. Verificare che l'imbracatura sia sicura da usare fino alla successiva ispezione periodica. Il registro delle ispezioni deve essere conservato in un luogo sicuro per poter essere esaminato in caso di incidente.



Distruggere e gettare le imbracature vecchie e danneggiate che non superano l'ispezione.

Informazioni sul prodotto (in caso di più imbracature utilizzare l'elenco alla pagina successiva):

Modello
imbracatura:

(es. RgoSling
HighBack


Cod. articolo:

Misura: ☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M
☐ L ☐ XL ☐ XXL

N. di serie:

Lista di controllo

OK	Non superato	N/A	
☐	☐		1. Etichetta prodotto È possibile leggere: carico massimo (SWL), codice articolo, numero di serie, misura, simboli di lavaggio.
☐	☐		2. Tessuto Assenza di strappi o sfilacciature, bruciature, fori, variazioni di colore, cattivi odori o altri segni di usura.
☐	☐	☐	3. Imbottitura Assenza di restringimenti, materiale sfuso, puntini o pieghe.
☐	☐		4. Cuciture Assenza di fili allentati o cuciture/punti danneggiati.
☐	☐	☐	5. Cinghie di sollevamento e copribordi Assenza di strappi o sfilacciature, smagliature, bruciature o altri segni di usura.
☐	☐	☐	6. Impugnature di guida e tasche Assenza di strappi, sfilacciature o punti allentati.
☐	☐	☐	7. Dettagli Chiusure, fibbie o anelli non presentano danni o crepe.
☐	☐		8. Manuale utente Il manuale utente è disponibile (i manuali utente possono essere scaricati dal sito www.etac.com).

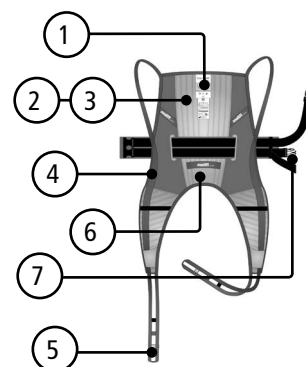

Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com


Approvato da:

Controllare tutti gli 8 punti della lista di controllo. Se uno o più punti sono difettosi, l'imbracatura non è approvata per l'uso.

Data:

Nome ispettore:
(in stampatello)

Firma

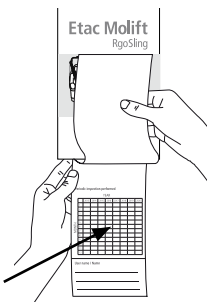

Utilizzare un pennarello indelebile o un perforatore per contrassegnare l'etichetta dell'imbracatura con la data dell'ispezione eseguita. La prossima ispezione deve essere eseguita entro 6 mesi da questa data.

Elenco di informazioni sui prodotti

Modello imbracatura: (es. RgoSling Toilet lowback)	Cod. articolo:	Misura:	N. di serie:	OK	Non OK
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐
.....		☐ XXS ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL		☐	☐



Distruggere e gettare le imbracature vecchie e danneggiate che non superano l'ispezione.