


Prüfliste für die periodische Inspektion (DE)

Gemäß ISO:10535

PI61002 Rev. A 2022-06-24

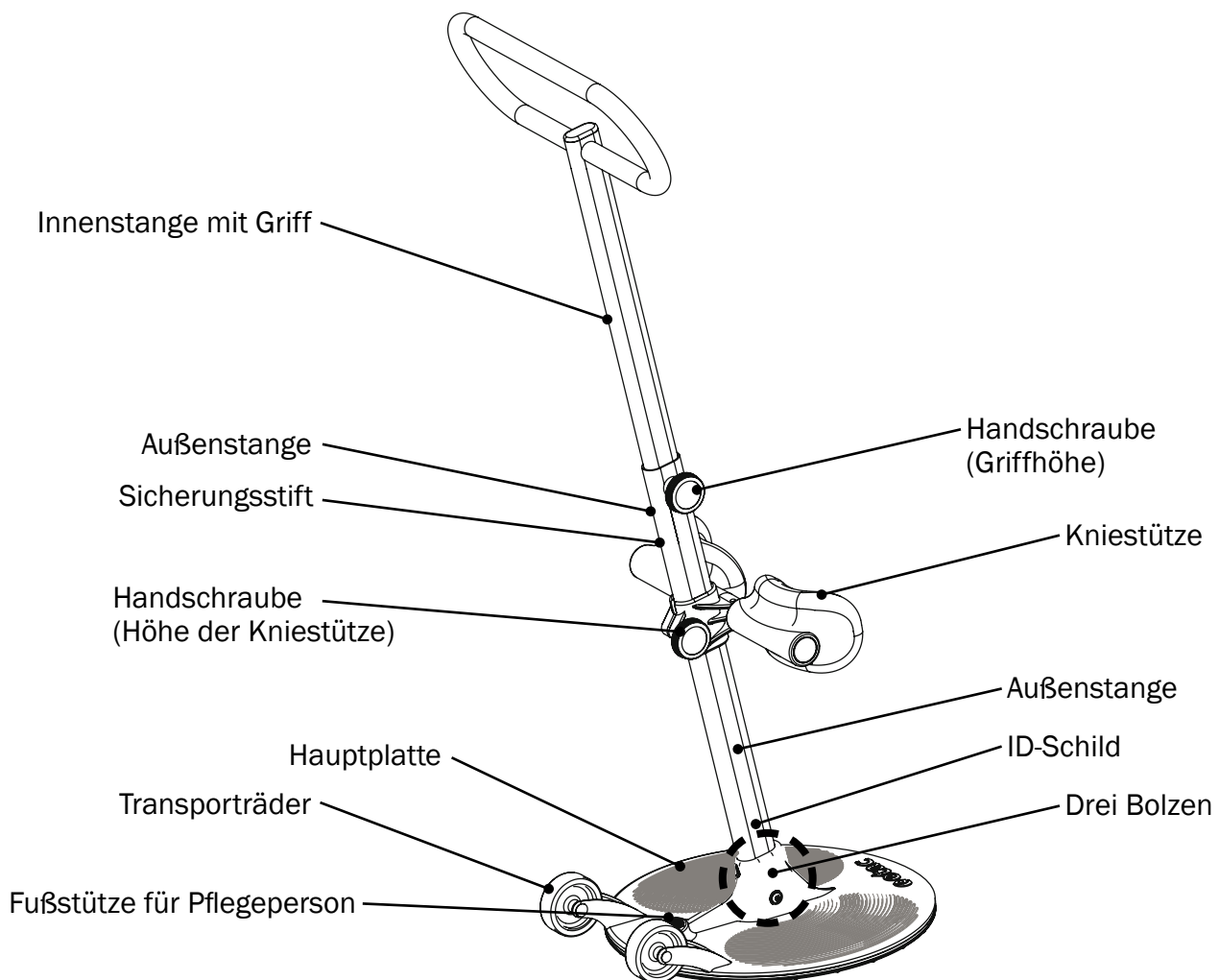

Produktschild, mit Kurzanleitung

The product label features four numbered diagrams: 1. A person sitting on a chair using the device. 2. A person standing and using the device. 3. A person in a wheelchair using the device. 4. A person using the device with a large 'X' over it, indicating it is not to be used. Below the diagrams are the brand names 'Turner Pro' and 'etac'. There is an information icon, a pH scale (min 5, max 9), a temperature gauge (max 70°C, 10 min), a QR code, and a large number '55'. At the bottom, it shows a maximum weight of 200 kg (441 lbs) with a silhouette of a person.

Nenntragfähigkeit

ID-Schild

The ID label contains a barcode and the following text: (01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX. It includes fields for REF (ABCDEFGHIJ), SN (XXXXXX), and a production date (YYYY-MM-DD). There is also a logo for Etac A/S, Parallelvej 3, DK-8751 Gedved, www.etac.com, and a CE mark with 'MD'.

Seriennummer Artikelnummer Produktionsdatum

Eine Kopie dieses Dokuments ist unter www.etac.com abrufbar.

Scannen Sie den QR-Code auf dem Produktschild, um zur Produkt-Webseite zu gelangen. Die Gebrauchsanleitung finden Sie im Abschnitt „Dokumente“.

Artikelnummer (siehe ID-Schild):

.....

Seriennummer (siehe ID-Schild):

.....

Produktionsjahr:

.....

Eigentümer:

.....

Nutzungsumgebung

- Wohnung
- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Sonstiges

Die periodische Inspektion muss von einer geeigneten Person durchgeführt werden, die ausreichend qualifiziert und mit der Konstruktion, Verwendung und Pflege der Aufstehhilfe vertraut ist.

Molift empfiehlt, alle Beobachtungen und Bemerkungen zur Aufstehhilfe zusammen mit dem Datum der Inspektion und dem Namen des Technikers in das Wartungsbuch einzutragen.

Sichtprüfung



Sichtprüfung der Tragekonstruktion, um Schäden, Risse, Brüche und Verformungen auszuschließen. Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um die Aufstehhilfe zur weiteren Verwendung freizugeben.

bestanden abgelehnt

Griff
Innenstange
Außenstange
Fahrgestell
Schilder
Kniepolster
Räder
Hauptplatte
Schweißstellen
Gebrauchsanleitung / Benutzerhandbuch ist vorhanden / verfügbar

Funktionsprüfung



Prüfen Sie die FUNKTION und kontrollieren Sie auf Verschleiß und Beschädigung. Alle Prüfpunkte müssen kontrolliert werden, um die Aufstehhilfe zur weiteren Verwendung freizugeben.

bestanden abgelehnt

Räder
Drei Schrauben am Fußteil sind angezogen
Handschraube, Griffhöhe
Handschraube, Höhe der Kniestütze
Funktion der Hauptplatte Funktionstest mit einer auf der Hauptplatte stehenden Person

Durchgeführt von

Vollständiger Name:

.....

Datum, Ort:

.....

Unterschrift:

.....

Ohne Beanstandungen abgenommen

Nächste Inspektion

(JJJJ / MM):/.....

Kennzeichnen Sie die Aufstehhilfe als „defekt“ und lassen Sie diese reparieren.

Die Aufstehhilfe ist irreparabel und muss stillgelegt werden.

Werden bei der periodischen Inspektion Mängel, Verschleißerscheinungen oder sonstige Schäden festgestellt, welche die Sicherheit des Patienten gefährden, darf die Aufstehhilfe nicht benutzt werden, bis der Mangel behoben ist.




Benachrichtigen Sie den Eigentümer.



Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss diese Unterlage oder eine Kopie davon im Wartungsbuch des Besitzers abgelegt werden.

Bringen Sie bei Abnahme ohne Beanstandungen eine Prüfplakette an und kennzeichnen Sie diese mit Monat und Jahr der **nächsten** Inspektion. Verwenden Sie zur Bestellung der Plakette die Artikelnummer 1100306.

Kennzeichnen Sie die Plakette mit Monat und Jahr der nächsten Inspektion.

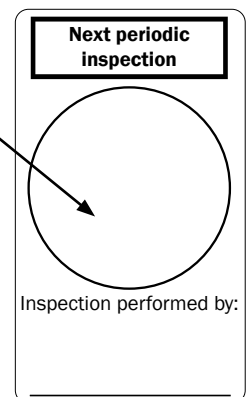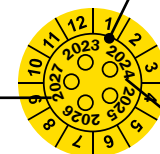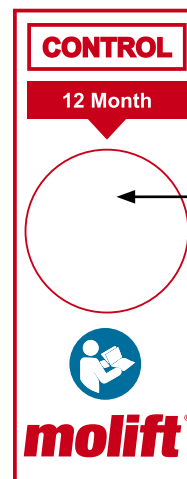

Anmerkungen und Beobachtungen

.....