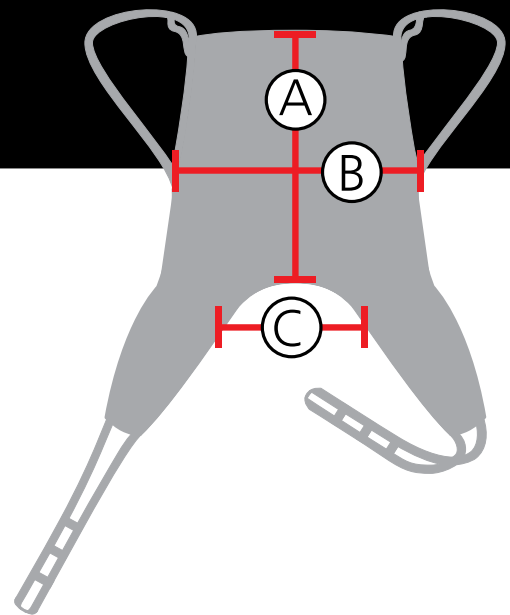


UTPRØVING AV LØFTESEIL

MOLIFT RgoSling



Min referanseliste

Alle våre løfteseil kommer i flere ulike størrelser. Seilene kan deles i ulike grupper, og ved å selv prøve en av hver type er du bedre forberedt ved utprøving av seil.

Ved å teste de forskjellige seiltypene får du en oppfatning av hvilke egenskaper de forskjellige modellene har.

Test også hvilken størrelse du selv bruker, og noter den i skjemaet.

Når du har testet og vurdert de forskjellige løfteseilene er du godt forberedt til dine individuelle utprøvinger med brukere.

Mitt navn

.....

VEKTANBEFALINGER

Dette er anbefalinger, en bedømmelse gjøres i hvert enkelt tilfelle.

STØRRELSE	FARGE-KODE	ANB. PERSON-VEKT (KG)
XXL	Hvit	230–300
XL	Blå	160–240
L	Grønn	90–160
M	Gul	45–95
S	Rød	25–50
XS	Lyseblå	17–25
XXS	Rosa	12–17

GUIDE FOR SEIL MED DELTE BENSTØTTER

A. Støtte i ryggen

LowBack gir støtte til midjehøyde.

MediumBack gir støtte til skulderhøyde.

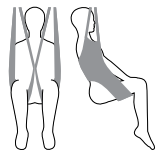
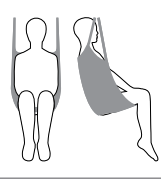
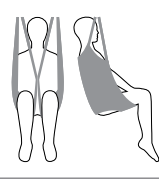
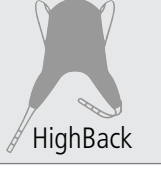
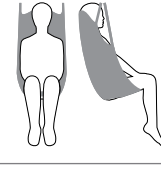
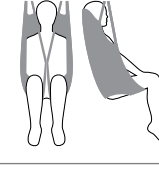
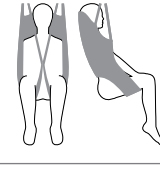
HighBack gir støtte også for hodet.

B. Benstøtteåpning

Smal benstøtteåpning. Seilet går ned til halebeinet. Når benstøttene overlappes får brukeren maksimalt med støtte/ liten åpning ved baken.

Normal benstøtteåpning Seilet plasseres ned til halebeinet. Basismodell.

Stor benstøtteåpning Seilets nederkant plasseres i høyde med hoftebenskammen noe som gir en stor åpning og enkel tilgjengelighet i for eksempel toalettsituasjoner.

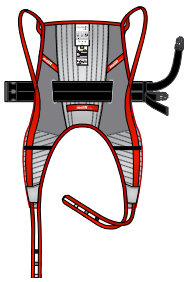
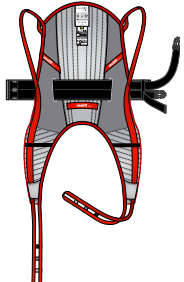
B. BENSTØTTEÅPNING			
	Smal	Normal	Stor
A. STØTTE I RYGGEN	 LowBack		 
	 MediumBack	 	INGEN PRODUKTER
	 HighBack	 	

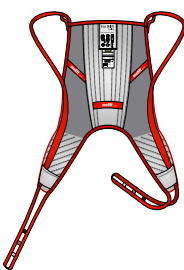
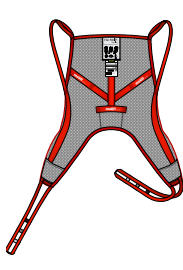
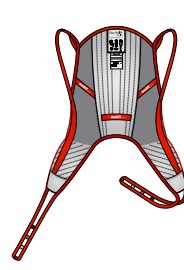
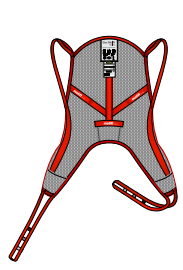
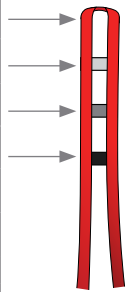
GJØR DETTE

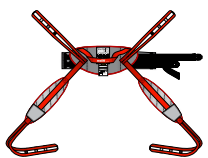
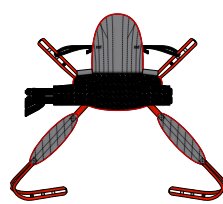
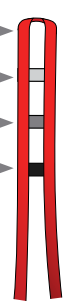
- Ring inn størrelsen som passer deg.
- Kryss av for høydeinnstillingene der det trengs (grå felt).
Hvert seil har forskjellig innstilling.

Egne notater

SEIL MED DELTE BENSTØTTER

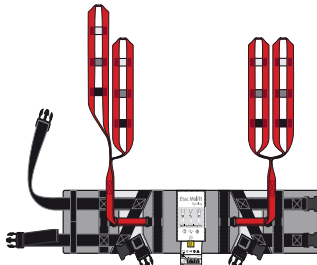
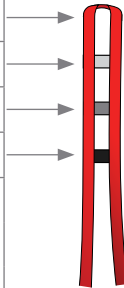
SEIL MED SMAL BENSTØTTEÅPNING		STØRRELSER	HØYDEINSTILLING FOR BENSTØTTER	
		XX-Large		
		X-Large	Rød	
		Large	Lysgrå	
		Medium	Mørkgrå	
		Small	Svart	
		X-Small		
		XX-Small		
RgoSling Amputee MediumBack	RgoSling Amputee HighBack			

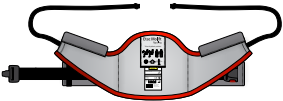
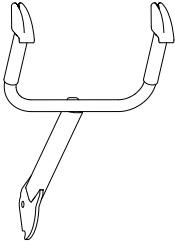
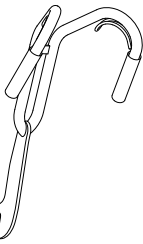
SEIL MED NORMALSTOR BENSTØTTEÅPNING				STØRRELSER	HØYDEINNSTILLING BENSTØTTER
				XXL	
				XL	
				L	
				M	
				S	
				XS	
				XXS	
RgoSling MediumBack	RgoSling HighBack				
Polstret	Nett	Polstret	Nett		

SEIL MED STOR BENSTØTTEÅPNING		STØRRELSER	HØYDEINNSTILLING ØVRE BÅND	HØYDEINNSTILLING BENSTØTTE
		XXL		
		XL	Rød	
		L	Lysgrå	
		M	Mørkgrå	
		S	Svart	
		XS		
		XXS		
RgoSling Toilet LowBack	RgoSling Toilet HighBack			

SEIL UTEN DELTE BENSTØTTER

HELSEIL		VELG STØRRELSE	HØYDEINNSTILLING BENSTØTTE		
					
			Rød		
	Large		Lysgrå		
	Medium		Mørkgrå		
	Small		Svart		
	RgoSling Comfort Highback		Kryss for rett innstilling		

SEILE FOR STØTTE OG TRENING	VELG STØRRELSE	HØYDEINNSTILLING BENSTØTTE		
				
	X-Large	Rød		
	Large	Lysgrå		
	Medium	Mørkgrå		
	Small	Svart		
	X-Small			
Molift RgoSling Ambulating Vest	XX-S	Kryss for rett innstilling		

SELE FOR MOLIFT QUICKRAISER		VELG STØRRELSE	VALG AV BØYLE	
		XL		
		L		
		M		
		S		
		XS		
Molift RgoSling StandUp	Molift RgoSling StandUp med support		U-formet bøyle	V-formet bøyle

Etac AS
 Bråtengt. 66
 Pb. 249, 1501 Moss
 Telefon 815 69 469 • Faks 69 27 09 11
 hovedkontor.norge@etac.com • www.etac.no


 Skaper muligheter