

## EliRamp terskeleliminator

EliRamp er en terskeleliminator produsert av 100% resirkulert materiale, bestående av granulat fra brukte bildekk. Den er lett å montere, lydløs i bruk og meget slitesterk. Den har påkjøring fra én side og avrundede kanter, som gjør den enkel i bruk for alle som skal forsere dørterskler og andre hindringer. Den fungerer utmerket ved bredere døråpninger og justeres lett ved smalere døråpninger.

### Lydløs og sklisikker

EliRamp er fullstendig lydløs og fyller alle krav til sklisikkerhet. Friksjon i gummi-overflaten kombinert med produktets vekt gjør at den i de fleste tilfeller kan monteres uten bruk av festemidler.



### Holdbar overalt og ingen skarpe kanter

EliRamp kan brukes på alle slette underlag, ute som inne, og skader ikke gulvbelegg eller andre flater. Den tåler ubegrenset med vekt og er holdbar i svært lang tid. EliRamp har ingen skarpe kanter som kan gi personskade eller punktere dekk. EliRamp leveres med 10 års garanti.



### Alltid korrekt stigningsforhold

EliRamp har et stigningsforhold på 1:8 som er vanlig anbefalt ved terskeleliminering. Derfor varierer EliRamp i dybde etter produktets høyde. Stigningsforholdet forblir uforandret ved høydejustering. EliRamp leveres i 7 standardmoduler som dekker alle terskelhøyder mellom 1,5–12,5 cm. Alle kan trimmes i bredde og dybde, 6 av modulene kan justeres i høyden. På rampens bakside er det ett eller flere prefabrikerte vertikale spor beregnet for kutting med tapetkniv, håndsag eller elektrisk stikksag.

Høyden reduseres med 0,5 cm for hvert spor som kuttes av. Stigningsforhold forblir uforandret. Kombinasjonen av vekt og sklisikkerhetgjør at EliRamp i ligger stabilt. Om nødvendig kan den festes til underlaget med lim eller dobbeltsidig tape.

### 7 standardmoduler, 6 kan justeres i høyde

Beskrivelse EliRamp	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Høyde (mm)	Art.nr.	HMS nr.
125 mm	900	1000	125	ER125	170087
Kuttspor på bakside	900	960	120		
Kuttspor på bakside	900	920	115		
Kuttspor på bakside	900	880	110		
Kuttspor på bakside	900	840	105		
100mm	900	800	100	ER100	170088
Kuttspor på bakside	900	760	95		
Kuttspor på bakside	900	720	90		
Kuttspor på bakside	900	680	85		
Kuttspor på bakside	900	640	80		
75mm	900	600	75	ER75	170089
Kuttspor på bakside	900	560	70		
Kuttspor på bakside	900	520	65		
Kuttspor på bakside	900	480	60		
Kuttspor på bakside	900	440	55		
50mm	900	400	50	ER50	170090
Kuttspor på bakside	900	360	45		
Kuttspor på bakside	900	320	40		
35mm	900	280	35	ER35	170091
Kuttspor på bakside	900	240	30		
25mm	900	200	25	ER25	170092
Kuttspor på bakside	900	160	20		
15mm	900	120	15	ER15	170093

