



R82[®]

R82 Flamingo High-low

En modern och bekväm dusch- och toalettstol för barn.

R82 Flamingo High-low

R82 Flamingo High-low är en flexibel och justerbar dusch- och toalettstol för barn.

Passar alla badrum

Funktionerna är anpassade för flera ändamål, och produkten är designad för att användas antingen fristående i duschen eller över en toalettstol. R82 Flamingo High-low är framtagen för att eliminera dålig sittställning och samtidigt ge hjälparen en bra arbetsmiljö.

Enkel höjdjustering och tilt med användaren i sitsen

R82 Flamingo High-low har en steglös höjdjustering från 53 till 74 cm i sitshöjd och en steglös vinkeljustering - tilt in space - mellan -5° till 20°. Båda justeras enkelt med en fotpedal.

De enkla justeringarna ger en ergonomisk arbetsställning vilket gör det enkelt att utföra hygien- och badsituationer för hjälparen. För extra assistans vid justeringarna finns ett handtag som tillbehör.



Storlekar

R82 Flamingo High-low, sits och underrede, finns i fyra storlekar vilket gör det enkelt att hitta rätt storlek till barnet. Dessutom finns möjligheten att uppgradera storleken kontinuerligt i takt med att barnet växer. Sitsen kan bytas från stl 1 till stl 2 och från stl 3 till stl 4 med befintligt underrede.

Flamingo High-low komplett

- Stl 1	31880401
- Stl 2	31880402
- Stl 3	31880403
- Stl 3 inkl. ryggförstärkning	31885503
- Stl 4	31880404
- Stl 4 inkl. ryggförstärkning	31885504

Flamingo High-low underrede

- Stl 1	31880411
- Stl 2	31880412
- Stl 3	31880413
- Stl 4	31880414

Chassi

Rostfritt stål, justerbart i höjdlöd och hopfällbart.

Art.nr

Sittenshet

Vit ABS plast, sits och rygg vinklas individuellt, Tilt-in-space

Mjukdyna

Grå PUR, sits och rygg

Stänkskydd

Grå PUR hög modell

Fotstöd

Justerbart i höjdlöd och vinkel, uppfällbart

Hjul

75 mm massiva låsbara, plast, svängbara



Detaljer



Enkel höjjustering

Steglös höjjustering från 53 till 74 cm i sitshöjd. Justeras enkelt med användaren i sitsen och underlättar vid förflyttning till/från stolen.



Optimal positionering

Flamingo High-low erbjuder enkel vinkeljustering av både rygg och sits. Detta gör det enkelt att placera användaren med knäna högre än höfterna över toaletten.



Enkel Tilt in space

Steglös justering i vinkel – tilt in space– mellan -5° till 20°. Justeras enkelt med fotpedal som är utrustad med säkerhetslås för extra säkerhet.





Passar alla sitsar

Flamingo High-low underredet finns i två storlekar och passar tillsammans med samtliga befintliga Flamingo sitsar.

Mått och vikt

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Sitsbredd (A)	240 mm	280 mm	320 mm	340 mm
Sitsdjup (B)	250 mm	290 mm	350 mm	400 mm
Rygghöjd (C)	350 mm	380 mm	420 mm	470 mm
Underbenslängd (D)	200–250 mm	230–340 mm	300–420 mm	300–420 mm
Sitshöjd över golvet (E)	530–740 mm	530–740 mm	530–740 mm	530–740 mm
Ryggbredd (F)	200 mm	220 mm	260 mm	280 mm
Totalbredd (G)	500 mm	500 mm	570 mm	570 mm
Underredets längd (H)	640 mm	640 mm	760 mm	760 mm
Total höjd (I)	860–1080 mm	920–1110 mm	940–1170 mm	1020–1200 mm
Sits, totalbredd	350 mm	380 mm	430 mm	480 mm
Sits, totaldjup	260 mm	315 mm	360 mm	425 mm
Sits, totalhöjd	400 mm	430 mm	480 mm	510 mm
Vinkling av rygg	-90° – +30°	-90° – +30°	-90° – +30°	-90° – +30°
Vinkling av sits (tilt in space)	-5° – +20° *	-5° – +20°	-5° – +20°	-5° – +20°
Vinkling av fotplatta	90°–75°	90°–75°	90°–75°	90°–75°
Vikt, total	14 kg	14.5 kg	16.5 kg	17 kg
Vikt, underrede	11.5 kg	11.5 kg	12.5 kg	12.5 kg
Vikt, sits	2.5 kg	3 kg	4 kg	4.5 kg
Max brukar- /lastvikt, total	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Max brukar- /lastvikt, underrede	37.5 kg	53 kg	64 kg	74.5 kg
Max brukar- /lastvikt, sits	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Rek. brukar- /lastvikt vid manövrering	35 kg	35 kg	55 kg	55 kg

* -5° uppnås vid 55 cm sitshöjd över golvet.

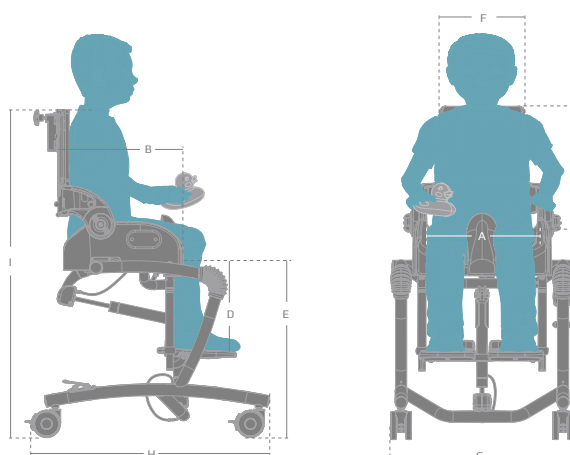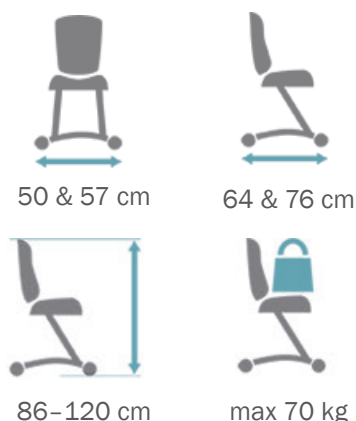

Tillbehör

22 april 2021



Handtag

För extra assistans vid höjdjustering och tilt in space.

Stl 1-2, 24 cm

31880110-HL

Stl 3-4, 31 cm

31880110-HLL



Vadband

För extra stöd och komfort.

Stl 1-4, 10x106 cm (HxL)

31880199



Potta med hållare

För användning i eller utanför badrummet.

Stl 1, 21x18 cm (DxH)

31880121-HL

Stl 2, 21x18 cm (DxH)

31880122-HL

Stl 3, 31x18 cm (DxH)

31880123

Stl 4, 31x18 cm (DxH)

31880124



Huvudstöd

För korrekt placering och stöd av huvudet vid tiltning. För alternativ av huvudstöd, se vår hemsida etac.se



Stänkskydd, nedre med hållare

För användning över toaletten.

Stl 1, 21 cm (D)

31880121-PR

Stl 2, 21 cm (D)


31880122-PR

Stl 3, 31 cm (D)

31880123-PR

Stl 4, 31 cm (D)

31880124-PR.

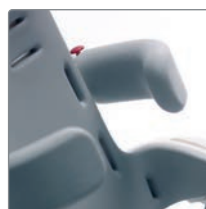

Bålstöd, sidosvängbara

För ytterligare stöd och säkerhet. För alternativ av bålstöd, se vår hemsida etac.se.

För fler tillbehör till R82 Flamingo High-low, se våra hemsida www.etac.se.



För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities