

SÅ AVGJORT BEDRE



## Libra

Lavsengen for moderne pleie



# Libra – pleiesengen for mer mobilitet, sikkerhet og trivsel

Moderne  
Alternative  
Sidegrinder

Vario  
Safe

Frihet og fleksibilitet, dette er fordelene som Libra tilbyr. Denne pleiesengen kan tilpasses de ønskene som både pasienter og pleiepersonell måtte ha, ned til minste detalj. Den sørger for at pleietrengende mennesker opplever både trygghet og komfort, samtidig som den virker stimulerende på deres mobilitet.

Våre innovative Vario-Safe sidegrinder er et vesentlige bidrag til dette. Med Vario Safe kan du bare på få sekunder ta av den delte sidegrinden, hode og fot gavel og panelene og sette dem på igjen. På denne måten kan pleieren mestre pasientens skiftende behov i enhver situasjon.

Med attraktive tredekorer eller stoffpolstringer forener Libra den komforten og elegansen et godt hotell byr på med den tryggheten et hjem gir. Takket være Vario Safe kan denne pleiesengen tilpasses enhver smak.



## Libra – standard

- høydejustering:  
ca. 25 – 80 cm
- Lavseng til forebygging:  
Beskyttelse uten tiltak som  
begrenser friheten
- Attraktive former, dekor og  
polstringsvarianter

Side 4



NB!  
Tilbudt med  
hel sidegrind

## Libra – variant movo

- høydejustering:  
ca. 28 – 83 cm
- Enda bedre kjøreegenskaper:  
lett manøvrering i trange rom
- Pleiepasienter kan lettere ta del  
i hverdagen i en mobil seng

Side 6



## Libra – variant gulfri Plus

- høydejustering:  
ca. 25 – 80 cm
- Understell uten langsgående avstivere:  
bedre plass for å komme til under sengen
- Enklere hygiene takket være lettere  
rengjøring av gulvet

Side 7



## Libra partner

- høydejustering:  
ca. 25 – 80 cm
- Fleksibel dobbeltseng:  
sove sammen eller adskilt
- Høy sikkerhet takket være synkron  
bevegelse av sengekroppen

Side 8

## Innhold

4 Libra – standard

6 Libra – variant movo

7 Libra – variant gulfri Plus

8 Libra partner

12 Fleksible sidegrinder

14 Libra med Vario Safe

16 Alltid den riktige høyden

18 Komfort som på et godt hotell

19 Liggeflater

20 Økonomisk med lavt strømforbruk

21 Intuitiv betjening

22 Sengeforlengelse

23 Tilbehør

24 Utstyr og tilvalg

26 Stiegmeyer-gruppen







Lavseng

**Vario  
Safe**

## Libra – standard

Skreddersydd

for individuelle krav

Pleietrengende må beskyttes så godt som mulig mot fall. Samtidig er en uinnskrenket mobilitet meget viktig for velvære og opprettholdelse av personens fysiske forfatning. Med den delte sidegrinden, som er tilgjengelig som tilvalg, tilbyr Libra som **lavseng** en høy grad av sikkerhet og samtidig full bevegelsesfrihet. Den laveste posisjonen på bare 25 cm minimerer faren for fallskader, den delte sidegrinden som er plassert på øvre del gir plass til å komme seg inn og ut av sengen. Dermed følger vi filosofien **Werdenfels-tilnærming**, som går ut på å unngå på tiltak som berøver de pleietrengendes frihet.


- stort høydejusteringsområde på ca. 25 – 80 cm for fallforebygging og skåne ryggen under pleie
- som tilvalg **delte sidegrinder** for individuelle beskyttelse i enhver situasjon
- **trivelig utseende** takket være et utvalg av gavler, tredekorer og polstringer
- om man ikke ønsker delt sidegrind eller overhodet ingen sidegrind montert, så muliggjør vårt **Vario-Safe-system** en rask fjerning av sidegrindselementene, gavler og panelene



▲ Modell Libra med delt sidegrind gir individuell beskyttelse.

◀ Med det fleksible Vario-Safe systemet er en individuell kombinasjon av sidegrindselementer, paneler og gavler mulig.

Utvendige mål/høydejusteringsområde:

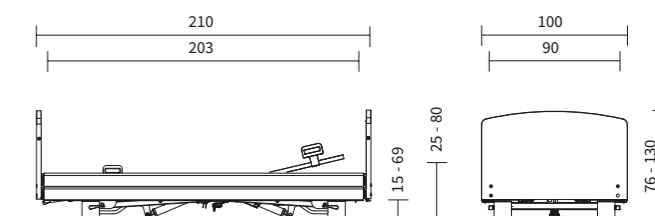





Delta i hverdagslivet igjen med modellvarianten movo.



Modellvariant gulvfri Plus gir gulvmoppen eller støvsugere uhindret under sengen.

## Vario Safe **Libra – variant movo**


Spesielt lett å kjøre, for en aktiv hverdag

Varianten movo av modell Libra overbeviser med sin særlig **gode kjørbarehet**. Manøvrering i trange rom og i fellesrom eller transport av sengen til ett annet sted i huset blir på denne måten vesentlig lettere. Pleiere **avlastes**, faren for kollisjonsskader synker. Den gode kjørbareheten som varianten movo kan skilte med, gjør det dessuten mulig for sengeliggende å ta del i det daglige liv – sengen kan enkelt trilles til aktivitetsrommet eller ut på terrassen.



- 100-mm-dobbelthjul med svært gode kjøreegenskaper
- Sentrallås for hjulene er standard
- stort høydejusteringsområde på ca. 28 - 83 cm

Utvendige mål/høydejusteringsområde:

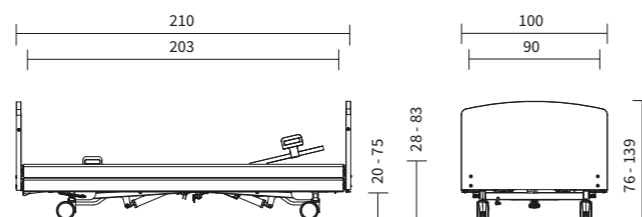

## Vario Safe **Libra – variant gulvfri Plus**

Gulvfrihet for en enklere hygiene


En grundig og **sikker hygiene** er svært viktig innen institusjonspleie – for å bekjempe smittestoffer og allergier og samtidig sørge for en trivelig atmosfære. Her er det ingen plass hverken for smuss eller hybelkaniner under sengen. Modellvarianten gulvfri Plus har et spesielt åpen understell, uten metallstenger på langsiden. Dette gjør en **grundig rengjøring** av gulvet lettere – gulvaskere og langkoster gir uhindret under sengen.

- stort høydejusteringsområde på ca. 25 - 80 cm
- optimal **tilkomst under sengen** for personløftere
- **8 hjul** sørger for lett manøvrerbarhet



▲ Med sine 8 hjul er det utrolig lett å manøvrere sengen.

Utvendige mål/høydejusteringsområde:

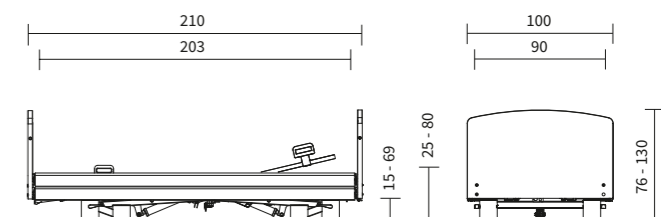





Med Libra partner nyter par i pleiehjem en ny livsfølelse.


## Libra partner

Dobbeltsengen for et verdig partnerskap også i høyere alder

Når par flytter på pleiehjem eller finner hverandre på nytt der, så er spørsmålet om de skal sove sammen eller adskilt. Med vår Libra partner har du en **fleksibel løsning** til enhver situasjon. Dobbeltsengen oppfyller alle krav som pleie stiller like suverent som Libra enkeltsengene. Samtidig kan de skilles i sine halvdeler og f.eks. plasseres ved tverrgående vegger i rommet. **Personlige ønsker** som partnerne måtte ha, kan etterkommes på lik linje med medisinske behov som gjør det nærliggende med en romslig adskillelse om natten.

- stort høydejusteringsområde på ca. 25 - 80 cm
- delt sidegrind med Vario-Safe system som tilvalg

Utvendige mål/høydejusteringsområde:

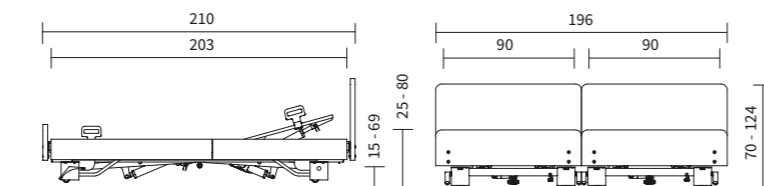

## Komfort og sikkerhet klokt kombinert

Ved konstruksjonen av Libra partner har vi lagt stor vekt på å tilby individuell komfort til de to brukerne, samtidig som det sørges for **optimal beskyttelse**. Rygg- og bendelene i de to liggeflatene kan justeres enkeltvis, slik at eksempelvis den ene partneren fortsatt kan lese, mens den andre allerede sover. I tillegg er hver sengehalvdel utstyrt med en **egen håndkontroll**.

Derimot beveger sengekroppen seg alltid **synkront** under høydejustering og når den tiltes. På denne måten unngås sprekk mellom liggeflatene, der pleiepasientene kan klemme seg.

De to liggeflatene kan justeres enkeltvis, slik at partnerne kan sove, lese eller se på fjernsyn parallelt.



▲ Sengehalvdelene kan enkelt skilles og settes sammen igjen – på denne måten er også pleie ved sengen tilgjengelig fra begge sider.



▲ For begge liggeflatene er en separat håndkontroll tilgjengelig.

### SÅ AVGJORT BEDRE Sitteposisjonen

Elektrisk justerbare dobbeltsenger er ofte bare enkeltsenger som står ved siden av hverandre og som har liten funksjonalitet. Vår Libra partner overbeviser derimot som en av de få modellene med tiltfunksjonen, slik at den kan justeres til en komfortabel sitteposisjon. Dette støtter pustefunksjonen, gjør det lettere å innta måltider i sengen samt fremmer en aktiv hverdag for dialog med andre personer.







Dobbeltsengen for endring i behovet

Med Libra partner nyter du alle fordelene som Vario-Safe systemet har å by på. Du kan skifte ut polstrede gaveldeler med forskjellig tredekor og andre typer gavler akkurat som du ønsker, eller du kan ettermontere sidegrinder. Sengen utvikler seg videre etter brukernes behov og smak.



◀ Sidegrinder på øvre del gir beskyttelse og orientering uten å begrense friheten.



◀ Den høye fotgavel Nobla reha gir ekstra beskyttelse, f.eks. når sengen tiltes i komfort posisjon.



◀ Komplet polstret ser Libra partner ut som en elegant designerseng.

#### SÅ AVGJORT BEDRE

### Trivsel samtidig med støtte

Tilpass Libra partner til pleiepasientenes behov og deres smak.

- mange forskjellige tredekorer
- lettstelte polstringer med forskjellige stoff farger og syntetisk skinn som alternativ
- Det kan velges mellom to fotgavler: den lave Nobla mala for uhindret utsyn og den middels høye Nobla reha for ekstra beskyttelse
- Sidepaneler og delte sidegrinder kan kombineres etter behov





Som standard er sidegrindene integrerte og sørger for et diskret harmonisk utseende når nedsenket.



Den delte sidegrinden kan kombineres med koselige stoff paneler.



Midtstøtten til den delte integrerte sidegrinden kan enkelt tas av og stues bort i en innretning under sengen.

# Sidegrinder

Optimal balanse mellom beskyttelse og frihet

For alle modellvarianter av Libra har man valget mellom **tre sidegrindssystemer**, som tilfredsstillers pasientenes forskjellige behov på en fleksibel måte. Som standard er sengen utstyrt med **integrerte sidegrinder** på begge sider, disse gir en maksimal beskyttelse mot fall.

Skulle den pleietrengende kunne forlate sengen med sidegrinden montert, anbefales det et system med delte elementer. Ved den **delte integrerte sidegrinden** er tverrstengene på hode- og fotenden forsvarlig festet på en midtstøtte, som samtidig tjener pasienten som ergonomisk støtte til å stå opp. Som navnet allerede sier, kan den delte integrerte sidegrinden kombineres med en lang integrert sidegrind på motsatt side av sengen.

Elementene til den teleskopiske **delte sidegrinden** kan enkelt justeres oppover i to trinn.

I det første trinnet får pasienten en orienteringshjelp, og i det andre trinnet en heldekkende beskyttelse. Ved denne modellen oppfyller allerede elementene på øvre delen med lengde på 110 cm **standard kravene** som stilles til sidegrinder, da de dekker mer enn 50 % av liggeflaten.

Det **strømlinjede designet** til den delte sidegrinden er bevisst redusert til det nødvendige: Overflatene er utformet i en elegant blanding av **tredekor og metallic look**, og bak dem behøves det ingen ekstra sidepaneler. Dette gjør at sengen kan **rengjøres både lett og grundig**. Der hvor ingen sidegrindelementer er konfigurert, kan koselige paneler med tredekor eller stoff polstring settes inn i stedet. Alle elementene kan monteres og demonteres på få sekunder med **Vario-Safe systemet**.



▲ Den lange integrerte sidegrinden sørger for maksimal beskyttelse.



▲ En diagonal plassering gir pasienten støtte og orientering.



▲ Elementet på hodesiden og midtstøtten til den delte integrerte sidegrinden gir en beskyttelse som tilfredsstillers standard kravene.



▲ Den delte integrerte sidegrinden kan kombineres med den lange integrerte sidegrinden.



▲ Den delte sidegrinden kan kombineres med koselige paneler.



Vario Safe

▲ De fire elementene til den delte sidegrinden kan justeres enkeltvis oppover i to trinn.






# Libra med Vario Safe – den beste løsningen for sikkerhet etter standard kravene

Dersom du velger Libra med delt sidegrind eller uten sidegrind, kan du nyte fordelene med vårt fleksible system Vario Safe. Prinsippet til Vario Safe er like enkelt som det er fleksibelt: Sidegrinds elementer, sengegavlene samt sidepanelene kan settes på og tas av uten verktøy. Til dette er det brukt snapp låser som er enkle å betjene, som klikker sikkert i lås og som ikke kan nås av pasienten.

Gavler og paneler kan etter ønske leveres med koselige polstringer av stoff eller syntetisk skinn. Senger med Vario Safe kan tilpasses pasientenes skiftende behov på få minutter. Pleieinstitusjoner kan etter ønske bestille sine senger i en basisutførelse og senere når som helst supplere dem med ytterligere deler.

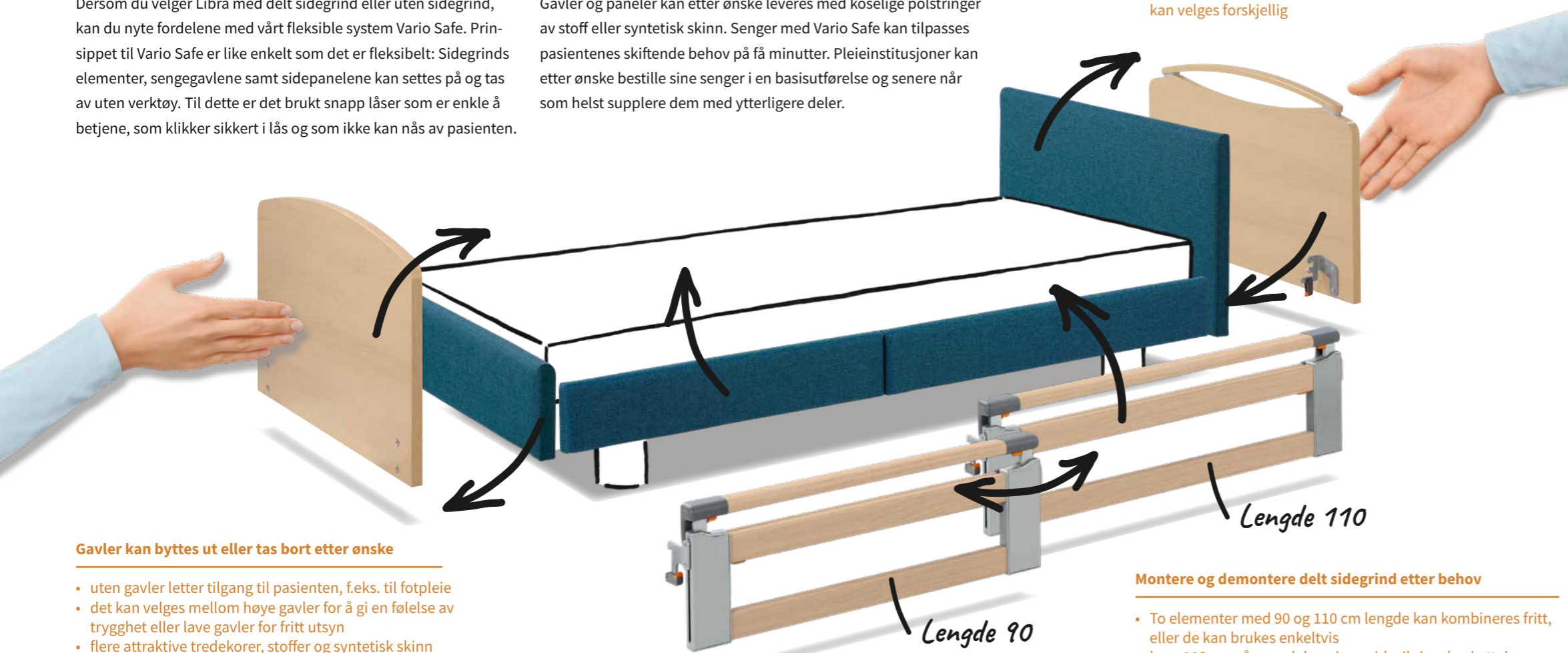

### Gavler kan byttes ut eller tas bort etter ønske

- uten gavler letter tilgang til pasienten, f.eks. til fotpleie
- det kan velges mellom høye gavler for å gi en følelse av trygghet eller lave gavler for fritt utsyn
- flere attraktive tredekorer, stoffer og syntetisk skinn kan velges

**! Sidegrindene kan kombineres etter ønske: 110/0 eller 90/110**

### Gavler med Vario Safe



## Modulært oppbygget og kan tilpasses uten bruk av verktøy


### Gavlene kan om ønsket byttes ut på få sekunder

- trivelige designvarianter, med eller uten håndgrep
- flere tredekorer, stoffer og syntetisk skinn tilvalg
- fargedesign på gavlene og sidepanelene kan velges forskjellig

### Montere og demontere delt sidegrind etter behov

- To elementer med 90 og 110 cm lengde kan kombineres fritt, eller de kan brukes enkeltvis
- bare 110 cm på øvre delen gir en sidesikringsbeskyttelse som tilfredsstillende standard kravene
- bare 90 cm på øvre delen gir en følelse av sikkerhet og orientering, og gir samtidig god plass til inn og utstigning av sengen

### Dekorer med Vario Safe

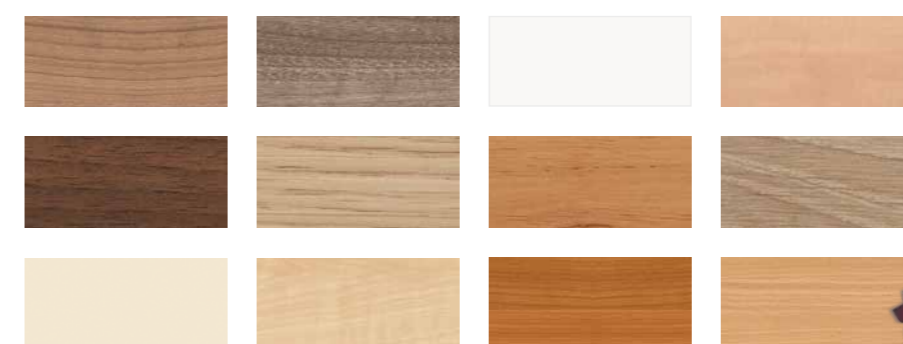

Informasjon om ytterligere stoffer og syntetisk skinn får du på forespørsel.

### SÅ AVGJORT BEDRE

## Mer fleksibilitet og sikkerhet med Vario Safe

Senger med Vario Safe oppfyller pasientenes skiftende behov for beskyttelse, og når det gjelder deres utseende, kan de tilpasses enhver smak. Den fleksible sidegrinden muliggjør en beskyttelse som tilfredsstillende standard kravene, uten at den pleietrengendes mobilitet begrenses.



▲ Alle Vario-Safe-elementene settes inn i sengerammen og festes med låser som er enkle å betjene.

▲ Trykk ganske enkelt låsen opp.



▲ Låsen klikker forsvarlig på plass - elementet er festet.

▲ For å løsne festet, trekker du den oransje sikringen mot deg og presser låsen ned.

Ved rengjøring av stoffene og det syntetiske skinnen må produsentens instruksjoner følges





Med dens lave høyde på ca. 25 cm bidrar Libra en effektiv fallforebygging uten å begrense pasientens mobilitet.

## Alltid den riktige høyden

### Fallforebyggende og ergonomisk pleie

Pleietrengende mennesker skal nyte godt av beskyttelse i Libra, uten at de derved må gi avkall på mobiliteten. En **lav sengehøyde** er et effektivt middel til fallforebygging, uten tiltak som begrenser friheten. Derfor kan Libra senkes ned til ca. 25 cm. Faren for å skade seg ved et fall så nær gulvet er liten. Pleiepersonellet, derimot, trenger en helt annen høyde: Her må det arbeides på hoftenivå for å avlaste ryggen. I denne situasjonen kan Libra heves opp til ca. 80 cm. høyde og gir på denne måten de beste forutsetningene for en **ergonomisk arbeidsstilling**.

Under høydejusteringen legger sengen automatisk inn et mellomstopp ved ca. 38 cm, takket være dens **3-stopp-funksjon**. På denne høyden kan pasienten problemløst gå inn og ut av sengen. Selvfølgelig gjør denne trinnløse justerbarheten til Libra det mulig å justere til enhver ønsket høyde, nøyaktig på centimeteren, for å oppfylle individuelle behov.

▼ Takket være dens 3-stopp-funksjon, legger sengen inn et mellomstopp ved ca. 38 cm – for mange mennesker er dette en ideell høyde til å gå inn i og ut av sengen.



#### SÅ AVGJORT BEDRE

### Trinnløst justerbar

- enkel justering til den ergonomisk mest gunstige inn- og utstigningsposisjonen med håndkontrollen
- enklere mobilisering av pasientene
- ryggbesparende arbeid ved sengen ivaretar pleiepersonellets helse
- fallforebyggende uten tiltak som begrenser friheten

► Hvis en gjenstand blokkerer sengens høydejustering, beveg sidegrinden i dens posisjon for å unngå skader.



▲ Gavler som lett lar seg fjerne muliggjør en lettere tilgang til pasienten, f.eks. til fotpleie.



▲ Med en høydejustering på inntil 80 cm kan pleiepersonellet til enhver tid arbeide ved sengen i en posisjon som skåner ryggen.





Komfortposisjonen egner seg ideelt for måltider eller til å se på fjernsyn.



▲ Med den justerbare ryggdelen er hverdagen alltid komfortabel.



▲ Med den sentrale hjullåsen, som er tilgjengelig som tilvalg, kan sengen bremses bare med en fotbevegelse.



▲ Komfort-liggeflaten består av 50 bevegelige fjærelementer.



▲ Stabil og fleksibel: metall-lamell-liggeflaten.



## Komfort og liggeflate

Livsglede som på et godt hotell

I Libra kan pleietrengende mennesker føle seg vel og trygge. Til dette bidrar de nøyaktige justeringsmulighetene for sengen i avgjørende grad. Det å kunne sitte avslappet, se på fjernsyn eller føre en samtale i øyehøyde – i Libra er alt dette mulig. Med et **komfort posisjon** på inntil 16° og en justering av ryggdelen på inntil 70° kan sengen forvandles til en komfortabel **lenestol**. På denne måten kan pasientene lettere ta del i det som skjer i hverdagen. Hvis situasjonen krever det, kan Libra som tilvalg kjøres i **Trendelenburg-posisjon**.

Sentralbremsen, som leveres som tilvalg, sørger for avlastning for pleiepersonellet: For å låse sengen helt, er det bare nødvendig å trå på bremsen med foten.

## En sunn og avslappende søvn

Masse komfort gir den firedelte **liggeflaten av metall-lameller** til Libra. Den er stabil og samtidig fleksibel. Justeringsmulighetene for ryggdelen og lårdelen gjør det enkelt å stille inn pasientens ønskeposisjon i enhver hverdagssituasjon. Metall-lamellene er utrolig enkle å rengjøre. Både komforten og hygienien kan forbedres gjennom alternative madrass flater, disse er tilgjengelige som tilvalg. **Komfort-liggeflaten** består av 50 individuelle fjærelementer. Disse elementene tilpasser seg nøyaktig til kroppen og bidrar til en god ventilasjon av madrassen. De svinger og sørger slik for en optimal trykkfordeling og minimerer skyvekrefter. Takket være komfortliggeflaten forsterkes trykksårforebygging. Den **hygieniske liggeflaten** av polypropylen er spesielt pustende på grunn av de dype ventilasjonsslissene. Den kan tas av og vaskes på en lettvinnt måte med vanlige rengjøringsmidler.

◀ Den pustende hygiene-liggeflaten sørger for et godt mikroklima.






## Økonomisk med lavt strømforbruk

Alle modellvariantene av Libra er som standard utstyrt med **ekstra lav spenning**. En ekstern transformator reduserer strømmen til 24 Volt direkte fra stikkkontakten, slik at ingen spennings-førende 230 Volt-komponenter befinner seg i nærheten av pasienten. Dette øker sikkerheten og hjelper til med å senke **energi-kostnadene** betydelig og samtidig beskytte miljøet.




Den eksterne transformatoren omgjør til ekstra lav spenning direkte fra stikkkontakten.

### SÅ AVGJORT BEDRE Innsparing av energi

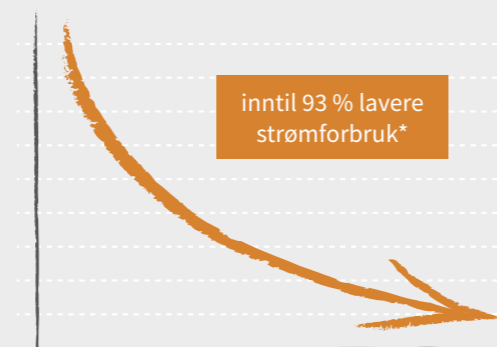

\* sammenlignet med 230-Volt-systemer ved ca. 5 justeringer per dag

### SÅ AVGJORT BEDRE Passer overalt

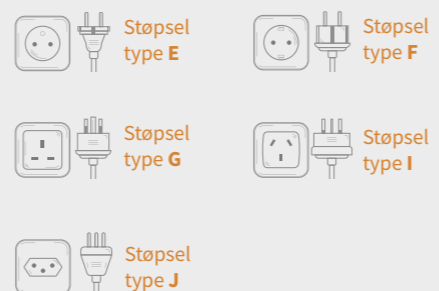

Vi tilbyr passende støpsler for mange internasjonale markeder. Benytt vårt 24-Volts system når som helst uten adapter.

## Intuitiv betjening

### Håndkontroll for individuelle krav

Alle justeringsmuligheter for Libra kan velges både enkelt og intuitivt med håndkontrollen. Den ligger lett i hånden og er ergonomisk formet. De store pilknappene og de klare og entydige piktogrammene gjør at selv pasienter med reduserte evner kan bruke den. Enkelte funksjoner kan imidlertid **sperras individuelt**. For å bruke sjokkleie (Trendelenburg), finnes det to forskjellige varianter: en standard håndkontroll med integrert Trendelenburg-knapp eller en separat Trendelenburg-håndkontroll, som utelukker faren for at pasienten aktiverer funksjonen ved en feil.

▼ For å utelukke at pasienten stiller inn sjokkleie utilsiktet, er en separat Trendelenburg-håndkontroll tilgjengelig (venstre). Den standard håndkontrollen (høyre) inneholder som standard ingen Trendelenburg-funksjon.

▼ Mulig er også en standard håndkontroll med integrert Trendelenburg-funksjon (knapp nede til høyre), denne bryteren er tilgjengelig som tilvalg.

▼ Ved hjelp av en holder på den delte sidegrinden er håndkontrollen alltid klar til bruk.





# Sengeforlengelse

Mer plass til lange pleiepasienter

I mange årtier nå har det vært slik at menneskene i gjennomsnitt blir stadig høyere – en utvikling som det i stadig økende grad må tas høyde for, også i pleiehjemmene. Med sengeforlengelsen for Libra, som leveres som tilvalg, skaffer du til enhver tid den plassen som trengs for å sørge for at pasienten kan ligge komfortabelt. Samtidig med kjøpet kan du konfigurere en ca. 20 cm. lengre seng, eller du kan **etterbestille** sengeforlengelsen senere.

Metall-elementet til forlengelse av sengerammen settes ganske enkelt inn på fotenden. For enhver type sidegrind kan det leveres en passende lengre grind eller panel. Hvis sengen er utstyrt med den


delte sidegrinden med Vario-Safe systemet, kan det plasseres **to 110 cm lange elementer** eller en 90 cm. lang sidegrind med et 130 cm langt panel. Med Vario Safe blir bruken av sengeforlengelsen i huset enda mer fleksibel og effektiv – alle elementer som behøves kan byttes fra den ene sengen til den andre, bare på få øyeblikk.

Til forlengelse av madrassen tilbyr Stiegelmeyer passende **madrass forlenger del**.

Sengeforlengelse:  
Sideelementene med  
forskjellige lengder til  
ethvert behov




Til en Libra med sengeforlengelse og Vario-Safe system kan det plasseres to 110 cm lange sidegrindselementer for hver sengeside. Også en 90 cm sidegrind med 130 cm sidepanel er mulig.

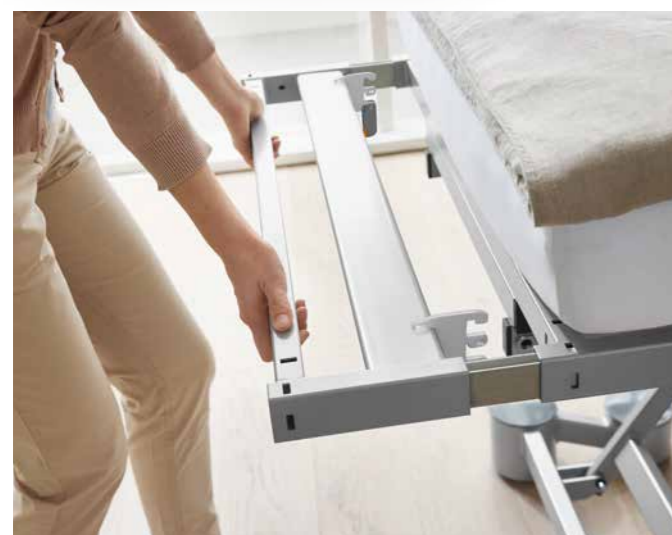

▲ Elementet til sengeforlengelse settes ganske enkelt inn i sengerammen.



▲ Til forlengelse av madrassen er en skreddersydd madrassdel tilgjengelig.

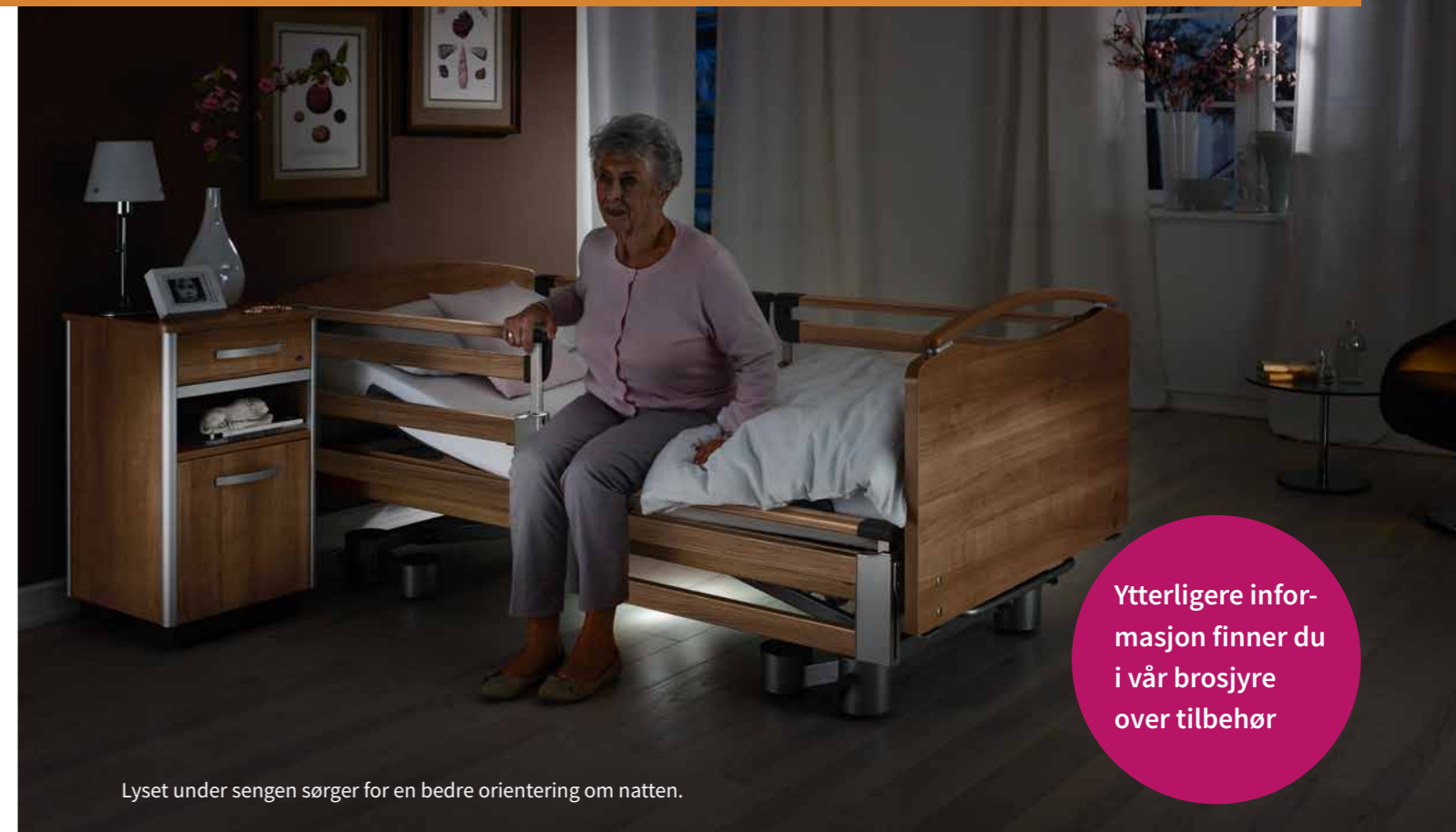

Lyset under sengen sørger for en bedre orientering om natten.

Ytterligere informasjon finner du i vår brosjyre over tilbehør

## Tilbehør

Med mer sikkerhet og komfort for din drømmeseng



▲ Leselampen Sola avgir et behagelig lys med liten varmeutvikling.



▲ Løftebøylen gjør posisjonering i sengen lettere.




▶ Sengetøyholder er meget praktisk, spesielt når man rer sengen



SÅ AVGJORT BEDRE

### Avstandsholderen

• veggavstandsholdere unngår støtskader med inventar og stikkontakter når sengen manøvreres

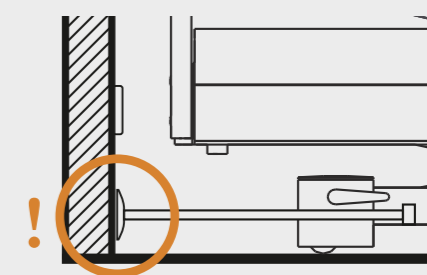

• mange forskjellige modeller tilgjengelig  
• buffere fanger opp støt  
• plater, som leveres som tilvalg, fordeler trykket jevnere – ideelt for gips vegger  
• størrelser som passer for sengen din



# Utstyr og tilvalg

Libra Movo med hele sidegrinder  
tilbudt Orkerød sykehjem

Modellvariant	Libra – standard	Libra – variant movo	Libra – variant gulvfri Plus	Libra partner
<b>Utførelse</b>				
4-søylers design	✓	✓	✓ (fot- og hodeende)	✓
<b>Mål og vekter</b>				
Utvendige mål ved – integrert delt sidegrind <sup>4)</sup>	på madrassbredde 80 cm ca. 93 x 209,4 cm			
– lange integrerte sidegrind <sup>4)</sup> (avhengig av treelementene)	på madrassbredde 90 cm ca. 100,3 x 209,4 cm			
	på madrassbredde 100 cm ca. 110,3 x 209,4 cm			
Utvendige mål ved – delt sidegrind	på madrassbredde 90 cm ca. 104,0 x 209,4 cm på madrassbredde 100 cm ca. 114,0 x 209,4 cm			på madrassbredde 2 x 90 cm ca. 195,6 x 209,4 cm
Liggeflate (madrassmål)	ca. 80 x 200 cm <sup>4)</sup> eller 90 x 200 cm eller 100 x 200 cm <sup>4)</sup>			
Liggeflateinndeling (RD/setedel/LD/BD)	ca. 72 – 25 – 33 – 54 cm			
Dynamisk utjevning av ryggdelen ifølge DBfK (Tysk forbund for pleieyrker)	ca. 8 cm			
Fri høyde over gulv	ca. 15 cm			
Total vekt	ca. 135 kg			ca. 270 kg
<b>Drivenheter</b>				
Helmotorisk	✓	✓	✓	✓
24-Volt konsept for drivenhet med ekstern transformator	✓	✓	✓	–
230-Volt drivenhet	–	–	–	✓
<b>Elektriske komponenter</b>				
Håndkontroll (kan sperres individuelt)	✓	✓	✓	✓
Håndkontroll inkl. Trendelenburg (kan sperres individuelt)	0	0	0	–
Ekstra håndkontroll for Trendelenburg	0	0	0	–
Lys under sengen	0	0	0	–
Nødnesenkning per 2 x 9 Volt batteri <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	–
<b>Sidegrindssystemer</b>				
lange integrert sidegrind på begge sider, beskyttelseshøyde 41 cm –2 tverrstenger	✓	✓	✓	–
delt integrert sidegrind på en side, lang på andre siden – 2 tverrstenger <sup>1)</sup>	0	0	0	–
delt integrert sidegrind på begge sider – 2 tverrstenger <sup>1)</sup>	0	0	0	–
delt sidegrind på begge sider <sup>1)</sup>	0	0	0	0
<b>Liggeflater</b>				
Liggeflate av metall-lameller	✓	✓	✓	✓
Liggeflate 4-delt, elektrisk justerbar	✓	✓	✓	✓
Liggeflaten kan tiltes til komfort posisjon	✓	✓	✓	✓
Liggeflate kan tiltes til sjokkleie	0	0	0	–
Komfort-base til liggeflate	0	0	0	0
Hygiene-base til liggeflate	0	0	0	0
Enkel å skille fra understellet	✓	✓	✓	✓
Madrassbredde 100 cm	0	0	0	–
Madrassbredde 80 cm	0	0	0	–
<b>Hjul</b>				
Dobbelthjul	Ø 50 mm	Ø 100 mm	Ø 50 mm 8 x	Ø 50 mm
«easy-floor-access»	–	–	✓	–
2 x 2 brems	✓	–	✓	–
4-hjuls sentralbrems	0	✓	–	✓

Libra Movo med hele sidegrinder  
tilbudt Orkerød sykehjem

Modellvariant	Libra – standard	Libra – variant movo	Libra – variant gulvfri Plus	Libra partner
<b>Veggavvisningssystemer</b>				
Veggavstandsholdere	0	0	0	–
Veggavstandsholdere på understellet	0	0	0	–
<b>Justeringsområder</b>				
Høydejustering	ca. 25 – 80 cm	ca. 28 – 83 cm	ca. 25 – 80 cm	ca. 25 – 80 cm
Justering av ryggdelen inntil ca. 70°	✓	✓	✓	✓
Justering av lår delen inntil ca. 40°	✓	✓	✓	✓
Komfort leie inntil ca. 16°	✓	✓	✓	✓
Trendelenburgleie inntil 16°	0	0	0	–
<b>Annet</b>				
Støttelementer med metallameller som er lette å rengjøre	✓	✓	✓	✓
Elementer av tre til utvalg ifølge brosjyre (målene varierer avhengig av utførelsen av sidegrindene og gavel modell)	✓	✓	✓	Gavler: Nobla, Nobla reha, Nobla mala
Tredekorer til utvalg ifølge brosjyre	✓	✓	✓	✓
Metallfarge Argentum	✓	✓	✓	✓
To holderhylser på hodeenden til løftebøyle/infusjonsstativ	✓	✓	✓	✓
Sidepanel bak sidegrindene <sup>1)</sup> (ikke ved delt sidegrind)	✓	✓	✓	–
Nødutløsning av ryggdelen	0	0	0	–
Sengeforlengelse med 20 cm	0	0	0	0
Sengetøyholder <sup>3)</sup>	0	0	0	–
<b>Tilbehør</b>				
Polstertrekk (til sidegrind)	0	0	0	0
Fallsikringsmatter	0	0	0	0
Infusjonsstativer/-holdere	0	0	0	0
Diverse polstringssystemer	0	0	0	0
Serveringsbrett	0	0	0	–

✓ = Standardutstyr  
0 = tilgjengelig som tilvalg  
– = kan ikke leveres



<sup>1)</sup> ikke for madrassbredde 80 cm  
<sup>2)</sup> batteri er ikke med ved levering  
<sup>3)</sup> ikke mulig ved delt integrert sidegrind  
<sup>4)</sup> ikke for Libra partner

SÅ AVGJORT BEDRE  
**Libra – sikkerhetsstandardene\***

- EN 14971  
Risikoanalyse for medisinske produkter
- EN 60601-1  
Sikkerhet for elektromedisinsk utstyr
- EN 60601-1-1  
Elektromagnetisk kompatibilitet
- DIN EN 60601-2-52  
Elektromedisinsk utstyr

\* Sikkerhetsanbefaling fra Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (Det føderale instituttet for legemidler og medisinske produkter)



# Verdibevarene Skapere av fremtiden



## STIEGELMEYERGROUP

### Verdibevarene

Våre foretak ble etablert i år 1900 i Herford og er ennå i dag et familieført foretak. Respekt og ansvar overfor våre kunder, medarbeidere og partnere er grunnlaget for vårt daglige arbeid. Idet vi bygger våre aktiviteter på disse verdiene samt på vår mange års erfaring, tilbyr vi våre kunder i hele verden høykvalitets produkter, løsninger og tjenester for kravene som stilles på områdene pleie og helse.

### Skapere av fremtiden

For å kunne mestre de raske endringene som finner sted innen pleie- og helsevesen, utvikler vi alle våre produkter selv. Innovasjoner og visjoner for fremtidens pleie er målsettingen for vårt arbeid. Her utveksler vi våre tanker og erfaringer med våre kunder, slik at vi kan gi dem målrettet støtte ved deres oppgaver i hverdagen. Sette morgendagens trender ut i praksis allerede i dag, det er en suksessfull tradisjon hos oss.

### Vår ekspertise

Sykehus

Pleiehjem

Pleie i hjemmet

Komfortsenger

Møbelsystemer

Tjenester



Stiegmeyer-gruppen er din internasjonale partner for sykehus og pleieinstitusjoner og varemerket Burmeier for pleie i hjemmet. Vi gir våre kunder støtte med praksisorienterte produkter, løsninger og tjenester som vi kontinuerlig utvikler videre.

- Etablert i 1900 og ennå i dag familieført
- Over 1100 medarbeidere over hele verden
- Produksjon av alle kjerneprodukter i egne fabrikker
- Produktutvikling og produksjon i Tyskland
- Tjenester, kursing og prosessoptimering hos kunden
- Internasjonale sertifiseringer og eksport til mer enn 60 land
- Salgselskap i Belgia, Finland, Frankrike, Nederland, Polen og Sør-Afrika

### Våre merker







## STIEGELMEYERGROUP

### Hovedkontor / Headquarters

---

*Deutschland / Germany*

**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**

Ackerstraße 42

D - 32051 Herford

Phone +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

*France*

**Stieglmeyer SAS**

16 Avenue de l'Europe · Bâtiment SXB1

67300 Schiltigheim

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

Fax +33 (0) 4 7238 - 5481

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

*South Africa*

**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*

**Stieglmeyer BV**

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*

**Stieglmeyer Oy**

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*

**Stieglmeyer Sp. z o.o.**

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl



Finn din kontaktperson på vårt nettsted:

Find your local partner on our website:

[www.stieglmeyer.com/partner](http://www.stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)