

Trygghetsband Assist Sleeve

molift®

Gäller: Assist Sleeve trygghetsband

Uppresning:


1. Placera trygghetsbandet Assist Sleeve runt patienten, ned mot stussen.
2. Fäst trygghetsbandet på en av fästknapparna på handtagets sida, genom att haka i en av öglorna på trygghetsbandet. Välj den fästknapp som bäst motsvarar patientens längd.



3. Säkerställ att du har en bra längd på trygghetsbandet att dra i, justera vid behov genom att välja en annan ögla vid fästknappen.



4. Säkerställ att plattformen är låst.

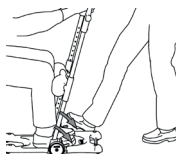

5. Uppmana patienten att ta tag i handtaget.




6. Placera en fot på plattformen som motvikt.

7. Ta tag i handtaget på trygghetsbandet, så nära patientens höft som möjligt.



8. Uppmana patienten att resa sig.

9. Assistera uppresningen genom att dra i handtaget, utan att översträcka din arm.

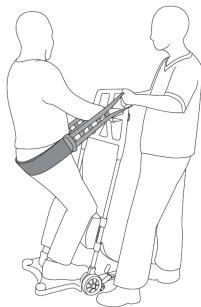

10. Fäst trygghetsbandet i fästknappen i samma höjd som på andra sidan.

Nedsättning:

1. Säkerställ att plattformen är låst.
2. Placera en fot på plattformen som motvikt.
3. Uppmana patienten att ta tag i handtaget.
4. Lossa trygghetsbandet från fästknappen på ena sidan.
5. Uppmana patienten att sätta sig.
6. Håll i handtaget på trygghetsbandet och assistera patientens nedsättning i ett lugnt tempo.
7. Ta bort trygghetsbandet genom att lossa det från fästknappen på andra sidan.



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

© Etac Sverige AB 2024-05-14

etac®
Creating Possibilities