



R82 Cricket

Kompakt, enkel vogn
med smarte løsninger

 **etac**[®]

R82 Cricket

Prisforhandlet fra 01.10.2020 i post 8 Enkel sittevogn.

Cricket er en smart og smidig vogn som passer i alle miljøer.

Cricket er enkel å slå sammen, og passer i alle biler. Vognen er godkjent for transport og oppfyller kravene ihht. ISO 7176-19 for sikker transport i kjøretøy.

Noe ekstra utover det vanlige

Her er vår nye Cricket – en lett og kompakt sammenleggbar vogn. Cricket er utviklet med tanke på innovasjon, kvalitet og komfort. Våre designere, fysioterapeuter og ingeniører har utviklet denne funksjonelle vognen for å gi støtte til barnet og enkel håndtering for hjelperen.

Smidig og smart

Produktet i sammenslått tilstand ligner på en gresshoppe (cricket) i utformingen og felles ut på omtrent samme måte som gresshoppens utvikler sine vinger.

Cricket gjør det enkelt å forflytte seg, akkurat som en ekte gresshoppe flyr eller hopper.

Standard konfigurasjon

Armlen

Kalesje

Nett

Hoftebelte Hardness Neopren

Polstret skuldersele

Leggstøtte

Regntrekk



Cricket, std konfigurasjon

Str.	HMS nr.	Art.nr
Str. 1, blå	285784	3287100
Str. 2	285785	3287200

Setetrekk

Str. 1, blå	285864	3187043111
Str. 2, blå	285867	3187043211
Str. 1, rød*	285866	3187043112
Str. 2, rød*	285869	3187043212
Str. 1, grå	285865	3187043114
Str. 2, grå	285868	3187043214

* Standard farge.

Fargevalg puter



Understell

Lettvekts aluminiumsramme.

Hjul

Massive lettrillende hjul. Svingbare 7" forhjul, 360 gr. Bakhjul 11"

Brems

Massive bakhjul med fotbrems.

Kjørebøyle

Høyde- og vinkeljusterbar kjørebøyle.

Fotstøtte

Fotstøtten er justerbar i høyde, dybde og vinkel.

Puter

Avtagbara og vaskbare puter.



Detaljer



Kjørebøyle

Ergonomisk høyde- og vinkeljusterbar kjørebøyle som gir god komfort under trilling. Kjørebøylen er enkel å justere i ulike høyder.



Ryggvinkel

Ryggen kan vinkles bakover i to posisjoner for at barnet ska kunne bytte fra sittende til liggende posisjon. Ryggstøttens vinkel er regulerbar mellom 110° og 125° med glidelås.




Vokser med barnet

Setedybden, setebredden og høyden på fotstøtten justeres slik at vognen vokser med barnet.



Høyde- og vinkeljusterbar fotstøtte

Cricket har en unik fotstøtte som kan høyde- og vinkeljusteres som ekstra støtte for barnet. Fotstøtten kan svinges unna ved forflytning, uten bruk av verktøy.

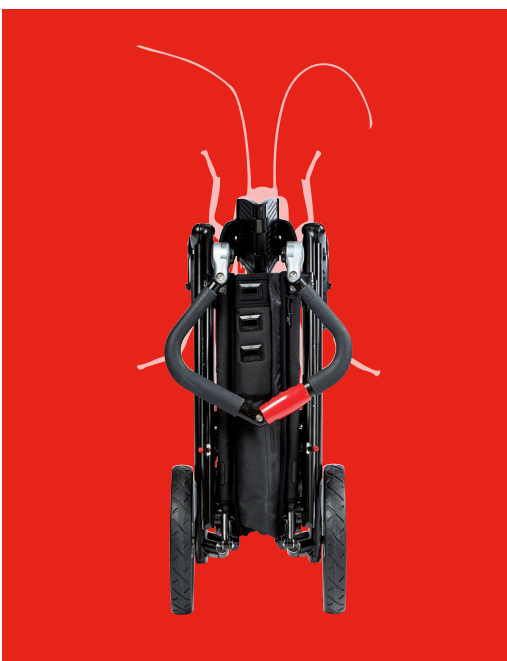

Enkel håndtering


R82 Cricket er kompakt, lett i vekt og legges enkelt sammen med noen få håndgrep. Den tar liten plass og kan oppbevares stort sett overalt.



Fortsett å vokse!

Barnets motorikk utvikles hele tiden, noe som gjør at barnet lærer seg nye ting og barnets behov endrer seg. Sittevognen Cricket fås i to størrelser. Hver størrelse har tilpasningsmuligheter, noe som gjør det mulig for barnet å vokse med sin Cricket.


Fotplate, sete og rygg kan justeres i ulike posisjoner slik at barnet kan ha en aktiv og variert stilling, noe som også er med å bidra til barnets utvikling.

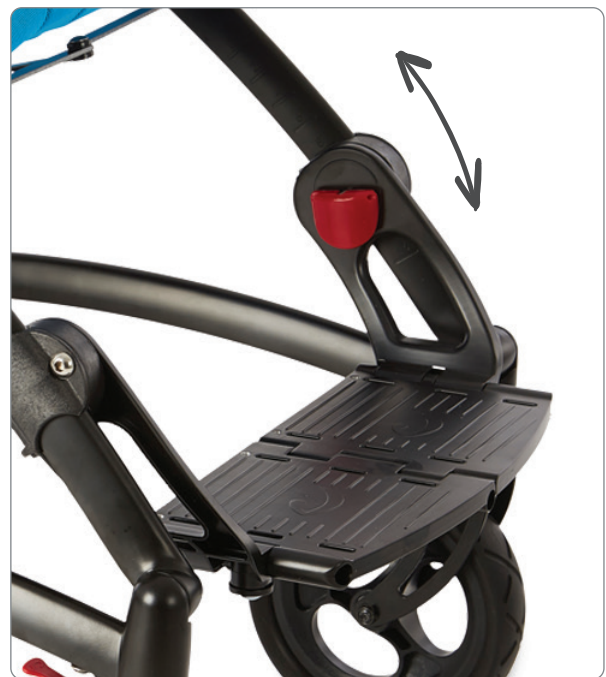

Mål og vekt

Mål	Størrelse 1	Størrelse 2
Setebredde (A)	24*-34 cm	29,5*-39.5 cm
Ryggbredde, utvendig (F1)	32.5 cm	38.5 cm
Ryggbredde, innvendig (F)	27 cm	33 cm
Setedybde (B)	21-31 cm	31-43 cm
Rygg høyde	50 cm	57 cm
Setehøyde framkant sete	50-53 cm	54-58 cm
Høyde fotplate, legg lengde	18-36 cm	22.5-37 cm
Vinkling fotplate	360°	360°
Totalbredde (G)	68 cm	74.5 cm
Høyde (I)	100 cm	105 cm
Lengde (H)	102.5 cm	104.5 cm
Bredde sammenslått	35.5 cm	35.5 cm
Høyde sammenslått	48.5 cm	48.5 cm
Lengde sammenslått	76 cm	76 cm
Ryggvinkel	110-125°	110-125°
Setevinkel	20°	20°
Minste svingradius	145 cm	152.5 cm
Totalvekt	12.4 kg	13.4 kg
Maks belastning (=bruker+sete+tilbehør)	35 kg	50 kg
Maks belastning ved transport(=bruker+sete+tilbehør)	27 kg	43 kg
Lengde armlen	20 cm	27.5 cm
Høyde armlen - sete	16-19 cm	16-19 cm
Min. dørbredde ved passasje	81.5 cm	81.5 cm
Statisk stabilitet	10°	10°

*Ved bruk av setebredde reduksjon (se tilbehør side 6)

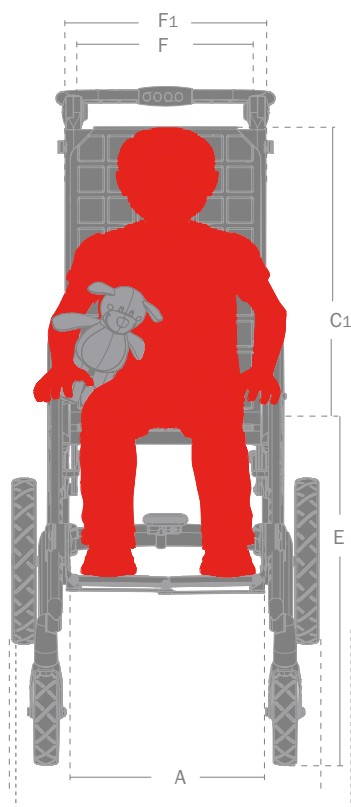

Tilbehør



Ryggeforlenger

Beskrivelse	HMS nr.	Art.nr.
Str. 1	285848	3187043160-1
Str. 2	285849	3187043160-2



Bord, monteres på armlen

Beskrivelse	HMS nr.	Art.nr.
Str. 1	285797	3187043180-1
Str. 2	285798	3187043180-2



Hodestøtte, formet

Beskrivelse	HMS nr.	Art.nr.
En størrelse	285815	3187043151



Gripebøyle for montering i armlen. For trygghet og støtte.

Beskrivelse	HMS nr.	Art.nr.
Str. 1	285810	3187043181-1
Str. 2	285812	3187043181-2



Nakkepute For ekstra støtte

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse	285843	3187043150



Gripebøyle for montering i understell. For trygghet og støtte

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	285811	3187043182-1
Str. 2	285813	3187043182-2



Kalesje (rød, standard konfigurasjon)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Blå, str. 1	285822	3187043171
Blå, str. 2	285825	3187043271
Grå, str. 1	285823	3187043174
Grå, str. 2	285826	3187043274
Rød (std), str. 1	285824	3187043172
Rød (std), str. 2	285827	3187043272



Ryggekk, maks belastning 5 kg.

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse		3187043183-1



Setebredde reduksjon, for ekstra komfort og smalere setebredde. Sidetrekk sete kreves.

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
3 cm	285851	3187043130-1
5 cm	285852	3187043130-2
Sidetrekk sete	285870	3187043130



Nett (standard konfigurasjon). Gir ekstra oppbevaringsplass. Maks belastning 10 kg

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	285844	3187043184-10
Str. 2	285845	3187043184-20



Skråkile for rygg og sete

Mål str. 1: B11xH27,5xL15cm
Mål: Str. 2: B14,5x27,5xL15cm

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	285858	3187043140-1
Str. 2	285859	3187043140-2



Leggstøtte (standard konfigurasjon) For ekstra komfort

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	285837	3187043190-10
Str. 2	285838	3187043190-20



Armlen (standard konfigurasjon) For trygghet og støtte

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	285788	3187043120-1
Str. 2	285789	3187043120-2



Hælkappe for posisjonering av føttene

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse	285817	3187043185

Tilbehør forts.



Lukkemekanisme for fotbrett

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse	285839	3187043186



Låsereim ved sammenslåing og oppbevaring

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse		3185100



Retningssperre forhjul

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse		3187043187



Regntrekk til kalesje (Standard konfigurasjon)

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. 1	285846	3187467-110
Str. 2	285847	3187467-210



Transportbeslag

Cricket oppfyller kravet ihht. ISO 7176-19

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
En størrelse	285863	3187043188

Regncape med hette

Beskrivelse	Art. nr.
Str. 4, B112xH90 cm	3187465-410
Str. 5, B126xH100 cm	3187465-510

For informasjon om vester og belter, se etac.no





V1 September 2019

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter.”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Vanemveien 1, 1599 Moss
Tlf 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
etac.no

etac[®]
Creating Possibilities