

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



**etac**<sup>®</sup>

# Etac Crissy

Aktivrollstolen som tar liten plats.

# Aktivrollstolen som tar liten plats

Etacs "Ability Based Seating"™ är en viktig del av Crissys designkoncept. Den kan ställas in för att passa de flesta kroppstyper och behov, genom anpassning efter användarens förmåga. Crissy kan fällas ihop när det behövs vilket är perfekt för den aktiva användaren.

## Sitsdjup och drivhjulposition

Crissys nyutvecklade chassi gör det möjligt att justera sitsdjup, sitshöjd och drivhjulposition oberoende av varandra. Rollstolen kan justeras i 30 lägen för att ge bästa möjliga balans i stolen, vilket ökar användarens aktivitetsmöjligheter.

En intressant detalj är att hjulfästet kan beställas i flera olika färger – ett sätt för användaren att sätta sin egen prägel på rollstolen.



*Justering av sitsdjup i tre lägen*



*Justering av drivhjulposition*



*Justering av sitshöjd och drivhjulposition*



# Etac Crissy Active

Crissy Active har integrerade benstöd och ett innovativt ryggstöd som ger extra stabilitet.

## Allt som behövs är ett höftmått

Chassits smarta design gör det möjligt att anpassa Crissy till alla sitsdjup för att passa användare med längden 158–190 cm\*. Allt du behöver göra är att mäta höftmättet – Crissy kan därefter anpassas på plats för att möta användarens behov. Det är även möjligt att välja färg på drivhjulsfästet.

## Det nya 2B ryggstödet

2B ryggstödet utformning, med mjukt svängda rör, ger ett utökat stöd i sidled. Balansen i överkroppen är central för att optimera framdrivning. För att möjliggöra aktivitet under en längre stund, arbetar vi för att ta fram lösningar som förlänger sittoleransen över tid. Det kallar vi Ability Based Seating™.

\* Enligt antropometriska data  
(Källa: (2009) Hansson et al. ,  
(1988) Berglund).



## Detaljer



### Polstrade sköldar

Polstrade sköldar ger extra komfort och skyddar känsliga områden från högt tryck.



### Aktiv ram

Integrerade benstöd för extra stabilitet och en aktiv livsstil.



### Sitsdjup – Allt i ett

Justerbart sitsdjup mellan 37 och 45 cm – i ett och samma chassi – genom att flytta ryggstödsfästet. Kan justeras ytterligare med hjälp av justerbara kardborreband.



### Vinkeljusterbar rygg

Den vinklade ryggen är justerbar -5 till +5 grader. Kan kombineras med höjdjusterbara körhandtag eller fast ryggstöd.

## Designad för ökad aktivitet

Ett stabilt chassi och en perfekt balanserad drivhjulposition förbättrar ergonomin och minimerar styrkan som krävs vid framdrivning. Crissy har lösningarna. Det hopfällbara chassit är stabilt och har 30 drivhjulpositioner. Både sitshöjd och egenskaperna för framdrivning kan finjusteras.

Att balansera rullstolen är precis lika viktigt som alla andra lägesinställningar för att främja rörligheten. Vi kallar detta för Ability Based Seating™ – för aktivitet och rörelse.



## Mått och vikt – Crissy Active

Sitsbredd	Total bredd	Sitsdjup	Wikt*	Transportvikt**
37.5 cm	57.5 cm	37–45 cm	13.0 kg	8.6 kg
40.0 cm	60.0 cm	37–45 cm	13.1 kg	8.7 kg
42.5 cm	62.5 cm	37–45 cm	13.2 kg	8.8 kg
45.0 cm	65.0 cm	37–45 cm	13.3 kg	8.9 kg
47.5 cm	67.5 cm	37–45 cm	13.4 kg	9.0 kg
50.0 cm	70.0 cm	37–45 cm	13.5 kg	9.1 kg

<b>Ryggstödshöjd</b> 2B låg: 35–40 cm  2B hög: 42.5–47.5 cm C2: 37.5–47.5 cm	<b>Sitshöjd fram</b> 40.5–55 cm  <b>Transportbredd hopfälld</b> 32 cm	<b>Ryggstödsvinkel</b> Fast ryggstöd 5° Vinkeljusterbart ryggstöd -5° – +5°	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg  <b>Sitshöjd bak</b> 38.5–51 cm
--	---	---	--

\* Vikter och mått gäller stol med 24" drivhjul med snappkopplingsnav, högtrycksdäck, aluminiumdrivringar, 2B rygg, fotplatta, broms, stänkskärm, 5" länkhjul och mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %

\*\* Vikter och mått gäller stol med 2B rygg, broms, 5" länkhjul med mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %.

# Etac Crissy Swing-Away

Crissy med sidosvänbara benstöd underlättar vid överflyttning i stående. Välj bland vårt breda utbud av benstöd.

## Allt som behövs är ett höftmått

Chassits smarta design gör det möjligt att anpassa Crissy till alla sitsdjup för att passa användare med längden 158–190 cm\*. Allt du behöver göra är att mäta höftmåtten – Crissy kan därefter anpassas på plats för att möta användarens behov. Det är även möjligt att välja färg på drivhjulsfästet.

## Det nya 2B ryggstödet

2B ryggstödet utformning, med mjukt svängda rör, ger ett utökat stöd i sidled. Balansen i överkroppen är central för att optimera framdrivning. Ryggstödet finns med val av fasta alternativt höjjusterbara körhandtag.

För att möjliggöra aktivitet under en längre stund, arbetar vi för att ta fram lösningar som förlänger sittoleransen över tid. Det kallar vi Ability Based Seating™.

\* Enligt antropometriska data (Källa: (2009) Hansson et al., (1988) Berglund).



## Detaljer



### Polstrade sköldar

Polstrade sköldar ger extra komfort och skyddar känsliga områden från högt tryck.




### Stabila benstöd

Benstöden finns med eller utan låsning. Välj mellan 70° eller 90° vinkel.



### Sitsdjup – Allt i ett

Justerbart sitsdjup mellan 37 och 45 cm – i ett och samma chassi – genom att flytta ryggstödsfästet. Kan justeras ytterligare med hjälp av justerbara kardborreband.

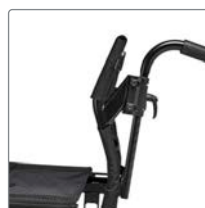

### Integrerat stöd

De mjukt svängda rören ger ett utökat stöd i sidled. Välj mellan fasta eller höjjusterbara körhandtag.

## Finjusteringar ger förbättrade egenskaper vid framdrivning

Ett stabilt chassi och en perfekt balanserad drivhjulposition förbättrar ergonomin och minimerar styrkan som krävs vid framdrivning. Crissy har lösningarna. Det hopfällbara chassit är stabilt och har 24 drivhjulpositioner. Alla Etacs benstöd och fotplattor kan monteras på Crissy Swing-Away.



Crissy Swing-Away med höjdbar körhandtag, vinkeljusterbar rygg och Schwalbe högtrycksdäck.

## Mått och Vikt – Crissy Swing-Away

Sitsbredd	Total bredd	Sitsdjup	Vikt*	Transportvikt**
37.5 cm	57.5 cm	37-45 cm	13.5 kg	8.3 kg
40.0 cm	60.0 cm	37-45 cm	13.6 kg	8.4 kg
42.5 cm	62.5 cm	37-45 cm	13.7 kg	8.5 kg
45.0 cm	65.0 cm	37-45 cm	13.8 kg	8.6 kg
47.5 cm	67.5 cm	37-45 cm	13.9 kg	8.7 kg
50.0 cm	70.0 cm	37-45 cm	14.0 kg	8.8 kg

<b>Ryggstödshöjd</b> 2B låg: 35–40 cm  2B hög: 42.5–47.5 cm C2: 37.5–47.5 cm	<b>Sitshöjd fram</b> 40.5–55 cm  <b>Bredd, hopfällad</b> 32 cm	<b>Ryggstödvinkel</b> Fast ryggstöd 5° Vinkeljusterbart ryggstöd -5° – +5°	<b>Max brukarvikt</b> 125 kg  <b>Sitshöjd bak</b> 38.5–51 cm
--	--	--	--

\* Vikter och mått gäller stol med 24" drivhjul med snappkopplingsnav, högtrycksdäck, aluminiumdrivringar, 2B rygg, benstöd, fotplatta, broms, stänkskärm, 6" länkhjul och mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %


\*\* Vikter och mått gäller stol med 2B rygg, broms, 6" länkhjul med mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %.

## Tillbehör



### 2B Ryggstöd

Vårt mest aktiva ryggstöd. Det böjda ryggstöret skapar ett diskret sidostöd. Den justerbara klädseln har komfortsköldar som förhindrar tryck vid känsliga kroppszoner.

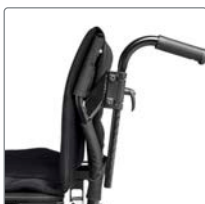

### 2B Ryggstöd

Vårt mest aktiva ryggstöd. Vinkeljusterbart med höjdjusterbara körhandtag. Kan kombineras med vårdarbroms.



### Breddningssköldar rygg

Sköldarna ger extra komfort och skyddar känsliga områden från högt tryck. Längd: 20 cm  
Bredd: 15 cm  
Höjd: 1 cm




### Överdrag Airmesh

Överdrag i Airmesh textil för ett aktivt intryck och luftigare känsla.




### Överdrag rygg

Mjukt elastiskt överdrag i mörkgrå plysch. Passar 2C ryggstöd och 2B hög.

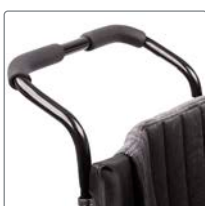

### Körbygel

Höjdregerbar och avtagbar. Passar 2C ryggstöd.

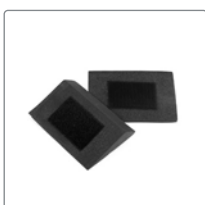


### Kil modell 1 (liten)

Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Inklusive självhäftande kardborre. Par. Längd: 13 cm, Bredd: 9.5 cm, Höjd: 2 cm



### Kil modell 2 (medium)

Par. Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Inklusive självhäftande kardborre. Längd: 19 cm, Bredd: 12 cm, Höjd: 2 cm

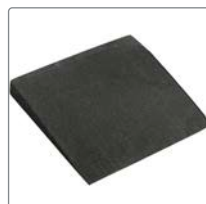

### Kil modell 3 (stor)

Par. Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Kan användas för att anpassa en sittdyna för användare med bäckenskevhet. Längd: 20 cm, Bredd: 17 cm, Höjd: 2.5 cm



### Ryggkil, kort

Mjuk kil som fästs med kardborre mot klädseln. 15 cm hög. Kombinera med sidostopp eller sidostopp med breddning. Klädsel: mörkgrå plysch. Säljs i styck.



### Ryggkil, lång

Mjuk kil som fästs med kardborre mot klädseln. 30 cm hög. Kombinera med sidostopp eller sidostopp med breddning. Klädsel: mörkgrå plysch. Säljs i styck.



### Sidodyna

Ger ökad sidostabilitet till originalklädselns kroppsnära stöd. Kan roteras och användas i två olika riktningar. Säljs i styck. Höjd: 29 cm, Djup: 15 cm.



### Höftbälte och bälte

Med snäpplås, justerbara i längd. Höftbälte: Två alternativa fästpunkter på ramen.



### Stänkskärm

Tillgänglig i tre storlekar beroende på drivhjulposition. Justerbar i höjd, djup och vinkel. Material: Kolfiber



## Tillbehör



### Armstöd

Höjdbarbara med avtagbar massiv platta, med kort (25 cm) alternativt lång (35 cm) armstödsplatta. Justering med insexnyckel. Går även att låsa fast på rullstolen.



### Armstöd Aktiv

Höjdbarbara med avtagbar massiv platta, med kort (25 cm) alternativt lång (35 cm) armstödsplatta. Justering med insexnyckel. Går även att låsa fast på rullstolen. 10 cm kortare i höjd än standard armstödet.



### Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta. Färg: svart eller rött



### Saxbroms

Saxbromsen kan användas till våra luftpumpade drivhjul.




### Broms med bromsspaksförlängare

Bromsspaken kan vinklas framåt, för att underlätta vid sidoförflyttning.



### Enhandsbroms

Höger alternativt vänster sida. Kan kombineras med vårdarbromshjul.

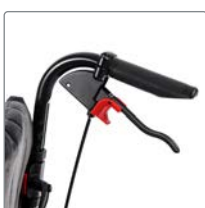

### Vårdarbroms

Passar Etac 2C ryggstöd, 2B ryggstöd med höjdbarbara körhandtag och 22" eller 24" drivhjul. Går ej att kombinera med tipskydd aktiv



### Sittdyna

Anatomisk formad sittdyna, 56 cm lång, som kapas till inställt sittdjup. Klädsel: mörkgrå plysch.



### Komfortkil

Ligger säkert i fickan på insidan av dynöverdraget. Ger ökad sittkomfort och motverkar att användaren glider fram på sitsen.



### Sittdyna Tidy

Med vattenavstötande hygienöverdrag i svart Dartex, tvättbart i 90° C. 46 cm lång (sitsbredd 35–40 cm) 50 cm lång (sitsbredd 42.5–60 cm).



### Sitsförlängare

Fästs med kardborre mellan transportfästen. Ökar sitsdjupet med upp till 7 cm.



### Bord

Transparent. Monteras på långa armstöd. Halkskydd finns som extra tillbehör.



### Hembord, halvt

Justerbart i djup och bredd. Fällbart åt sidan. Fästs på armstödskonsollen. Höjden justeras med armstödet.



### Benstöd standard

Avtagbara och sidovängbara. Finns även med låsning. Färg: svart eller vit

## Tillbehör



### Snäva benstöd/ Snäva korta benstöd

Gör att fotstödet kommer 5 cm närmare sitsen. Kan endast användas med 5" länkhjul. Finns även i en kort version och med låsning. Färg: svart eller vit



### Amputationsbenstöd

Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled. Passar för höger och vänster sida. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex. Avtagbart.



### Amputationsvikt

Motverkar tipprisk och förbättrar köreegenskaperna. Avtagbar och vinkelreglerbar. Kan kombineras med amputationsbenstöd. Vikt: 3 kg



### Fotplattor

Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, reglerbara i höjd. Levereras med standard infästningsrör. Finns även med korta (-8 cm) respektive långa (+10 cm) infästningsrör. Djup 13 cm.



### Fotplattor

Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, reglerbara i höjd. Finns med standard eller långa (+10 cm) infästningsrör.



### Hel fotplatta

Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och vinkel.



### Förlängd fotplatta

Monteras på befintlig fotplatta. Ger större understödsyta. Djup 21 cm.



### Vadband

Avtagbart, reglerbart i längd.




### Polstring till vadband

Ger ett mjukare stöd för vaderna. Finns i 20, 30 och 40 cm längd.



### Hälband

Reglerbart i längd. Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med förlängd fotplatta.

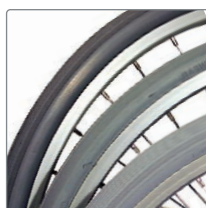

### Drivhjul

22" alternativt 24", samt 24" lågviktsdrivhjul. Välj mellan massiva eller luftpumpade med högtrycks slang.



### Drivhjul Schwalbe

Schwalbe Rightrun högtrycksdäck. Finns endast som 24" drivhjul.

Drivhjul Marathon Plus finns som alternativt val till samtliga Crissy modeller.



### Drivringar

Välj mellan plastade, cellgummi, aluminium, titan och rostfria.




### Ekerskydd

Grått eller gult tryck med logo.



### Tippskydd

Justerbara i höjd och längd. Uppfällbara.

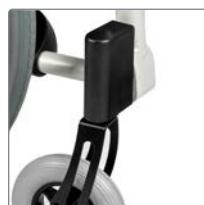

### Breddat framaffelfäste

Flyttar ut länkhjulet 3 cm, stolens totalbredd påverkas inte. Finns även i kort modell, 4" och 5" länkhjul, för extra låg sitshöjd.



### Tippskydd aktiv

Inkl trampör. Tippskyddet kan aktiveras med användaren sittande i stolen.

\*Obs; Kan ej kombineras med vårdarbroms



### Lodningsverktyg länkhjul

Vattenpass för lodning av länkhjul.



### Länkhjul


4", 5", 6" alternativt 6,5".



### Käpphållare

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras på trampöret alternativt tipskyddet. Passar både höger och vänster sida.

## Chassifärg

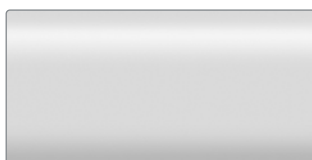

Silvrit -74



Svart -01



Champagne -76



Rubinröd -75



Mentol -77

## Drivhjulsfäste färg



Svart -01



Champagne -76



Mentol -77



Rubinröd -75



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

  
Creating Possibilities