



Etac Cross 5

För ännu bättre sittkomfort
och köregenskaper.

 **etac**[®]

Etac Cross 5

Rullstol Etac Cross 5 kombinerar maximal komfort med optimal funktionalitet.

Ännu bättre sittkomfort och köregenskaper

Det multi-justerbara ryggstödet, den unika ramkonstruktionen och det breda tillbehörssortimentet garanterar varje användare en rullstol med bästa möjliga sittkomfort och köregenskaper. Chassits unika stabilitet gör att Cross 5 svarar snabbt i både start och svängar.

Skapa form med användaren sittande i rullstolen

Att justera Cross 5 är enkelt och kräver få verktyg. Välj sittbredd och anpassa rullstolen efter varje användares individuella behov. Det unika 3A ryggstödet kan ställas in asymmetriskt och ger möjlighet till förlängning av sittdjupet. Alla inställningar kan göras med rullstolsanvändaren sittande i stolen.



Cross 3A ryggstöd – med förbättrad ryggskena

Profilen har en mjukt rundad insida och en ändavslutning med skåror, vilket förenklar montering av tillbehör som fästs i profilen.

Den nya designen ger mer utrymme mellan profilerna vilket ger bättre plats för bröstryggen. Ryggöverdraget är breddat och möjliggör ännu bättre stöd och omslutning av ryggen.

Detaljer



3A Ryggstöd

På Etac Cross 3A ryggstöd kan du justera två vinklar. Ryggstödsvinkeln (höftvinkeln) är steglöst justerbar -5° till +20°. Lumbalvinkeln justeras från -8° till +18°.



Enkel att ställa in

Med hjälp av insexnyckel justeras både ryggstöds höjd och lumbal-vinkel. Inställningarna är lätta att utföra och kan göras med personen sittande i stolen.



36 + 2 drivhjulpositioner

Drivhjulen kan monteras i fyra olika lägen i varje hål. Det ger extremt bra förutsättningar för inställning av bakre sitshöjd och tyngdpunktsplacering.



Anpassning rygglädsel

Klädseln är försedd med sex justerbara kardborreband. Det översta är bredare vilket ger ökad komfort och stabilitet.



Högre brukarvikt

Krysset är förstärkt, vilket medför att brukarvikten för Cross 5 är höjd till 135 kg. Cross 5 XL klarar en brukarvikt på 160 kg.



Enkel Lille Viking montering

Fästpunkter för monteringen är integrerade i gaveln.



Extra låg sitshöjd

Med 20" drivhjul monterade i den översta raden blir sitshöjden 34 cm.



Tippskydd som klarar alla sitshöjder

Tippskyddet är teleskoperande och uppfällbart. Det kan anpassas för sitshöjder mellan 34 och 51 cm.



Enkel bromsjustering

Justeringen görs på bromsens utsida, vilket förenklar inställningen.



Elastiskt överdrag

Det mjuka överdraget i plysch är elastiskt och följsamt. Materialet fäster direkt mot rygglädseln utan kardborreband vilket underlättar vid tvätt.



38 möjliga drivhjulpositioner gör det möjligt att justera sitshöjden från 34 till 53 cm. Mindre avstånd mellan stegen i drivhjulinställningen ger perfekt balansering och framdrivning.

Etac Cross 3A Ryggstöd

Framtagen för att uppfylla förskrivarens höga krav på bästa möjliga positionering.

Med 3A ryggstödet är det möjligt

3A ryggstödet är unikt. Utforska möjligheterna och erfär hur du, med några enkla inställningar, skapar ett individuellt utformat stöd utan att behöva använda dyra ryggsystem. Alla inställningar görs direkt, med rullstolsanvändaren sittande i rullstolen. På så sätt får du snabb återkoppling, medan du varsamt justerar vinklar och form. Om behoven förändras kan du lika lätt omjustera.

Proximal stabilitet är en förutsättning för postural kontroll. 3A ryggstödet är ett effektivt verktyg för att ge bäckenet stöd och brösttryggen balans. Att skapa förutsättningar för aktivitet och möjliggöra mobilitet utifrån användarens förmåga är det vi kallar Ability Based Seating™.

Tack för att du ändrar inställning!



Detaljer



Att ändra inställning

Dålig kroppshållning tar på krafterna. För att orka med aktiviteter måste användaren ha ett bra stöd för ryggen. Läs mer om hur du kan ställa in Cross 3A ryggstödet på nästföljande sidor. Låt oss ändra inställning!




Proximal stabilitet är A och O

Ett balanserat stöd för bäckenet är första steget mot proximal stabilitet. Den nedre ryggstödsvinkeln och inställningen av de nedersta ryggbanden är avgörande för att stabilisera och balansera bäckenet.



Sittolerans

3A ryggstödet erbjuder inställningar för att skapa ett kroppsnära och balanserat stöd. Ryggöverdraget är både polstrat och elastiskt, vilket gör det följsamt så att inga tryckpunkter bildas över känsliga områden – en viktig förutsättning för användarens sittolerans över tid.

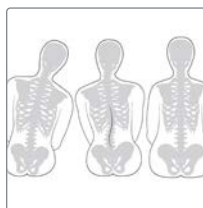


Ability Based Seating™

Genom att ha förmågan som utgångspunkt kan vi stärka användarens möjlighet till aktivitet. Förmågor är färskvaror. Använd dem eller förlora dem. Möjliggör förmågor och stärk dem.

Etac Cross 3A Ryggstöd – med förstklassiga inställningsmöjligheter

Ryggstödet utformning är av största vikt för att erbjuda maximalt stöd, öka sittoleransen och ge rörelsefrihet. En välbalanserad position minskar också risken för framåtgång. Cross 3A ryggstödet har flera smarta inställningsmöjligheter som kan varieras på ett otal sätt. Genom att kombinera olika ryggstöds- och lumbalvinklar med ryggbandens inställning blir positioneringsmöjligheterna närmast oändliga.

3A står för Angulus, Altitudo och Altus – de latinska orden för vinkel, höjd och djup. Här ser du några exempel på 3A ryggstödet vinkel- och höjdinställningar:

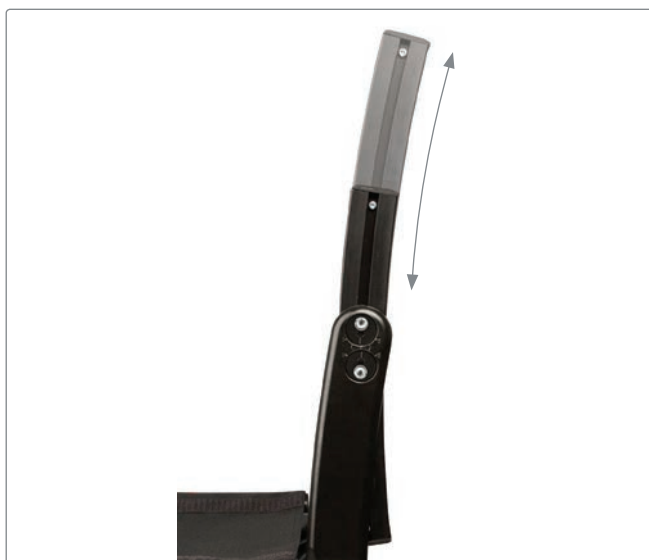


Justerbar ryggstödshöjd
Reglerbar mellan 32–45 cm.



Justerbar vinkel mellan ryggstöd och sits (höft)
Reglerbar från -5° till $+20^{\circ}$.



Justerbar lumbalvinkel
Reglerbar -8° till $+18^{\circ}$

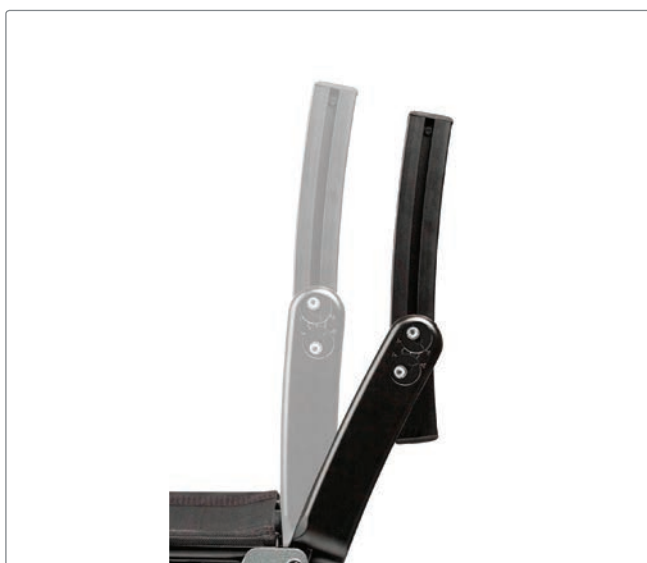

Förlängt sitsdjup
Adderar 7 cm.

Vårdarbroms skapar trygghet på promenaden

Cross 5 med vårdarbroms har samma unika möjligheter och komfort som en Cross 5 med enbart brukarbroms. Vårdarbromsen underlättar hanteringen för personen som skjuter på, vilket skapar trygghet för både användaren och hjälparen. Dessutom är Cross 5 med vårdarbroms alltid utrustad med brukarbroms. Vårdarbromsen är lätt att hantera både för att bromsa och parkera. Den passar i samtliga drivhjulspositioner med både 20", 22" och 24" drivhjul.



Större sitsbredder och högre brukarvikt

Etac Cross 5 XL har samma kvaliteter och egenskaper som en Cross 5. För att klara en tuff belastning är ryggstödet förstärkt med ett fällbart tvärstag. Cross 5 XL finns i sitsbredder upp till 60 cm och klarar en brukarvikt på 160 kg. Den har samma inställningsmöjligheter och stora tillbehörsprogram som Cross 5 och finns även med vårdarbroms.



Etac Cross 5 XL

Tillbehör

Ryggstöd



Ryggklädsel

Klädseln är försedd med sex justerbara kardborreband. Det översta är bredare vilket ger ökad komfort och stabilitet.



3A ryggstöd

Finns i tre varianter, samtliga justerbara i höjd (38–51 cm) och höftvinkel. Med fast alternativt justerbar lumbalvinkel.



Överdrag rygg

Mjukt elastiskt överdrag i mörkgrå plysch.




Komfortöverdrag

Med extra tjock polstring. Finns även till hög rygg. Mörkgrå plysch.



Överdrag Airmesh

Överdrag i Airmesh textil för ett aktivt intryck och luftigare känsla. Överdraget kan användas till både 3A ryggstödet (standardhöjd) och 2B ryggstödet.

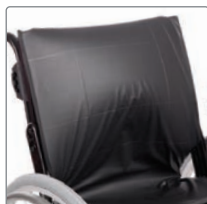

Hygienöverdrag Tidy

Vattenavstötande hygienöverdrag med skumdyna samt svetsade sömmar. Kan levereras med kundspecifik brodyrmärkning.



Körbygel

Höjdgörljörbara och avtagbara.



Körhandtag

Höjdgörljörbara och avtagbara.



Fasta körhandtag



Tvärstag rygg

Ger extra stabilitet. Fällbart med snäpplås på ena sidan.



Ryggkil

Mjuk kil som fästs med kardborre mot klädseln. 30 cm hög. Kombinera med sidostopp eller sidostopp med breddning. Klädsel: mörkgrå plysch.




Ryggkil

Mjuk kil som fästs med kardborre mot klädseln. 15 cm hög. Kombinera med sidostopp eller sidostopp med breddning. Klädsel: mörkgrå plysch.



ECS sitt- och ryggsystem

Separat sitt- och ryggsystem med olika överdrag och stoppningar. Många valmöjligheter av sitt- och ryggdynor, huvudstöd, bålstöd mm.

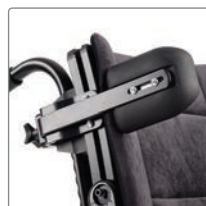

Bålstöd, justerbart och avtagbart

Flera möjligheter att få ett kroppsnära stöd som inte begränsar armrörelsen. Dynan kan roteras för olika former och justeras i djup och höjd. Kan tas av och på för sidoförflyttning utan verktyg.

Tillbehör, forts.

Ryggstöd, forts.



Bålstöd, sidosvängbart och avtagbart

Svagt böjd dyna som kan roteras för att passa olika kroppsformer. Justeras i djup och höjd, och utsvängbart med ett enkelt knapptryck. I utsvängt läge kan armstödet enkelt hanteras utan att kollidera med bålstödsfästet.



Sidostopp, rak

Kombineras med sidostödsdyna, eller tillförs bara för att hålla ryggkilen på rätt plats.



Bålstöd

Mjukt bålstöd i svart Dartex. Justerbart i höjd, djup och bredd. Två alternativa breddpositioner.



Sidodyna

Ger ökad sidostabilitet till originalklädselns kroppsnära stöd. Kan roteras och användas i två olika riktningar.



Bålstöd stor dyna

Bålstöd med stor dyna i svart PUR. Justerbart i djup och höjd.



Sidostopp, liten breddning

Det lilla sidostoppet ökar ryggstödet bredd med 15 mm på var sida. Kombinera gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil.




Bålstöd ssb

Bålstöd i svart PUR. Sidosvängbart. Justerbart i höjd och djup. Mellanstor alternativt stor dyna.



Sidostopp, större breddning

Sidostoppet ökar ryggstödet bredd med 30 mm på var sida. Kombinera gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil.

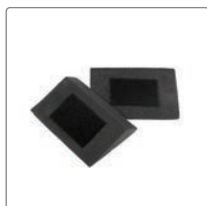


Kil modell 1 (liten)

Par. Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Inklusive självhäftande kardborre. Längd: 13 cm, Bredd: 9.5 cm, Höjd: 2 cm



Kil modell 2 (medium)

Par. Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Inklusive självhäftande kardborre. Längd: 19 cm, Bredd: 12 cm, Höjd: 2 cm

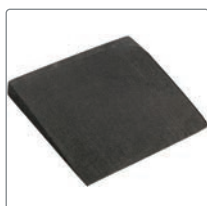

Kil modell 3 (stor)

Par. Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Kan användas för att anpassa en sittdyna för användare med bäckenskevhet. Längd: 20 cm, Bredd: 17 cm, Höjd: 2.5 cm

Armstöd och sidoskydd



Armstöd

Höjdjusterbara med massiv platta, med kort (25 cm) alternativt lång (38 cm) armstödsplatta. Justering med insexnyckel. Går även att låsa fast på rullstolen.



Överdrag armstöd

Polstrat med kallskum eller gel. Avtagbart. Finns i kort (25 cm) och lång (38 cm) modell. Klädsel i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.

Benstöd och fotplattor



Armstöd avtagbara

Höjdjusterbara med avtagbar massiv platta, med kort (25 cm) alternativt lång (35 cm) armstödsplatta. Justering med insexnyckel. Går även att låsa fast på rullstolen.



Armstödsdyna bred och mjuk

Monteras på befintligt armstöd. Passar både kort (25 cm) och långt (38 cm) armstöd, höger och vänster sida..



Armstödsdyna Hemi

Passar endast till långa armstöd (35 och 38 cm). Polstrat avtagbart överdrag. Överdrag i mörkgrå plysch.




Sidoskydd

Avtagbart och justerbart i höjd.



Lårstöd

Finns i kort (50 cm) och lång (57 cm) modell. Monteras på befintligt armstöd.

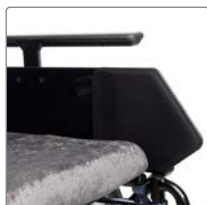

Mjukdyna, lårstöd



Stänkskärm i kolfiber

Justerbar i höjd, djup och vinkel.



Benstöd standard

Svarta. Avtagbara och sidosvängbara. Finns även med låsning.



Snäva benstöd / Snäva korta benstöd

Gör att fotstödet kommer cirka 6 cm närmare sitsen. Finns även i en kort version och med låsning.



Vinkelreglerbart benstöd modell 1

Kombineras med vadplatta i mjuk plysch som kan regleras i höjd, djup, vinkel och sidled. Benstöd, dynkonsol och vadplatta beställs separat.



Vinkelreglerbart benstöd modell 2

Med uppfällbar vadplatta, justerbar i vinkel och höjd.




Vinkelreglerbart benstöd modell 3 med vadplatta

Med skålad, uppfällbar vadplatta som kan justeras i två höjdlägen på benstödsröret. Passar till både höger och vänster sida.



Vinkelreglerbart benstöd

Sidosvängbara och avtagbara. Med fällbara vadstöd, justerbara i höjd- och djupled. Överdrag: Hygienklädsel.

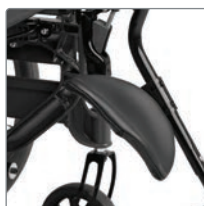

Överdrag vadplatta

Till vinkelreglerbart benstöd. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.

Tillbehör, forts.

Benstöd och fotplattor, forts.



Fotplattor

Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, reglerbara i höjd. Levereras med standard infästningsrör. Finns även med korta (-8 cm) respektive långa (+10 cm) infästningsrör. Djup 13 cm



Polstring till vadband

Ger ett mjukare stöd för vaderna. Finns i 20, 30 och 40 cm längd.



Polstring, delad fotplatta

För extra mjuk komfort. Plysch.



Vadmatta

För extra mjuk komfort. Justerbart med Velcro. Plysch. Monteras på fast eller vinkelställbara benstöd.



Hel fotplatta

Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och vinkel.



Hälband

Reglerbart i längd. Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med förlängd fotplatta.



Polstring, hel fotplatta Cross

För extra mjuk komfort. Plysch.



Amputationsbenstöd

Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled. Passar för höger och vänster sida. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex. Avtagbart.



Hel fotplatta barn

Justerbar i höjd och djup. Reglerbar i vinkel. Finns för sitsbredd 35 och 37,5 cm. Avtagbar.



Amputationsvikt

Motverkar tipprisk och förbättrar köregenskaperna. Avtagbar och vinkel-reglerbar. Vikt: 3 kg



Förlängd fotplatta

Monteras på befintlig fotplatta. Ger större understödsyta. Djup 21 cm.



Gipsbenstöd

För helbensgips. Stödet har tre separata dynor som är reglerbara i höjd, djup, vinkel och sidled. Finns till höger och vänster sida.



Vadband

Avtagbart, reglerbart i längd.



Tillbehör, forts.

Drivhjul och länkhjul



Drivhjul

20", 22" alternativt 24", samt 24" lågviktsdrivhjul. Välj mellan massiva eller luftpumpade med högtrycksslang.



Drivringar

Välj mellan plastade, cellgummi, aluminium, titan och rostfria.



Enarmsdrift

Passar både höger och vänster sida. Kan inte kombineras med vådarbroms.



Länkhjul

4", 5", 6" alternativt 6,5".



Cambervinkel

Standard 2°, alternativ 0°.



Ekerskydd

Grå eller gul logo.

Broms



Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta. Färg: svart.



Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta. Färg: rött.




Broms med bromsspaksförlängare

Bromsspaken kan vinklas framåt, för att underlätta vid sidoförflyttning.



Enhandsbroms

Höger alternativt vänster sida. Kan kombineras med vådarbromshjul.

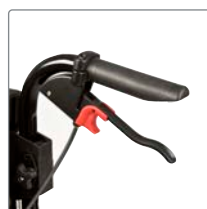

Vådarbroms

Med minskad öppningsvinkel för att passa personer med mindre händer. 75 mm mellan handtagsgrepp och bromsspak.

Sits



Sitsklädsel

Ställbar 6 cm i djup.



Hård sits

Avtagbar. Kompletteras med lämplig sittdyna. Lågmonterad.




Hög montering, plan sits

Tillbehörssats för att få plansitsen i samma höjd som sitsrören.



Sittdyna

52 cm lång. Anatomisk formad sittdyna som kapas till inställt sittdjup. Klädsel: mörkgrå plysch.

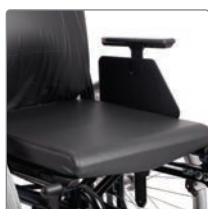

Sittdyna Tidy

Med vattenavstötande hygienöverdrag i svart Dartex.
46 cm lång (sitsbredd 35–40 cm)
50 cm lång (sitsbredd 42.5–60 cm).



Sitsförlängare

Fästs med kardborre mellan transportfästen. Ökar sitsdjupet med upp till 7 cm.


Tippskydd



Teleskoperande tippskydd

Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i längd och vinkel. Passar alla sitshöjder.

Huvudstöd

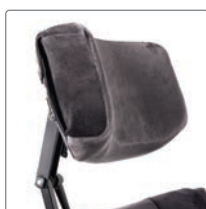

Huvudstöd

Inklusive stag. Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Monteras på huvudstödsfäste alt körbygel (fäste köps separat). Klädsel: mörkgrå plysch alt hygien grå.




Huvudstöd med sidostöd

Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdrag: grå hygien, avtagbart och tvättbart.



Huvudstödsfäste

Avtagbart med snäpplås.

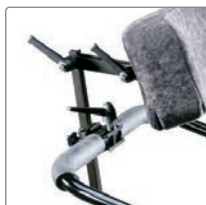


Huvudstödsfäste

För körbygel.

Tillbehör, forts.

Övrigt

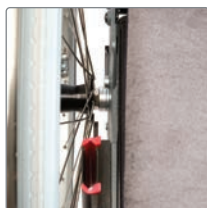

Breddningssats drivhjul

Ökar avståndet mellan armstöd, broms och drivhjul per sida med: Cross 5: 5 mm, Cross I: 10 mm. Totalbredden ökar med: Cross 5: 1 cm, Cross I: 2 cm. Ej i kombination med vårdarbroms.




Fäste bröstsele

För övre infästning av bröstsele. Monteras på huvudstödsstaget.



Breddat framgaffelfäste

Flyttar ut länkhjulet 3 cm, stolens totalbredd påverkas inte.

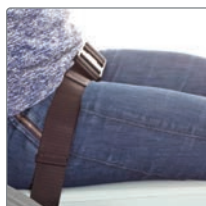

Höftbälte och bälte

Med snäpplås, justerbara i längd. Höftbälte: Två alternativa fästpunkter på ramen.



Framgaffelfäste kort

För 4" och 5" länkhjul. Gör att man kommer ner till 34 cm sitshöjd.



Käpphållare Universal

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras på trampörret alternativt tippskyddet. Passar både höger och vänster sida.



Bord

Transparent. Monteras på långa armstöd.



Droppställning

Komplett med fäste.



Hemibord

Fästs mot armstödsdynor (ingår) med velcro. Passar både korta och långa armstöd. Finns upp till 50 cm sitsbredd. Halkskydd finns som extra tillbehör.



Lodningsverktyg länkhjul

Vattenpass för lodning av länkhjul.



Hemibord, halvt

Justerbart i djup och bredd. Fällbart åt sidan. Fästs på armstödsconsollen. Höjden justeras med armstödet.



Verktögsats

Innehåller ringnyckel (8, 10, 13 och 24 mm), insexnyckel (3, 4, 5 och 6 mm), hylsnyckel (19 mm) och skruvmejsel PH1.

Chassifärg



Mörkblå -93

Mått och vikt – Etac Cross 5 / Cross 5 XL

							
Cross 5				Kort ram		Lång ram	
Sitsbredd	Total bredd	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Sitsdjup	Vikt	Sitsdjup	Vikt
35.0 cm	56.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.0 kg	42–48 cm (+7 cm*)	15.2 kg
37.5 cm	58.5 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.1 kg	42–48 cm (+7 cm*)	15.3 kg
40.0 cm	61.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.2 kg	42–48 cm (+7 cm*)	15.4 kg
42.5 cm	63.5 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.3 kg	42–48 cm (+7 cm*)	15.5 kg
45.0 cm	66.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.5 kg	42–48 cm (+7 cm*)	15.7 kg
47.5 cm	68.5 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.6 kg	42–48 cm (+7 cm*)	15.8 kg
50.0 cm	71.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.7 kg	42–48 cm (+7 cm*)	15.9 kg
Cross 5 XL				Kort ram		Lång ram	
Sitsbredd	Total bredd	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Sitsdjup	Vikt	Sitsdjup	Vikt
47.5 cm	68.5 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	15.9 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.1 kg
50.0 cm	71.0 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.0 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.2 kg
52.5 cm	73.5 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.1 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.3 kg
55.0 cm	76.0 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.3 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.5 kg
57.5 cm	78.5 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.4 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.6 kg
60.0 cm	81.0 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.5 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.7 kg

Mått och vikt – Etac Cross 5 / Cross 5 XL med vårdarbroms

      								
Cross 5 VB				Kort ram		Lång ram		
Sitsbredd	Total bredd	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Sitsdjup	Vikt	Sitsdjup	Vikt	
35.0 cm	57.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.6 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.8 kg	
37.5 cm	59.5 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.7 kg	42–48 cm (+7 cm*)	16.9 kg	
40.0 cm	62.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.8 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.0 kg	
42.5 cm	64.5 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	16.9 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.1 kg	
45.0 cm	67.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	17.1 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.3 kg	
47.5 cm	69.5 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	17.2 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.4 kg	
50.0 cm	72.0 cm	34–56.5 cm	34–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	17.3 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.5 kg	

Cross 5 XL VB				Kort ram		Lång ram		
Sitsbredd	Total bredd	Sitshöjd fram	Sitshöjd bak	Sitsdjup	Vikt	Sitsdjup	Vikt	
47.5 cm	69.5 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	17.5 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.7 kg	
50.0 cm	72.0 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	17.6 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.8 kg	
52.5 cm	74.5 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	17.7 kg	42–48 cm (+7 cm*)	17.9 kg	
55.0 cm	77.0 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	17.9 kg	42–48 cm (+7 cm*)	18.1 kg	
57.5 cm	79.5 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	18.0 kg	42–48 cm (+7 cm*)	18.2 kg	
60.0 cm	82.0 cm	40–56.5 cm	40–53 cm	36–42 cm (+7 cm*)	18.1 kg	42–48 cm (+7 cm*)	18.3 kg	

Gemensam fakta

Ryggstödshöjd**	32–45 cm
Transportbredd	32.0 cm
Max brukarvikt, Cross 5	135 kg
Max brukarvikt, Cross 5 XL	160 kg

* Mått med Cross 3A Triangulär rygg.

** Gäller Cross 3A standard ryggstöd. För Cross 3A ryggstöd hög gäller 38–51 cm.

Cross 5: Vikter gäller stol med 24" drivhjul med snappkopplingsnav, högtrycksdäck, aluminiumdrivringar, körhandtag, benstöd, fotplatta, broms, armstödsfäste, 6 1/2" länkhjul och mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %.

Cross 5 XL: Vikter gäller stol med 24" drivhjul med snappkopplingsnav, massivt däck, rostfria drivringar, tvärstag rygg, körhandtag, benstöd, fotplatta, hälband, broms, armstödsfäste, 6 1/2" länkhjul och mediumgaffel. Angivna mått kan variera ± 2 %.



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se