



## Etac Cross 6

Gemakkelijk verstelbare rolstoel  
voor optimaal comfort

 **etac**<sup>®</sup>





## De Clinical Guide

Een extra steuntje bij een rolstoelpassing

Etac heeft samen met fysiotherapeut Bart van der Heyden de Clinical Guide ontwikkeld. Bart zijn passie is het ontwikkelen van zittechnieken die tot een betere zitinterventie leiden en tevens tijdbesparend zijn zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de resultaten van de zitinterventie. De Clinical Guide vertegenwoordigt de methodologie van Etac die is aangepast en geïnspireerd door Bart's ontwikkelde 'SuperSeating' zitanalyse techniek voor rolstoelgebruikers. De clinical guide helpt je een efficiënte Cross 6 rolstoelpassing te doen die tijd bespaart, zonder concessies te doen aan het (klinische) resultaat.



Clinical Guide  
Etac Cross 6  
met 3A rugleuning

etac

# Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.

Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie. Waarbij we de cliënt zoveel mogelijk gebruiksgemak en comfort willen laten ervaren en de zorgverleners zoveel mogelijk ontzorgen.

- ✓ Slim ontworpen hulpmiddelen
- ✓ Altijd samen op zoek naar de beste oplossing
- ✓ Oprecht en persoonlijke service

## Rolstoelen

Etac ontwikkelt en produceert kwalitatieve rolstoelen die de juiste zithouding creëren en goede rugondersteuning bieden voor een betere houding en balans.





# Etac Cross 6

Individueel aanpasbaar én comfortabel.

## Iedereen verdient de juiste rolstoel..

De Cross 6 is een gemakkelijk verstelbare rolstoel voor een juiste houding en optimaal comfort. De rolstoel is individueel aanpasbaar, zodat voor iedereen de ideale pasvorm gecreëerd kan worden. De Cross 6 is ontwikkeld op de pijlers van het beste welzijnssysteem ter wereld: het Scandinavische systeem. Het resultaat: een rolstoel voor iedereen.

## Tijdbesparend

De nieuwe Cross 6 is nog beter instelbaar dan zijn voorganger al was. Professionals bevestigen dat de Cross 6 snel en gemakkelijk naar wens aan te passen is.

Cross 6 – Gemaakt in Zweden.  
Omdat iedereen de juiste rolstoel verdient.



## Heupbreedte is wat telt

De zithoogte van de Cross 6 is instelbaar tussen de 32 en 53,5 cm: met één frame! Het ontwerp van de wielposities geeft optimale stabiliteit in relatie tot de geïnstalleerde zithoogte. Elke uitsparing biedt vier asgaten. Verreweg de meeste gebruikers passen in het korte zitframe\*. Bestel de juiste rolstoel door - simpelweg - de heupbreedte te meten.

\*Het korte zitframe in combinatie met een 3A rugstelsel is geschikt voor de meeste gebruikers tot een lengte van 190 cm. Overweeg een lang zitframe bij een lengte vanaf 185 cm.

Let op: indien een Intram rugleuning wordt toegepast (ook bij Cross 6 Comfort) gelden andere maten, zijn de verstelmogelijkheden beperkter en kan vaak beter gekozen worden voor een lang zitframe.

# Etac Cross 6 Comfort

De Etac Cross 6 Comfort combineert maximaal comfort met uitstekende functionaliteit.

## Optimaal zitcomfort en rijgedrag

Speciaal voor de Nederlandse markt bestaat deze uitvoering van de Etac Cross 6, in een specifieke configuratie voor u opgebouwd.

De Cross 6 Comfort is standaard uitgevoerd met een Intram Tulprugleuning, een Intram vlak gepolsterde zitting, massieve banden, anti-kiep, lange armleggers met armleggerhoezen en Prio comfort beensteunen.

## Eenvoudig in te stellen

Het instellen van de Cross 6 is eenvoudig en vereist een minimum aan gereedschap om aan de individuele behoeftes van de gebruiker te voldoen.

De Etac Cross Comfort is ook verkrijgbaar in de XL variant, met een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg.



## Details



### Intram zitsysteem

De velours Intram tulprugleuning biedt goede ondersteuning van de rug voor een comfortabele zithouding. Samen met de gepolsterde zitting biedt het Intram zitsysteem hoogwaardig comfort.



### Ongekend zithoogte-bereik

Met het Cross 6 zijframe realiseert u moeiteloos een framehoogte tussen 32 en 53,5 cm. Herinzetbaarheid is gewaarborgd.



### Uitstekende rij-eigenschappen

De Cross 6 COMFORT heeft een dubbel kruisframe en evenaart de stijfheid van een vastframe rolstoel. Goede rij-eigenschappen zijn gegarandeerd.



### Veelzijdige mogelijkheden

Uitgebreid assortiment aan opties en accessoires. Cross 6 Comfort kan desgewenst ook worden uitgerust met alle andere polsterdelen van het Intram-assortiment.

## Functies - Tijdbesparend

Ontworpen in samenwerking met de beste professionals ter wereld, in elke fase: van productontwikkeling en ontwerp, via productie tot het verzamelen van gebruikerservaringen. Deze verbeteringen helpen de artsen en zorgverleners tijd te besparen.



### Snelste wielverstelling

De intuïtieve wielverstelling is de snelste in de branche. Nieuw ontwerp voor stabiliteit in verhouding tot zithoogte. 44 posities.



### Twee maten zitframes

Het korte zitframe wordt voor het grootste gedeelte van de gebruikers ingezet. Bespaart tijd tijdens het bestellen.



### Eenvoudig de juiste heuphoek

Het instellen van de juiste heuphoek is nu eenvoudig en geeft een hoorbaar klikgeluid na correct instellen.



### Voor elk lichaamstype/vorm

Stel eenvoudig - en desgewenst asymmetrisch - de individuele ondersteuning van de rugleuning in.



### In hoogte instelbare duwhandvatten

Snel en eenvoudig te verstellen naar de gewenste hoogte middels een cliplock (niet voor Intram rugleuningen).



### Behoud van sterkte

Het rolstoelframe behoudt gedurende de gehele levensduur haar ongekende stijfheid; gegarandeerd.



### De riem zelf positioneren

Een nieuwe, eenvoudige manier om de riem te positioneren.



### Anti-kiep

Inzetbaar voor het gehele zithoogte-bereik van 21 cm, snel en eenvoudig. Altijd per paar.


## Framekleuren



Zwart -01



Grijs -78

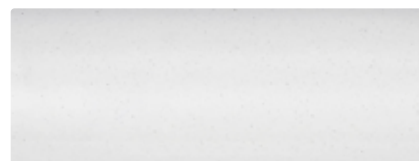

Wit -92

Cross 6	Artikelnummer	Totale breedte	Zitdiepte	Transportgewicht
35 cm kort	13240101	55,5 cm	36-49 cm	10,4 kg
35 cm lang	13240102	55,5 cm	42-55 cm	10,7 kg
37,5 cm kort	13240103	58,0 cm	36-49 cm	10,5 kg
37,5 cm lang	13240104	58,0 cm	42-55 cm	10,8 kg
40 cm kort	13240105	60,5 cm	36-49 cm	10,6 kg
40 cm lang	13240106	60,5 cm	42-55 cm	10,9 kg
42,5 cm kort	13240107	63,0 cm	36-49cm	10,7 kg
42,5 cm lang	13240108	63,0 cm	42-55 cm	11 kg
45 cm kort	13240109	65,5 cm	36-49 cm	10,9 kg
45 cm lang	13240110	65,5 cm	42-55 cm	11,2 kg
47,5 cm kort	13240111	68,0 cm	36-49 cm	11 kg
47,5 cm lang	13240112	68,0 cm	42-55 cm	11,3 kg
50 cm kort	13240113	70,5 cm	36-49 cm	11,1 kg
50 cm lang	13240114	70,5 cm	42-55 cm	11,4 kg

Cross 5 XL	Artikelnummer	Totale breedte	Zitdiepte	Transportgewicht
47,5 cm kort	13123111	68,5 cm	36-49 cm	11,6 kg
47,5 cm lang	13123112	68,5 cm	42-55 cm	11,8 kg
50 cm kort	13123113	71,0 cm	36-49 cm	11,7 kg
50 cm lang	13123114	71,0 cm	42-55 cm	11,9 kg
52,5 cm kort	13123115	73,5 cm	36-49 cm	11,8 kg
52,5 cm lang	13123116	73,5 cm	42-55 cm	12 kg
55 cm kort	13123117	76,0 cm	36-49 cm	12 kg
55 cm lang	13123118	76,0 cm	42-55 cm	12,2 kg
57,5 cm kort	13123119	78,5 cm	36-49 cm	12,1 kg
57,5 cm lang	13123120	78,5 cm	42-55 cm	12,3 kg
60 cm kort	13123121	81,0 cm	36-49 cm	12,2 kg
60 cm lang	13123122	81,0 cm	42-55 cm	12,4 kg

Cross 6 Comfort	Artikelnummer	Totale breedte	Zitdiepte	Transportgewicht
35 cm kort	e13246001	56,0 cm	43-47 cm	10,4 kg
35 cm lang	e13246002	56,0 cm	47-51 cm	10,7 kg
37,5 cm kort	e13246003	58,5 cm	43-47 cm	10,5 kg
37,5 cm lang	e13246004	58,5 cm	47-51 cm	10,8 kg
40 cm kort	e13246005	61,0 cm	43-47 cm	10,6 kg
40 cm lang	e13246006	61,0 cm	47-51 cm	10,9 kg
42,5 cm kort	e13246007	63,5 cm	43-47 cm	10,7 kg
42,5 cm lang	e13246008	63,5 cm	47-51 cm	11 kg
45 cm kort	e13246009	66,0 cm	43-47 cm	10,9 kg
45 cm lang	e13246010	66,0 cm	47-51 cm	11,2 kg
47,5 cm kort	e13246011	68,5 cm	43-47 cm	11 kg
47,5 cm lang	e13246012	68,5 cm	47-51 cm	11,3 kg
50 cm kort	e13246013	71,0 cm	43-47 cm	11,1 kg
50 cm lang	e13246014	71,0 cm	47-51 cm	11,4 kg

Cross 5 XL Comfort	Artikelnummer	Totale breedte	Zitdiepte	Transportgewicht
47,5 cm kort	e13126111	68,5 cm	43-47 cm	11,6 kg
47,5 cm lang	e13126112	68,5 cm	47-51 cm	11,8 kg
50 cm kort	e13126113	71,0 cm	43-47 cm	11,7 kg
50 cm lang	e13126114	71,0 cm	47-51 cm	11,9 kg
52,5 cm kort	e13126115	73,5 cm	43-47cm	11,8 kg
52,5 cm lang	e13126116	73,5 cm	47-51 cm	12 kg
55 cm kort	e13126117	76,0 cm	43-47 cm	12 kg
55 cm lang	e13126118	76,0 cm	47-51 cm	12,2 kg
57,5 cm kort	e13126119	78,5 cm	43-47 cm	12,1 kg
57,5 cm lang	e13126120	78,5 cm	47-51 cm	12,3 kg
60 cm kort	e13126121	81,0 cm	43-47 cm	12,2 kg
60 cm lang	e13126122	81,0 cm	47-51 cm	12,4 kg

De gegeven gewichten en afmetingen kunnen 2% afwijken.

#### Framehoogte voor

32-53,5 cm

#### Framehoogte achter

32-51,5 cm

#### Rughoogte

32-45 cm met std. Cross 3A rugframe.

#### Rughoogte met Cross 3A hoge versie

38-51 cm

#### Transportbreedte

32 cm

#### Totale hoogte

74-128 cm

#### Totale lengte

102-122 cm

#### Lengte opgevouwen

76-92 cm

#### Max. gebruikersgewicht

Cross 6 / Cross 6 Comfort 135 kg  
Cross 5 XL / Cross 5 XL Comfort 160 kg




# Etac 3A rugstelsysteem

Gemaakt om te voldoen aan de meest strenge eisen van revalidatie-professionals.

Er bestaat geen andere rugleuning die vergelijkbaar is met het Etac 3A rugstelsysteem. Ontdek de diverse positioneringsmogelijkheden en hoe deze bereikt kunnen worden zonder dure rugondersteuningssystemen te gebruiken. Pas de vorm en ondersteuning direct aan, ook wanneer de gebruiker in de rolstoel zit. Het resultaat is

direct zichtbaar en de ondersteuning kan altijd aangepast worden naar de behoeftes. Het 3A rugstelsysteem is een uniek hulpmiddel om aan positioneringsdoelen te voldoen, op basis van individuele capaciteiten en de lichaamsvorm van de gebruiker. Om mobiliteit en zelfstandigheid te verbeteren. Dit noemen we Ability Based Seating™.

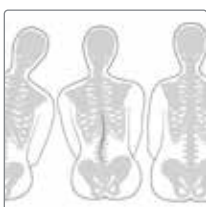

### Ability Based Seating™

De optimale rug-instelling gaat uit van de mogelijkheden van de gebruiker en probeert deze te vergroten. Door ondersteuning op de juiste plek wordt de balans verbeterd en kan de gebruiker actiever zitten.



### Direct perfecte pasvorm

Zijsteunen, drukverdelers en wiggen zijn voorbeelden van eenvoudige onderdelen om direct de perfecte vorm te creëren.



### Rompstabiliteit is de kern

Het creëren van voldoende bekkenondersteuning is de eerste stap naar rompstabiliteit. De rughoek en de onderste spanbanden zijn de belangrijkste instrumenten om het bekken te ondersteunen.



### How to Shape Up

Een slechte zithouding kost bijzonder veel energie. Wanneer een rolstoelgebruiker actief wil kunnen zijn, is een goede rugondersteuning belangrijk. Lees meer over het instellen van de Cross 3A op onze website.



## Uitstekend aanpassingsvermogen

De 3A rugleuning heeft verschillende slimme instelmogelijkheden voor een uitstekend aanpassingsvermogen aan de gebruiker. De combinatie rugleuning- en heupsteunverstelling maakt verschillende positioneringsmogelijkheden mogelijk.

3A staat voor 'Angulus', 'Altitudo' en 'Altus' - Latijnse woorden die staan voor hoek, hoogte en diepte. Hieronder zijn enkele voorbeelden terug te vinden van wat bereikt kan worden met een Cross 3A rugsysteem.



### Verstelbare hoogte van de rugleuning

Verstelbaar tussen 32 - 45 cm



### Verstelbare hoek tussen zitting en rugleuning (heup)

Verstelbaar van  $-5^{\circ}$  tot  $+20^{\circ}$



### Verstelbare lendenhoek

Verstelbaar van  $-16^{\circ}$  tot  $+16^{\circ}$



### Verstelbare zitdiepte

Tot 7 cm extra zitdiepte

#### Rughoogte

Verstelbaar van 32 tot 45 cm.

Hoge uitvoering: verstelbaar van 38 tot 51 cm

#### Rughoek

Standaard instelling  $+2^{\circ}$ , verstelbaar  $-5^{\circ}$  tot  $+20^{\circ}$ .

#### Lumbale hoek

Standaard instelling  $+7^{\circ}$ , verstelbaar van  $-16^{\circ}$  tot  $+16^{\circ}$

#### Rugspanning en rugbekleding

6 verstelbare rugspanbanden met klittenband. Gepolsterde rughoes met grijs velours, mesh of platilon bekleding.

#### Zitdiepte 3A rugsysteem

Kort frame: 36 - 49 cm - Lang frame: 42 - 55 cm

Voorzijde: de zitdiepte kan worden ingekort met 5 cm

Achterkant: de zitdiepte varieert, afhankelijk van de ruginstelling. Door gebruik te maken van een zitmat-verlenger en het verstellen van de rughoek, kan de zitdiepte verder vergroot worden met maximaal 7 cm

# Intram zitsysteem

Een uitstekend gepolsterd zitsysteem voor de Etac Cross 6 en Cross 5 XL

De Etac Cross 6 kan worden uitgevoerd met gepolsterde zittingen en rugleuningen: het Intram zitsysteem. Door de Intram rugleuningen en zittingen kan de actieve rolstoel ook worden gebruikt als semi-actieve of passieve rolstoel.

Het Intram zitsysteem biedt een uitstekend zitcomfort door de keuze voor uitsluitend hoogwaardige materialen. De zitpolstering is uitgevoerd in een hoogwaardig koudschuim.

## Uitstekend zitcomfort

De zittingen in Comfort-uitvoering met traagschuim zijn voorzien van een extra onderlaag waardoor er nog wat extra schokdemping is en de zitbotten worden opgevangen voordat het laagste punt wordt bereikt. Met de taludzitting willen we bereiken dat het bekken wordt gestabiliseerd en niet achterover kantelt waardoor het contact met de rugleuning kleiner zou worden. Het talud is op een dusdanige wijze vormgegeven dat de hoogte aan de voorzijde nauwelijks groter is dan bij een vlak gepolsterde zitting. Hierdoor blijft de mogelijkheid aanwezig om te trippelen en neemt de effectieve zithoogte nauwelijks toe ten opzichte van een vlakke zitting.

De ophanging van de zittingen is door middel van verzonken haken waardoor het verschil in zithoogte ten opzichte van de zitmat is slechts 4,5 cm bedraagt.

De rugleuningen zijn eveneens uitgevoerd met een hoogwaardig koudschuim; de polstering is op een zodanige manier aangebracht dat vergroeiingen als kyfose er in de meeste gevallen in wegvallen. Dit is mede te danken aan de basis die aan de onderzijde open is en voorzien is van instelbare banden. Hierdoor is ook de her-inzetbaarheid van deze rugleuningen gewaarborgd. Verder is de laterale ondersteuning zo aangebracht dat de heupen vrij blijven.





### Drempelzitting

Afbekleed in zwart antislip en voorzien van een 5 of 7,5 cm hoge drempel.



### Vlakke zitplank

Afbekleed in zwart antislip.



### Taludzitting

Voorzien van koudschuim of met traagschuim polstering. Standaard afbekleed in platon.



### Vlak gepolsterde zitting

Voorzien van koudschuim. Ook leverbaar in Comfort-uitvoering met traagschuim polstering. Afbekleed in donkergrijs velours of platon.



### Tulprug

Naspanbaar en gepolsterd met een hoogwaardig koudschuim en voorzien van laterale ondersteuning.

Voorzien van een houten basis met open onderzijde en vier met klittenband naspanbare banden. Afbekleed in donkergrijs velours of platon. Rughoogte 45 cm.



### Hoge rugleuning

Naspanbaar en gepolsterd met een hoogwaardig koudschuim. Voorzien van laterale ondersteuning.

Voorzien van een houten basis met open onderzijde en vijf met klittenband naspanbare banden. Afbekleed in donkergrijs velours of platon. Rughoogte 56 cm.



### Cliplocks

Voor borging van de voorste twee zittinghaken in het rolstoelframe (optioneel).



De rugleuningen zijn voorzien van een uitgekiend ophangstelsysteem waardoor het mogelijk is om met één hand de rugleuning te monteren. Hiervoor dient de rolstoel te worden uitgevoerd met het Cross 2 rugframe



### Starlock zitkussen

Luchtcel zitkussens met excellente drukverdeling en onbegrensde mogelijkheden voor positioneren. Kan op een slappe zitmat of op een vlakke zitplank geplaatst worden.





## Standaard uitvoering Cross 6 en Cross 5 XL



### 3A rugframe

In hoogte, diepte en hoek instelbaar. Rughoogte 38-51 cm. Standaard uitgevoerd met een gepolsterde rugbekleding in grijs velours.



### Zitkussen

Anatomisch gevormd zitkussen. 56 cm lang. Op maat te snijden voor de juiste zitdiepte. Bekleding: grijs velours.




### Standaard beensteun

Afneembaar en wegzwenkbaar. Standaard uitgevoerd met opklapbare en in hoogte en hoek instelbare voetplaten.



### Remmen recht

Drukrem met rechte remhendel.

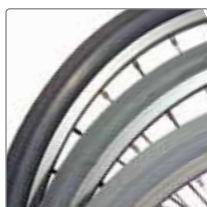

### Voor- en achterwielen

24" achterwielen met massieve banden en aluminium hoepels. 6,5" massieve voorwielen met standaard balhoofden en medium voorvorken.



### Armsteunen met kledingbeschermer

Uitneembaar en in hoogte instelbaar met inbus. Armleggerlengte 26 cm.

## Standaard uitvoering Cross 6 Comfort en Cross 5 XL Comfort



### Armleggerpolstering platilon

Lange armsteunen (36 cm) met kledingbeschermer, in hoogte instelbaar. Voorzien van gepolsterde armleggerhoezen in platilon




### Prio comfort beensteun

Afneembaar en wegzwenkbaar, voorzien van gepolsterde kuitplaat en kniepolstering. Lengte-compenserend. Inzetbaar vanaf zitbreedte 42,5 cm.



### Vlak gepolsterde Intram zitting

Voorzien van koudschuim interieur en platilon bekleding.

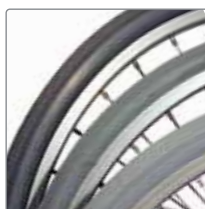

### Voor- en achterwielen

24" achterwielen met massieve banden en aluminium hoepels. 6,5" massieve voorwielen met standaard balhoofden en medium voorvorken.



### Intram Tulprug

Afbekleed in grijs velours. Voorzien van naspanbare singelbanden en laterale ondersteuning.



### Stokhouder

Inclusief lus. Te monteren aan de linker- of rechterzijde

## Accessoires



### Gepolsterde hoofdsteun

Te monteren op de duwbeugel of Intram rugpolsterdelen. In hoogte, diepte en hoek instelbaar.

Met afneembare en wasbare velours hoes.



### Duwbeugel

In hoogte instelbaar en uitneembaar.



### Hoofdsteunhuisje

Verkrijgbaar in een versie voor Intram rugleuning en een versie voor 3A rugleuning.



### One-arm drive

Verkrijgbaar in een rechts en linkse uitvoering.

Niet in combinatie met trommelremmen



### Dijbeensteun met foampad

Te monteren aan bestaande armsteun.



### Anti-kiep telescopisch

Opklapbaar. In hoogte, diepte en hoek instelbaar.

Passend voor alle zithoogtes. Altijd per paar



### Rugfixatiebeugel

Biedt extra stijfheid aan het rugframe, eenvoudig neerklapbaar.

Standaard op de Cross 5 XL.



### Comfort rugbekleding

Met extra dikke vulling.

Ook geschikt voor de hoge 3A rugleuning.

Materiaal: grijs velours. Optioneel bedrukt met uw logo



### Rugwikkussen

Verkrijgbaar in 15 of 30 cm hoog.

Materiaal: grijs velours met klitteband.



### Incontinentie rugbekleding

Incontinentiehoes voor 3A rugleuning.

Materiaal: Dartex. Waterafstotend, afneembaar met een natte doek en wasbaar op 90 °C.

Optioneel bedrukt met uw logo.

Alleen voor de 3A standaard rughoogte



### Rompsteun, wegzwenkbaar

Voor betere ondersteuning en genoeg ruimte om de arm vrij te bewegen. Instelbaar in hoogte en diepte.

Verkrijgbaar in 3 versies.



### Airmesh rugbekleding

Gepolsterde 3A rughoes met ademende bekleding met open structuur.

Alleen voor de 3A standaard rughoogte.



### Carbon spatborden

In hoogte, diepte en hoek instelbaar



### Spaakbeschermers

Transparant of met grijs Etac logo.

## Accessoires



### Beensteun kleine hoek / kleine hoek en extra kort

Brengt de voetenplaten 5 cm naar achteren. Alleen in combinatie met 4" of 5" voorwielen. Ook verkrijgbaar in korte versie en met vergrendeling.



### Centrale voetenplaat

Opklapbaar en instelbaar in hoogte, diepte en hoek. Voetplaatpolstering optioneel verkrijgbaar.



### Prio Comfort beensteun

Afneembaar en wegzwenkbaar, voorzien van gepolsterde kuitplaat en kniepolstering. Lengte-compenserend. Inzetbaar vanaf zitbreedte 42,5 cm.



### Vergrote voetplaten

Vergroot de voetplaatdiepte. Te monteren op standaard voetplaat.



### Comfort beensteun model 1

Afneembaar en wegzwenkbaar. Optioneel te combineren met kuitplaatophanging en gepolsterde kuitplaat.



### Kuitband

Verwijderbaar, verstelbaar in lengte. Kuitbandpolstering optioneel verkrijgbaar.



### Comfort beensteun model 3

Afneembaar en wegzwenkbaar. Optioneel te combineren met kuitplaatophanging en gepolsterde kuitplaat. Lengte-compenserend.



### Hakband

Verstelbaar in lengte. Niet in combinatie met vergrote voetplaten.



### Comfort beensteun model 3 met kunststof kuitplaat

Afneembaar en wegzwenkbaar. Lengte-compenserend



### Kuitplaatpolstering

Losse hoes t.b.v. kunststof kuitplaat model 3. Materiaal: Dartex of grijs velours..



### Gipsbeensteun

Met afzonderlijk kussen. Instelbaar in hoogte, diepte en hoek. Wegzwenkbaar. Exclusief voetenplaat



### Voetplaatpolstering

Voor extra comfort.



### Armleggerkussen

Zacht gepolsterd en extra breed (8x40 cm). Te monteren op de lange armsteun.



### Hemiplegie armlegger

In hoek instelbaar te monteren op de lange (36 cm) armsteun. Bekleed met afneembare hoes in grijs velours.



## Accessoires



### Amputatiesteun

Instelbaar in hoogte, diepte en hoek.  
Links of rechts te monteren.  
Bekleding: grijs velours of Dartex.



### Incontinentie zitkussen

Met incontinentiehoes.  
Waterafstotend, afneembaar met een natte doek en wasbaar op 90° C.  
Lengte 46 cm, breedte 35-40 cm.  
Lengte 50 cm, breedte 42,5-60 cm.



### Zitdieptevergroter 3A

Extra singel aan de achterzijde voor 7 cm extra zitdiepte.



### Heupgordel

Met druk knopen, verstelbaar in lengte.  
Traploos te monteren in een montagesleuf.



### Werkblad

Transparant.  
Te monteren op lange armsteunen



### College-werkblad

Verstelbaar in diepte en breedte. Zijdelings opklapbaar.  
Bevestigen op armsteunbeugels.  
De hoogte wordt ingesteld met behulp van de armsteun.



### Stokhouder

Inclusief lus.  
Te monteren aan de linker- of rechterzijde.



### Remmen met verlengde remhendel

Neerklapbare remhendel voor zijdelingse transfer.


### Eénhandige remsbediening

Verkrijfbaar voor de rechter- of linkerzijde.  
Kan in combinatie met trommelremmen.



### Pelvic Stabilizer

Contour inleg in het standaard zitkussen, te plaatsen in de hoes.

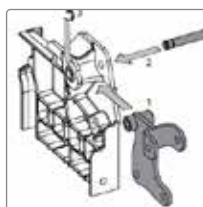

### Zitdieptevergroter Intram

Bouwt het Intram rugframe 6 cm meer naar achteren



### Trommelremmen

Standaard ruimte tussen hendel en handvat, 100 mm.  
Voor mensen met kleinere handen.  
Ruimte tussen hendel en handvat, 75 mm



### Verbredingsset

Vergroot de ruimte tussen de armsteunen en de totale breedte van de rolstoel met 2 cm.



### Verbrede balhoofden

Verplaatst het voorwiel 3 cm naar de buitenzijde.  
Totale breedte van rolstoel blijft gelijk.



### Verlaagde balhoofden

Voor 4" en 5" voorwielen, voor extra kleine zithoogte.



## Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen. Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

**Kijk ook op** [www.etac.nl](http://www.etac.nl)

Etac B.V.  
Tinweg 8  
8445 PD Heerenveen  
T: 0513 681 686  
E: [contact.nl@etac.com](mailto:contact.nl@etac.com)  
W: [Etac.nl](http://Etac.nl)

  
Creating Possibilities