



Body Armor® Original  
och Body Armor® Mjuk

# Body Armor® Hälavlastare för enpatientsbruk

Body Armor® är en hälavlastare utformad med syfte att förebygga och behandla trycksår på hälen. Body Armor® eliminerar effektivt trycket mot hälen genom att hälen höjs upp från omgivande tryck, vilket ger snabbare läkning. Den är tillverkad av mjukt och fast polyuretanskum för bästa patientkomfort.

## Justerbar – En storlek passar alla

För att patientanpassa storlek kan ovandelarna överlappar varandra. Den extra paden som medföljer kan formas genom att man klipper i skummet så att den uppfyller patients behov av stöd och tryckfördelning. En positioneringskil medföljer och används för att motverka rotation av höften. När foten är korrekt placerad i hälavlastaren så är hälen helt fri från allt tryck.

Body Armor® hälavlastare kan användas på både höger och vänster fot. Passar för vadmokrets 25–54 cm och kostorlek upp till 47.

## Detaljer:

- Skum med fasade kanter och hörn
- Svetsade sömmar för minskad risk till irritation av huden
- Ventilationshål ger en bra miljö för foten
- Extra långt vaddstöd (30 cm) minskar risken för översträckning av knät
- Kardborrelåsning för säker och enkel hantering
- Band över framfoten med extra pad
- Etikett med plats för märkning



### Justerbar

För att patientanpassa storlek kan ovandelarna överlappa varandra.



### Enkel att patientanpassa

Den extra paden som medföljer kan formas så den uppfyller patients behov av stöd och tryckfördelning.



### Positioneringskil

Motverkar rotation av höften.



### Öppning för hälen

När foten är korrekt placerad så är hälen helt fri från allt tryck.

## Förpackningen innehåller förutom hälavlastaren:



Pad som skydd för framfoten



Extra pad för individuell anpassning



Kil för positionering av foten



Tvättpåse



### Detaljer:

- Öppning för hälen
- När foten är korrekt placerad i hälavlastaren så är hälen helt fri från allt tryck
- Extra lång stödjande fotdel
- Förebygger droppfot
- Mjuk, friktionsfri undersida

Body Armor® finns med två olika insidor, original och mjuk.



**Body Armor® original**

Original ger bra ventilation tack vare sin väffade insida.



**Body Armor® mjuk**

Mjuk för patienter med ödem eller med hypersensitiv hud, rekommenderas även till personer med diabetes.

### Hälskydd Body Armor®

Original - one size, en styck  
Mjuk - one size, en styck

### Art.nr

DABAHR-N  
DABAHR-F

### Vadomfång:

ca 25 - 54 cm



### Tvättråd

Handtvätt rekommenderas. Vid handtvätt, tvätta med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Vid maskintvätt ska remmarna stängas och stöveln placeras i tvättpåse eller örngott. Tvätta i 60 °C. Torkning i rumstemperatur.

### Tillverkare

**DARCO**

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)