

# Immedia E-Board Oval

Glidskiva – vid horisontell överflyttning, ompositionering och vid applicering av lyftsele

En glidskiva överbryggar kortare avstånd vid liggande överflyttningar. Den låga friktionen på skivans ovansida gör det möjligt att förflytta en patient mellan två liggplatser som t ex mellan två olika sängar eller mellan bår och säng.


Placera gärna glidskivorna under ett draglakan och för att minska friktionen ytterligare använd t ex Immedia MultiGlide glidtyg mellan draglakanet och glidskivorna.

Den mindre modellen av glidskivorna kan användas till olika förflyttningar som t ex längre bak i stol eller som stöd för applicering av lyftselens benstöd.



## Immedia E-Board Oval L

E-Board Oval L är lämplig vid överflyttning mellan två liggplatser och som hjälp vid applicering av lyftsele.

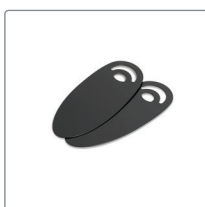

## Immedia E-Board Oval S

E-Board Oval S är en liten glidskiva som kan användas till att flyttas bakåt i en stol eller vid applicering av bestöden på lyftsele.

## Immedia E-Board Oval

E-Board Oval har en låg friktion på båda sidor som underlättar vid placering och borttagning.



Glidskiva E-Board Oval är lämplig vid överflyttning mellan två liggplatser och vid applicering av lyftsele.

Placera lyftselen mellan skivorna för att minska friktionen.

### Övriga användningsområden

- Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
- Stöd vid förflyttning av ben i och ur säng

Beskrivning		B x L	Art.nr	Specifikationer	
Immedia E-Board		(cm)		Immedia E-board	E-Board
Large	E-Board oval, 2 st, svart, tjocklek 3 mm	39 x 85	IM411	Material: polyetylen	Max. brukarvikt: 150 kg
Small	E-Board oval, 2 st, svart, tjocklek 3 mm	20 x 45	IM412		



Kan torkas av med desinfektionsmedel.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)