



etac®

Etac Alto

Mobil dusch- och toalettstol

Lyfter upplevelsen av vård och omsorg

Alto är en kompakt, eldriven, mobil dusch- och toalettstol med justerbar höjd och tiltning, som kan användas för dusch, toalettbesök och transport. Den är utformad med både vårdpersonalens och användarnas behov i åtanke, vilket gör den mycket lämplig för olika miljöer, inklusive hemvård, sjukhus och äldreboenden.



Banar väg för värdighet och integritet

Begränsat badrumsutrymme innebär utmaningar, vilket ofta leder till val av hjälpmedel som baseras på begränsningar snarare än individuella behov, vilket resulterar i kompromisser. Vårdpersonal har fysiskt krävande uppgifter och tillbringar mycket tid i dåliga arbetsställningar, vilket kan orsaka skador.

Alto är utformat för små utrymmen och ger enkel åtkomst, vilket förenklar arbetsuppgifterna och eliminerar kostsamma ombyggnationer. Vårdpersonalen får minskad stress och skaderisk, vilket leder till bättre och mer värdig vård.

Upptäck funktionerna

En stol med utmärkt manövrerbarhet och 360 graders åtkomst, särskilt utformad för att underlätta personlig omvårdnad för vårdgivaren samtidigt som den är bekväm för användaren.

Multijusterbart huvudstöd

Utformat för att ge högsta komfort och flexibilitet och kan justeras för att passa flera brukares behov.

Intuitiv handkontroll

Patientvänlig handkontroll med sex knappar och batteriindikator..

Justera höjd och lutning

Kan enkelt justeras till önskad position.

Litet utrymme

Lätt att navigera genom vanliga dörröppningar.

Kraftfullt batteri

Det kraftfulla batteriet räcker till 70-100 användningscykler.

Justerbar bredd

Justerbara arm- och benstöd ger extra utrymme.

Sits med öppning baktill

Möjliggör enkel åtkomst.

Enkel rengöring

IP46, icke-korrosivt material och få smutsfällor.

Ren design

Öppna sidor för enkel åtkomst..

Liten svängdiameter

För enkel manövrering i små utrymmen.



Alto

Alto är en eldriven stol med justerbar höjd och tiltfunktion. Den har exceptionell manövrerbarhet och ergonomisk 360-graders åtkomst, vilket minskar risken för skador för vårdgivare.

Ergonomisk åtkomst för vårdgivare

Hjälpa till med hela hygiensituationen utan att utföra fysiskt krävande uppgifter, överanstränga sig eller använda besvärliga arbetsställningar som kan leda till arbetsrelaterade skador.

Lätt att manövrera och använda

Gör det möjligt att med en hand transportera användaren till, från och i badrummet. Detta gör vårdgivarens jobb enklare, säkrare och bekvämare.

Kompakt och ändamålsenlig design

Den ändamålsenliga designen gör att den passar över de flesta toaletter och utan problem kan passera genom dörröppningar, så att användaren kan bo kvar i sitt hem med liten eller ingen ombyggnation.

Förbättrad komfort och funktionalitet

Med justerbar höjd, tiltning och många tillbehör ökar användarens komfort och vårdgivarens bekvämlighet, vilket förbättrar den övergripande vårdkvaliteten, värdigheten och välbefinnandet.



Alto levereras med 5 års garanti och 8 års livslängd (1 års garanti för batteriet).

Alto

Art. nr

Dusch- och toalettstol Alto inklusive bäckengejder, EU	80229600
Dusch- och toalettstol Alto med avtorkningsbar rygg, inklusive bäckengejder, EU	80229605
Dusch- och toalettstol Alto, upprätt rygg och huvudstöd, inklusive bäckengejder, EU	80229608

Max brukarvikt: 160 kg

Material

Chassi: pulverlackerat stål
Sits/armstöd: polypropylen
Mjukt ryggstöd: polyester/velcro
Fotstöd: polypropen
Hjul: polyamid/TPE, låsbara, kullagrade
Avtorkningsbart ryggstöd: polypropylen



max 160 kg
max 353 lbs



Manuell rengöring: Rengör produkten med vanliga icke-slipande rengöringsmedel (pH mellan 5-9). Skölj och torka. Desinficera produkten med 70% tvättsprit. Låt lufttorka.

Maskinell rengöring: Rengör produkten i en tvättmaskin eller tunnel.

Rengöring i tvättmaskin eller tunnel ska ske i enlighet med EN/ISO 60601-2-52

Lös utmaningarna med badrum i bostadshus

Att arbeta i badrum i bostäder kan vara en utmaning på grund av begränsat utrymme och smala dörröppningar. Eftersom det finns en mängd olika toalettmodeller, oftast vägghängda, kan det vara svårt att hitta en tiltbar mobil dusch- och toalettstol som fungerar bra i utrymmet.

Alto är särskilt utformad för hemvård och med sitt minimala bottenmått är den idealisk för mindre utrymmen. Den finns i en version med upprätt rygg och upprätt huvudstöd, en unik kombination som gör att stolen kan placeras närmare väggen och passar perfekt på väggmonterade toaletter och många så kallade "smarta" toaletter.

Det upprätta huvudstödet möjliggör enkla justeringar i sidled utan verktyg, samt höjd- och djupjusteringar för att säkerställa en bekväm upplevelse för alla användare.



Alto med upprätt rygg och upprätt huvudstöd över väggmonterad toalett.

Hygienisk och lätt att rengöra

Förutom utrymmesbegränsningar finns det även andra faktorer att ta hänsyn till. För institutioner och sjukhus är infektionskontroll och hygien viktiga faktorer. En mobil dusch- och toalettstol måste vara lätt att rengöra för att kunna användas av flera personer dagligen.

Altos design möjliggör enkel rengöring och underhåll, för en säker och hygienisk miljö. Den erbjuder en version med hygieniskt ryggstöd, ytor som är lätta att rengöra och få synliga skruvhuvuden där smuts kan samlas. Detta gör Alto lämplig för både hemsjukvård och sjukhus.

Det avtorkningsbara ryggstödet är utformat för att stödja ryggradens naturliga kurva, vilket främjar god hållning och komfort. Det är något flexibelt i den nedre delen för att kunna anpassas till användarens olika former. Det är enkelt att montera och kräver inga verktyg. Dessutom kan det avtorkningsbara ryggstödet höjd enkelt justeras genom att skjuta stödet antingen uppåt eller nedåt på chassit.



Alto har avtorkningsbart ryggstöd, vilket gör rengöringen snabb och enkel.

Tillbehör

Alto är kompatibel med ett brett utbud av Swift Mobil-2 tillbehör, vilket underlättar individuell anpassning.



Sluten sits baktill

84001337

En sits som är sluten baktill och har en hygienöppning framtill för extra stöd runt sitsen.

Material: Polypropylen



Mjuk dyna med oval öppning

80209067

Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 4 cm.

Material: polyeter/vävplast.



Mjuk komfortsits, 4 cm öppning baktill

80209519

Ergonomiskt formad med skön mjukhet som ger god avlastning och bekvämt stöd. Försedd med ett urtag framtill.

Material: Polyuretan



Huvudstöd

80209521

Multijusterbart huvudstöd med formad kudde. Reglerbart i höjd-, djup- och sidled samt i vinkel. Komplet med fäste.

Material: Kudde: polyuretan

Stag: rostfritt stål




Mjuk komfortsits, 2 cm öppning baktill

80209518

Utformad med god mjukhet och runda former för bästa komfort. Försedd med ett urtag framtill.

Material: Polyuretan

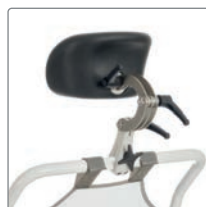

Upprätt huvudstöd

80209533

I kombination med den upprättstående ryggen kan stolen placeras närmare väggen. Multijusterbar med formad kudde. Komplet med konsol. Material: Kudde: Polyuretan

Fäste: Rostfritt stål




Mjuk komfortsits, 4 cm

Liten öppning 15 cm: 80209507

Stor öppning 18 cm: 80209506

Ergonomiskt formad, mjuk komfortsits med urtag framtill. Höjd 4 cm vid lägsta punkt.

Material: Polyuretan.

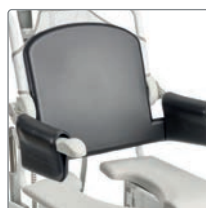

Komfortskal

80209455

Mjukrygg med integrerade armstödsdynor. Komfortskalet ger ett varmt mjukt stöd samtidigt som greppytan på armstöden lämnas fritt.

Material: PE.



Mjuk komfortsits, 2 cm

Öppning 18 cm: 80209306

Formad, mjuk komfortsits med urtag framtill. Höjd 2 cm vid lägsta punkt.

Material: Polyuretan.



Komfort Kit

80209457

Mjukrygg med integrerade armstödsdynor och mjuksits med standardöppning 18 cm.

Material: PE



Sitslock

80209434

Ett bekvämt sitslock när man vill täcka hygienöppningen. Kan användas i duschen. Höjd 2 cm.

Material: Polyuretan.



Bålstöd /sidostöd

80209509

Fixerar bålen i stolen så att brukaren sitter bättre och känner sig tryggare.

Material: Polyestertyg, kardborre, PE.



Mjuk dyna med standardöppning

80209065

Skumdyna med överdrag av vattenavvisande material. Höjd 2 cm.

Material: Polyeter/vävplast.



Tvärså

60,5 cm 80303034

66,5 cm 80209452

Ett tryggt stöd att hålla sig i eller som kan användas som ett kryststöd. Fästs runt armstöden.

Material: aluminium, PE.

Tillbehör



Mjuk ryggdyna

80209448

Erbjuder brukaren värme och mjukhet. Används innanför armstöden vilket gör det möjligt att fälla upp armstöden och skapa tillgänglighet vid sidoförflyttning. Material: PE.



Armstödsdyna

80209508

UAnvänds för att skapa mjukhet runt armstöden. Ger ett varmt, mjukt underlag som stöd för armarna och lämnar greppytan fri för trygg uppresning. Säljs i par. Material: Polyeten



Armstöd Hemiplegi

80209035


Erbjuder ett stöd för underarmen med dess skålade form. Försedd med ett mjukt värmereflekterande material utvändigt. Passar både höger och vänster armstöd. Material: PE



Armstödslås

80209445

En låstapp som används när man vill ha möjlighet att låsa armstödet i nedfällt eller uppfällt läge.

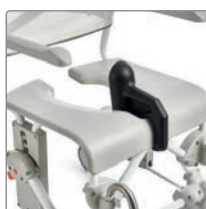

Stänkskydd

80209430

Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs över sitsens främre uttag och kan enkelt tas bort. Material: polyuretan



Höft-/brösthälte med klädsel

80209524

Tvådelat bälte för positionering som kan användas antingen som höft- eller bröstbälte. Justerbart med tre spännen med en längd på 65 till 130 cm. Materialet är bekvämt och snabbtorkande och ger ett stabilt stöd vid positionering.



Höftbälte

80209440

Enkelt att justera med plastspänne. Fixeras runt ryggören i bakkant med kardborreband. Material: polyester



Brösthälte

80209442

Enkelt att justera och som fästs runt banden till ryggklädseln. Rekommenderas att användas tillsammans med höftbälte. Material: polyester



Bäcken med lock

Bäcken med lock och handtag: 80209255 Unik invändig form som bryter strålen och minskar stänk. Locket har ett handtag som låser vid bäckenet och gör att innehållet säkras från spill. Material: PP



Bäcken

Bäcken utan lock 80209254

Lock med handtag 80209256

Unik invändig form som bryter strålen och minskar stänk. Material: PP



Bäckengejder

80209257

Passar både Etacs bäcken eller traditionella sjukhusbäcken. Används tillsammans med gejderfästen som beställs separat. Material: PP



Bäckenhållare

80209049

Bäckenhållaren håller bäckenet på plats när stolen tillas. Passar Swift Mobil Tilt-2 och Swift Mobil Tilt-2 XL rygg.



Gejderfäste

80209435

Monteras fast under sitsen för att kunna använda bäckengejder. Monteras med skruvmejsel. Komplettsats. Material: polyamid



Låg upphängning av bäcken/hink

80209259

Används när man vill ha bäckenet/hinken lägre placerat under sitsen. Monteras tillsammans med bäcken- alt. hinkgejderna. Sänker bäcken-/hinkgejderna 6 cm. Material: PP.

Tillbehör



Hinkgejder

80209258

Används som hållare till bäcken/hinkar eller bäcken med högre kanter. Används tillsammans med gejderfästen som beställs separat.

Material: PP.



Hink med handtag och lock

80209265

Traditionell hink som används tillsammans med hinkgejder.

Material: PP



Kort benstöd komplett

80209520

Ett kort benstöd med fotplatta som kan svängas åt sidan. Kan justeras 12,5 cm och ger en fotstödshöjd på 24 – 36,5 cm. Fotplattan har en rundad form. Säljs i par.

Material: rostfritt stål och PP



Benstöd med fällbara fotplattor

80209446

Justerar för de som behöver en mer öppen fotvinkel och är försedd med hälband. Säljs i par.

Material: rostfritt stål och Polypropylen



Ben- och vadvadstöd

80209437

Vinkelställbart stöd för benet som kan användas både för höger och vänster ben. Säljs per styck. Material: rostfritt stål och ABS-plast



Överdrag ben- och vadvadstöd

80209535

Ökar komforten vid användning av ben- och vadvadstödet genom sin vaddering och skapar en mjukare yta för benet. Montera genom att dra på det över stödet. Material: Polyester, Polyurethane, Nylon, Spandex



Fotplatta för ben- och vadvadstöd

80209443

Sats med separat fotplatta att montera tillsammans med ben- och vadvadstöd.

Material: ABS-plast



Vinklade benstöd - Vida

80209531

Kommer ca 5 cm längre från sitsen i förhållande till standard-benstöden. Kan höjjusteras totalt 12,5 cm. Välvd fotplatta och kan svängas åt sidan. Säljs i par.

Material: rostfritt stål och polyuretan



Vinklade benstöd - Snäva

80209532

Kommer ca 4 cm närmare sitsen i förhållande till standard-benstöden. Kan höjjusteras totalt 12,5 cm. Välvd fotplatta och kan svängas åt sidan. Säljs i par.

Material: Rostfritt stål och polyuretan



Amputationsbenstöd

80209510

Justerbart i höjd och reglerbart i längd och vinkel. Kan användas både till höger eller vänster sida. Är brukaren amputerad rekommenderar vi att man använder tippskydd. Material: rostfritt stål och polyuretan



Avtorkningsbar rygg

80209530

Stödjer ryggradens naturliga kurva, vilket främjar god hållning och komfort. Justerbart i höjddel och något flexibelt i nedre delen. Lätt att rengöra, underhålla och montera. Material: Polypropylen



Riktningsslås för hjul

80209534

Ger möjlighet att låsa hjulriktningen för enklare manövrering i korridorer. Bromsens färg: svart

Material: Polyamid, Polypropen, TPE, Fe

Se tvättinstruktioner på sidan 10.

Tvättråd för tillbehör

Mjuk komfortsits och sitslock, huvudstöd, armstödslås, stänkskydd, bäcken, bäckengejder, gejderfäste, lågt monteringsfäste, hinkgejder, hink, fotplattor, ben- och vadstöd, amputationsbenstöd, lås för hjulens riktning, sits med öppning bak, avtorkningsbar rygg



Rygglädsel, höft-/brösthäls med klädsel, höftbälte, bröstbälte, halsband



Mjuka dynor, komfortskal, mjuk ryggdyna, armstödsdyna, armstöd Hemiplegi, tvärså, överdrag till ben- och vadstöd



Förklaring av tvättsymboler



Maskintvätt - max tvätttemperatur 60 °C



Manuell rengöring: Rengör produkten med ett lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH-värde mellan 6-9, eller med en 70-procentig desinfektionslösning.



Maskinell rengöring: Produkten kan rengöras i en kabinettvättadesinfektor vid max. 85 °C i 3 minuter.



Mått

Modell	Längd	Bredd	Sits höjd	Rygg höjd	Sits djup
Alto	972 mm	600 / 640 mm	500 / 930 mm	540 mm (590 mm*)	465 mm
Modell	Fotstödshöjd	Sits bredd	Armstödshöjd	Bredd mellan armstöd	Mått över toalett
Alto	340 / 465 mm	500 mm	220/250/280 mm	420/480/540 mm	A= Min 105 mm B = 190 mm C = Min 600 mm (510 mm)*
Modell	Höjd	Hjul	Frigång över toalett bredd	Frigång över toalett höjd	Tilt vinkel
Alto	1040-1470 mm (1085-1515mm*)	125 mm	430 mm (406 mm)**	445 mm	-5° - 30°
Modell	Svängradie	Max brukarvikt	Vikt		
Alto	ø 1005 mm	160 kg	40 kg		

*Gäller 8022 9607, 8022 9608 **Om produkten ska vara centrerad



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities