

 **etac**®

Creating Possibilities



 **etac**®

Etac Prio 3A

Komfortkørestol til aktivitet og hvile

Genfind mobiliteten med Etac Prio 3A

Mange, der ikke længere er i stand til at sidde i en allround kørestol, skifter til en ordinær komfortkørestol - og bliver dermed helt afhængige af andres hjælp til at kunne bevæge sig. Ofte sker skiftet tidligere end nødvendigt.

Til forskel fra andre komfortkørestole er Etac Prio 3A designet til at optimere aktiviteten ud fra brugerens formåen, mens den giver den støtte og komfort, brugeren har brug for.

Etac Prio 3A er den eneste multifunktionskørestol, der tilbyder dynamisk bækkenstøtte. Støtten deaktiveres i hvile og genaktiveres i den aktive position. Den dynamiske bækkenstøtte er bare ét eksempel på Etac Prios innovative funktioner, der rent faktisk forbedrer siddetolerancen over tid. Kørestolen er lavet til at give ro - uden at opgive mobiliteten.

Med Etac Prio 3A mindsker du springet fra allround til komfort på en naturlig måde.

Har brugeren behov for yderligere støtte, kan du nemt ændre indstillingerne for øget støtte og komfort.

Ability Based Seating™

Vi ved, at færdigheder skal anvendes. Hvis de ikke bliver brugt, kan de forsvinde. Det gælder om at udnytte mulighederne. Ved at tilbyde justerbar støtte ud fra den individuelle kropstype, stræber vi efter at forbedre muligheden for aktivitet og bevægelighed. Dette kan medføre en stærkere balance og forbedre aktivitetsniveauet. - Det er hvad vi kalder Ability Based Seating™



Byt til en all-roundkørestol når brugerens ydeevne forbedres.

Gå fra allround til en Prio 3A Aktiv og bevar din aktivitet.

Etac Cross 6



Prio 3A kan justeres ud fra brugerens aktuelle behov.

Udskift Prio 3A Aktiv ved øget behov for støtte og komfort.

Etac Prio 3A Aktiv



Prio 3A Standard for maksimal støtte.

Etac Prio 3A Standard

Fokus på mobiliteten

For at kunne være aktiv lige så længe viljen er der, er den rette støtte og balance afgørende, både i aktivitet og hvile.


For den enkelte person kan meningsfulde aktiviteter være så simple, som at række ud efter en kop, holde øjenkontakt med den person du taler med, eller køre en kørestol tilstrækkelig langt for at kunne svinge rundt og vende sig mod nogen.

Ability Based Seating™.



Etac 3A rygstøtte

En dårlig kropsholdning tager på kræfterne. For at udholde aktiviteter bør brugeren have en god rygstøtte. Etac Prio 3A er udstyret med den smarte 3A rygstøtte – arbejd enkelt med justeringer og tilbehør for at tilpasse kørestolen til brugerens behov. Når behovene ændrer sig er det meget let at ændre indstilling.

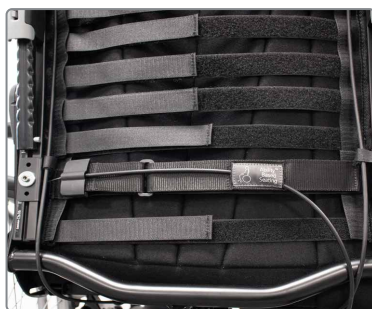

Dynamisk bækkenstøtte

Bækkenstøtten er højdejusterbar og kan justeres med præcision. Bækkenstroppens spænding mindskes automatisk, når man læner sig tilbage i behagelig hvilestilling – og strammer til igen når ryggen atter føres frem. En ideel kombination for aktivitet og hvile.

Mindsker automatisk trækket ved bagudrettet leje og sammentrækkes igen ved aktiv leje.



Justerbar lumbalvinkel

Justerbar -12° til +10°.



Justerbar vinkel mellem rygstøtte og sæde (hofte)

Justerbar mellem -3° – +20° (med tilbehør 0° – +20°).



Højdejusterbar rygstøtte

Justerbar mellem 46 - 62 cm

Inklusiv rygforlænger 52 - 68 cm.


Tilpas til forskellige kropstyper

Vi er alle unikke individer med forskellige kropstyper, egenskaber og behov. At give støtte til bækken og overkrop samt have mulighed for at tilpasse ryggen ud fra hvert individ er meget vigtigt for at opnå en god siddestilling. Med 3A rygstøtten og smart tilbehør som rygbredningssættet, kiler og den patenterede 3D-ryghynde, kan du skabe plads og støtte i alle retninger til den aktive bruger. Selv for brugere med et større behov for form og støtte såsom brugere med kyfose eller andre asymmetrier.

Aktiv - men med behov for hvile

En bruger kan være aktiv, men samtidig have behov for hvile, komfort og aflastning.

Benyt Prio 3A til aktive formål med mulighed for forskellige drivhjulspositioner (1), fast benstøtte (2), lændestøtte med polstring (3) eller hvis der er større behov for komfort, en 3D-ryghynde. Ved behov for tilt kan Prio 3A med brugerbetjent tilt anvendes (4).

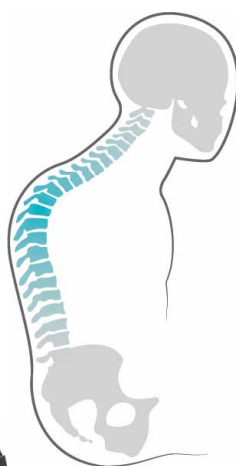

Kyfose og asymmetri


Brugere med kyfotisk rygsøjle har behov for tilstrækkelig plads for at kunne sidde på sædet. Ved asymmetri kræves støtte på forskellige steder for at stabilisere core.

Skab den rette form og støtte i alle retninger for brugere med kyfotisk ryg eller asymmetri ved hjælp af den justerbare hovedstøtte (1), justering af 3A rygstøttens lændevinkel (2), 3D-ryghynde (3) som også kan tilpasses en asymmetrisk krop, den dynamiske bækkenstøtte (4) og gaspatronklips som begrænser ryg- og sædevinklen.

Brede skuldre

For at give brugere med brede skuldre stabilitet og komfort, kan man anvende tilbehør til rygdvidelse.

For at udvide ryglænet kan man anvende et rygbredningssæt (1) og skabe komfort til den bredere form med 3D-ryghynden (2).

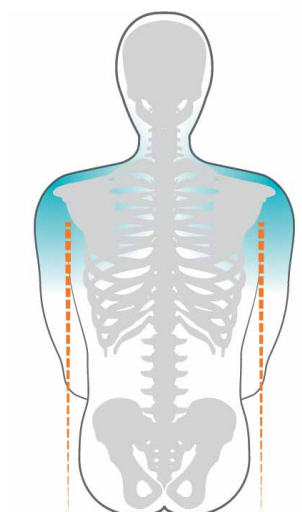

Støtte og komfort

Nogle brugere har behov for lidt ekstra støtte og komfort.


For at skabe støtte og komfort, kan man anvende tilbehør som sidepude (1) og polstrede armlænsbetræk (2) sammen med hovedstøtte (3) og 3D-ryghynden (4).

Valg af ryghynde



Rygpude

Blød og fleksibel rygpude, fås i grå velour eller gråt hygiejnebetræk.

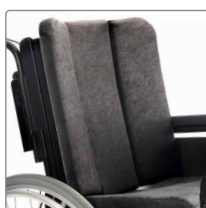

3D ryghynde

3-delt ryghynde i blød velour. Giver støtte og tilpasser sig efter ryggen.



Rygovertæk

Et tyndt overtræk i blød velour som giver en bredere ryg.

Prio 3A

- Alt du har brug for er et hoftemål



Alt du har brug for at vide for at vælge kørestolsbredde er et hoftemål. Resten kan indstilles ud fra den enkelte brugers behov.

Prio 3A giver flere muligheder for form og støtte til brugeren, både ved en aktiv siddeposition og ved behov for øget komfort og aflastning i hvile. Prøv med forskellige justeringer og tilbehør for at tilpasse kørestolen helt efter brugerens behov.

Prio 3A kan tilpasses til både aktivitet og hvile. Hav fokus på bevægeligheden.

Egenskaber



Sædedybde

Justerbar fra 39-51 cm. Ved at anvende både den forreste og bagerste indstilling, bliver det lettere at finde en optimalt balanceret tilstand. Forreste indstilling: 7 cm. Bagerste indstilling: 5 cm.



Sædetilt og rygvinkel

Hjælperstyret tilt (-3 - +20) og rygvinkel (0 - +30) er standard. Eltilt og brugerbetjent tilt kan tilvælges.



Optimeret balance

Optimerer drivhjulets position i forhold til den valgte sædehøjde for at opnå en optimalt balanceret tilstand.

Tilpasning til forskellige kropstyper

Med et lille udvalg af smart tilbehør kan du skabe den støtte og den form, du har brug for.



Vores patenterede 3D-ryglæn-system er formbart i alle retninger!

Vi har skabt et ryglæn, der giver plads og støtte i alle retninger – ideel for brugere med kyfose og andre asymmetrier. Desuden kan det lave ryglæn med fordel benyttes til den mere aktive bruger, der har brug for god plads til skulderbevægelse, når drivhjulene betjenes. 3D-ryg er standard på Prio Aktiv.



Rygforlængere

Læg 6 cm til ryghøjden med rygforlængeren inklusiv et ekstra bånd. Med 3A rygstøttens forlængelse bliver den højeste rygstøtkehøjde 68 cm.



Rygbredning

Til brugere med bredere skuldre kan et rygbredningssæt anvendes for øget stabilitet og komfort. 3D-ryghynden kan indstilles efter den nye form for at opnå komfort og aflastning.




Sidepude

Sidepuden giver øget sidestabilitet til betrækkets kropsnære støtte. Puden kan vendes for at opnå en anden form. Støttes af armlænet eller sidestop. Sælges stykvis.



Trykfordeler og bredningsskjold

Rygskjoldet har fleksibelt men fast indstilling, som kan benyttes til trykfølsomme områder.

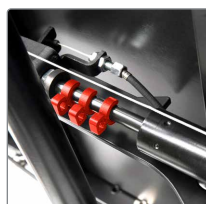

Gaspatronklips

Mindsker indstillingsmuligheder af sædetilt og rygvinkel. Muliggør et balanceret leje, så stolen forbliver stabil i hvile.



Kiler

Bløde kiler med "hook and loop" burrebånd i plys og celledum i forskellige størrelser gør, at du hurtigt og nemt kan skabe form og støtte.



Polstring til sidestøtten

Polstringen yder ekstra komfort og mindsker sædebredden mellem armlænerne med ca 1,5 cm per side. Polstringen er 8 mm tykkere bagtil for at udjævne sædets bredde. Monteres på siden.

Model/Sædebredde	Sædedybde	Totalbredde	Transportbredde	Vægt
40 cm	39-51 cm	59 cm	56 cm	33.0 kg
45 cm	39-51 cm	64 cm	61 cm	33.3 kg
50 cm	39-51 cm	69 cm	66 cm	33.6 kg
55 cm	39-51 cm	74 cm	71 cm	33.9 kg

Vægt og dimensioner er angivet for en stol med 24" drivhjul med Quick Release, massive hjul, rustfri stål drivring, ryg med tværstang, benstøtter, fodplade, hælrem, brems, monteret armlæn, 6 1/2" forhjul og en medium gaffel. Angivne mål kan variere +/- 2 %.

Ryghøjde

46 - 62 cm

52 - 68 cm incl rygforlænger (6 cm)

Sædekip

-3° - +20°

Ryglæn, vinkling

0 - +30°

Baghjul, balancepunkt

Prio med 20", 22" og 24" drivhjul har 3 alternative balancepositioner pr. sædehøjde.

Totalvægt

Gælder stol med monteret armlæn, benstøtte med justerbar vinkling, fodplade, lægstøtte, drivhjul og tipsikringer.

Sædehøjde

20", 22" og 24" drivhjul: 38 - 52.5 cm
16" Drivhjul: 40 - 45 cm

Transportvægt

22,9-23,8 kg uden armlæn, benstøtte med justerbar vinkling, lægstøtte og drivhjul.

Max. brugervægt

135 kg

Prio 3A Aktiv

Med komfortkørestolen Prio 3A Aktiv er det næsten som at sidde i en let krydsrammekørestol med lav ryg. Kørestolens enkle udtryk gemmer dog på flere funktioner, der kan give brugeren ekstra støtte og komfort. Udover sædetilt, rygtilt og dynamisk bækkenstøtte, er Prio 3A Aktiv udstyret med vores patenterede 3D-ryglænsystem, der er formbart i alle retninger og ideelt ved bl.a. asymmetri og kyfose.

- ✓ 3D-ryg, som giver optimal støtte og komfort
- ✓ Lav ryghøjde fremmer aktivitet
- ✓ Dynamisk bækkenstøtte
- ✓ Letkørende og nem at gå frem
- ✓ Bredt tilbehørsprogram
- ✓ Mulighed for elektrisk betjent ryg- og sædetilt.



Bestilling af Prio 3A Aktiv

Sædebredde	Varenr.	HMI-nr.	Prio 3A Aktiv konfigureres specifikt til den enkelte brugers behov, men er defineret som standard med: • Standard sædepude, velourbetræk • Dynamisk bækkenstøtte* • 3D-ryg, velourbetræk • Komfortlås • Højdejusterbare kørehåndtag • Højdejusterbare og smalle armlæn, model Cross • Standard benstøtter • Fodplader med hælremme • Tipsikringer • Stelfarve: Sort • 6", 6,5" eller 8" massive forhjul** • 20", 22" eller 24" drivhjul** med massive dæk og aludrivringe.
Prio 40 cm	13421405	132098	
Prio 45 cm	13421409	132101	
Prio 50 cm	13421413	132104	
Prio 55 cm	13421417	132107	
Eltit, komplet sæt*	28348	-	

* Eltit kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.

Prio 3A Standard

Prio 3A Standard yder mere støtte end Prio 3A Aktiv. Ryggen er højere og den justerbare hovedstøtte kan, sammen med de eleverbare benstøtter, tilpasses den enkelte bruger. Komfortlås sikrer, at en forudindstillet kip-position nemt kan findes igen. Desuden kan der tilvælges eltelt til de brugere, der selv vil kunne justere ryg- og sædevinkel. Elteltet kan dog ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte og komfortlås.

- ✓ Stropryg med rygovertræk, former sig efter brugers ryg
- ✓ Højde- og vinkeljusterbar hovedstøtte
- ✓ Komfortlås ved tilt
- ✓ Dynamisk bækkenstøtte
- ✓ Bredt tilbehørsprogram
- ✓ Mulighed for elektrisk betjent ryg- og sædetilt.



Bestilling af Prio 3A Standard

Sædebredde	Varenr.	HMI-nr.	Prio 3A Standard konfigureres specifikt til den enkelte brugers behov, men er defineret som standard med: • Standard sædepude, hygiejnebetræk • Stropryg, rygovertræk i velour og dynamisk bækkenstøtte* • Komfortlås • Hovedstøtte, traditionel. Hygiejnebetræk • Højdejusterbare kørehåndtag • Højdejusterbare, brede armlæn • Eleverbare benstøtter med lægstøtter • Fodplader med hælremme • Tipsikringer • Stelfarve: Sort • 6", 6,5" eller 8" massive forhjul** • 20", 22" eller 24" drivhjul** med massive dæk og aludrivringe.
Prio 40 cm	13420405	132086	
Prio 45 cm	13420409	132089	
Prio 50 cm	13420413	132092	
Prio 55 cm	13420417	132095	
Eltelt, komplet sæt*	28348	-	

* Eltelt kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.

Prio 3A Hospital

Med tanke på de store hygiejnekrav, der må tilgodeses på bl.a. hospitaler, tilbyder vi den rengøringsvenlige variant Prio 3A Hospital. Kørestolen tåler vask i vaskemaskine og alle puder har vandtæt hygiejnebetræk, der nemt kan vaskes og tørres af. Stroptrykken er nem at justere og det brede tilbehørsprogram gør det enkelt at tilpasse stolen til patienten.

Benytter hospitalet også vores populære Cross 6 krydsrammekørestol, tilgodeses god totaløkonomi og overskuelig logistik, idet meget tilbehør fra Cross 6 kan benyttes på Prio.

- ✓ **Stroptryk, dynamisk bækkenstøtte og rygpude giver maksimal komfort og stabilitet**
- ✓ **Vaskbart og vandtæt hygiejnebetræk på sædepude, rygpude, nakkestøtte og lægplader**
- ✓ **Bredt tilbehørsprogram, som er kompatibelt med vores populære Cross 6 krydsrammekørestol**
- ✓ **Mulighed for elektrisk betjent ryg- og sædetilt.**



Bestilling af Prio Hospital

Sædebredde	Varenr.	HMI-nr.
Prio 40 cm	13422405	132110
Prio 45 cm	13422409	132113
Prio 50 cm	13422413	132116
Prio 55 cm	13422417	132119
Eltilt, komplet sæt*	28348	-

Prio Hospital konfigureres specifikt til den enkelte brugers behov, men er defineret som standard med:

- Standard sædepude med Tidybetræk og komfort rygpude med hygiejnebetræk
- Stroptryk og dynamisk bækkenstøtte*
- Komfortlås
- Hovedstøtte, traditionel. Hygiejnebetræk
- Højdejusterbare kørehåndtag
- Højdejusterbare, brede armlæn
- Eleverbare benstøtter med lægstøtter
- Fodplader med hælremme
- Tipsikringer
- Stelfarve: Sort
- 6", 6,5" eller 8" massive forhjul**
- 20", 22" eller 24" drivhjul** med massive dæk og aludrivringe.

* Eltilt kan ikke kombineres med dynamisk bækkenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.

** Afhængig af sædehøjde.

Tilbehør og reservedele



Hovedstøtte med sidestøtte

For ekstra støtte af hovedet. Inkl. betræk i mørkegrå hygiejne.

Hovedstøtte hygiejne, rustfri stang
 - med 1 greb28536-65
 - med 3 greb 28645-65
 Hovedstøtte hygiejne, sort stang
 med 1 greb.28539-65
 Forlængerkit til hovedstøtte (Mål mellem møtrikkerne: 82,5 mm). 29012
 Betræk hygiejne63185-65
 Hovedstøtteholder* 28024
 *Anvendes hvis der skiftes fra anden type hovedstøtte.



Højdelås til nakkestøttestang


Sikrer montering af hovedstøtte i samme højde, hvis den har været afmonteret

Højdelås til nakkestøttestang.....28564



Hovedstøtte, anatomisk

Materiale og form giver god støtte for hoved og nakke.

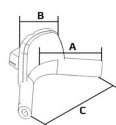

Str. Medium: A15,5 cm,
 B14 cm, C26 cm 319945483-83
 Str. Large: A17 cm,
 B14 cm, C32 cm319967493-83



Stropryg til 3A Ryg

Seks "hook and loop" burrebåndstroppe. Den øverste er bredere og med mere støtte. SB = sædebredde.

Ønskes høj ryg, benyttes nedenstående rygforlænger (øger højden med 6 cm).

Til SB 40-45 cm (øvre ryg).....62954-60
 Til SB 50-55 cm (øvre ryg).....62955-60
 Til SB 40-45 cm (nedre ryg).....63337-60
 Til SB 50-55 cm (nedre ryg).....63338-60
 Rygforlænger til SB 40-45 cm 28659
 Rygforlænger til SB 50-55 cm 28660



Hovedstøtte, traditionel

Højde- og vinkeljusterbar, aftagelig. Anbefales ved kyfose. Betræk: Grå velour eller hygiejnebetræk. Hovedstøttestang i rustfri stål eller sort rustfri stål.

Hovedstøtte velour, rustfri stang
 - med 1 greb28534-60
 - med 3 greb 28644-60
 Hovedstøtte hygiejne, rustfri stang
 - med 1 greb28534-65
 - med 3 greb 28644-65
 Hovedstøtte hygiejne, sort stang.....28538-65
 Forlængerkit til hovedstøtte (Mål mellem møtrikkerne: 82,5 mm). 29012
 Betræk Velour.....63177-60
 Betræk Hygiejne.....63177-65



Rygovertræk

Blødt rygovertræk i grå velour. SB = sædebredde

Til SB 40 cm63339-60
 Til SB 45 cm63340-60
 Til SB 50 cm63341-60
 Til SB 55 cm63342-60



Selefæste

Kun til traditionel hovedstøtte/hovedstøtte med sidestøtte.

One size 28186



Prio 3D-ryghynde

3D er et unikt rygsystem, der giver støtte og plads til en kyfotisk ryg eller asymmetrier. Grå velour. Monteres med "hook and loop" burrebånd. SB = sædebredde

Til SB 40 cm63343-60
 Til SB 45 cm63344-60
 Til SB 50 cm63345-60
 Til SB 55 cm63346-60

Tilbehør og reservedele



Ryg pude

Polstret pude, monteret med "hook and loop" burrebånd på bagsiden. Hygiejnebetræk på forsiden eller gråt velour. Kan ikke monteres på 3D-ryg. SB = sædebredde

Til SB 40 cm, velourbetræk	28410-60
Til SB 40 cm, hygiejnebetræk	28410-65
Til SB 45 cm, velourbetræk	28411-60
Til SB 45 cm, hygiejnebetræk	28411-65
Til SB 50 cm, velourbetræk	28412-60
Til SB 50 cm, hygiejnebetræk	28412-65
Til SB 55 cm, velourbetræk	28413-60
Til SB 55 cm, hygiejnebetræk	28413-65



Rygbredningssæt

Kan med fordel benyttes sammen med 3D-ryghynden. Monteres på rygrørene og er højde- og vinkeljusterbar. SB = sædebredde.

Rygbredningssæt komplet til Prio 3A SB 40-45 cm	28786
--	-------



Ryg pude, hygiejnebetræk på for- og bagside

Polstret pude, monteres med "hook and loop" burrebånd på bagsiden. Hygiejnebetræk på både for- og bagside. Kan ikke monteres på 3D-ryg. SB = sædebredde


Til SB 40 cm, hygiejnebetræk	28540-65
Til SB 45 cm, hygiejnebetræk	28541-65
Til SB 50 cm, hygiejnebetræk	28542-65
Til SB 55 cm, hygiejnebetræk	28543-65



Rygvinklingsbegrænsning

Begrænser stolens rygvinkel fremad for en aktiv sædeposition. Ved at justere længden på selen kan den aktive rygstøtte kontrolleres. Kan kombineres med gaspatronklips (28163) for begrænsning af rygvinkel bagud.

Rygvinklingsbegrænsning	28573
-------------------------------	-------

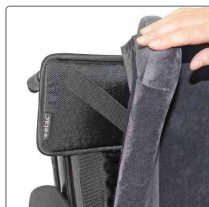

Trykfordeler

Fastgøres med velcro bag rygovertrækket, præcis hvor der er brug for den. Brug den evt. til at fordele trykket over rygprofilerne eller til at gøre ryggen bredere. Mål L20 x B15 x H1 cm.

Trykfordeler	28637
--------------------	-------



Kørebøjle

Højdejusterbar og aftagelig. Kan kombineres med ledsagerbremse. SB = sædebredde.


Til SB 40 cm	25580-01
Til SB 45 cm	25582-01
Til SB 50 cm	25583-01
Til SB 55 cm	26069-01



Sidepude

Puden kan vendes for at opnå en anden form. Kan kun benyttes i kombination med ryg med rygovertræk.

Højre	63171-60-1
Venstre	63171-60-2

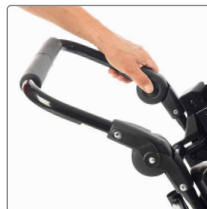

Kørebøjle, vinkeljusterbar

Højde- og vinkeljusterbar, og aftagelig. Kan kombineres med hjælpebremse. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm	27163
Til SB 45 cm	27165
Til SB 50 cm	27167

Tilbehør og reservedele

Sædepude, Standard

Standardpude med mørkegråt velour eller hygiejne betræk. Varianten Tidy Hygiejne er med svejsede sømme og er stærkere end "Hygiejne".
Pudetykkelse: 8 cm fortil og 6,5 cm bagtil.
Pudelængde: Kort 50 cm og Lang 56 cm.



Kort (Sædedybde 46-50 cm)			
Sædebredde	Velour	Hygiejne	Tidy Hygiejne
40 cm	27751-60	27751-65	28055-65
45 cm	27752-60	27752-65	28056-65
50 cm	27753-60	27753-65	28057-65
55 cm	27754-60	27754-65	28058-65
Lang (Sædedybde 52-56 cm)			
40 cm	27759-60	27759-65	
45 cm	27760-60	27760-65	
50 cm	27761-60	27761-65	
55 cm	27762-60	27762-65	



Dropstativ

Til to poser.



One size 28341



Skab en form med kiler

Foruden det justerbare ryglæn og brednings-sættet, er disse kiler en god løsning til at forme og tilpasse Prios ryg og/eller sæde. Kilerne, der kan kombineres og klippes til, fås i tre størrelser og leveres i sæt med 2 stk..

Small (L13 x B9,5 x H2 cm), 2 stk28030
Medium (L19 x B12 x H2 cm), 2 stk28139
Large (L20 x B17 x H2,5 cm), 2 stk28140

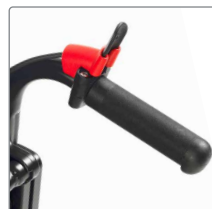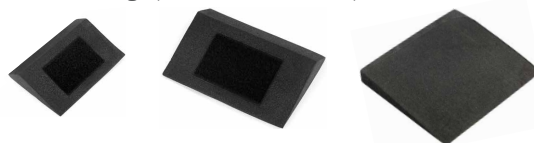

Låsbart greb

Forhindrer aktivering af tilbagelæning eller kip. Hvis positionen skal justeres, trækkes låseanordningen opad og derefter ned igen for at låse grebet.

1 stk 28047



Armlæn, Standard Prio

Højde- og dybdejusterbar, aftageligt. Armlæns pude 49 cm. Med eller uden armlæns pude. Armlænsbetræk i velour yder ekstra komfort.

Armlæn m. pude, højre 28827-1
Armlæn m. pude, venstre..... 28827-2
Armlæn m. pude, højre (fingerskr.) ... 28828-1
Armlæn m. pude, venstre (fingerskr.) 28828-2
Armlæn m. pude, venstre - Lavt 28638-1
Armlæn m. pude, højre - Lavt 28638-2
Armlæn u. pude, højre 28832-1
Armlæn u. pude, venstre..... 28832-2
Armlænsbetræk Prio højre, velour ...63193-60-1
Armlænsbetræk Prio venstre, velour..63193-60-2



Kørehåndtag

Højdejusterbart og aftageligt, skridsikker belægning. Leveres som kit inkl. udløser for enten rygfældning eller sædetilt - med og uden monteret ledsagerbremse.

Med rygfældning28219-01
Med sædetilt.....28220-01
Med ledsagerbremse og rygfældning..28221-01
Med ledsagerbremse og sædetilt28222-01



Polstring til sideplader

Giver øget komfort og mindsker sædebredden mellem armlænenene med ca. 1,5 cm i hver side. Betrækket trækkes nemt ud over sidepladen og er ligeledes nemt at fjerne igen.

Polstring sideplade, højre63271-1
Polstring sideplade, venstre.....63271-2

Etac tilbyder flere typer sædepuder - både luftpuder, komfortpuder og standardpuder.

Se det store udvalg på vores hjemmeside eller i kataloget "Puder til kørestole".



Luftpude StarLock

Patenteret låsning af luftceller giver individuelle positioneringsmuligheder med maksimal trykaflastning. Puden fås i 4 højder.



Luftpude Star Standard Air

Enkel og let indstillelig luftpude. Brugeren opnår god komfort og omslutning af bækkenet. Puden fås i 2 højder.



Luftpude Star Stabil Air

Kombination af luft og anatomisk formet skum, giver stabilitet og aflastning.



Etac Tidy Hygiejne

Anatomisk formet sædepude med vandtæt mørkegråt hygiejnetekstil med svejsede sømme.



Etac Komfortpude

Anatomisk formet pude i viskoelastisk skum. Aftageligt indlæg for yderligere tilpasning. Velour- eller hygiejnebetræk.



Etac Standardpude

Anatomisk formet sædepude med velour- eller hygiejnebetræk.


Tilbehør og reservedele



Armlæn med bred og blød pude

Giver blød og dejlig aflastning til armen.
Leveres med fingerskrue for enkel justering i dybden. Passer til både højre og venstre side.
Monteres på Armlæn, Standard Prio.

Bred armlæns pude, blød 28640

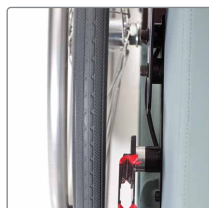

Bredningssæt

Øger afstanden mellem armlænene med 2,5 cm.

1 sæt 27892



Armlæn, smalt

For at gøre drivringene let tilgængelige anbefaler vi dette smalle armlæn. Armlænsbetræk yder ekstra komfort.

Armlæn højre, (L38 cm) 28826-1
Armlæn venstre, (L38 cm) 28826-2
Armlæn, højre (L38 cm) - Lav 28784-1
Armlæn, højre (L38 cm) - Lav 28784-2
Betræk Velour 1 stk 62283-60
Betræk Hygiejne 1 stk 62283-63
Betræk Velour med gel 1 stk 26241-60
Betræk Hygiejne med gel 1 stk 26241-63



Tipsikring

Opklappelig, justerbar i højde og regulerbar i længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.

Tipsikring multi CC59 28457



Hemiplegiarmlæn

Kan drejes for god positionering af arm.
Monteres på Armlæn, smalt (Model Cross).

Hemiplegiarmlæn Højre 25770-60-1
Hemiplegiarmlæn Venstre 25770-60-2
Betræk 62449-60



Stokkeholder

Velegnet til både højre og venstre side.


Stokkeholder, dobbelt 27327



Armlæn med dybdejusterbar pude

Højde- og dybdejusterbar. L:37 x B:8 cm.

Armlæn, højre 28801-1
Armlæn, venstre 28801-2

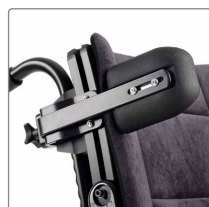


Kropsstøtte, Fast

Justerbar i højde og længde og monteres nemt i rygrørene. Puden kan roteres, så der er to forskellige former. Stangen der holder puden leveres i 4 versioner. Sælges stykvis og monteres uden brug af værktøj.

Kropsstøtte fast, komplet 0 mm 28142
Kropsstøtte fast, komplet +15 mm 28143
Kropsstøtte fast, komplet -15 mm 28144
Kropsstøtte fast, komplet -45 mm 28145



Tilbehør og reservedele

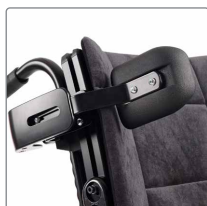

Kropsstøtte, Svingbar

Justerbar i højde og dybde. Kan fjernes uden brug af værktøj. Komplet kropsstøtte med pude af polyurethan. Sælges stykvis og monteres uden brug af værktøj.

Kropsstøtte 3A (0 mm) Højre.....28181-1
Kropsstøtte 3A (0 mm) Venstre.....28181-2
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Højre.....28180-1
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Venstre.....28180-2
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Højre28141-1
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Venstre.....28141-2



Kropsstøtte, svingbar

Svingbar kropsstøtte i sort PUR. Justerbar i højde og dybde. Fås med lille eller stor pude.

Kropsstøtte svingbar, lille, højre27915-1
Kropsstøtte svingbar, lille, venstre27915-2
Kropsstøtte svingbar, stor, højre27916-1
Kropsstøtte svingbar, stor, venstre ..27916-2



Kropsstøtte, fast - Hygiejnebetræk

Blød kropsstøtte betrukket med sort hygiejnebetræk. Regulerbar i højden/dybden. To alternative breddepositioner. H10 x L15 cm.


Kropsstøtte, Hygiejnebetræk, 1 stk 27395



Låsesplit, quick release

Denne låsesplit gør sammenklapning af ryggen nemmere.

Låsesplit..... 83159

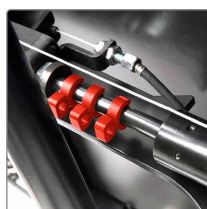

Gaspatronklips

Hver klips, der tilføjes, begrænser vinklingen med ca. 2°. Der kræves intet værktøj.

Pose med 10 stk..... 28163




Ledsagerbremse

Ledsagerbremse leveres komplet, dog uden drivhjul.

Ledsagerbremse, kit..... 28423

Drivhjul (C5) til ledsagerbremse:

16" baghjul med tromlebremse højre..... 81173
16" massivt dæk, venstre..... 81174
20" massivt dæk 81337
22" massivt dæk 81339
24" massivt dæk 81346

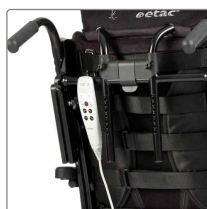

Eltilt

Eljustering af ryg- og sædevinkel. Kan monteres fra fabrikken eller bestilles som tilbehør til eftermontering på eksisterende Prio kørestole. OBS! Eltilt kan ikke kombineres med dynamisk bæckenstøtte, komfortlås, quick release låsesplit eller varekurv.

Eltilt, komplet sæt..... 28348
Klemsikring..... 28415



16" baghjul med tromlebremse

16" massivt baghjul med integreret tromlebremse

16" baghjul med tromlebremse, højre..... 83386
16" baghjul med tromlebremse, venstre.. 83387

Tilbehør og reservedele



Bremse med vinklet greb

Giver en større gribeblade. Bremsen passer til 24" drivhjul. Ved 20" og 22" drivhjul, skal der benyttes en adapter.

Højre, sort.....	27894-1
Venstre, sort.....	27894-2
Højre, rød.....	27951-1
Venstre, rød.....	27951-2
Adapter til bremse 16"-20" komplet....	28654
Adapter til bremse 22".....	28403




Amputationsbenstøtte

Højdejusterbar, længderegulerbar og vinkelregulerbar. Kan leveres i hygiejnebetræk eller velour.

Længde = 26 cm. Kan forlænges med 6 cm.

Mørkegrå velour.....	25516-60
Sort hygiejnebetræk.....	25516-63
Ekstra bred til sædebredde 55 cm:	
Sort hygiejnebetræk, højre.....	26210-63-1
Sort hygiejnebetræk, venstre.....	26210-63-2

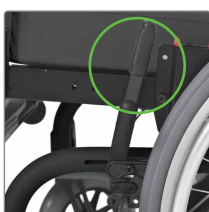

Bremse og bremseforlænger

Bremsegrebet kan vinkles fremad for at lette sideværts forflytninger.

Bremse med forlænget håndtag, højre.....	27895-1
Bremse med forlænget håndtag, venstre.....	27895-2
Kun bremseforlænger.....	25515



Benstøtte, fast vinkel (Cross 6)

Kan svinges til siden og er aftagelig. (Benyttes også til kørestolen Cross 6).

Benstøtte vid vinkel, 1 stk.....	25574-01
----------------------------------	----------



Enhåndsbremse

Kan kombineres m/drivhjul til ledsagerbremse.

Højre.....	27531-1
Venstre.....	27531-2



Ydre knæstøtte

Passer til Cross benstøtter ikke låsbar.

Ydre knæstøtte, højre.....	28777-1
Ydre knæstøtte, venstre.....	28777-2



Enhåndsdraft

Passer til både højre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbremse. Både drivhjul og teleskopaksel skal monteres.

20" drivhjul.....	26534
22" drivhjul.....	26533
24" drivhjul.....	26522
Teleskopaksel til Prio 40.....	27318
Teleskopaksel til Prio 45-50.....	27319
Teleskopaksel til Prio 55.....	27320



Benstøtter, eleverbare

Kan svinges til siden og er aftagelige. Inkl. lægstøtter, som er justerbare i højde og dybde. Betræk lægstøtter: Grå hygiejnetekstil. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm Højre.....	27857-65-1
Til SB 40 cm Venstre.....	27857-65-2
Til SB 45 cm Højre.....	27858-65-1
Til SB 45 cm Venstre.....	27858-65-2
Til SB 50 cm Højre.....	27859-65-1
Til SB 50 cm Venstre.....	27859-65-2
Til SB 55 cm Højre.....	27860-65-1
Til SB 55 cm Venstre.....	27860-65-2



Hel fodplade

Kan let løftes op eller svinges til siden. Komplet sæt inkl. standard fodstøtter, fodplade forlænger og monteringsæt.

Til SB 40 cm	28662
Til SB 45 cm	28663
Til SB 50 cm	28664
Til SB 55 cm	28665



Fodkasse

Komplet med Fodpladeforlængere, Sideplader og polstring.

Fodkasse M, til SB 40-47,5 cm	28642
Fodkasse L, til SB 50-52,5 cm	28643
Reservedel:	
Polstring til fodkasse, str. M	28778
Polstring til fodkasse, str. L	28779

Tilbehør og reservedele



Hel fodplade, model Cross

Opklappelig og indstillelig i højde og vinkel.
SB = sædebredde.

Til SB 40-45 cm (B26 x D17 cm) 25937
Til SB 50-55 cm (B37 x D17 cm) 26853



Hælrem

Anvendes på delte fodstøtter. Justerbar i dybden.

One size 24458



Polstring til hel fodplade

Blød polstring til hel fodplade, model Cross.
SB = sædebredde.

Til SB 40-47,5 cm 63190-60
Til SB 50-60 cm 63191-60



Fodpladeforlænger

Øger fodpladedybden. Monteres ovenpå Cross-fodstøtten. Længde: 21 cm.
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm 50798
Til SB 45 cm 50799
Til SB 50 og 55 cm 50800



Fodplade 13 cm dyb

Sammenklappelig, højde- og vinkeljusterbar. Ekskl. hælrem. Varianten med ekstra lange underrør anbefales til eleverbare fodstøtter. Højre (x=1) Venstre (x=2)
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm 25644-x
Til SB 45 cm 25736-x
Til SB 50 og 55 cm 25646-x
Til SB 40 cm, underrør +10 cm 25650-x
Til SB 45 cm, underrør +10 cm 25737-x
Til SB 50 og 55 cm, underrør +10 cm 25652-x



Fodplade forlænger

Benyt med bredt forgaffelfæste, så hjulene ikke går imod. Alle fodplader kræver boring - skabelon hertil medfølger.

Str. S, hel fodplade, til SB 35-50 cm 28774
Str M, delt fodplade, højre,
til SB 40-47,5 cm 28775-1
Str M, delt fodplade, venstre,
til SB 40-47,5 cm 28775-2
Str L, delt fodplade, højre,
til SB 50-52,5 cm 28776-1
Str L, delt fodplade, venstre,
til SB 50-52,5 cm 28776-2
Sidebeskytter for fodplade, H: 3,5 cm 28772
Styr hel fodplade 28773



Polstring til delte fodplader

Blød polstring til delte fodplader model Cross. SB = sædebredde.

Til SB 35-40 cm, højre 63188-60-1
Til SB 35-40 cm, venstre 63188-60-2
Til SB 42,5-50 cm højre 63189-60-1
Til SB 42,5-50 cm venstre 63189-60-2
Til SB 52,5-60 cm højre 63192-60-1
Til SB 52,5-60 cm, venstre 63192-60-2

Tilbehør og reservedele



Lægbånd

Længdejusterbart og aftageligt.
SB = sædebredde.

Til SB 40 cm.....	27909
Til SB 45 cm.....	27919
Til SB 50 cm.....	27920
Til SB 55 cm.....	27921



Hoftesele

Monteres på sæderammen.


Længde 100 cm	27904
Længde 128 cm	28544



Polstring til lægbånd

Aftagelig. Fås i 3 længder.

20 cm	26845
30 cm	26846
40 cm	26847

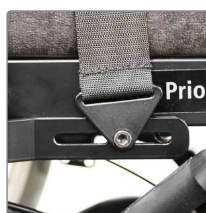

Beslag for positioneringssele

Dette beslag, som monteres på den forreste del af stolen, gør det muligt at montere både 2- og 4-punktssele. Beslaget er udstyret med spor, for individuel justering af selen og monteres på armlænsfæstet. Leveres i sæt for montering på begge sider.

Beslag for positioneringssele.....	28641
------------------------------------	-------



Polstret lægstøtte

Lægstøtte i blødt velour og i to bredder.
Passer til Prio og Cross benstøtter.
SB = sædebredde.

75 cm til SB 35-47,5 cm.....	63186-60
90 cm til SB 50-60 cm	63187-60



Abduktionsklods

Aftagelig og dybdejusterbar.

One size	28022
----------------	-------



Adapter for sædehøjde til 16" drivhjul

Muliggør yderligere to sædehøjder for Prio med 16" drivhjul: 40 cm og 42,5 cm.

Adapter	28414
---------------	-------



Kurv til iltflaske

Kan også benyttes som varekurv.

One size	28316
----------------	-------

Tilbehør og reservedele



Bord til Prio armlæn

Transparent. Monteres på Armlæn, model Standard Prio. Bredde bord: Sædebredde + 17,5 cm, + yderligere 2,5 cm ved bredningssæt. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm.....	27971
Til SB 45 cm.....	27972
Til SB 50 cm.....	27973
Til SB 55 cm.....	27974
Til SB 40 cm med bredningssæt.....	24601
Til SB 45 cm med bredningssæt.....	26021
Til SB 50 cm med bredningssæt.....	26907
Fikseringsbånd	82921



Drivringe - C5

20" aluminium.....	81109
22" aluminium.....	25636
24" aluminium.....	25181
20" plastbelagt.....	81229
22" plastbelagt.....	80895
24" plastbelagt.....	82998
20" stål.....	21034
22" stål.....	24395
24" stål.....	24023
20" mosgummi.....	24442
22" mosgummi.....	24551
24" mosgummi.....	80800
24" Titan.....	24540



Bord til smalle armlæn

Transparent. Monteres på Armlæn, smalt (Model Cross). Bredde bord: Sædebredde + 10 cm, + yderligere 2,5 cm ved bredningssæt. SB = sædebredde.

Til SB 40 cm.....	24418
Til SB 45 cm.....	24419
Til SB 50 cm.....	24601
Til SB 55 cm.....	26021
Til SB 40 cm med bredningssæt.....	25188
Til SB 45 cm med bredningssæt.....	25731
Til SB 50 cm med bredningssæt.....	26020
Til SB 55 cm med bredningssæt.....	26022
Fikseringsbånd	62103



Egerbeskytter

Med 6-punkts ophæng. Gråt tryk og Etac logo.

20" - Grå Etac.....	25502-28
22" - Grå Etac.....	25503-28
24" - Grå Etac.....	25504-28
20" - Grå Etac m. ledsagerbremse.....	28816-28
22" - Grå Etac m. ledsagerbremse.....	28817-28
24" - Grå Etac m. ledsagerbremse.....	28818-28



Halvbord til smalle armlæn

Justerbart i dybde og bredde. Monteres på armlæn, smalle (Model Cross)

Højre.....	27352-1
Venstre.....	27352-2



Forhjul med 57 mm navbredde

6" (150 x 30 mm) Halvmassivt	27863
6½" (165 x 30 mm) Massivt.....	27866
7" (175 x 45 mm) Halvmassivt.....	27867
8" (200 x 35 mm) Halvmassivt	27864
8" (200 x 50 mm) Halvmassivt	27868



Drivhjul - C5

20", 22" eller 24". Massive dæk (pur). Quick Release, aluminiumdrivring. Ønskes C5 højtryksdæk, kontakt venligst Etac.

20"*	82486
22"	82485
24"	82484

*OBS: ikke mulig i position 1.



Forgaffer og forgaffelfæste til 57 mm navbredde

Forgaffelfæste fås i standard og bredt. Det brede flytter forhjulet 3 cm udad. Sædets totalbredde bliver ikke påvirket. Fæste og forgaffel bestilles separat.

Forgaffel standard	28422
Forgaffel kort	28421
Forgaffelfæste standard, komplet.....	80606
Forgaffelfæste bredt, komplet.....	25763
Forgaffelhus, bredt	80899
Låg til forgaffelhus.....	50429



Drivhjul C6

OBS! Alle drivhjul leveres uden QR aksel, som skal bestilles separat. Drivhjulene skal monteres med nedenstående navhylster og QR aksel.

20" højtryksdæk, speedlite med
 - alu.drivring.....83908
 - rustfri ståldrivring.....83909
 - plastdrivring.....83884

20" massivt dæk med
 - alu.drivring.....83885
 - rustfri ståldrivring.....83910
 - plastdrivring.....83911

22" højtryksdæk, speedlite med
 - alu.drivring.....83880
 - rustfri ståldrivring.....83906
 - plastdrivring.....83881

22" massivt dæk med
 - alu.drivring.....83882
 - rustfri ståldrivring.....83907
 - plastdrivring.....83883

24" højtryksdæk, speedlite med
 - alu.drivring.....83873
 - rustfri ståldrivring.....83874
 - plastdrivring.....83875

24" massivt dæk med
 - alu.drivring.....83876
 - rustfri ståldrivring.....83877
 - plastdrivring.....83878

Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83872

Navhylster for Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83893



Drivhjul Maxx

Alle drivhjul leveres uden QR aksel, som skal bestilles separat. Drivhjulene skal monteres med nedenstående navhylster og QR aksel.

22" højtryksdæk med
 - hårdano. alu.drivring, speedlite.....28956
 - plastdrivring, speedlite.....28957
 - hårdano. alu.drivring,
 trailblazer, højre24052-1
 - hårdano. alu.drivring,
 trailblazer, venstre.....24052-2
 - titanium drivring, speedlite24087
 - titanium drivring, trailblazer, højre24115-1
 - titanium drivring, trailblazer, venstre24115-2
 - plastdrivring, trailblazer, højre24053-1
 - plastdrivring, trailblazer, venstre.....24053-2

24" højtryksdæk med
 - hårdano. alu.drivring, speedlite.....28950
 - plastdrivring, speedlite.....28951
 - hårdano. alu.drivring,
 trailblazer højre28952-1
 - hårdano. alu.drivring,
 trailblazer venstre28952-2
 - titanium drivring, trailblazer, højre24116-1
 - titanium drivring, trailblazer, venstre24116-2
 - plastdrivring, trailblazer, højre.....28953-1
 - plastdrivring, trailblazer, venstre.....28953-2

Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83872

Navhylster for Quick Release aksel
 (til C6 og Maxx drivhjul).....83893



Dæk og slanger

Til C6 og Maxx drivhjul.

Dæk, 20" x 1" speedlite dæk83897
 Dæk, 22" x 1" speedlite dæk83898
 Dæk, 24" x 1" speedlite dæk83899
 Dæk, 20" x 1 3/8" massivt dæk.....83347
 Dæk, 22" x 1 3/8" massivt dæk.....83348
 Dæk, 24" x 1 1/4" massivt dæk.....83349
 Dæk, 22" x 1" trailblazer dæk.....83350
 Dæk, 24" x 1" trailblazer dæk.....83351
 Slange, højtryk 20" x 1"82199
 Slange, højtryk 22" x 1"80136
 Slange, højtryk 24" x 1"80560



Egerbeskytter - C6/Maxx

Inkl. 6-punkts ophæng.

20" egerbeskytter	28934
22" egerbeskytter	28935
24" egerbeskytter	28936



Forgafler til 45 mm navbredde, Stål

Inkl. aksel til forgaffelhus.

Forgaffel stål str. S	24038
Forgaffel stål str. M	28969



Drivringe

Med 6-punktsophæng.

20" aluminium.....	83890
22" aluminium.....	83888
24" aluminium.....	83886
22" hårdano. aluminium	83336
24" hårdano. aluminium	83334
20" rustfri stål	83891
22" rustfri stål	83889
24" rustfri stål	83887
22" titanium	83513
24" titanium	83514
20" plastdrivring.....	83339
22" plastdrivring.....	83338
24" plastdrivring.....	83335
Monteringskit 6-punktsophæng	83892
Monteringskit 6-punktsophæng - for plastdrivring	24081



Hjælpemotor Lille Viking

Med Lille Viking gøres kørestolen el-drevet og ledsagerstyret, og betjenes via en trinløs håndbetjening monteret på stolens skubbehåndtag. Kontakt venligst Etac.



Forhjul med 45 mm navbredde

Massivt. Navbredde 45 mm.

6" 150x34 mm.....	28922
8" 200x38 mm.....	28526



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities